

# Adam, Rouilly

SERVING MEDICAL EDUCATION WORLDWIDE



AR150

210150 ストーマケアトルソ



## 習得できる手技

- ストーマケアトルソは、人工肛門（コロストミー）、回腸ストーマ（イレオストミー）、尿路ストーマ（ウロストミー）を有する患者のケアに従事する医療従事者のトレーニング用に設計されています。
- 患者本人によるセルフトレーニングにも有用な教材です。

## 特長

- 簡単にセットアップ可能で、すぐに使用できます。
- 5種類のストーマモデルが付属しており、容易に交換可能です。
- 大半の皮膚保護クリームや皮膜剤と併用可能です。
- ドレッシング材やパッチ類を繰り返し貼付することができます。

## 安全と注意



使用後は必ずストーマをトルソから取り外し、付属の保管ボックスに収納してください。ストーマを装着したまま保管すると、摩耗が早まる恐れがあります。





ドレッシング材や皮膚保護皮膜を貼り付けたまま放置・保管しないでください。各トレーニング終了後は、必ずトルソ表面を清拭してください。



本シミュレーターは、実際の患者と同様の注意と配慮をもって取り扱ってください。

## 構成

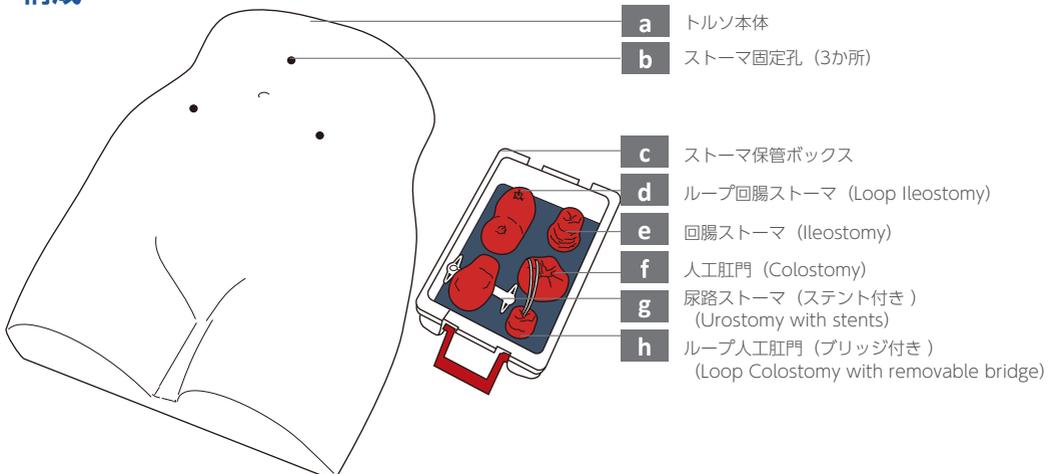


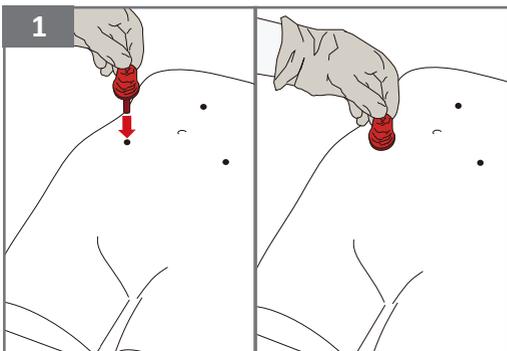

## ご使用前

使用するスチームを保管ボックスから取り出します。スチームのプラグを、トルソのいずれかの固定孔に差し込みます。

スチーム基部がトルソ表面と平らになるようにしっかり押し込みます。

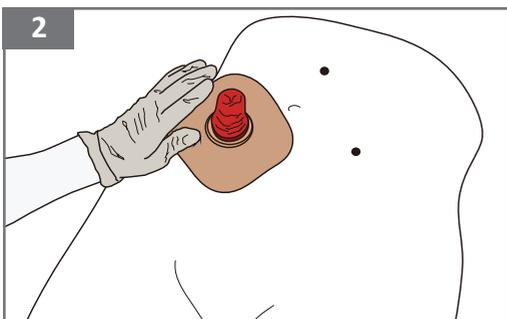


## ご使用中

トルソは大半の皮膚保護クリームや皮膜剤に対応しています。

ドレッシング材やパッチ類は繰り返し貼付可能です。

一部のドレッシング材では、アルコールで表面を拭くことで粘着性が向上する場合があります。

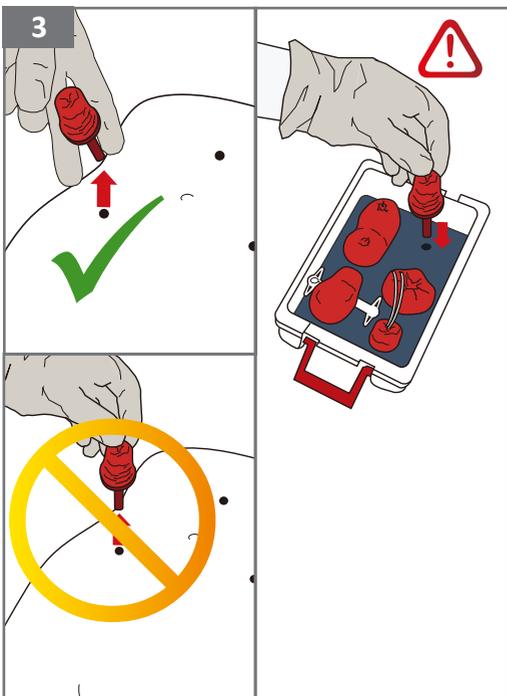

## ご使用后

すべてのドレッシング材およびスチーム装具を取り外します。

✓ 図示のように、スチーム基部の硬質部分の下からやさしく持ち上げて外します。

✗ スチーム本体を直接引っ張って外さないでください。損傷の原因となります。

スチームは付属の保管ボックスに戻します。

トルソ本体表面に残った接着剤残渣や皮膚保護クリームをきれいに清拭します。

⚠ 使用後は必ずスチームをトルソから取り外し、保管ボックスに収納してください。スチームを装着したまま保管しないでください。この手順を怠ると、摩耗が早まり製品寿命が短くなります。

# Adam,Rouilly

**NLS** 日本ライトサービス株式会社  
Nihon Light Service, Inc.

医学教育機器事業部

〒113-0033 東京都文京区本郷 2-3-9 ツインビュウ御茶の水 2F

☎ 03-3815-2354 📠 03-3818-6843 ✉ [igaku@nlsinc.co.jp](mailto:igaku@nlsinc.co.jp) 🌐 [www.medical-sim.jp](http://www.medical-sim.jp)