



USER GUIDE




ART マット AUGMENTED REALITY TRAINING MAT

インデックス

| | |
|-----------|---|
| 商品構成 | 3 |
| 安全と清掃の手引き | 4 |
| セットアップ | 6 |


TAKE A LOOK
AT OUR **VIDEO**

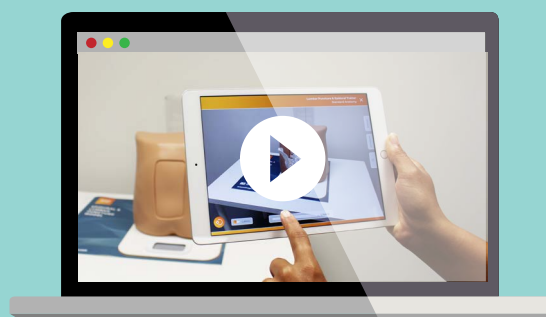

VISIT THE WEBSITE
limbsandthings.com
OR YOUTUBE CHANNEL
youtube.com/limbsandthings

商品構成

ART マット

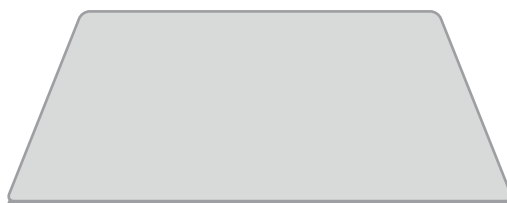

アプリはGoogle Play/App Storeから



ご用意いただくもの：タブレット（推奨）／スマートフォン
端末に必要なスペックは随時更新されるためWEBページでご確認ください。

安全と清掃の手引き

ARTマットを使用される前に、この安全の手引きを確認してください。

DO's



- このガイドを厳守してください。
- このガイドを保管してください。
- すべての警告に注意してください。

- マットは平らな場所で使用してください。



- メーカー指定の物品だけを使用してください。


- すべての整備は、資格を持つサービス担当者に依頼してください。装置が損傷した場合は、修理が必要です。



DON'Ts




- 熱源の近くに設置したり、炎にさらしたり、火の近くで使用したりしないでください。
- 本製品の近くまたは上で可燃性の溶剤を使用しないでください。

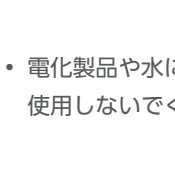

- 電化製品や水に濡れたものの近くで使用しないでください。



- マットのグラフィックを他のもので覆わないでください。

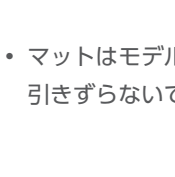

- マットはモデルを乗せたまま引きずらないでください。

保管



プリント面を外側にした状態で丸めて保管してください。



折り曲げないでください。



マットの上に製品以外の重いものを置かないでください。

清掃



水、石鹼、ノンアルコール洗浄剤で洗浄できます。



研磨剤やアルコール系洗浄剤は使用できません。




マットが完全に乾いてから保管してください。

セットアップ


1

専用ケースからマットを取り出します。

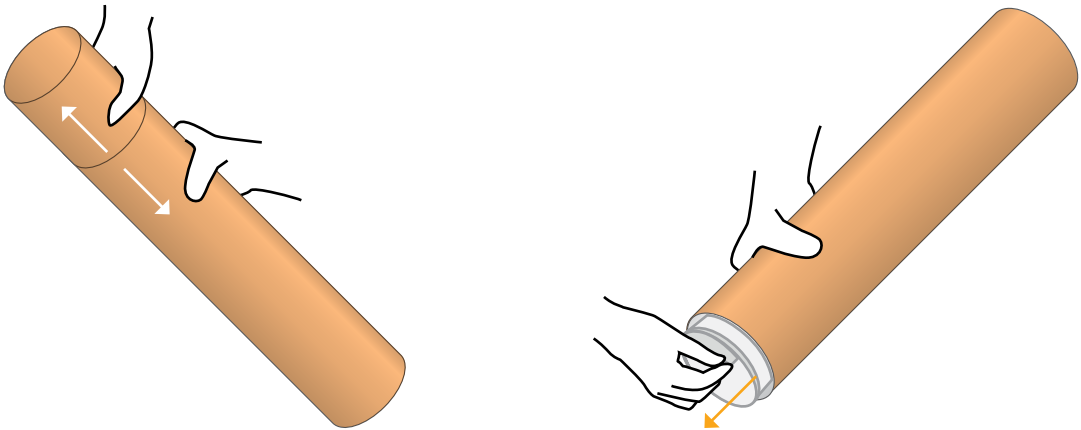




2

マットを平らなテーブルの上に設置します。

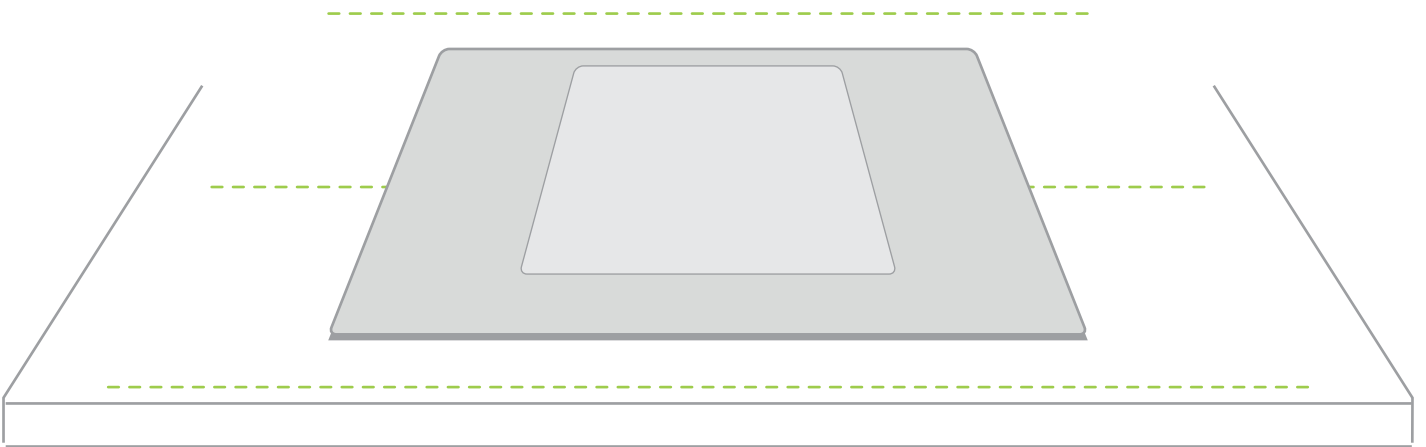


3

マットの指定された位置に製品（モデル）を置きます。

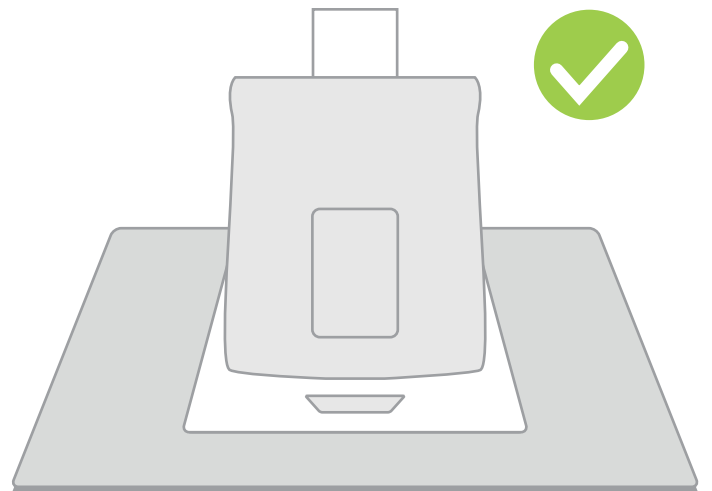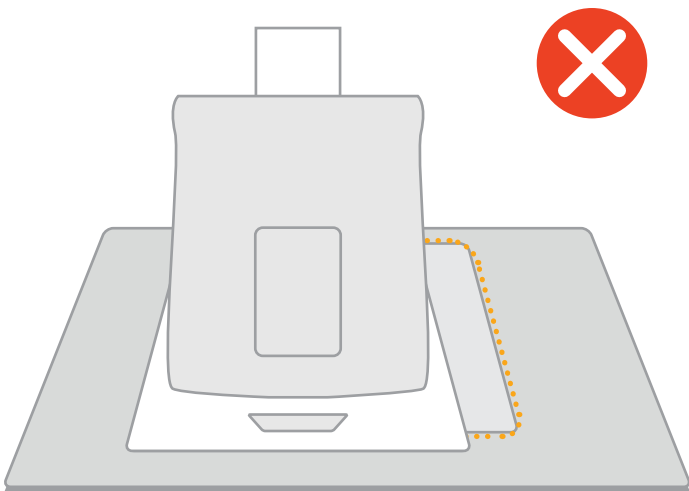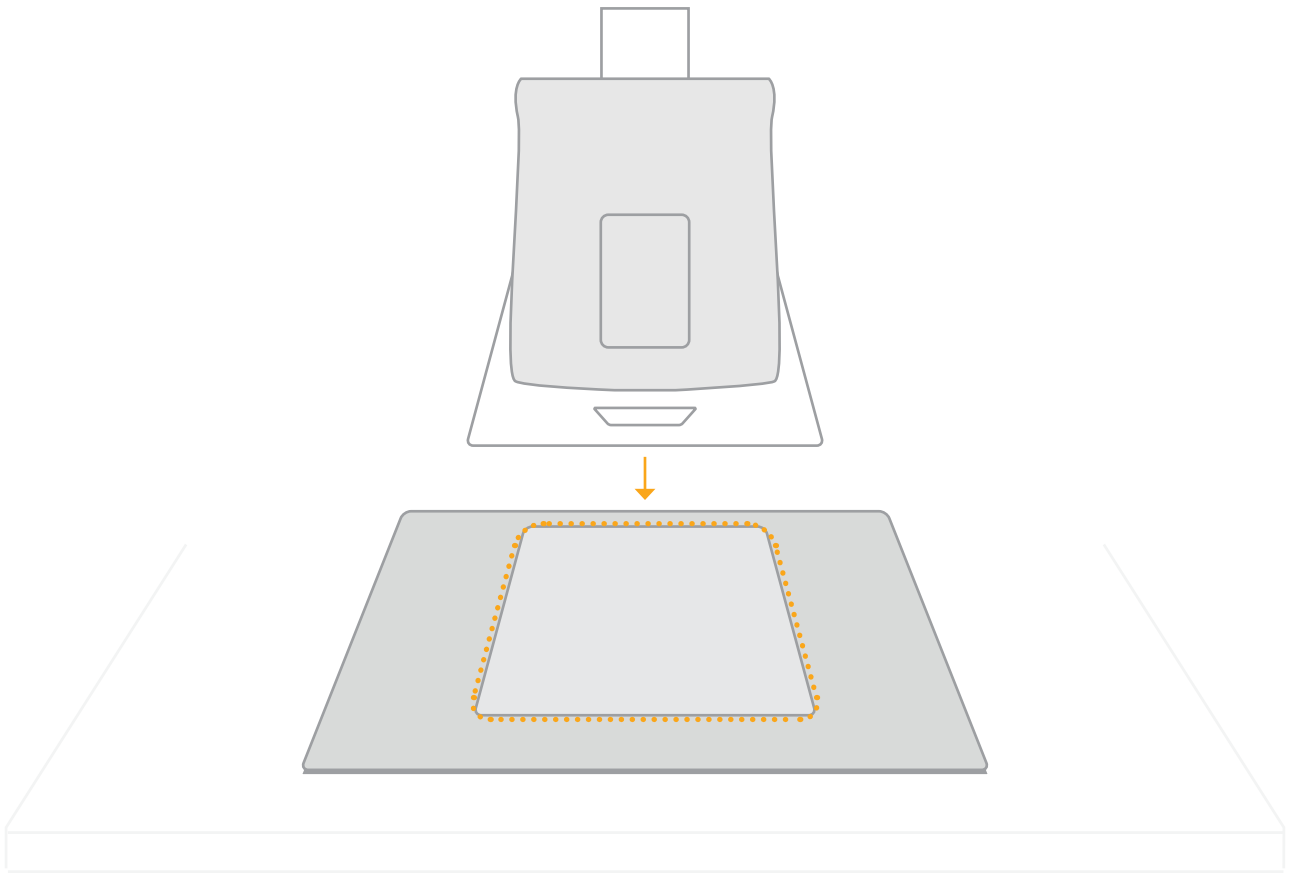

ARTアプリを使ってマットをスキャンします。

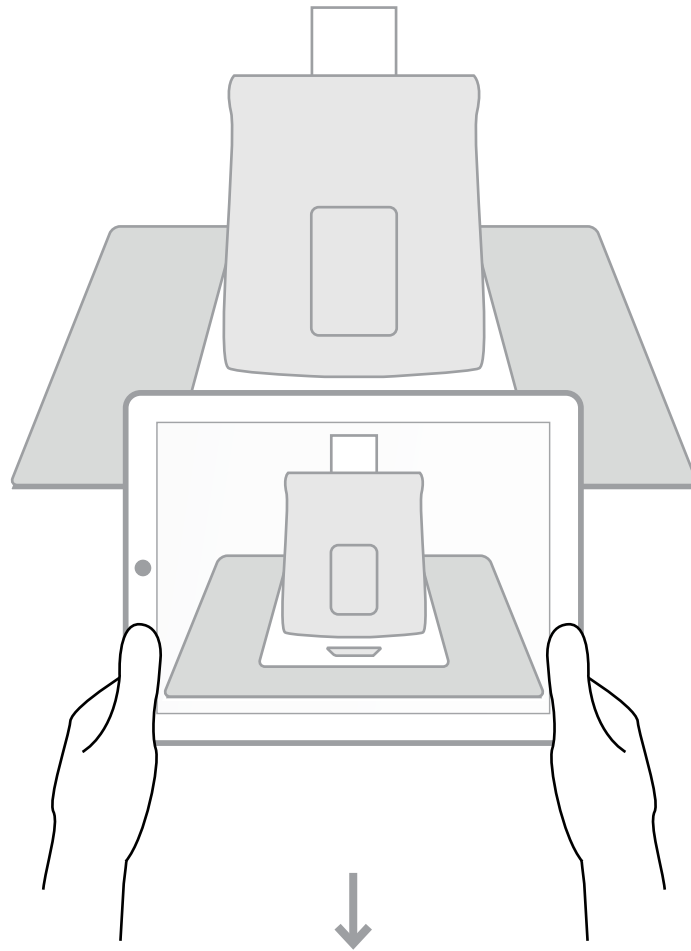

アプリのトラブルシューティングは、
ウェブサイトをご確認ください。

YOU MAY
ALSO BE
INTERESTED IN...

- 160850 男性導尿トレーナー
- 160851 女性導尿トレーナー
- 160852 エコーガイド膀胱留置カテーテル挿入トレーナー



160230

胸腔ドレナージ・胸腔穿刺トレーナー



第1版 2023年10月
© 2023 Limbs & Things

NLS 日本ライトサービス株式会社
Nihon Light Service, Inc.
医学教育機器事業部

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-42-1

☎ 03-3815-2354

☎ 03-3818-6843

✉ igaku@nlsinc.co.jp

🌐 www.medical-sim.jp