



USER GUIDE




ART マット AUGMENTED REALITY TRAINING MAT

インデックス

商品構成	3
安全と清掃の手引き	4
セットアップ	6


TAKE A LOOK
AT OUR **VIDEO**

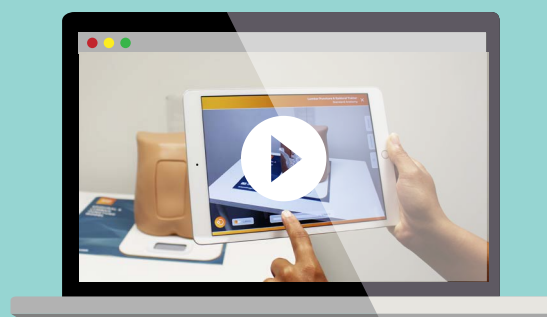

VISIT THE WEBSITE
limbsandthings.com
OR YOUTUBE CHANNEL
youtube.com/limbsandthings

商品構成

ART マット

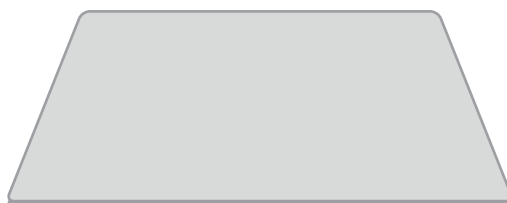

アプリはGoogle Play/App Storeから



ご用意いただくもの：タブレット（推奨）／スマートフォン
端末に必要なスペックは随時更新されるためWEBページでご確認ください。

安全と清掃の 手引き

ARTマットを使用される前に、
この安全の手引きを確認してください。

DO's



- このガイドを厳守してください。
- このガイドを保管してください。
- すべての警告に注意してください。

- マットは平らな場所で使用してください。



- メーカー指定の物品だけを使用してください。

- すべての整備は、資格を持つサービス担当者に依頼してください。装置が損傷した場合は、修理が必要です。



DON'Ts



- 熱源の近くに設置したり、炎にさらしたり、火の近くで使用したりしないでください。
- 本製品の近くまたは上で可燃性の溶剤を使用しないでください。

- 電化製品や水に濡れたものの近くで使用しないでください。



- マットのグラフィックを他のもので覆わないでください。

- マットはモデルを乗せたまま引きずらないでください。



保 管



プリント面を外側にした状態で丸めて保管してください。



折り曲げないでください。



マットの上に製品以外の重いものを置かないでください。

清 掃



水、石鹼、ノンアルコール洗剤で洗浄できます。



研磨剤やアルコール系洗剤は使用できません。




マットが完全に乾いてから保管してください。

セットアップ


1

専用ケースからマットを取り出します。

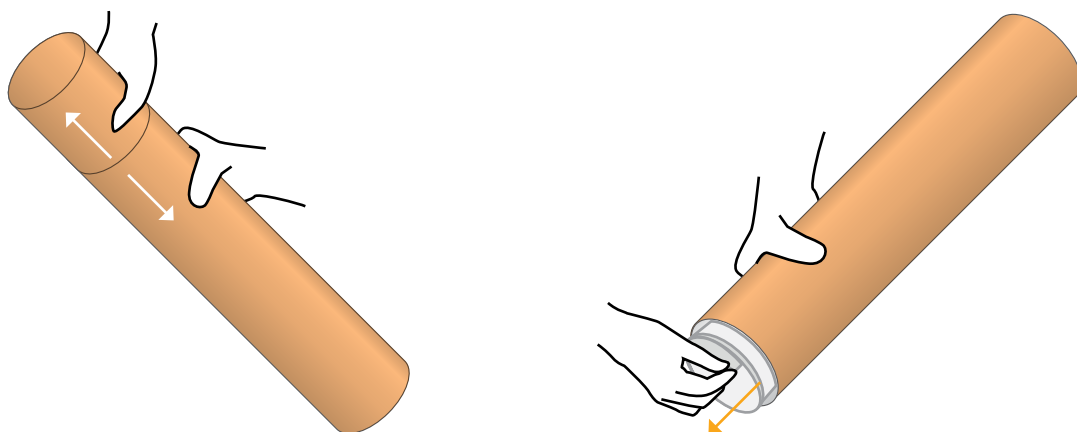



2

マットを平らなテーブルの上に設置します。


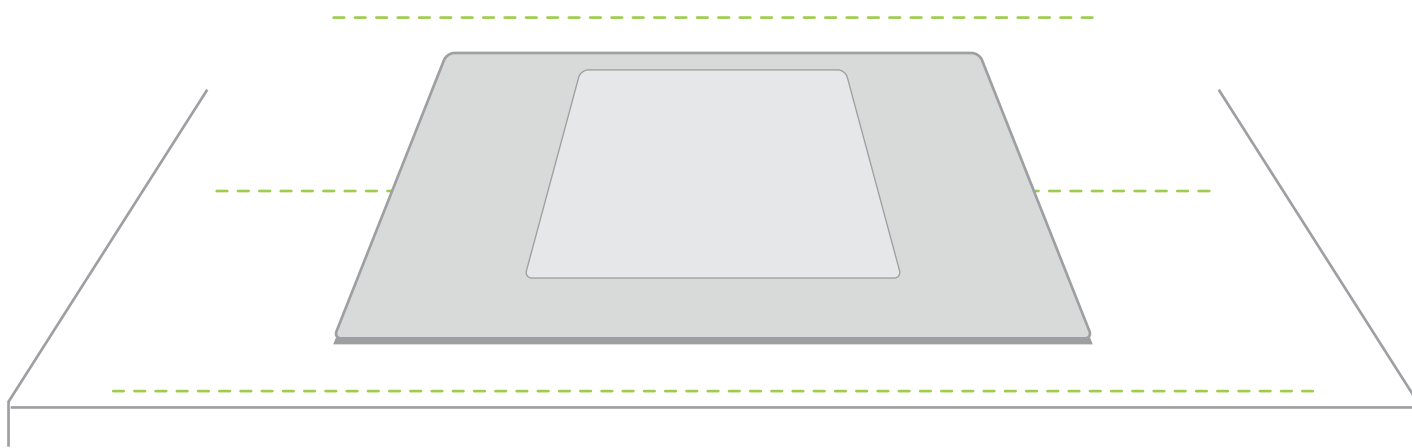


3

マットの指定された位置に製品（モデル）を置きます。

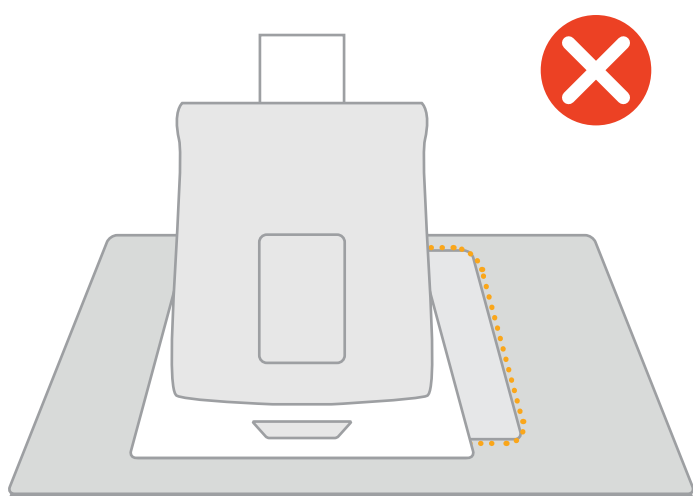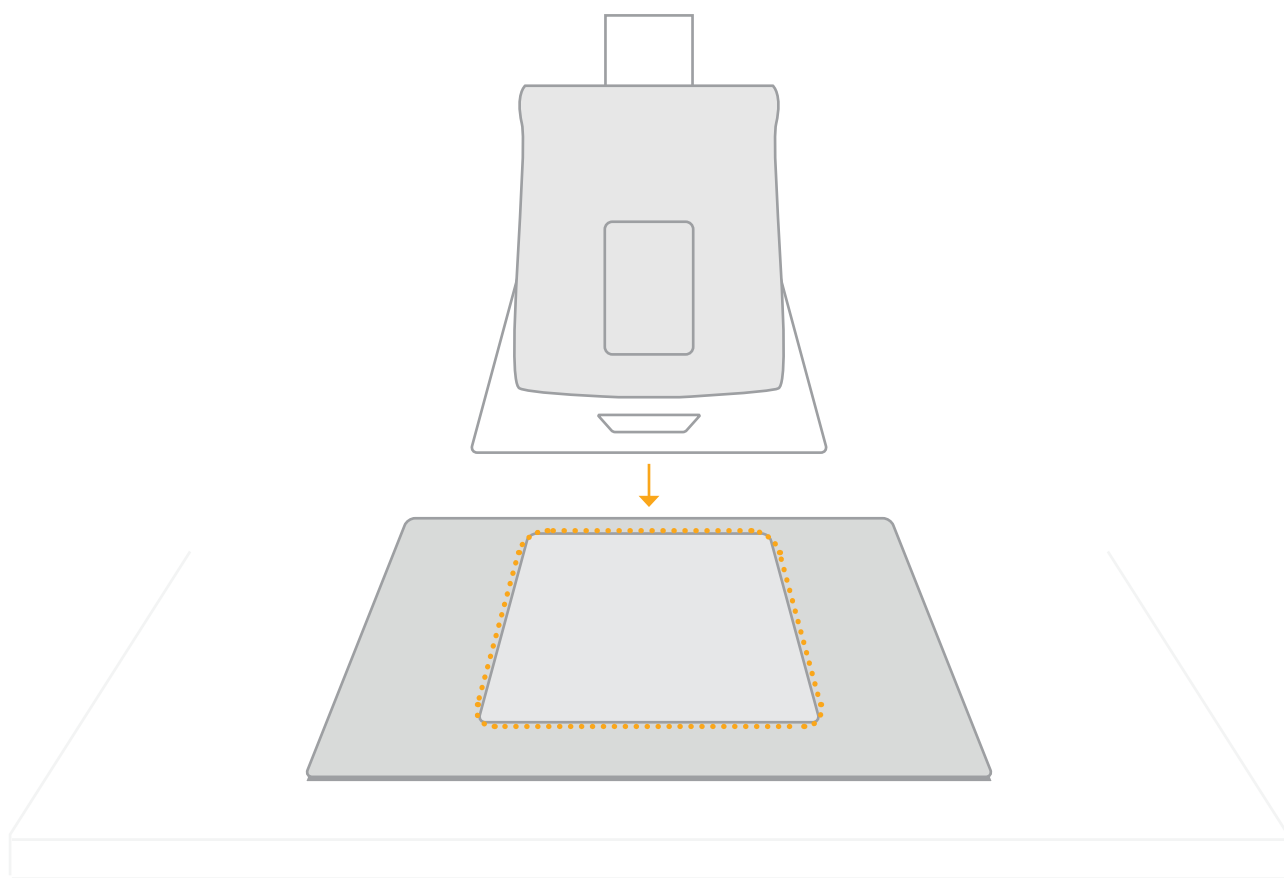

ARTアプリを使ってマットをスキャンします。

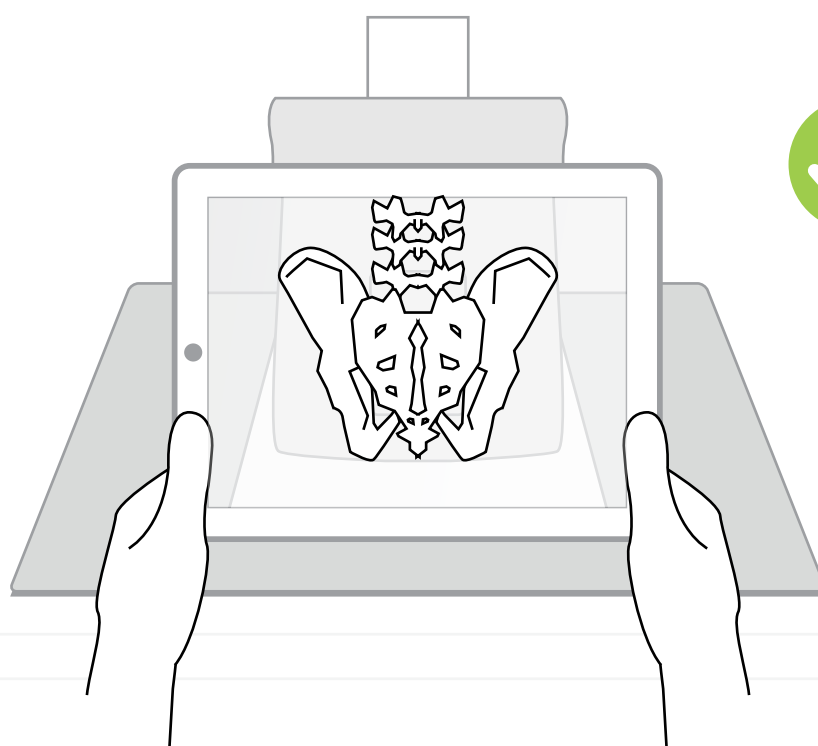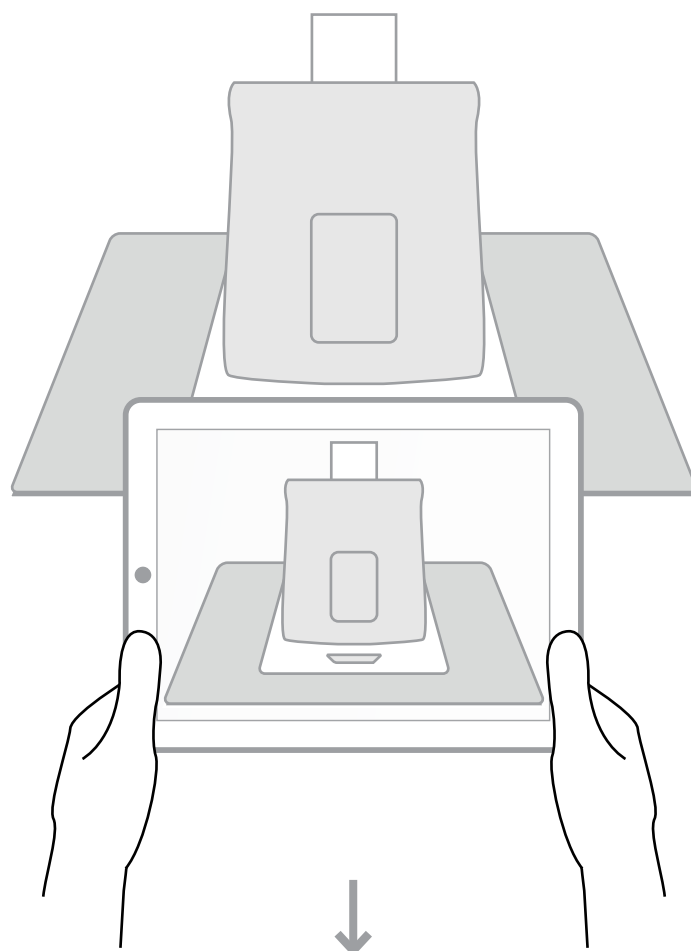

アプリのトラブルシューティングは、
ウェブサイトをご確認ください。

YOU MAY
ALSO BE
INTERESTED IN...

- 160850 男性導尿トレーナー
- 160851 女性導尿トレーナー
- 160852 エコーガイド膀胱留置カテーテル挿入トレーナー



160230

胸腔ドレナージ・胸腔穿刺トレーナー

