




USER GUIDE

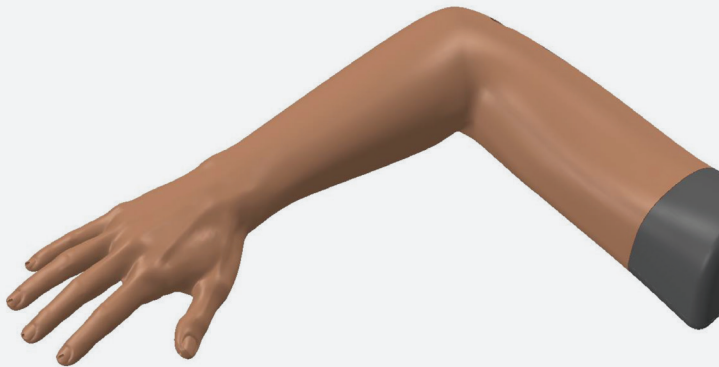

# コーレス骨折整復 トレーナー

品番:170250

# インデックス

## 商品構成

2

## 安全と清掃の手引き

3

## セットアップ

4

- クイックセットアップ 4
- 皮膚を交換する 6


## 清掃と保管

8

- 使用後の清掃と保管 8

## 商品構成


### コーレス骨折整復トレーナー

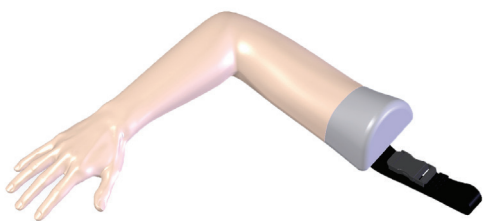

コーレス骨折整復トレーナー用皮膚  
※装着済

170251

### 高さ調整機能付 コーレス骨折整復トレーナー用スタンド

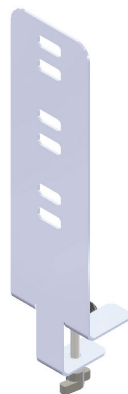

### 六角レンチ・大 (5mm) 六角レンチ・小 (2.5mm)



## 保管と移動

- 人身事故や製品の破損を防ぐため、輸送・保管時には必ず適切な梱包・固定を行ってください。

## 安全と清掃の 手引き

コーレス骨折整復トレーナーを使用される前に、  
この安全の手引きを確認してください

### DO's



- このガイドのすべての指示に従い厳守してください。
- このガイドを保管してください。
- すべての警告に注意してください。

- 皮膚を交換する際に破れないよう、内側にベビーパウダーを塗布しておくことで、皮膚を装着する際の摩擦を防ぐことができます。



- 製品が破損したり摩耗したりした場合は、修理する必要があります。お買い上げの販売店にご連絡ください。

- 使用後は、柔らかい布やスポンジを中性洗剤を混ぜたお湯につけ、しっかり絞った後、やさしく拭いてください。



- ギプスやシーネを外すときは、皮膚を傷つけないように注意してください。

- 製品を使用しないときは、テンションを0（最低のテンション）に戻す必要があります。



### DON'Ts



- 熱源の近くに設置したり、炎にさらしたり、火の近くで使用したりしないでください。
- 本製品の近くまたは上で可燃性の溶剤を使用しないでください。

- メーカーが提供するアタッチメント以外は使用しないでください。




- 製品を分解したり修理しようとしたりしないでください。製品の点検や修理は販売代理店に連絡をしてください。

- 本製品は玩具ではありませんので、お子様や訓練を受けていないスタッフが使用することはできません。



- トレーニング中は、無理に力を入れてスタンドに負荷をかけ過ぎないように注意してください。

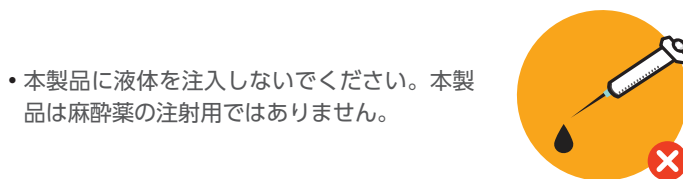


- 本製品に液体を注入しないでください。本製品は麻酔薬の注射用ではありません。

## セットアップ

## クイックセットアップ

箱から出してすぐに使用することが可能です。

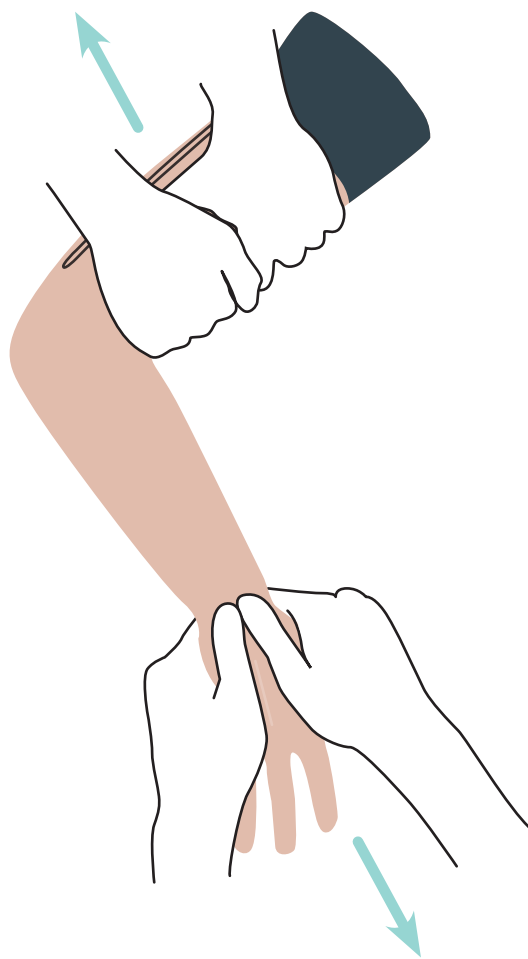

テンションを調整することで、難易度を段階的に変更することができます。  
※レンチはネジ穴に対してまっすぐ差し込んでください。



大きい方の六角レンチ (5mm) を使用してください。



**締める**  
反時計回し (左回り)




**緩める**  
時計回し (右回り)




## セットアップ

スタンドを使用して固定する

適切な高さを選択してください。

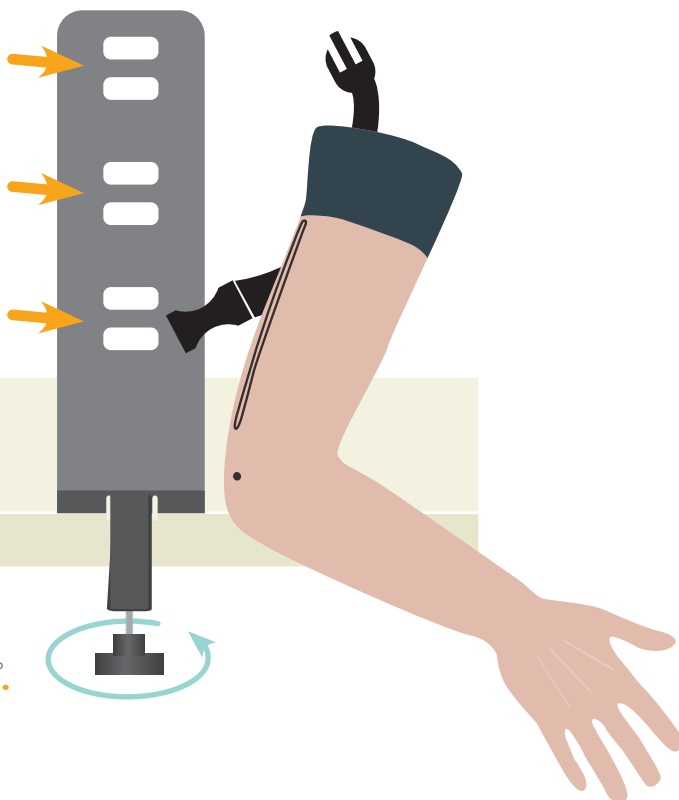

クランプを締めて固定してください。

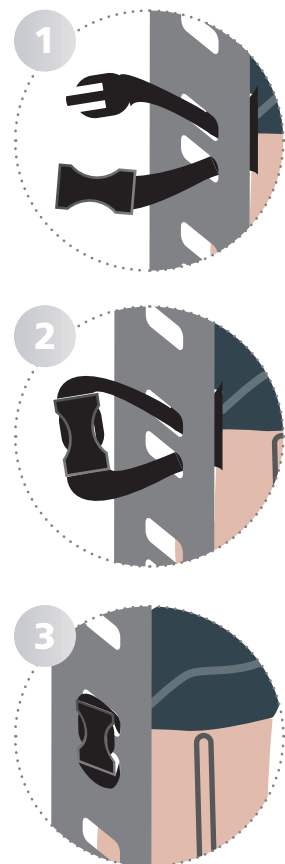

牽引と反対牽引の手技は、スタンドに固定していても必ず2人以上で行ってください。

多様な外固定法が可能です。  
※固定の除去時にモデルを傷つけないよう  
留意してください。



## セットアップ


## 皮膚を交換する

3本のボルトを外します。  
※ネジ部はボルトの先端のみです。




皮膚を固定しているプレートを、以下の手順で取り外します。

1

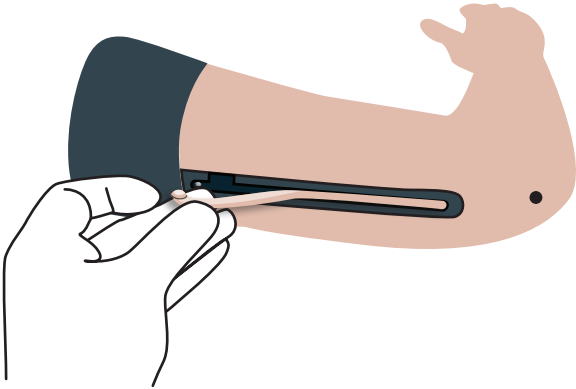


2

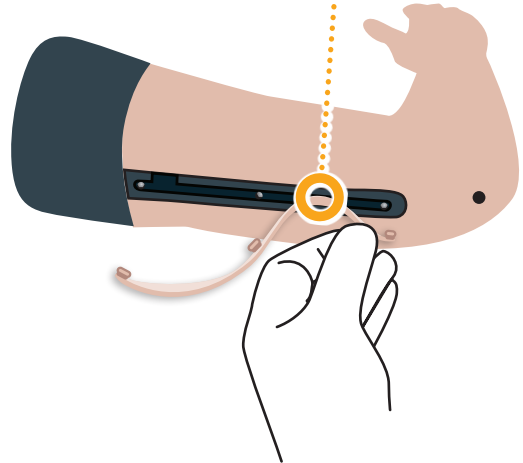

3



4

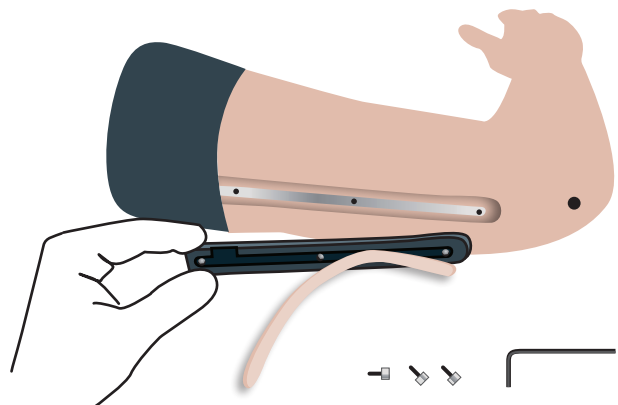

## セットアップ


## 皮膚を脱着する



新たな皮膚への交換は、この手順を逆から行います。

最初の工程（腕の皮膚を前腕部に挿入する際）は、特に慎重に行ってください。

※交換時に新しい皮膚を固定する前（本体露出の時点）にネジ穴をエアダスター等で掃除し、中のクズを除去することをお勧めします。

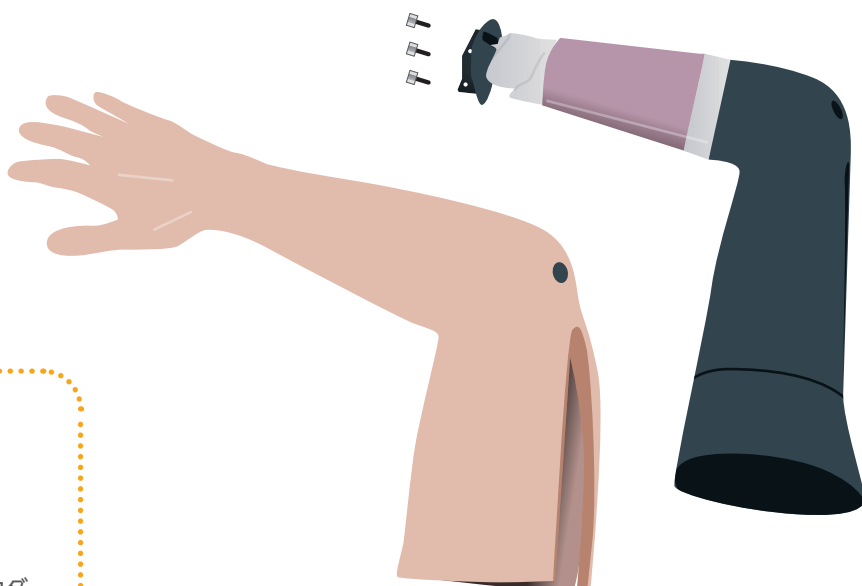


交換する皮膚の内側にビーパウダーを塗布しておくことで装着時の摩擦を防げます。

## 清掃と保管

## 使用後の清掃と保管

使用後は毎回、柔らかい布やスポンジを中性洗剤を混ぜたお湯につけ、しっかり絞った後、やさしく拭いてください。

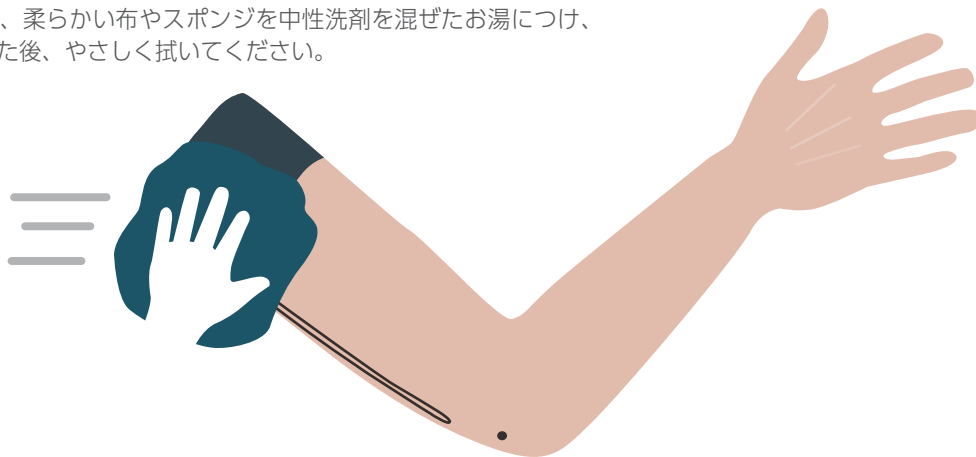

使用後は内臓バネのテンションを最小に戻してから保管してください。  
テンションがかかったままの保管は、不具合の原因となります。※P. 4参照

TAKE A LOOK  
AT OUR **VIDEO**



VISIT THE WEBSITE  
[limbsandthings.com](https://limbsandthings.com)

OR YOUTUBE CHANNEL  
[youtube.com/limbsandthings](https://youtube.com/limbsandthings)



Part No: 965-531

第1版 2021年4月  
©2021 Limbs & Things

**NLS** 日本ライトサービス株式会社  
Nihon Light Service, Inc.  
医学教育機器事業部

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-42-1

03-3815-2354

03-3818-6843

igaku@nlsinc.co.jp

www.medical-sim.jp