





USER GUIDE

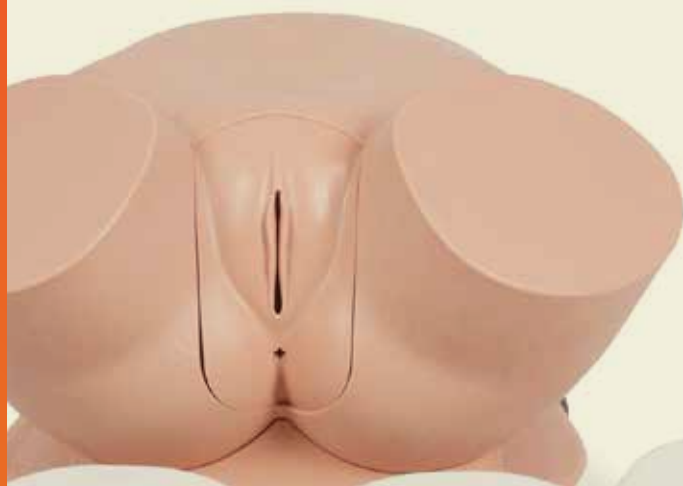

臨床用女性骨盤部 トレーナー アドバンス

品番: 160905

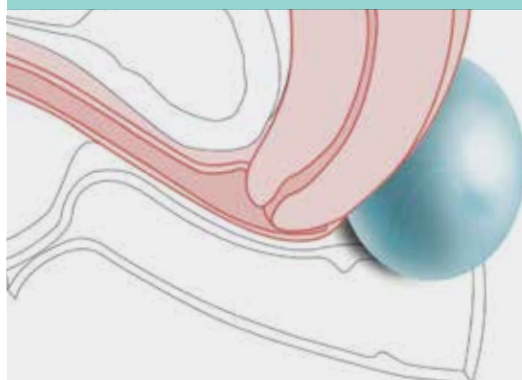

インデックス

商品構成	3
安全と清掃の手引き	4
セットアップ	5
• 本体をスタンドにセットする	5
• 子宮モジュールを交換する	6
トレーニング	7
• 双手診	7
清掃と保管	7
• 使用後の清掃と保管	7

TAKE A LOOK
AT OUR VIDEO



VISIT THE WEBSITE
limbsandthings.com
OR YOUTUBE CHANNEL
youtube.com/limbsandthings

商品構成

160910 腹壁インサート



本体（トルソ）



ベース



160920 子宮モジュール 1

正常 - 未産婦



100293 水性潤滑剤



キャリーケース（2個）



160921 子宮モジュール 2

筋腫 大 - 未産婦



160922 子宮モジュール 3

筋腫 小 - 未産婦



160923 子宮モジュール 4

卵巣嚢胞 - 経産婦



160924 子宮モジュール 5

後屈 - 経産婦



160925 子宮モジュール 6

妊娠10~12週



160926 子宮モジュール 7

妊娠14~16週



▶ 本紙上のモジュール症例図は、このシミュレーターの解剖の情報提供を目的とし単純化し表現たものです。

安全と清掃の 手引き

シミュレーターを使用される前に、この安全の手引きを確認してください

DO's



- このガイドのすべての指示に従い厳守してください。
- すべての警告に注意してください。

- 水性潤滑剤を使用してください。非推奨材料は、材質のシリコンゴにダメージを与え、強度の低下を招きます。



- 常にグローブをつけ、指輪などの貴金属はつけない。ネイルなど鋭利なものは、モデル損傷の原因となります。

- 触診する前に、潤滑剤を指に塗布してください。



- 使用後は柔らかい布やスポンジを中性洗剤を混ぜたお湯につけ、しっかり絞った後、やさしく拭いてください。

DON'Ts



- 熱源の近くに設置したり、炎にさらしたり、火の近くで使用しないでください。
- 本製品の近くまたは上で可燃性の溶剤を使用しないでください。

- 製造元から供給されるアタッチメント以外は使用しないでください。



- 指に異物（貴金属、ネイルなど）をつけて使用しないでください。

- スキンパーツ（ゴム）が割けている場合は使用しないでください。



- お客様のもとでの製品の分解や修理を禁止します。販売店から製造元に依頼をしてください。

保管と移動




ケガや製品損傷を防ぐため、輸送中や保管中に製品が適切に梱包、固定されていることを常に確認してください。


セットアップ

本体をスタンドにセットする

1

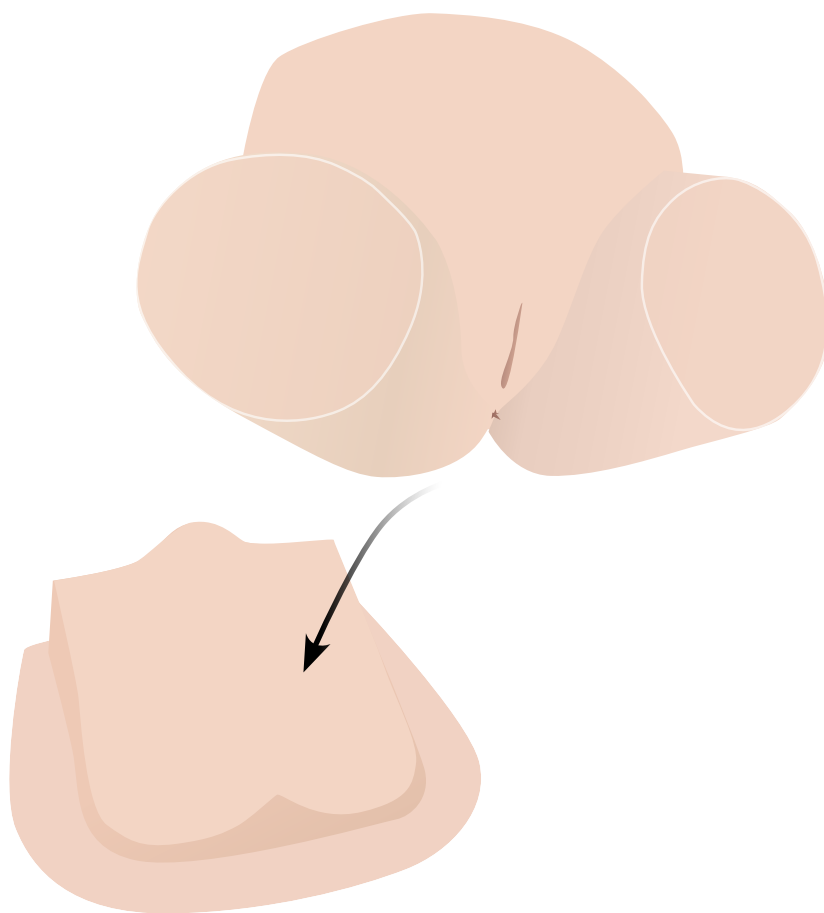

2

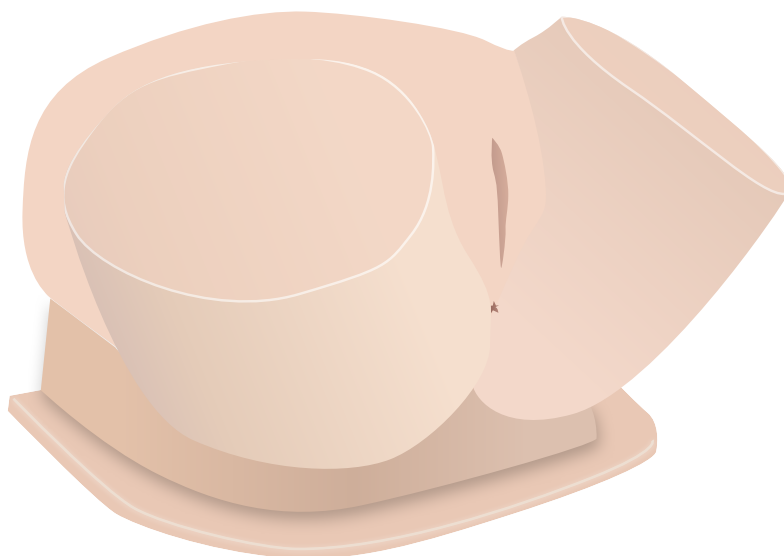


セットアップ

子宮モジュールを交換する

1




本体上部から、腹壁
インサートを持ち
上げます。

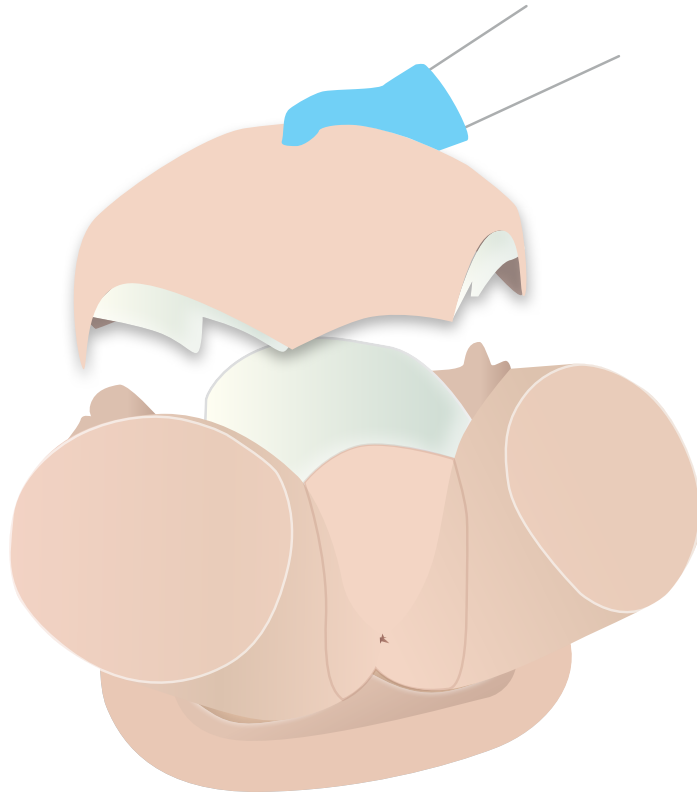

2



モジュールの取り外しは
両手でゆっくりと。

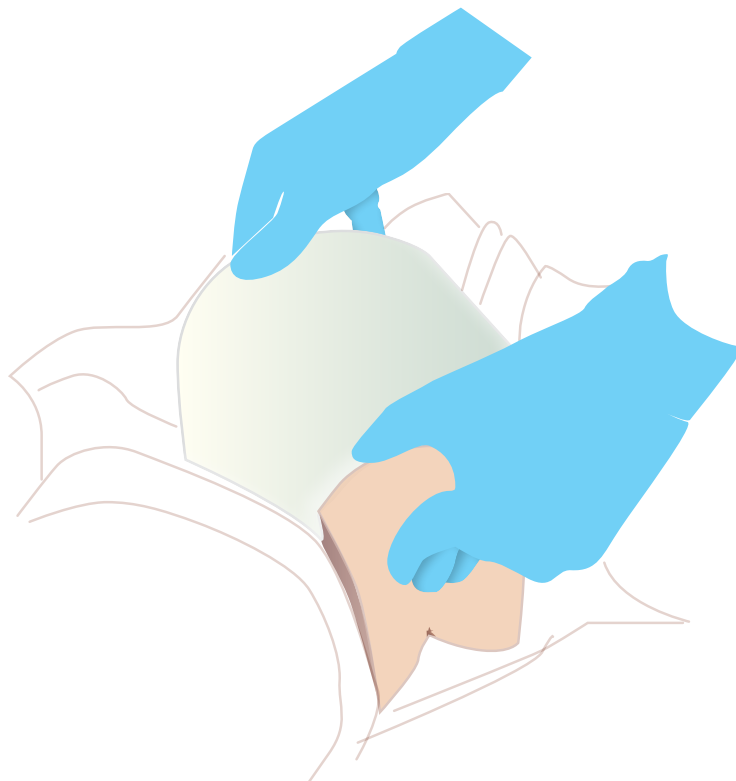

トレーニング


双手診をおこなう

- 必ずグローブをつけておこないます。貴金属も必ずはずしてください。
- 診察前には必ず潤滑剤を塗布してください。




各モジュールの診察は
必ず腹壁の上から。
(モジュール単独使用は禁止)

モジュールは腹壁越しでの使用を想定し設計されています。モジュールを直に押すだけの強度を備えていませんので、破損の原因となります。

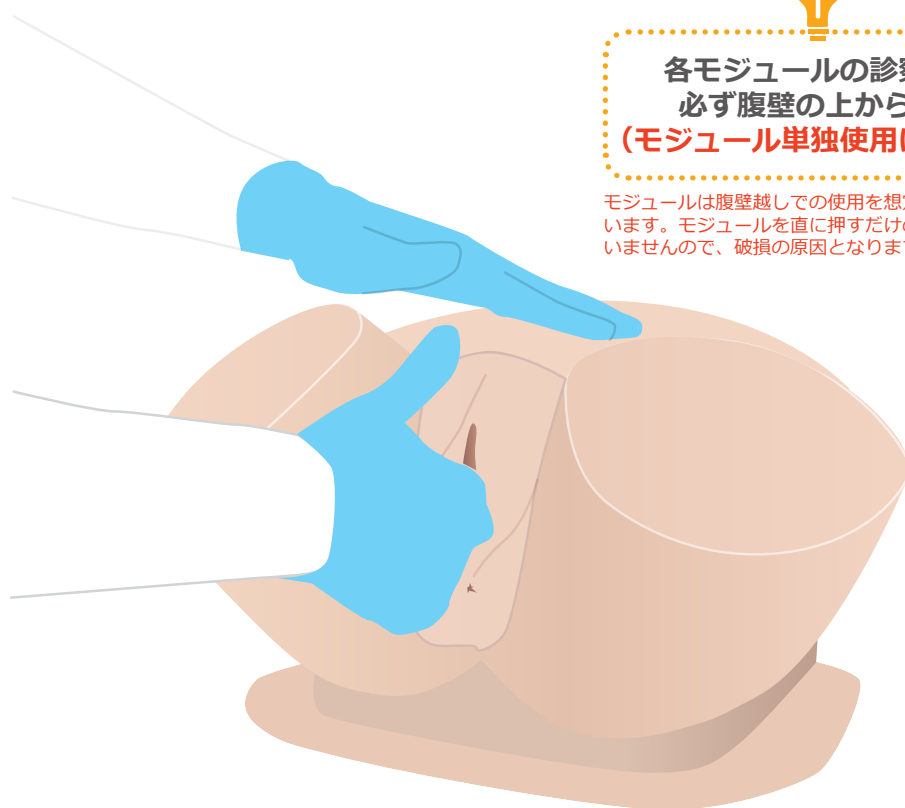

清掃と保管

- 使用後はやわらかい布で潤滑剤をふきとってください。
- 温水や洗剤でかるく湿らせた柔らかい布で、表面の汚れをふきとってください。
※洗剤を使用した場合は、ふたたび表面を水で湿らせた布でふいてください。

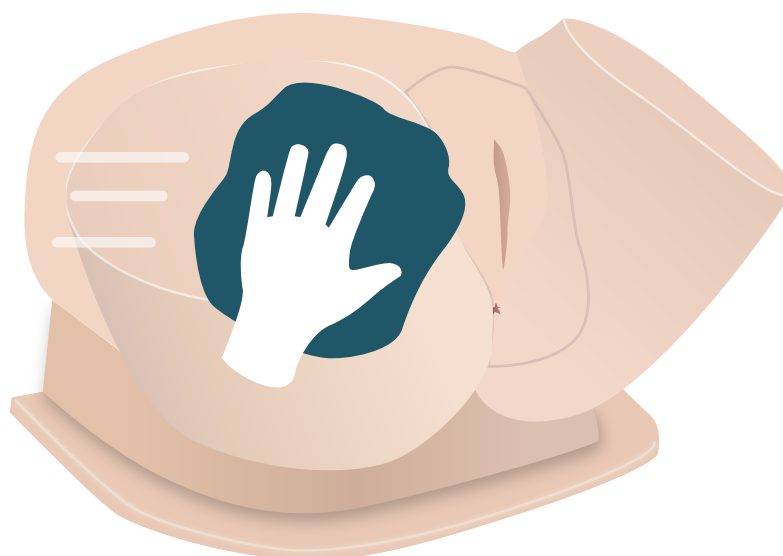

YOU MAY
ALSO BE
INTERESTED IN...

乳房診察トレーナー

140200 スタンダード

140201 アドバンス

140202 ベーシック



Part No: 065-963
第3版 (2019年2月)
© 2019 Limbs & Things

NLS 日本ライトサービス株式会社
Nihon Light Service, Inc.

医学教育機器事業部

〒113-0033 東京都文京区本郷 2-3-9 ツインビュー御茶の水2F

☎ 03-3815-2354

☎ 03-3818-6843

✉ igaku@nlsinc.co.jp

🌐 www.medical-sim.jp