



USER GUIDE



会陰切開モジュール

品番: 161104


インデックス

商品構成	3
安全と清掃の手引き	4
セットアップ	5
• スタンドを固定する	5
• 会陰切開パッドを取り付ける	6
• 胎児頭部を取り付ける	7
• 会陰切開パッドを修復する	8
ケア&メンテナンス	11

商品構成


会陰切開パッド (2枚入)

161113

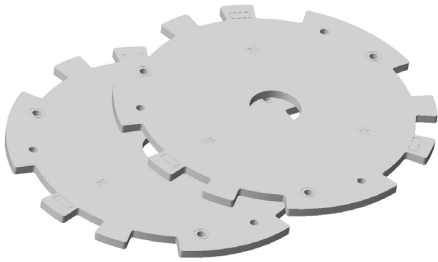


会陰切開修復テープ (24枚入)

161114

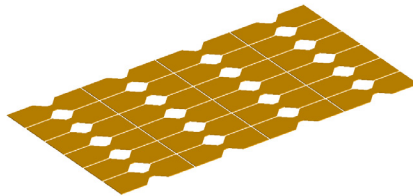


会陰切開用胎児頭部

161115

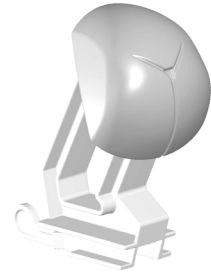

会陰切開イラストレーションパック


161116

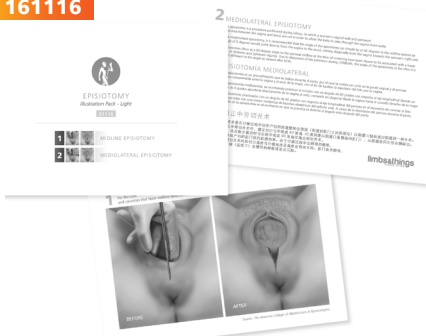

構成に含まれませんので、ご用意ください。

会陰部フレーム (固定クランプ付)

161109

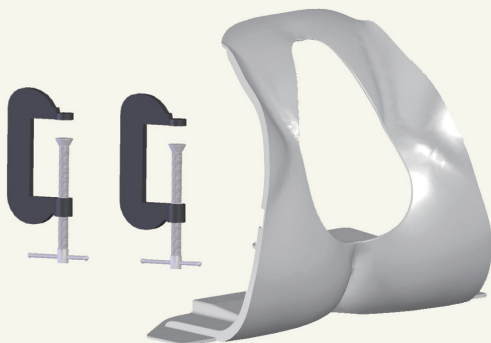

ハサミもしくはメス



ベビーパウダー



安全と清掃の 手引き

会陰切開モジュールを使用される前に、
この安全の手引きを確認してください。

DO's



- このガイドのすべての指示に従ってください。
- このガイドは大切に保管してください。
- すべての警告に注意してください。

- 常に手袋を着用し、貴金属はすべて外してください。爪や指輪などの鋭利な表面は、製品損傷の原因となります。



- 使用後は毎回、柔らかい布やスポンジを中性洗剤を混ぜたお湯につけ、しっかり絞った後、やさしく拭いてください。

- ベビーパウダーを胎児頭部や会陰切開パッドの穴の縁に塗布すると裂けにくくなります。
- また、胎児頭部を装着する際の摩擦も軽減されます。



保管と移動



- トレーニング後、収納前にスタンドからはすべてのパーツを取り外し、保管中に長時間の伸展負荷がかからないようにしてください。パッドの破損や劣化の原因となります。



- 輸送や保管の際には、人身事故や製品の損傷を防ぐために、必ず適切な梱包と固定を行ってください。

DON'Ts




- 熱源の近くに設置したり、炎にさらしたり、火の近くで使用したりしないでください。
- 本製品の近くまたは上で可燃性の溶剤を使用しないでください。

- メーカーが提供するアタッチメント以外は使用しないでください。



- 製品を分解したり修理しようとしたりしないでください。製品の点検や修理は販売代理店に連絡をしてください。

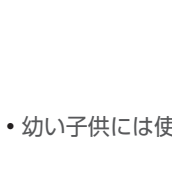


- 幼い子供には使わせないでください。



セットアップ


スタンドを固定する

1

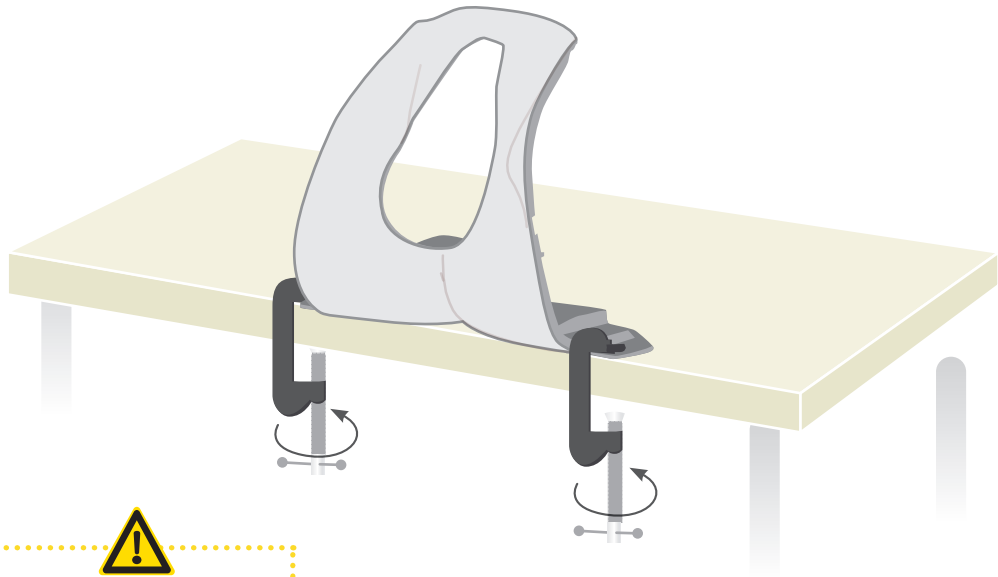

締め付けすぎないよう
にしてください。



2

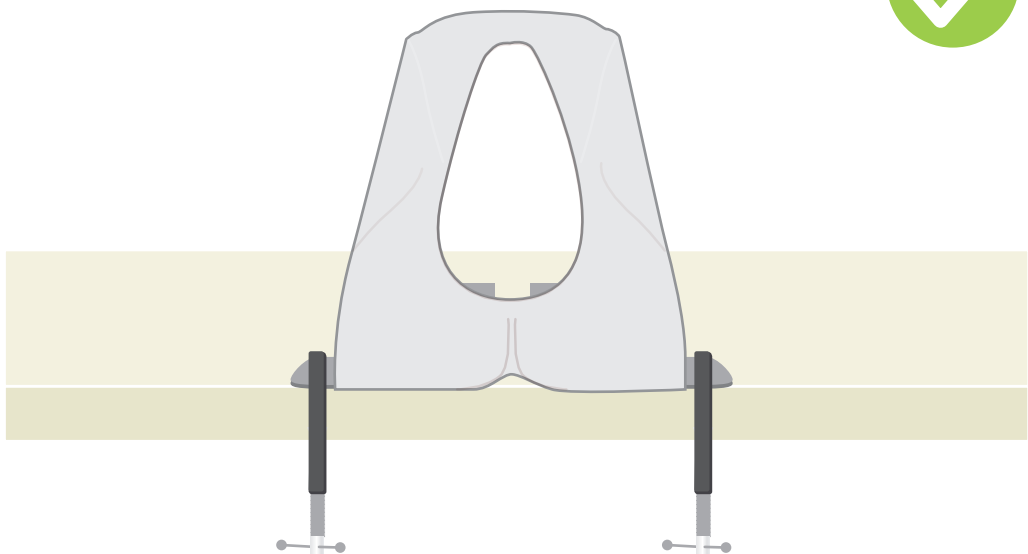

セットアップ


会陰切開パッドを取り付ける

1

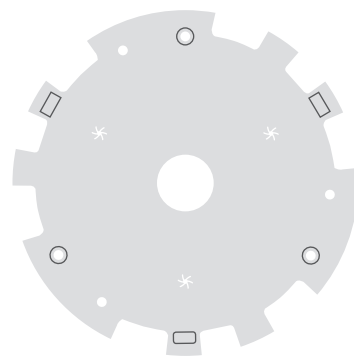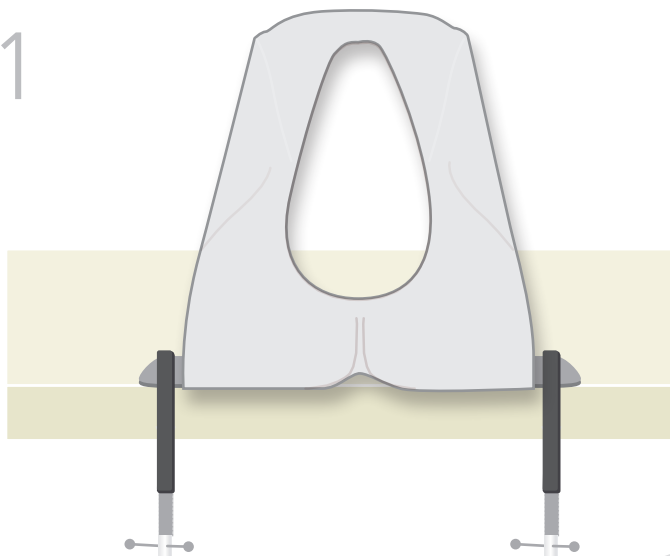


□ 形状の溝を底面に合わせます。

2

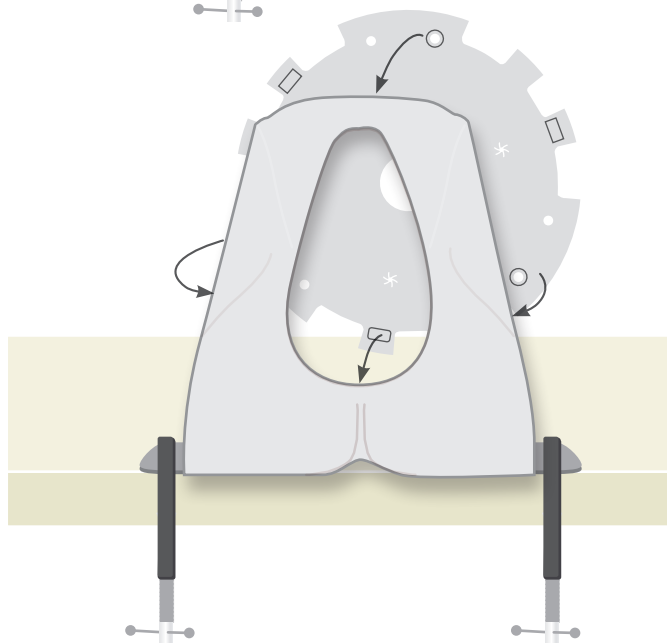

3

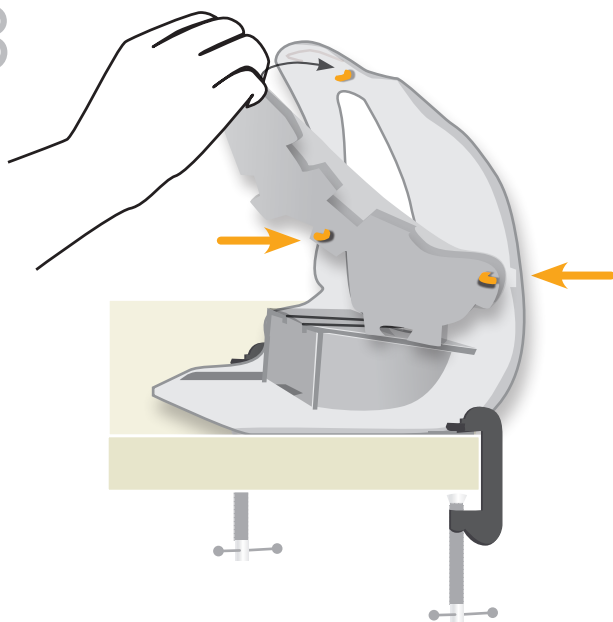


肛門が真ん中にあることを確認します。



セットアップ


胎児頭部を取り付ける

1

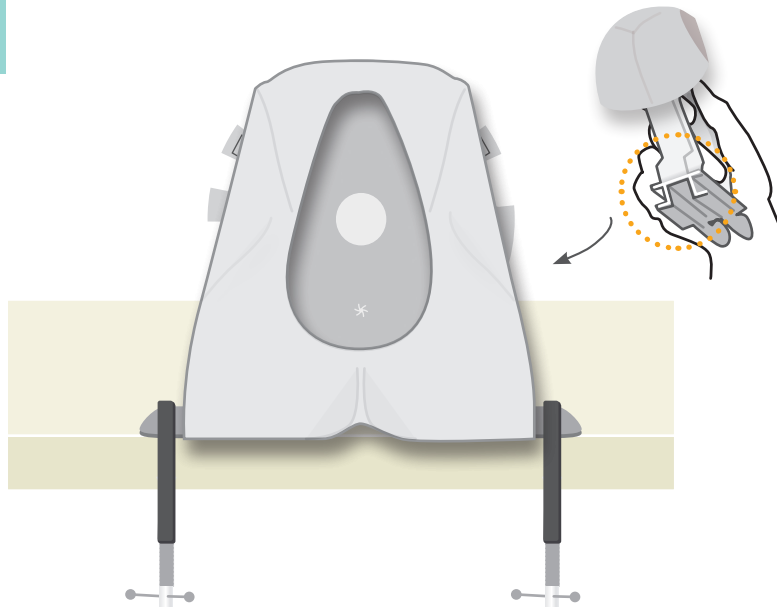


胎児頭部にパウダーを塗布し、切開パッドの裂けを防ぎます。


2

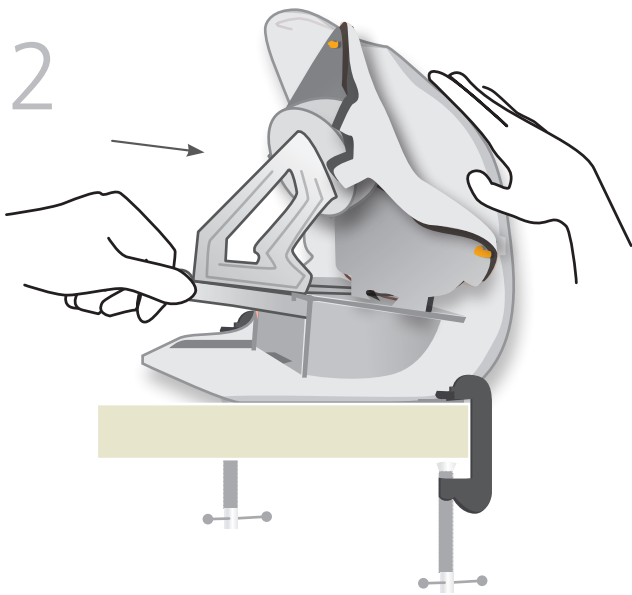

「カチッ！」と音がするまで差し込みます。

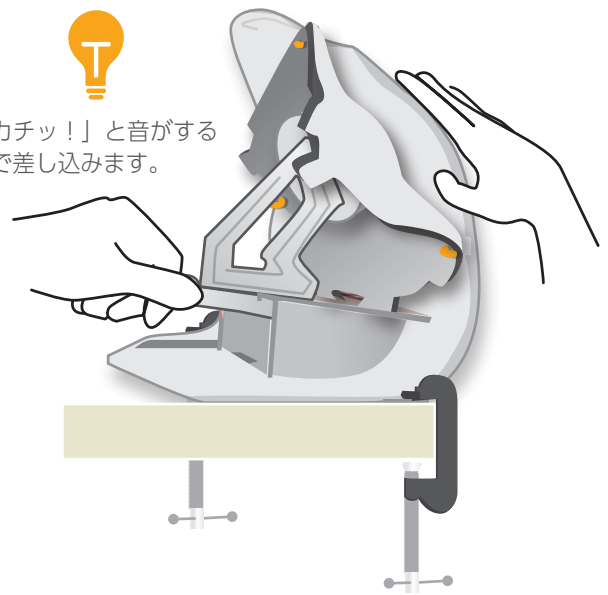


3

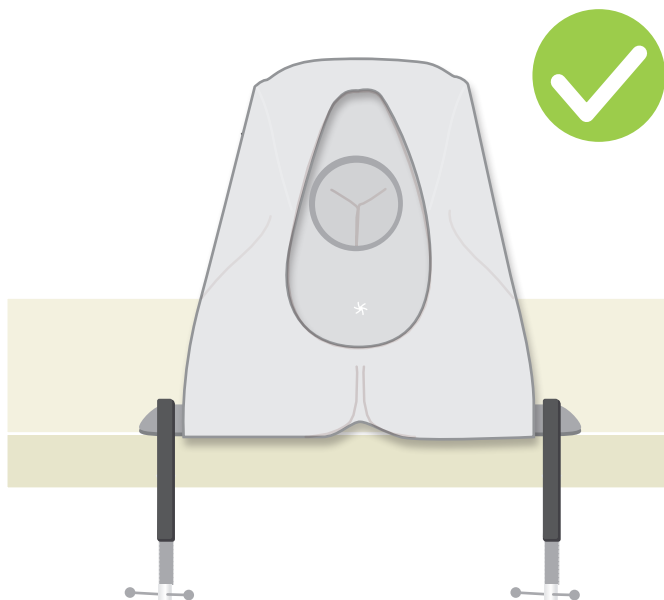


セットアップ

会陰切開パッドを修復する


1

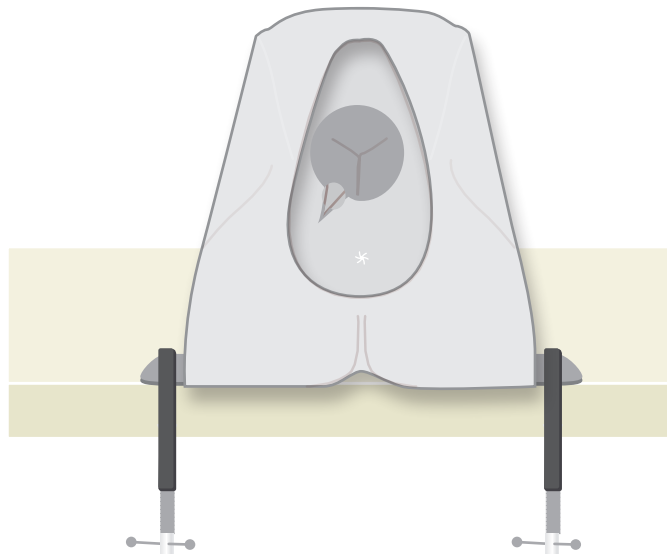

2

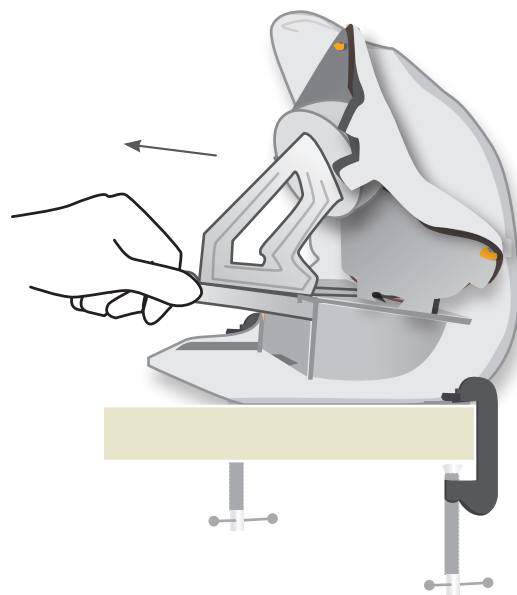


3

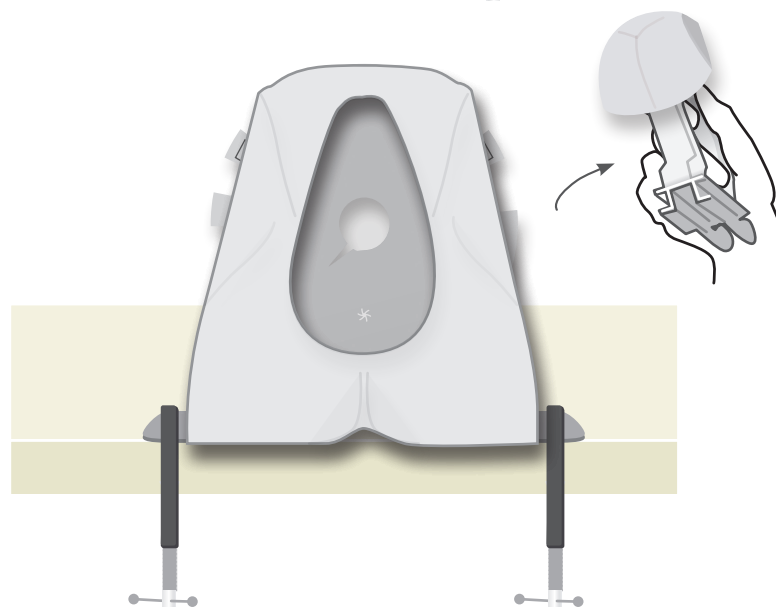

セットアップ

会陰切開パッドを修復する


4

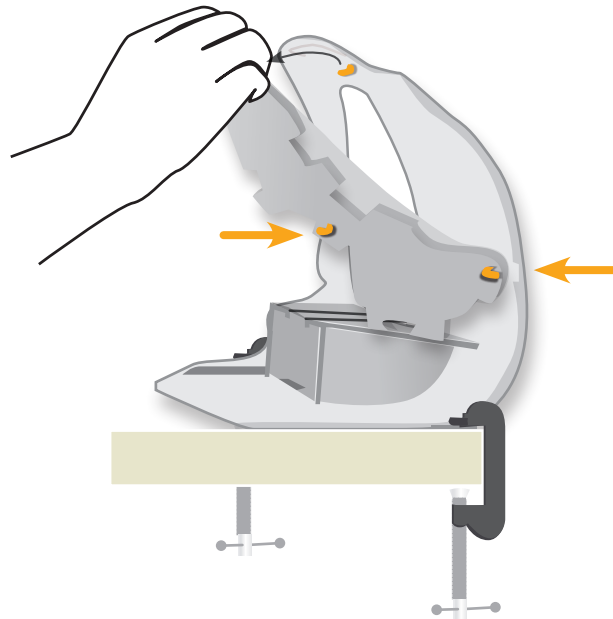

5



6

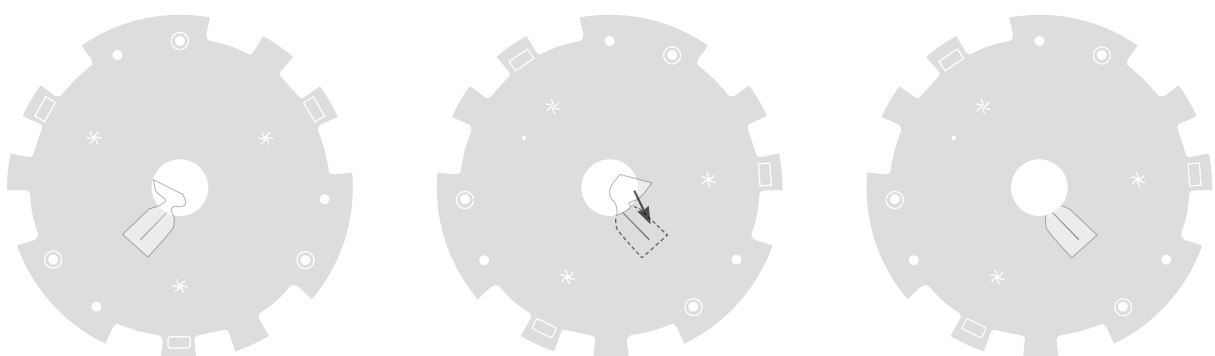

セットアップ


会陰切開パッドを修復する

7



パッドを120° 回転しローテーションします。

8

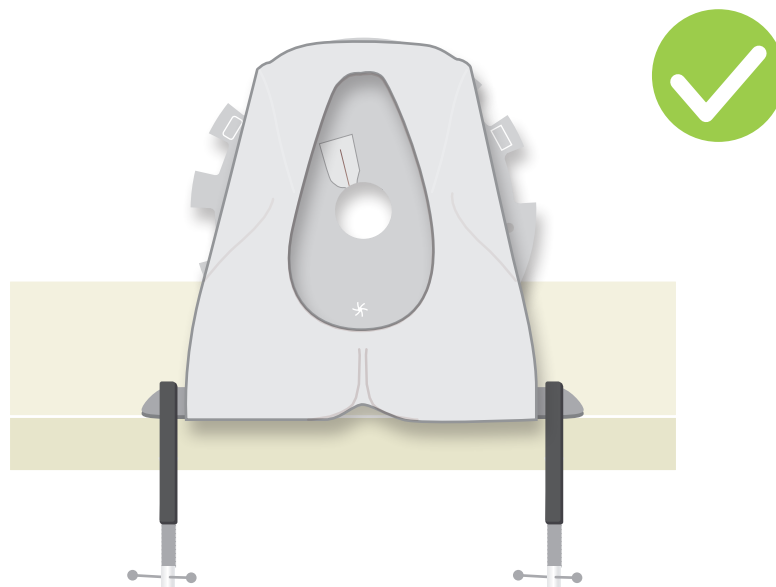

パッド1枚につき、合計12回カットできます。



パッドはすぐ取り外し、伸展したまま保管しないでください。



湿った布で拭いてください。

YOU MAY
ALSO BE
INTERESTED IN...


161102

会陰裂傷修復トレーナー (第4度)



161107

交換用会陰 (2個入) 第4度 / 会陰裂傷修復

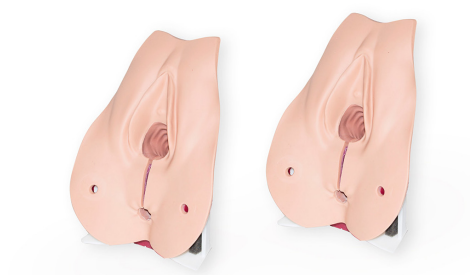

Part No: 365-504

第1版 2021年12月
©2021 Limbs & Things

NLS 日本ライトサービス株式会社
Nihon Light Service, Inc.
医学教育機器事業部

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-42-1

☎ 03-3815-2354

☎ 03-3818-6843

✉ igaku@nlsinc.co.jp

🌐 www.medical-sim.jp

2022.03.R01. Printed in Japan