




USER GUIDE

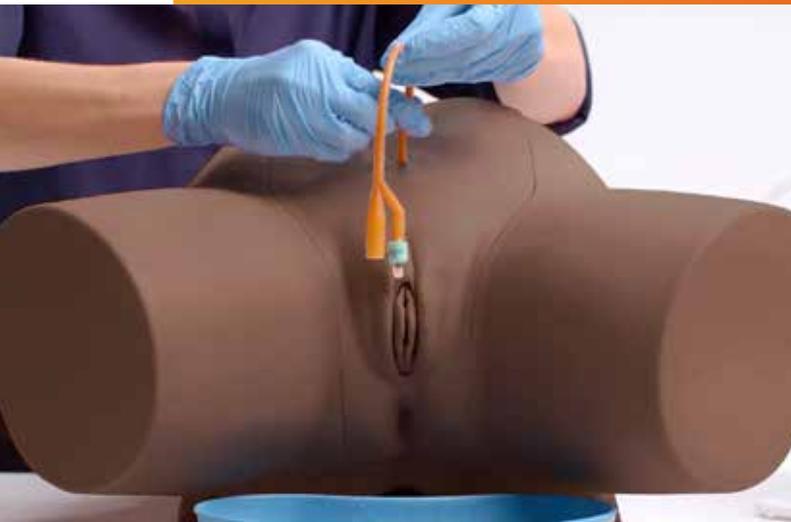

女性導尿トレーナー

品番: 160851

商品構成	3
安全と清掃の手引き	4
セットアップ	5
• 本体フレームを設置する	5
• 給水システムを組み立てる	6
• 使用後に排水する	8
• 洗淨後に組み立てる	9

TAKE A LOOK
AT OUR VIDEO



VISIT THE WEBSITE
limbsandthings.com

OR YOUTUBE CHANNEL
youtube.com/limbsandthings

商品構成

女性導尿モジュール

160856




給水システム

160893



本体フレームとスタンド

160864

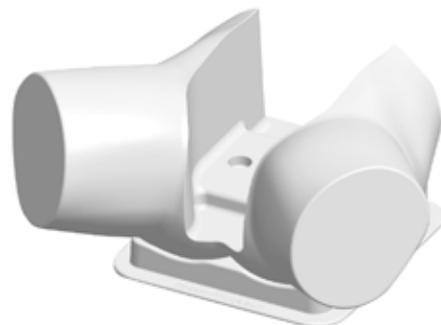

カテーテル無菌包装用スリーブ (2枚入)

160862



潤滑剤 (導尿用)

160892




抗菌剤

150185



給排水延長チューブ


160867

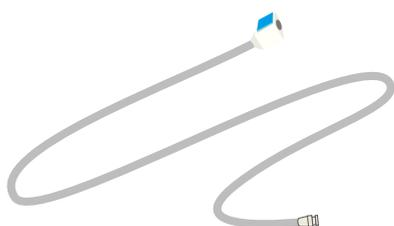

膿盆 (プラスチック製)




14Fr フォーリーカテーテル

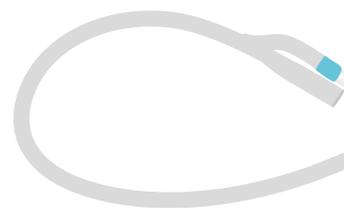

ARTマット (導尿トレーナー用)

160131

※別冊ガイド参照
(折り曲げ厳禁)

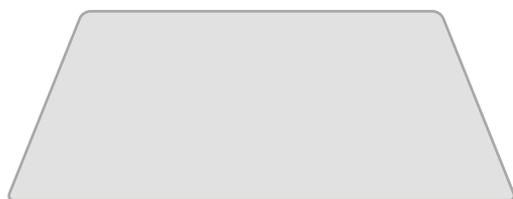

安全と清掃の 手引き

導尿トレーナーを使用される前に、この安全の手引きを確認してください

DO' s



このガイドのすべての指示に従ってください。
このガイドは保管をしてください。すべての警告に注意してください。

製造元から供給されるアタッチメントと
消耗品だけ使用してください。



資格を有したサービス担当者にすべてのサービ
スを依頼してください。損傷した場合は、整備
が必要です。

常にグローブをつけ、指輪などの貴金属は
つけないでください。ネイルなど鋭利なも
のは、モデル損傷の原因となります。



カテーテルを挿入するときは潤滑剤を使用して
下さい。

指定の抗菌剤（ミルトン）を使用してく
ださい。



14Frのフォーリーカテーテルを使用してく
ださい。

使用後は、柔らかい布やスポンジを中性
洗剤を混ぜたお湯につけ、しっかり絞っ
た後、やさしく拭いてください。



DON' Ts



熱源の近くに設置したり、炎にさらしたり、
火の近くで使用したりしないでください。
本製品の近くまたは上で可燃性の溶剤を使用
しないでください。

本品を電気製品や水による損傷のあるものの
近くに設置しないでください。



カテーテルを挿入したままにしないでくださ
い。変形が生じ、本来の性能が損なわれます。

バルーンが膨らんだままカテーテルを抜去し
ないでください。



麻酔ジェルを使用しないでください。付属の疑
似ジェル（水性潤滑剤）を使用してください。

お客様のもとでの製品の分解や修理を禁止しま
す。販売店から製造元に依頼をしてください。



水が入ったまま製品を長時間放置しないでく
ださい。使用後は解体し清掃を行ってください。

STORAGE & TRANSPORTATION




ケガや製品損傷を防ぐため、輸送中や保管中
に製品が適切に梱包、固定されていることを
常に確認してください。


セットアップ

本体フレームを設置する

1

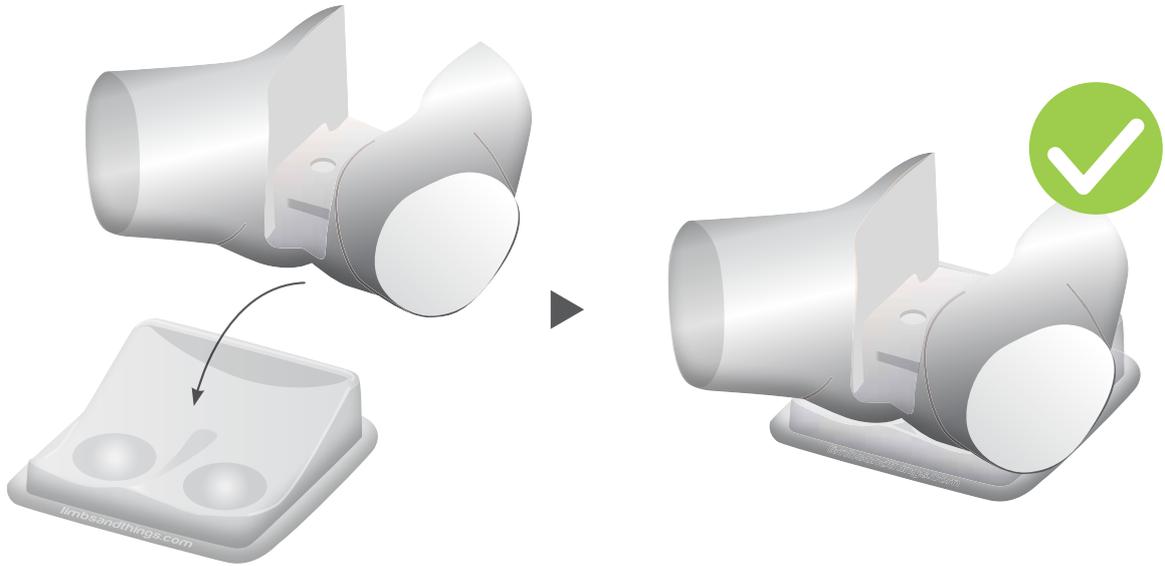


2

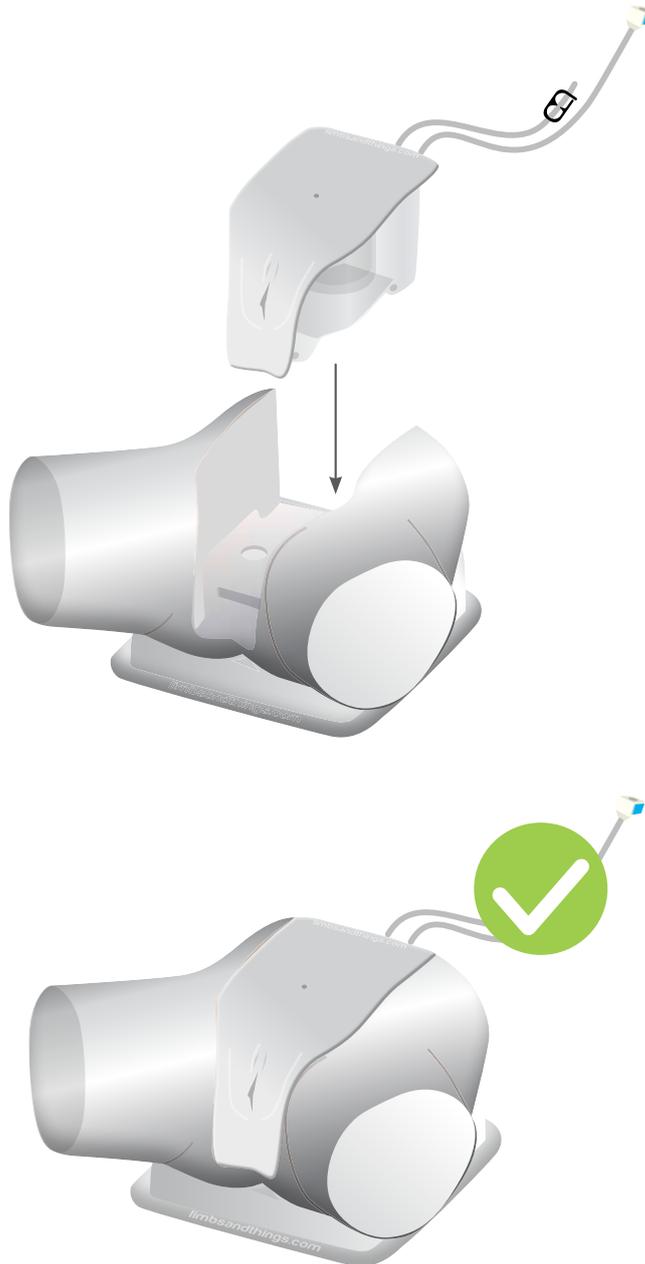


セットアップ

給水システムを組み立てる


1

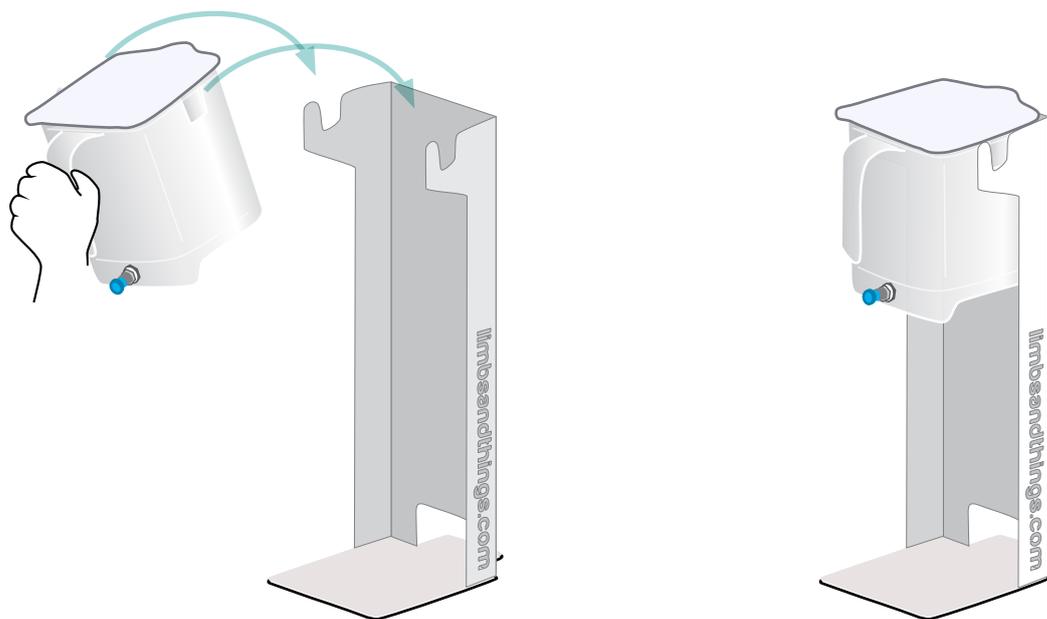


2

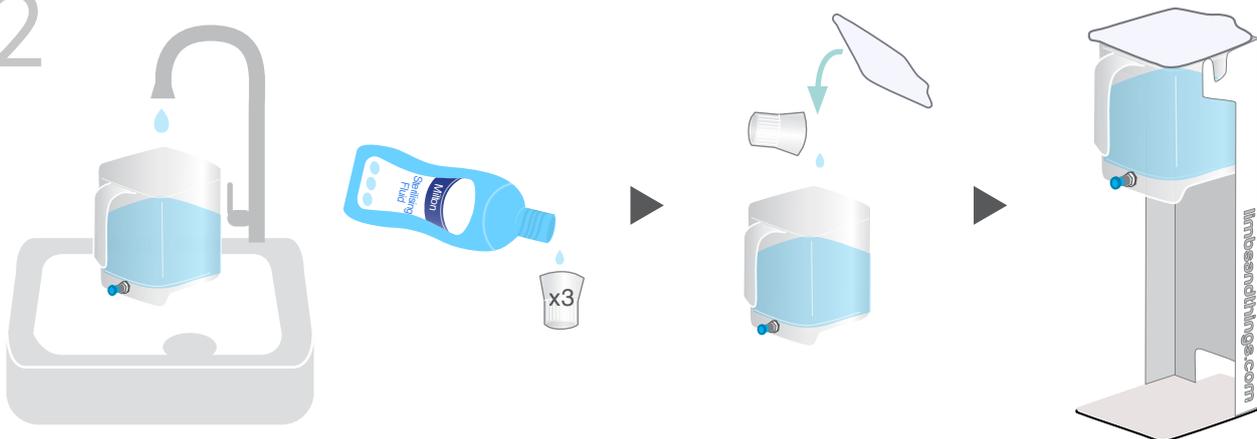

3

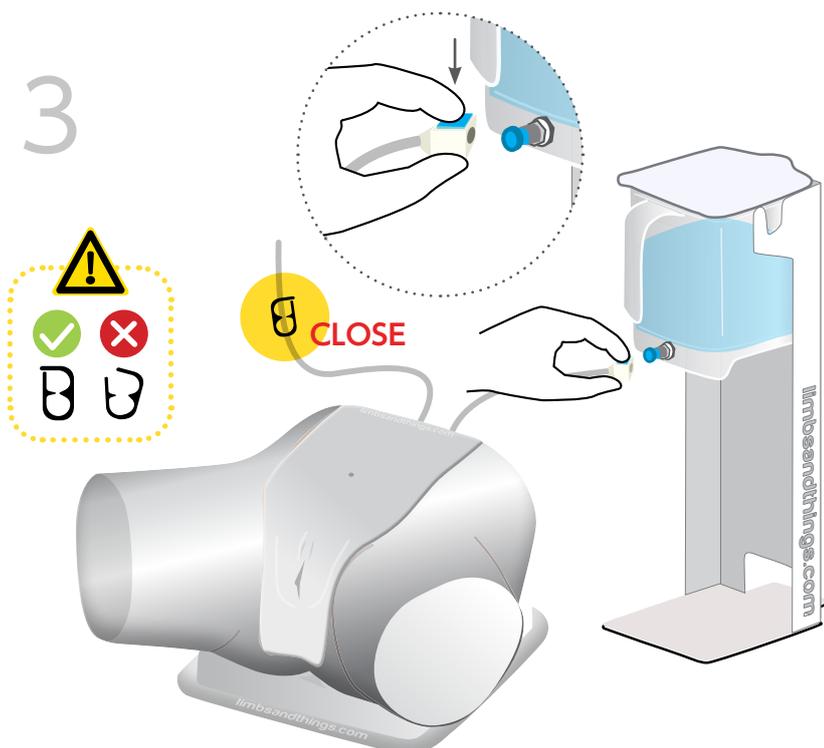


延長チューブを使用した
くらいが、標準的な患者
圧です。

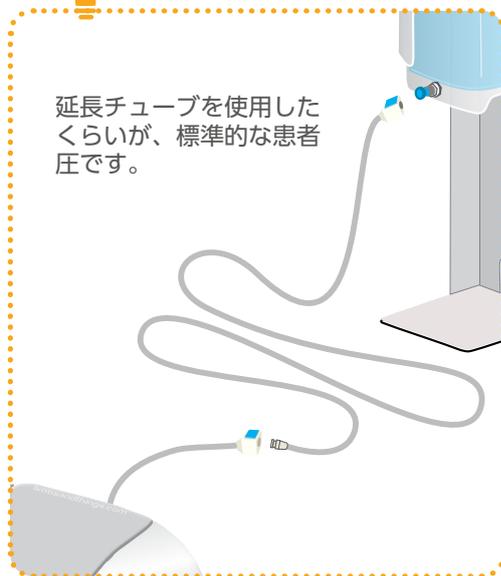


セットアップ

給水システムを組み立てる


4

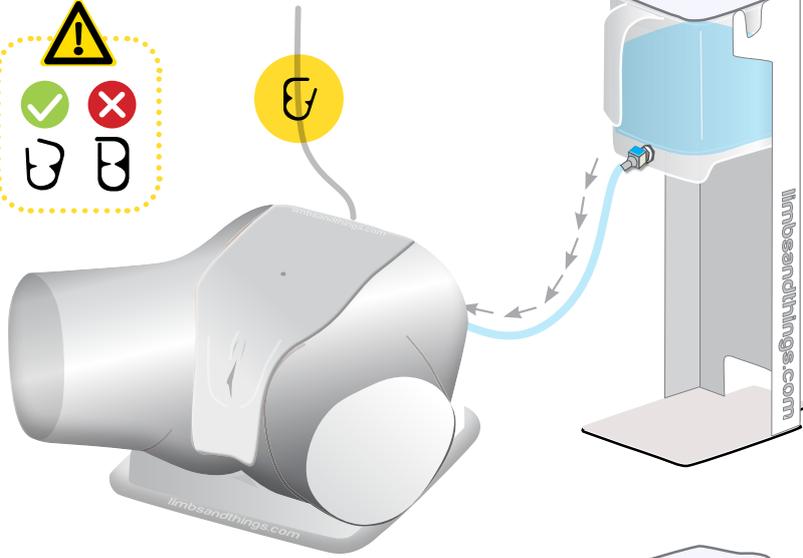

5

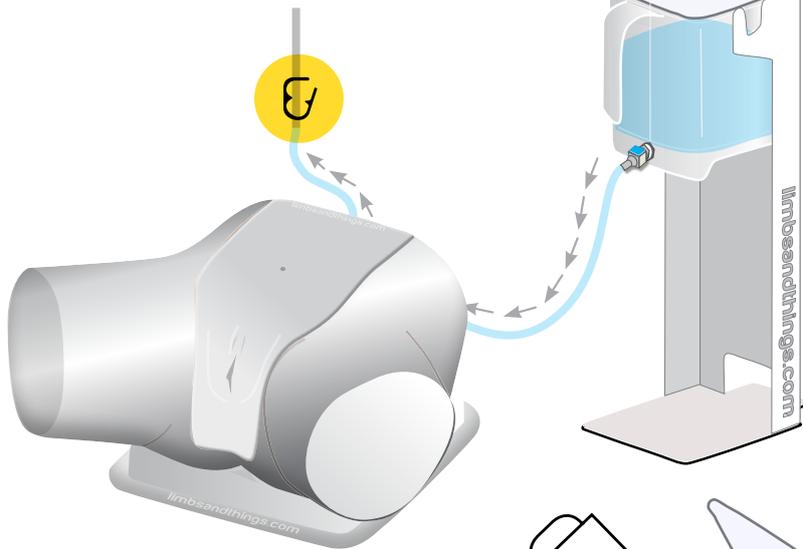


6

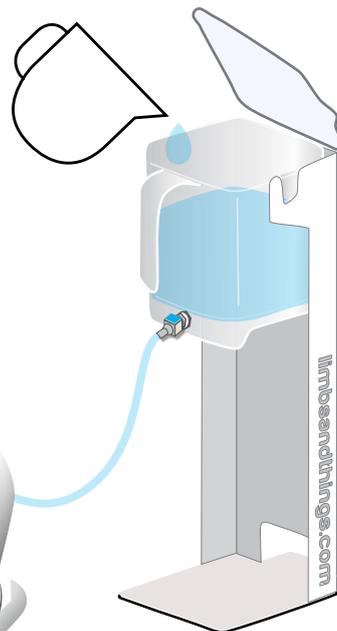

給水タンクに水を補充します。




使用前に10ml 注入
手技ごとに5~10ml 注入

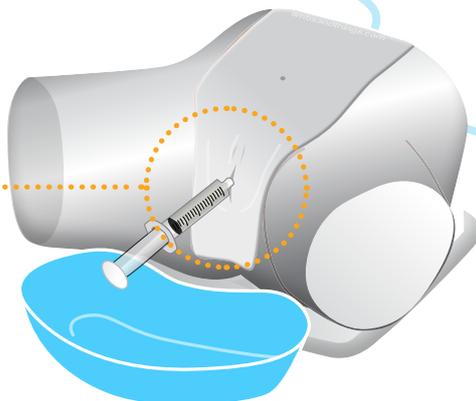


セットアップ

使用後に排水する

1

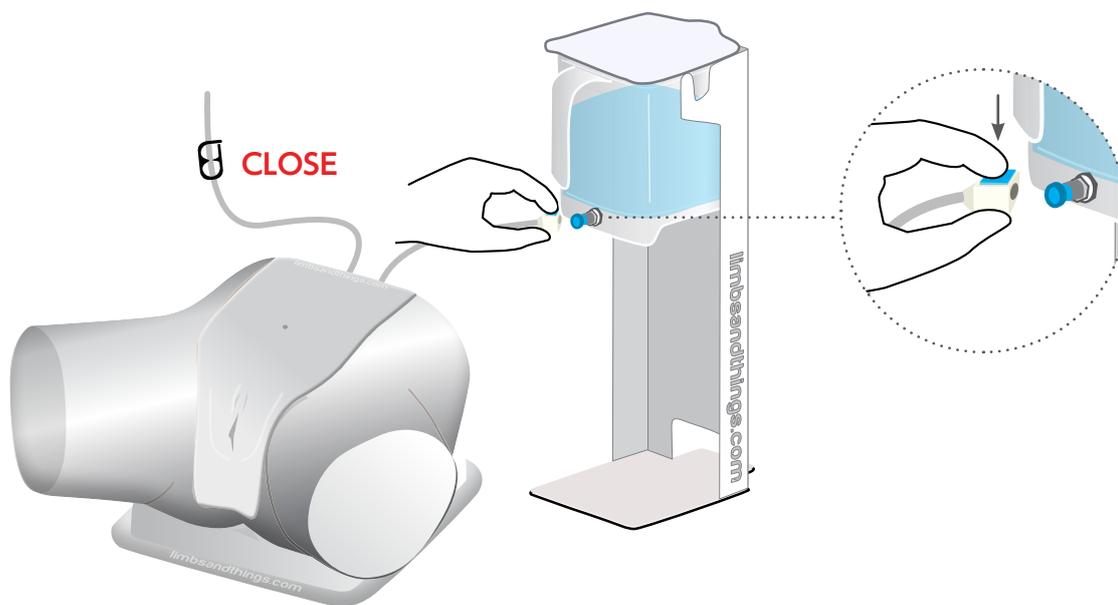

2

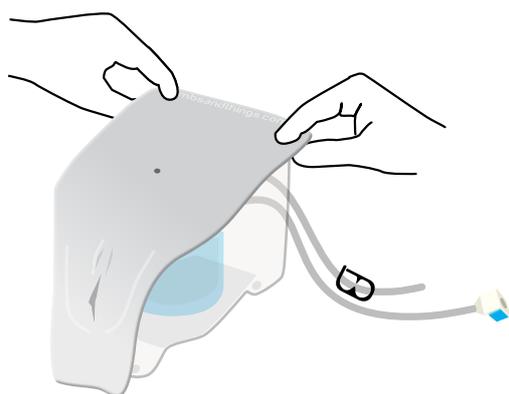

3



4





セットアップ

洗浄後に組み立てる


1

白キャップは強く締めすぎないようにしてください。(破損原因となります。)

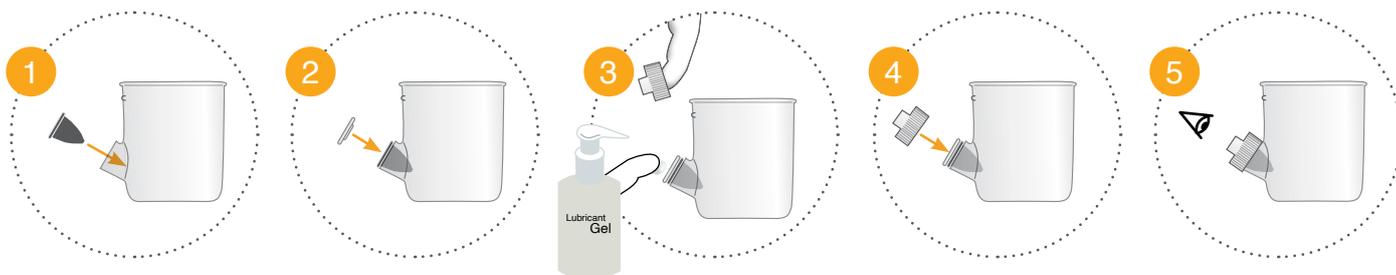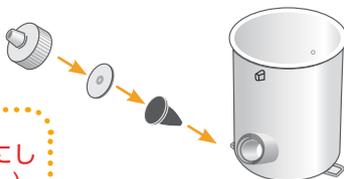


キャップを取り付ける前に潤滑剤を注入してください。

隙間がないように(ずれていない)

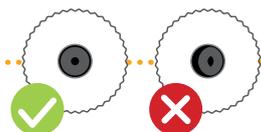



2

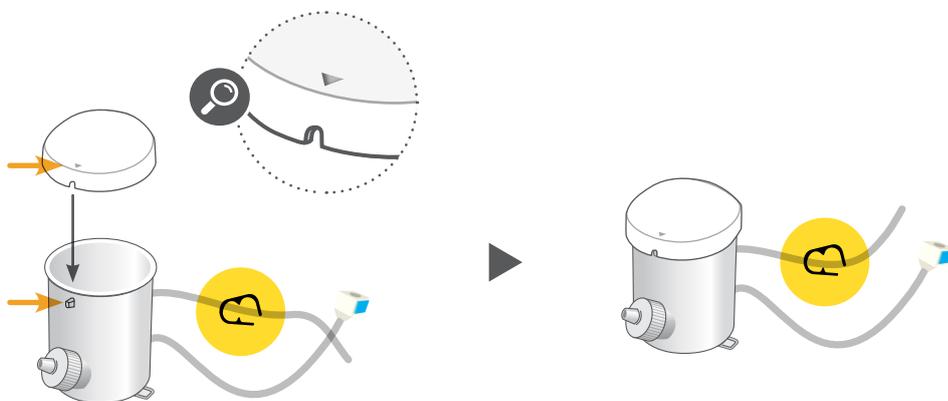

セットアップ


洗浄後に組み立てる

3

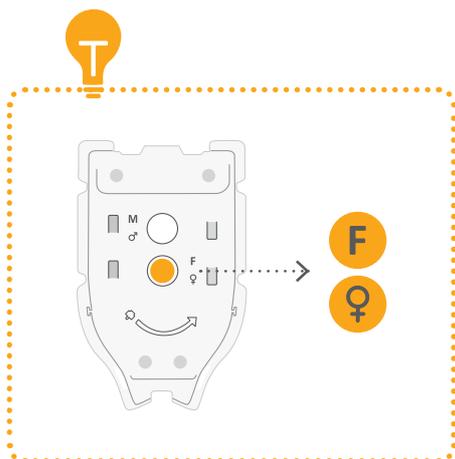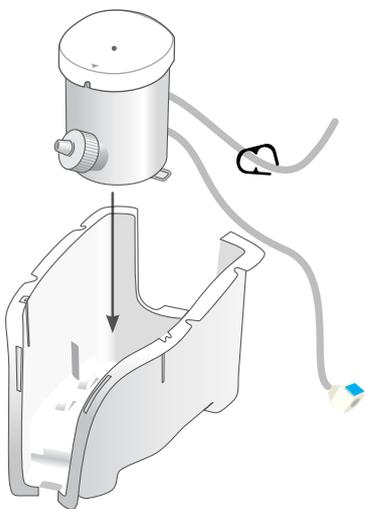


女性導尿モジュールは前方のスリットで取りつけます。

※後方は女性モジュール専用

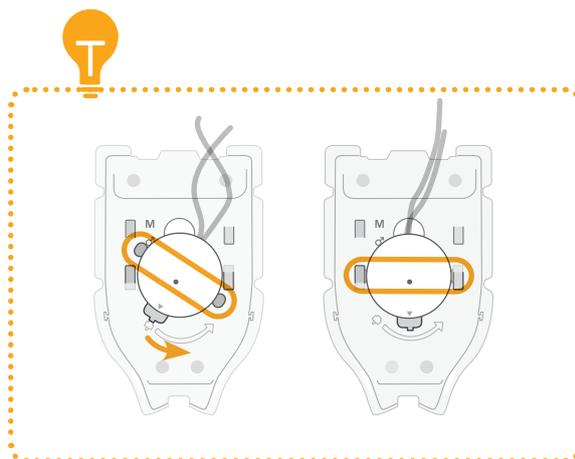

反時計回り：固定する
時計回り：取り外し


4

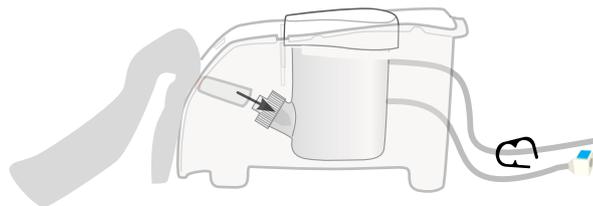

5




6

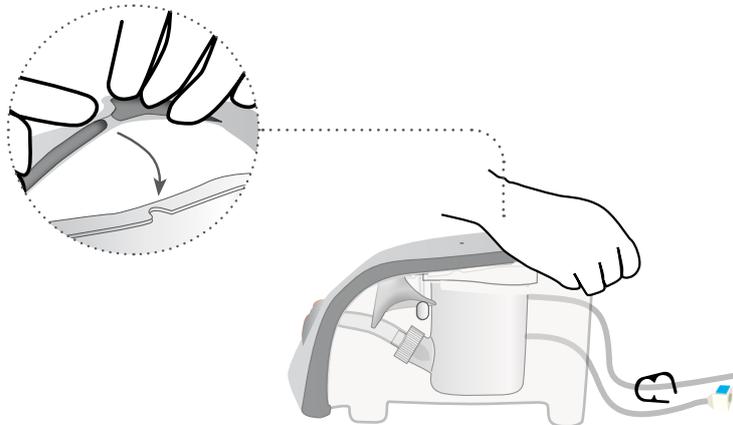

YOU MAY
ALSO BE
INTERESTED IN...


男性導尿トレーナー

160850

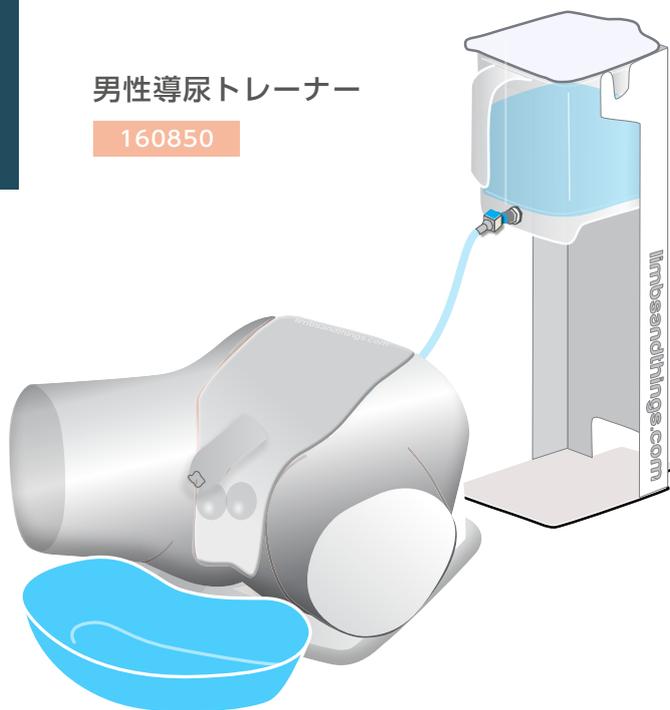

エコーガイド膀胱留置
カテーテル挿入トレーナー

160852

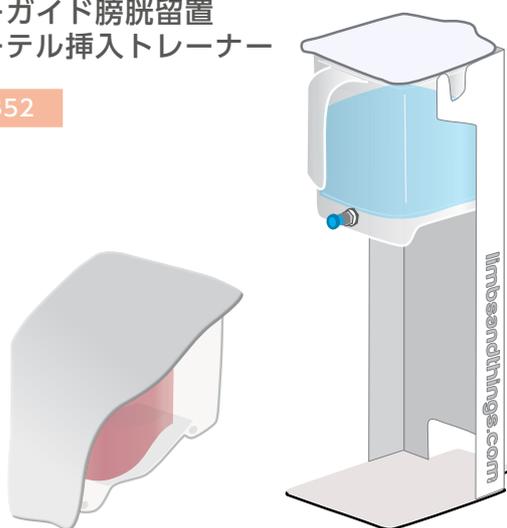

キャリーケース (中)

140209



Part No: 965-509

第5版 2023年10月
© 2023 Limbs & Things

NLS 日本ライトサービス株式会社
Nihon Light Service, Inc.

医学教育機器事業部

〒113-0033 東京都文京区本郷 2-3-9 ツインビュー御茶の水2F

☎ 03-3815-2354

☎ 03-3818-6843

✉ igaku@nlsinc.co.jp

🌐 www.medical-sim.jp