



USER GUIDE



## 乳児股関節検査 トレーナー

142000

## インデックス

商品構成

2

セットアップ

3

乳児股関節検査トレーナーの準備  
モジュールの変更

安全と清掃の手引き

4


## 商品構成

乳児股関節検査用上半身トルソ

142001



乳児股関節検査 イラストカード

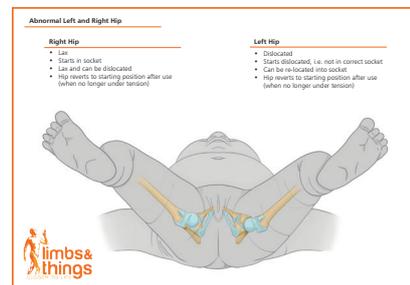


乳児股関節検査用脚部（正常）

142002




乳児股関節検査用脚部（異常）

142003

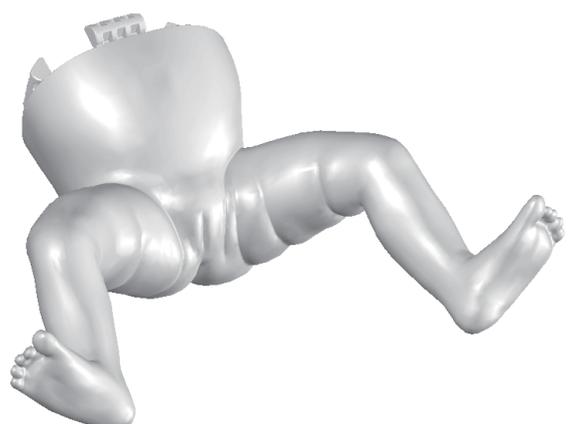

# セットアップ



## 乳児股関節検査トレーナーの準備

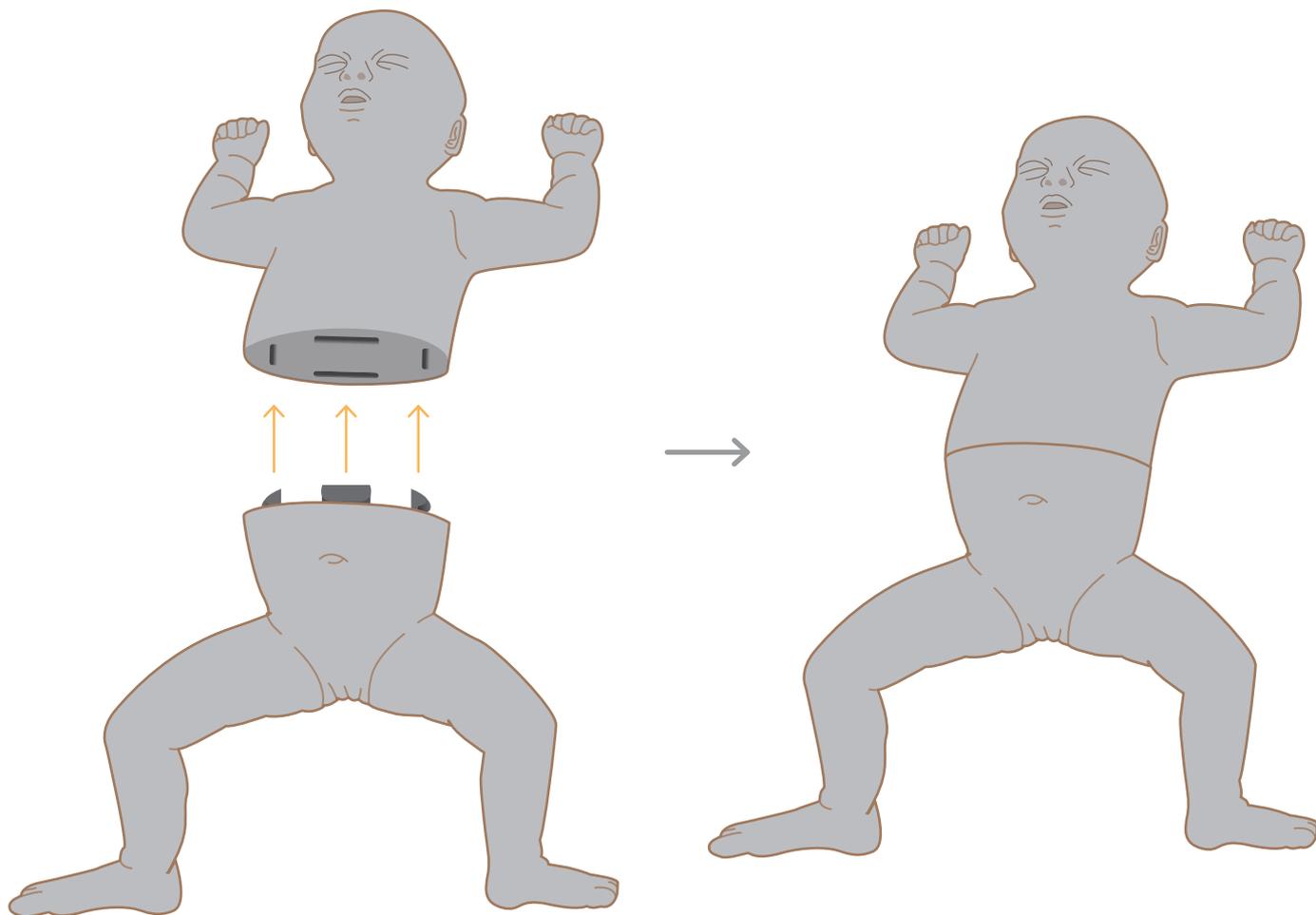

### モジュールの変更



脚部の正常／異常を選択し、  
上半身トルソに装着します。

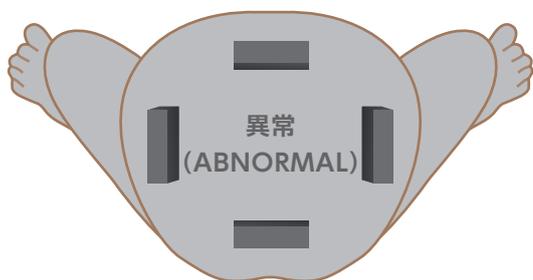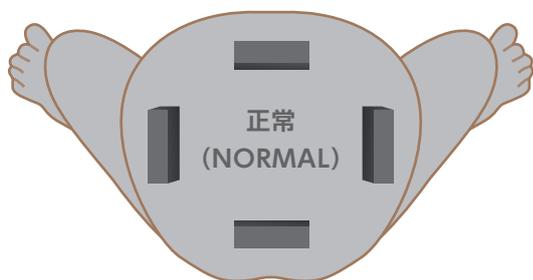

## 安全と清掃の 手引き

幼児股関節検査トレーナーを使用する前に  
この安全の手引きを確認してください。

### DO's



このガイドのすべての指示に従ってください。  
このガイドは大切に保管してください。  
すべての警告に注意してください。

メーカー指定のアタッチメント／アクセサリのみ使用してください。



すべての整備は、資格を持つサービス担当者に依頼してください。損傷した場合は、修理が必要です。

常に手袋を着用し、貴金属はすべて外してください。爪や指輪などの鋭利な表面は、製品損傷の原因となります。



使用後は、柔らかい布やスポンジを中性洗剤を混ぜたお湯につけ、しっかり絞った後、やさしく拭いてください。



### DON'Ts

足を90度以上外転させないでください。



熱源の近くに設置したり、炎にさらしたり、火の近くで使用したりしないでください。  
本製品の近くや上で可燃性の溶剤を使用しないでください。

電化製品や水に濡れたものの近くで使用しないでください。



製品を分解したり修理しようとしたりしないでください。製品の点検や修理は販売代理店に連絡をしてください。

### 保管と移動



輸送や保管の際には、人身事故や製品の損傷を防ぐために、必ず適切な梱包と固定を行ってください。

## TAKE A LOOK AT OUR VIDEO

VISIT THE WEBSITE  
[limbsandthings.com](http://limbsandthings.com)

OR YOUTUBE CHANNEL  
[youtube.com/limbsandthings](https://www.youtube.com/limbsandthings)



Part No:265-503

2022年10月 第3版  
© 2022 Limbs & Things

**NLS** 日本ライトサービス株式会社  
Nihon Light Service, Inc.

医学教育機器事業部

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-42-1

03-3815-2354

03-3818-6843

[igaku@nlsinc.co.jp](mailto:igaku@nlsinc.co.jp)

[www.medical-sim.jp](http://www.medical-sim.jp)