



USER GUIDE



乳児股関節検査 トレーナー

142000



インデックス


商品構成	2
セットアップ	3
乳児股関節検査トレーナーの準備 モジュールの変更	4
安全と清掃の手引き	4

商品構成


乳児股関節検査用上半身トルソ




乳児股関節検査 イラストカード

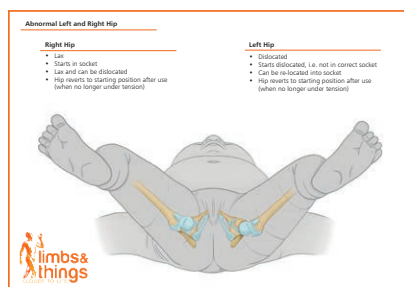

乳児股関節検査用脚部（正常）

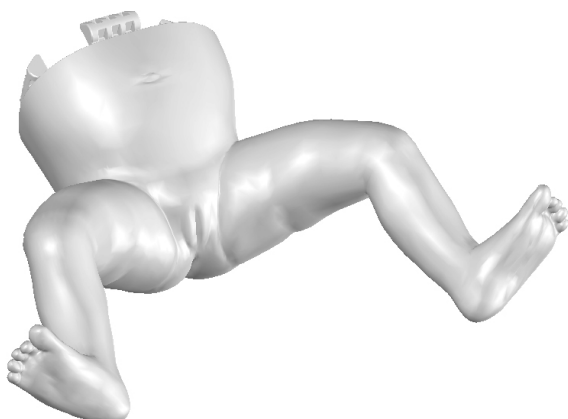


乳児股関節検査用脚部（異常）

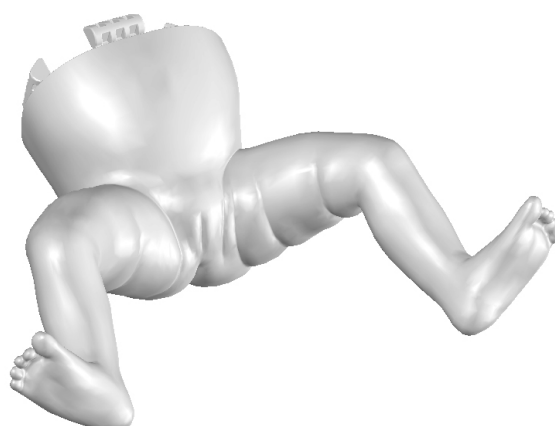

セットアップ



乳児股関節検査トレーナーの準備

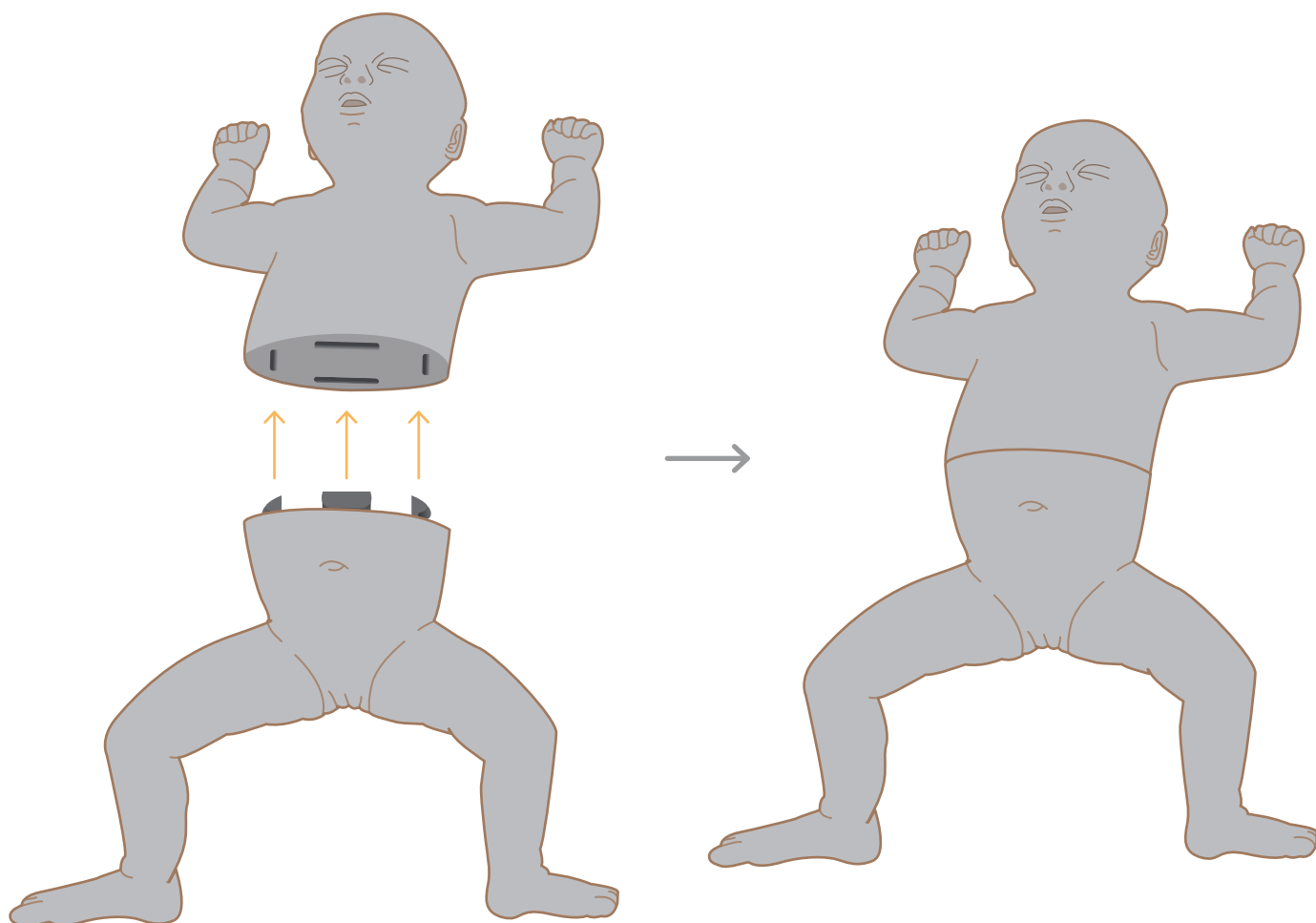

モジュールの変更



脚部の正常／異常を選択し、
上半身トルソに装着します。

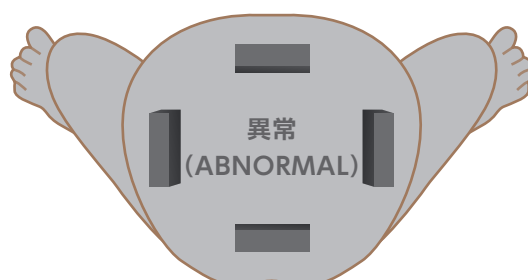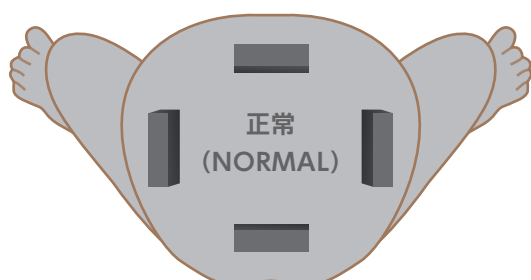

安全と清掃の 手引き

幼児股関節検査トレーナーを使用する前に
この安全の手引きを確認してください。

DO's



このガイドのすべての指示に従ってください。
このガイドは大切に保管してください。
すべての警告に注意してください。

メーカー指定のアタッチメント／アクセサリのみ使用してください。



すべての整備は、資格を持つサービス担当者に依頼してください。損傷した場合は、修理が必要です。

常に手袋を着用し、貴金属はすべて外してください。爪や指輪などの鋭利な表面は、製品損傷の原因となります。



使用後は、柔らかい布やスポンジを中性洗剤を混ぜたお湯につけ、しっかり絞った後、やさしく拭いてください。



DON'Ts

脚を90度以上外転させないでください。



熱源の近くに設置したり、炎にさらしたり、火の近くで使用したりしないでください。
本製品の近くや上で可燃性の溶剤を使用しないでください。

電化製品や水に濡れたものの近くで使用しないでください。



製品を分解したり修理しようとしたりしないでください。製品の点検や修理は販売代理店に連絡をしてください。

保管と移動



輸送や保管の際には、人身事故や製品の損傷を防ぐために、必ず適切な梱包と固定を行ってください。

TAKE A LOOK AT OUR VIDEO

VISIT THE WEBSITE
limbsandthings.com

OR YOUTUBE CHANNEL
[youtube.com/limbsandthings](https://www.youtube.com/limbsandthings)



Part No:265-503

2022年10月 第3版
© 2022 Limbs & Things

NLS 日本ライトサービス株式会社
Nihon Light Service, Inc.

医学教育機器事業部

〒113-0033 東京都文京区本郷 2-3-9 ツインビュー御茶の水 2F

☎ 03-3815-2354

📠 03-3818-6843

✉ igaku@nlsinc.co.jp

🌐 www.medical-sim.jp