



USER GUIDE




男性導尿トレーナー

品番: 160850

商品構成	3
安全と清掃の手引き	4
セットアップ	5
• 本体フレームを設置する	5
• 包皮を取り付ける	6
• 給水システムを組み立てる	7
• 使用後に排水する	9
• 洗浄後に組み立てる	10

TAKE A LOOK
AT OUR VIDEO

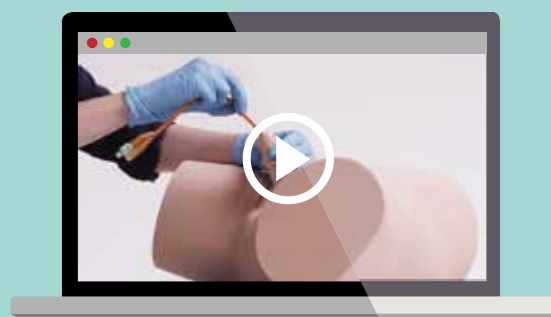

VISIT THE WEBSITE
limbsandthings.com

OR YOUTUBE CHANNEL
youtube.com/limbsandthings

商品構成

男性導尿モジュール

160855




給水システム

160893



本体フレームとスタンド

160864

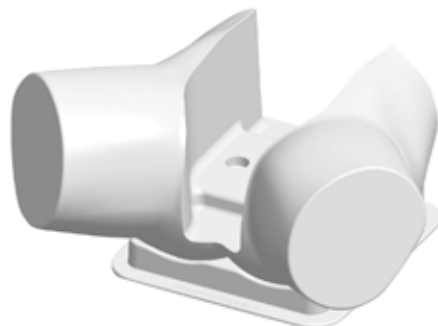

男性導尿用包皮（3個入）

160859




カテーテル無菌包装用スリーブ（2枚入）

160862



潤滑剤（導尿用）

160892

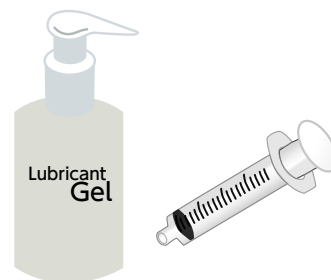

抗菌剤


150185



膿盆（プラスチック製）




14Fr フォーリーカテーテル

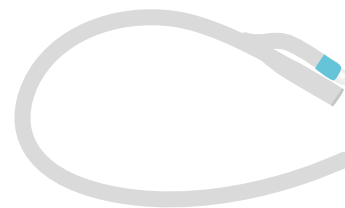

給排水延長チューブ


160867

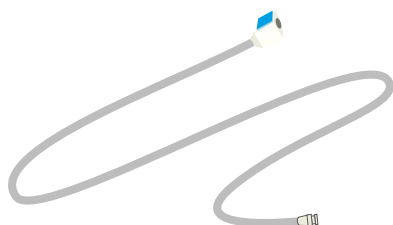

ARTマット（導尿トレーナー用）

160131

※別冊ガイド参照
（折り曲げ厳禁）

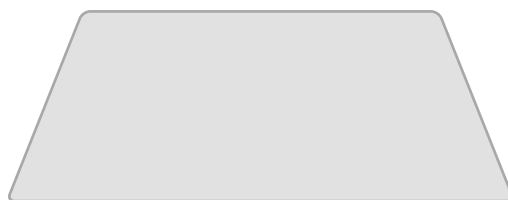

安全と清掃の手引き

導尿トレーナーを使用される前に、この安全の手引きを確認してください

DO's



このガイドのすべての指示に従ってください。
このガイドは保管をしてください。すべての警告に注意してください。

製造元から供給されるアタッチメントと
消耗品だけ使用してください。



資格を有したサービス担当者にすべてのサービス
を依頼してください。損傷した場合は、整備
が必要です。

常にグローブをつけ、指輪などの貴金属は
つけないでください。ネイルなど鋭利なものは、
モデル損傷の原因となります。



カテーテルを挿入するときは潤滑剤を使用して
下さい。

指定の抗菌剤（ミルトン）を使用してく
ださい。



14Frのフォーリーカテーテルを使用してく
ださい。

使用後は、柔らかい布やスポンジを中性
洗剤を混ぜたお湯につけ、しっかり絞っ
た後、やさしく拭いてください。



DON'Ts



熱源の近くに設置したり、炎にさらしたり、
火の近くで使用したりしないでください。
本製品の近くまたは上で可燃性の溶剤を使用
しないでください。

本品を電気製品や水による損傷のあるものの
近くに設置しないでください。



カテーテルを挿入したままにしないでくださ
い。変形が生じ、本来の性能が損なわれます。

バルーンが膨らんだままカテーテルを抜去し
ないでください。



麻酔ジェルを使用しないでください。付属の疑
似ジェル（水性潤滑剤）を使用してください。

お客様のもとでの製品の分解や修理を禁止しま
す。販売店から製造元に依頼をしてください。



水が入ったまま製品を長時間放置しないでくだ
さい。使用後は解体し清掃を行ってください。

STORAGE & TRANSPORTATION




ケガや製品損傷を防ぐため、輸送中や保管中
に製品が適切に梱包、固定されていることを
常に確認してください。


セットアップ

本体フレームを設置する

1

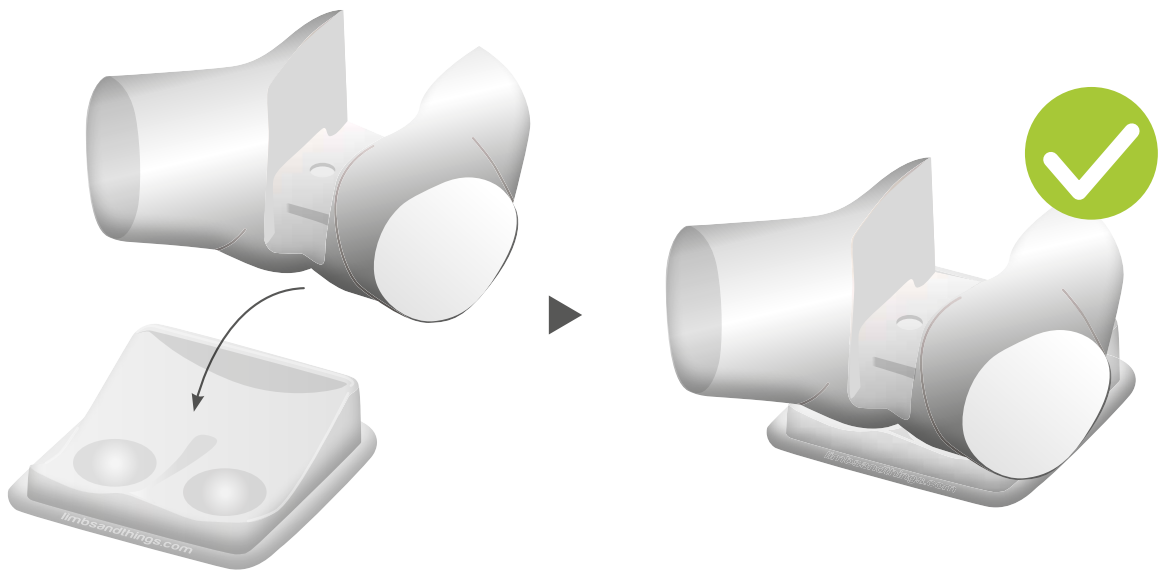


2

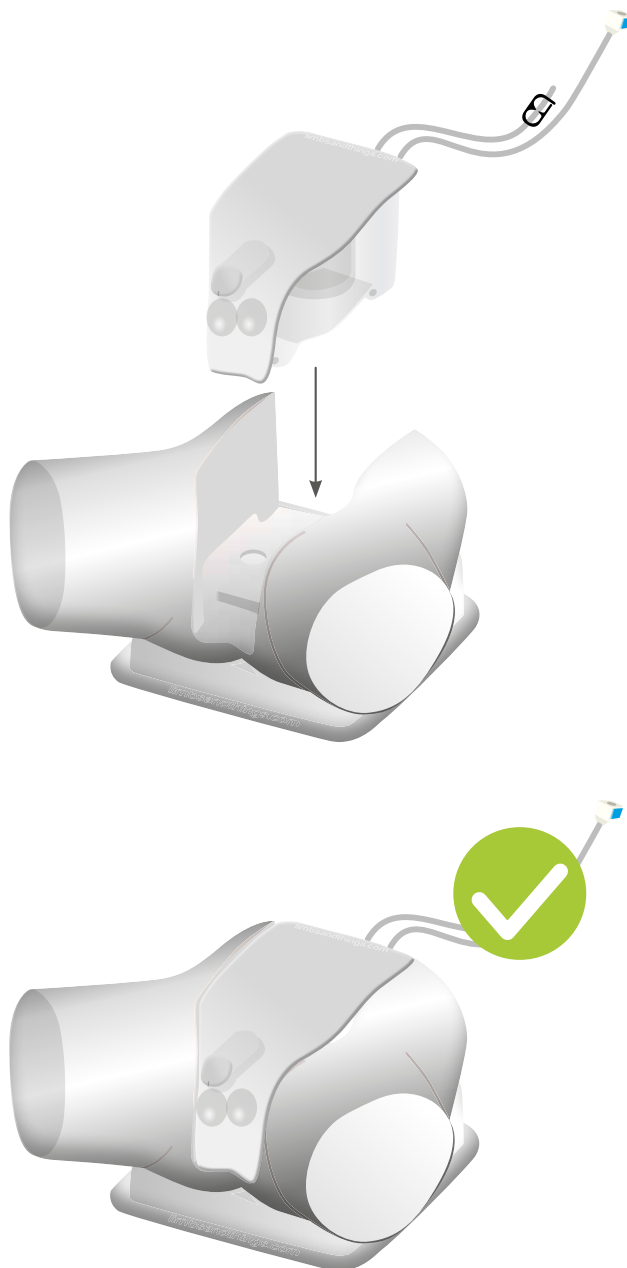


セットアップ

包皮を取り付ける


1

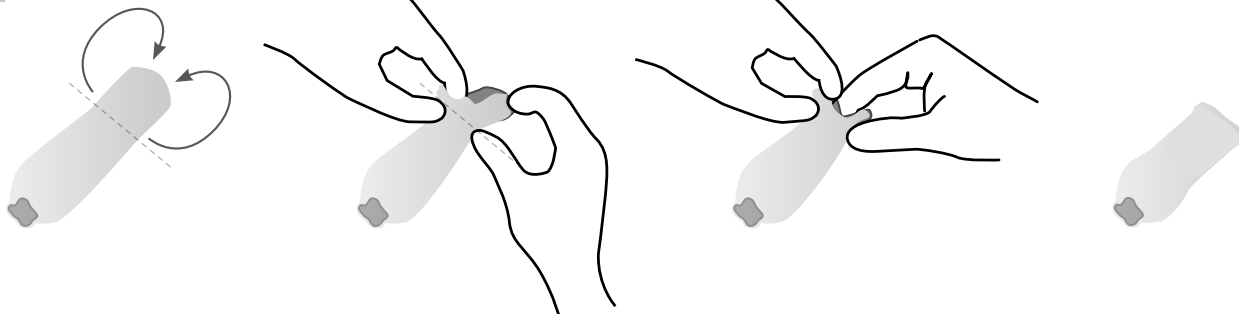

2





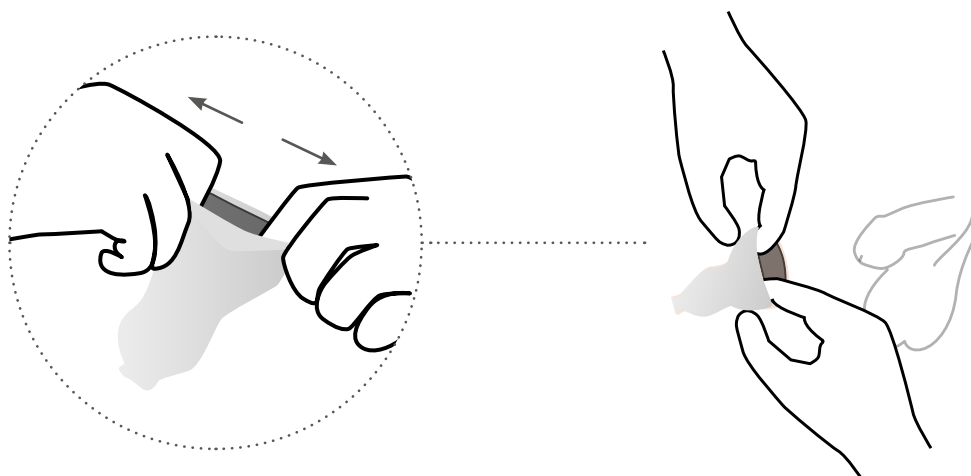


3

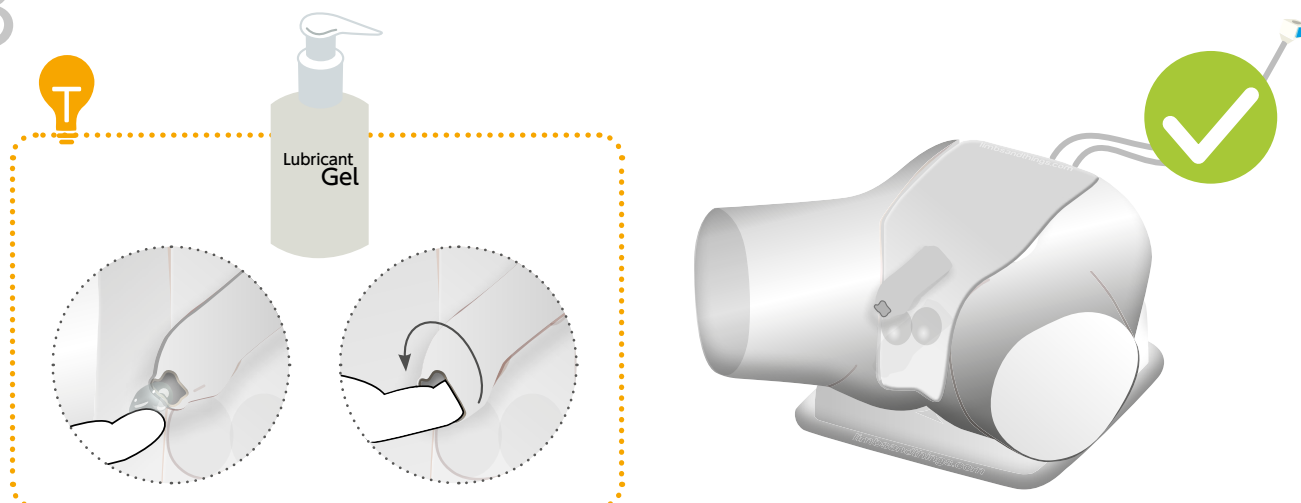

セットアップ

給水システムを組み立てる

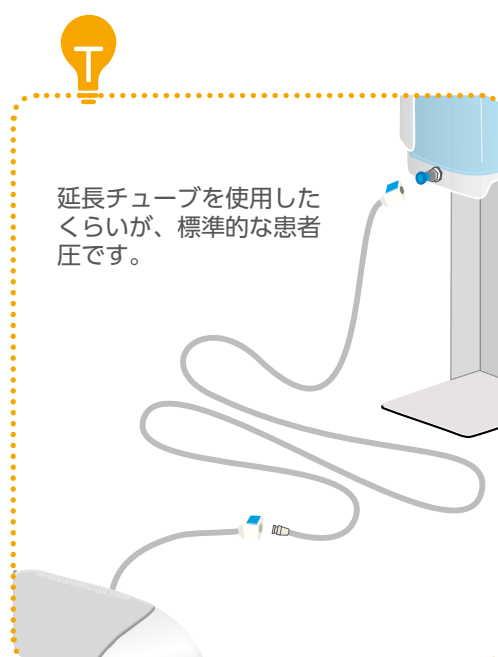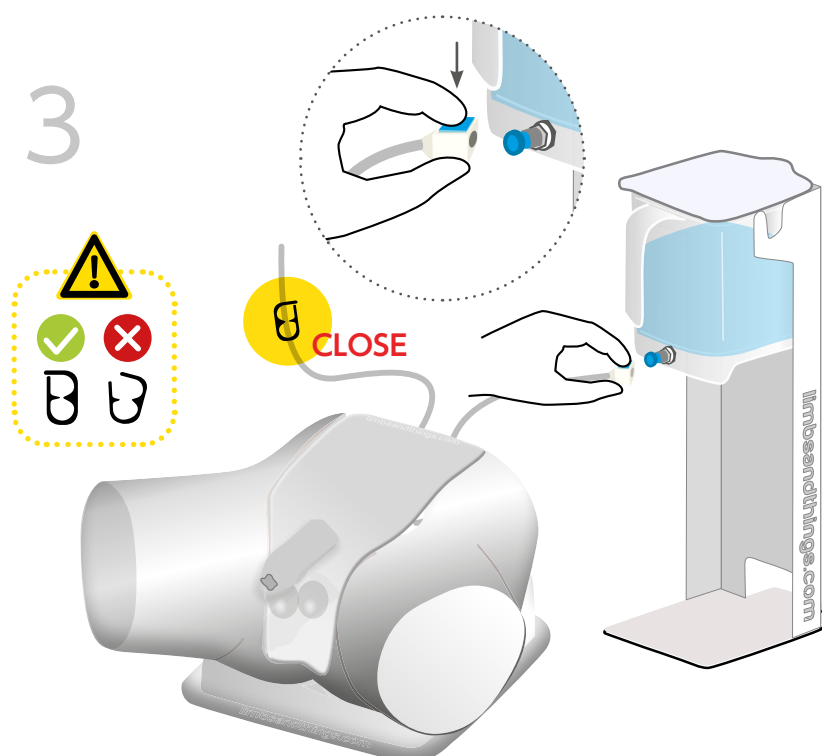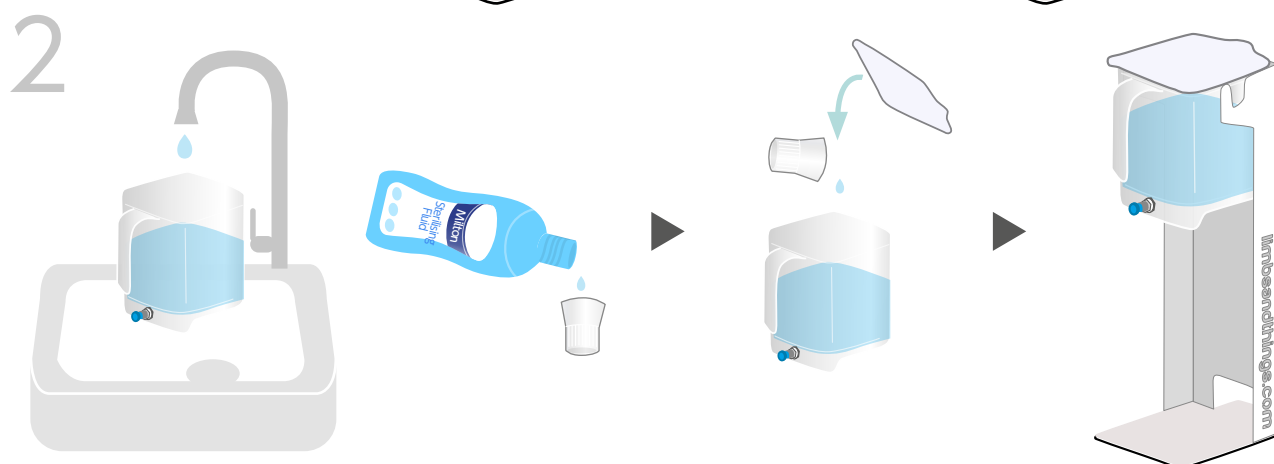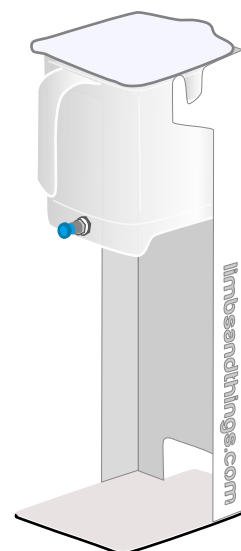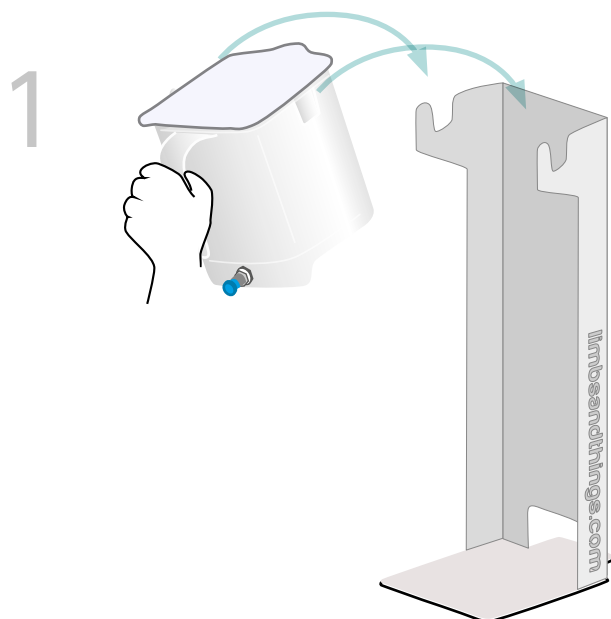



セットアップ

給水システムを組み立てる



4



OPEN

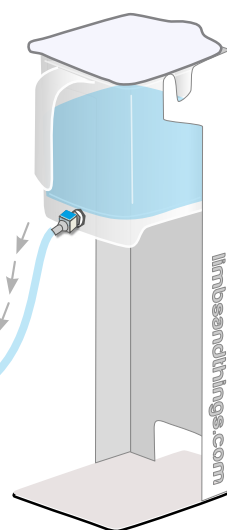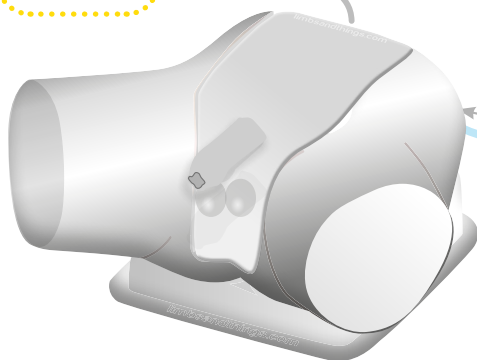



5

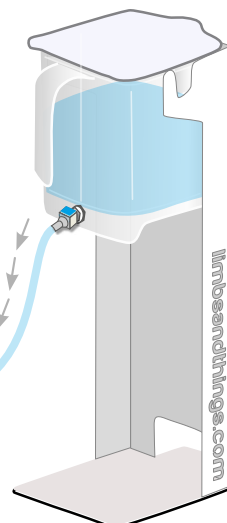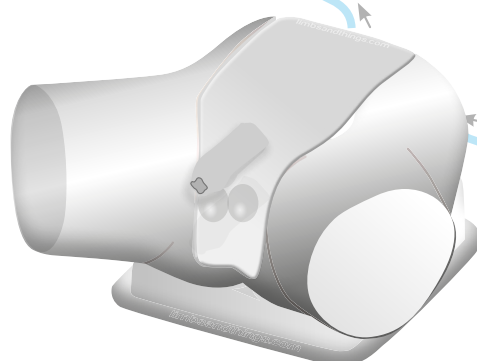

6



CLOSE

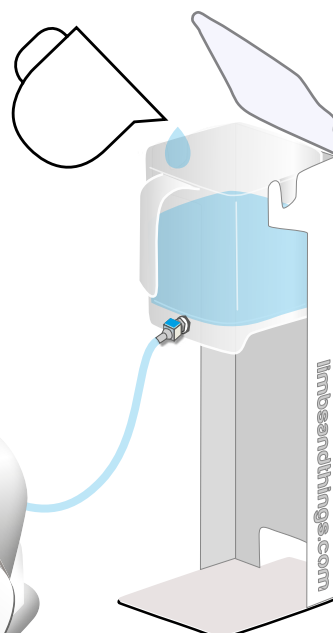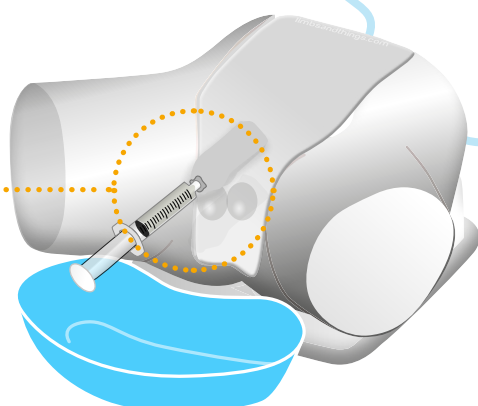

給水タンクに水を
補充します。




使用前に10ml 注入
手技ごとに5~10ml 注入




セットアップ

使用後に排水する

1

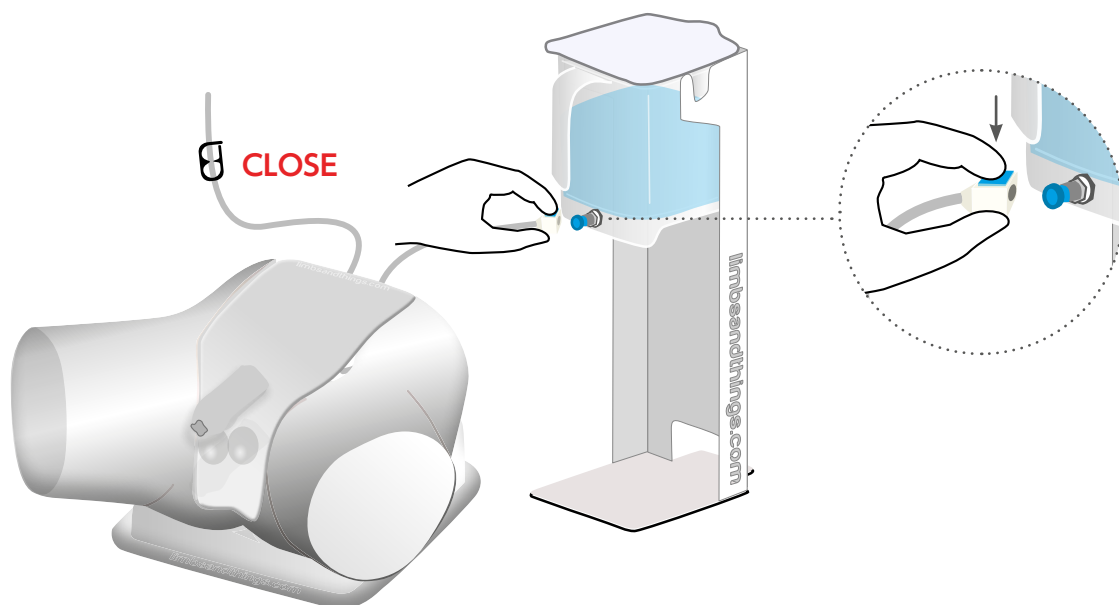

2

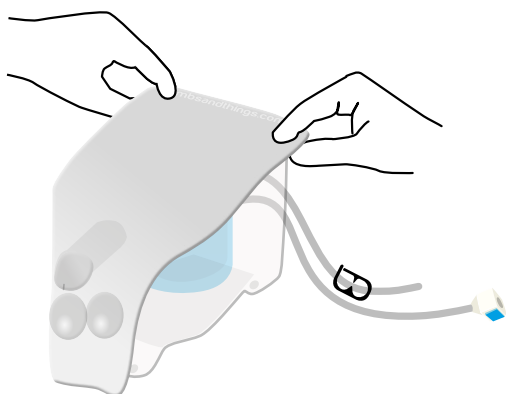


3



4





乾いた布でパーツの水分を完全に拭き取ってから、組み立てます。

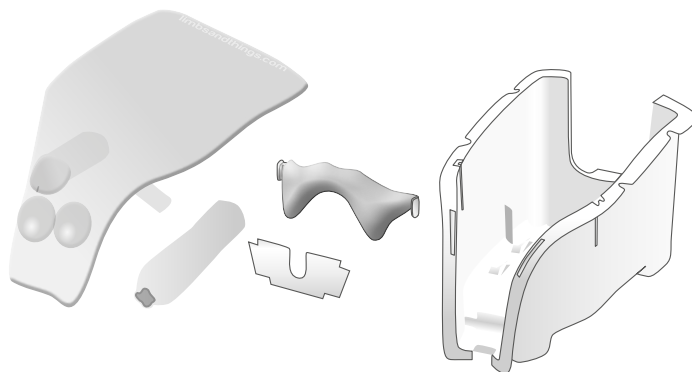

セットアップ

洗浄後に組み立てる

1

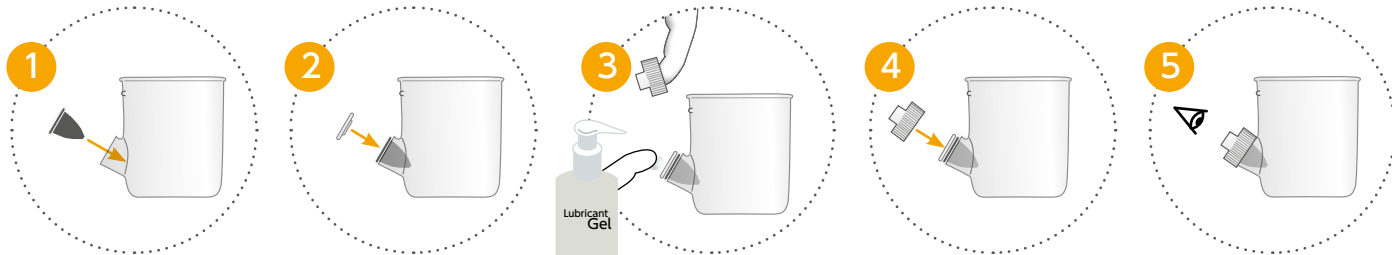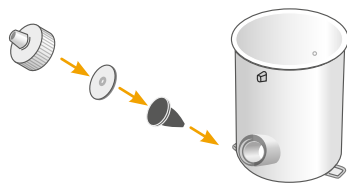


キャップを取り付ける前に
潤滑剤を注入してください。


隙間がないように
(ずれていない)



2

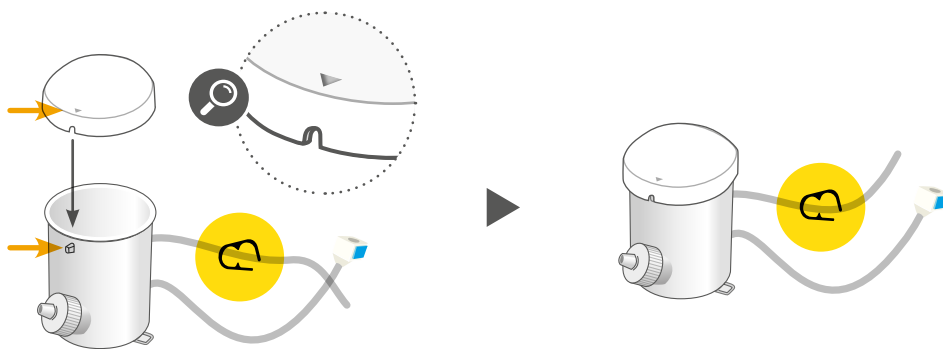


3

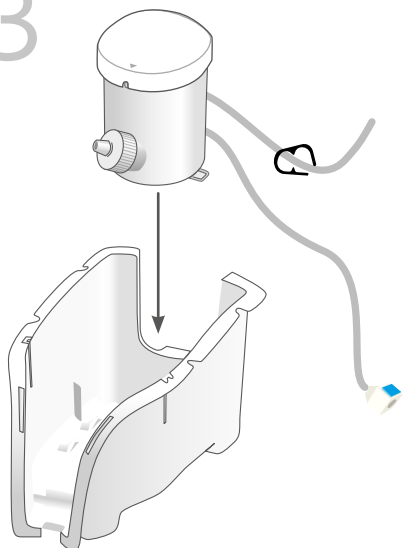


男性導尿モジュールは後方の
スリットで取りつけます。


※前方は女性モジュール専用

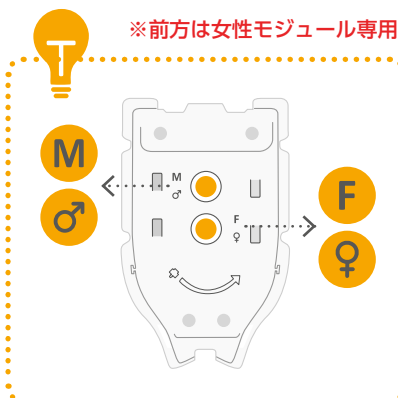


反時計回り：固定する
時計回り：取り外し

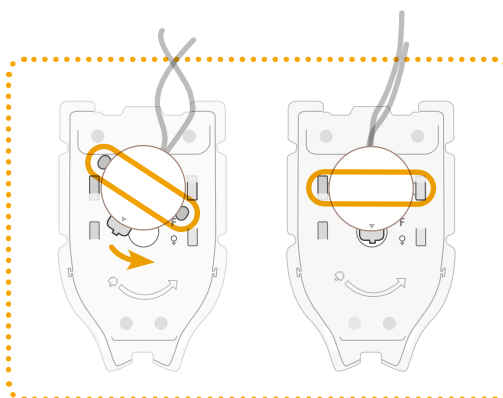


4

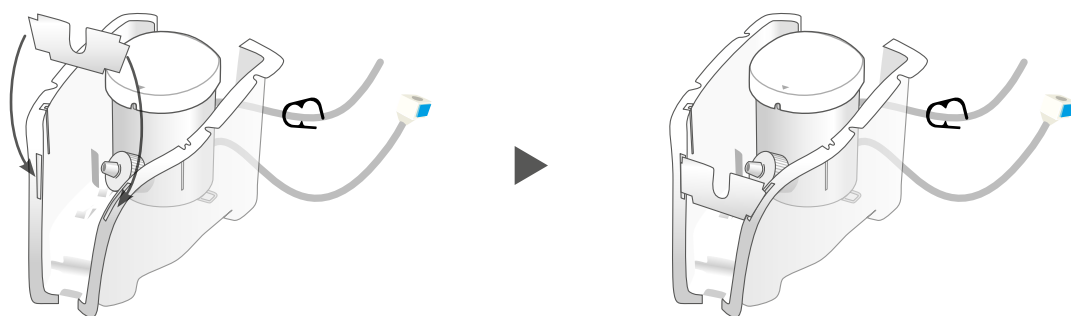


5

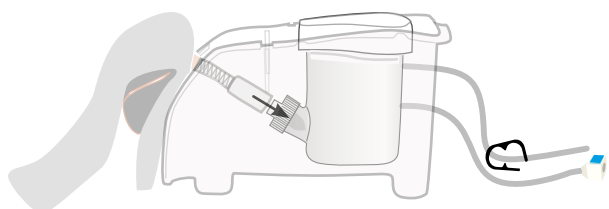

6

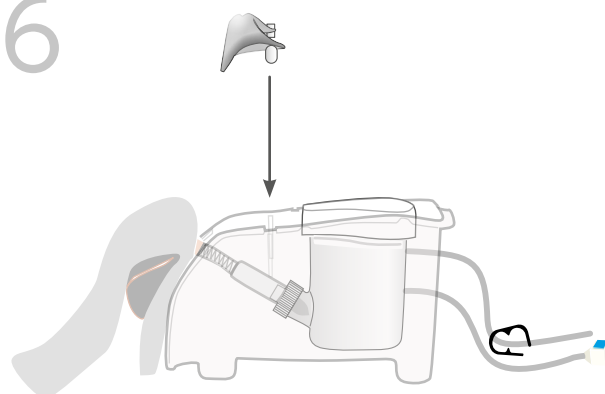

7

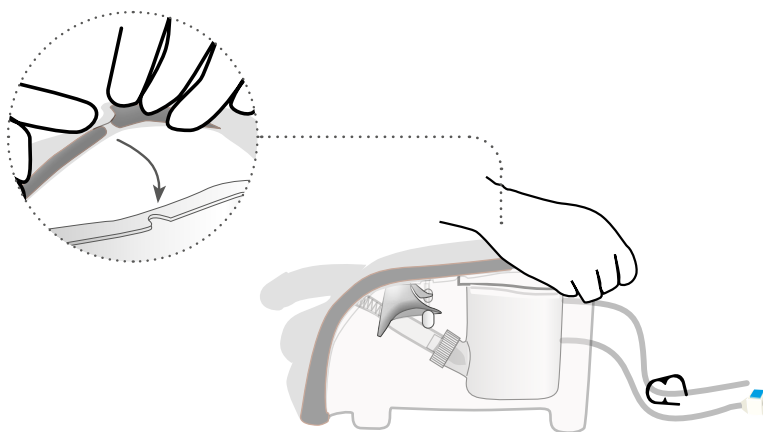

YOU MAY
ALSO BE
INTERESTED IN...


女性導尿トレーナー

160851



エコーガイド膀胱留置
カテーテル挿入トレーナー

160852

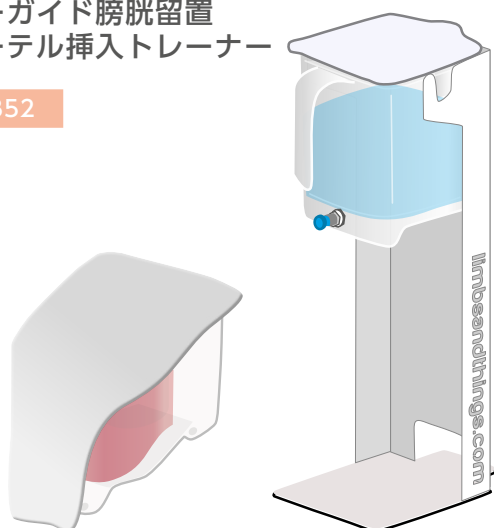

キャリーケース（中）

140209

