



USER GUIDE



直腸診察トレーナー アドバンス

品番:160171



インデックス

商品構成	3
安全と清掃の手引き	4
セットアップ	5
• スタンドにセッティングする	5
• 会陰を取りつける / 取り替える	6
• 前立腺を取りつける / 取り替える	8
• 診察用糞便を取りつける	9
トレーニング	10
• 直腸を診察する	10
• 肛門の圧を評価する	10
使用後の清掃と保管	11

TAKE A LOOK
AT OUR VIDEO



VISIT THE WEBSITE
limbsandthings.com
OR
YOUTUBE CHANNEL
youtube.com/limbsandthings

商品構成

160177 本体(臀部)



160173 イラストレーション パック



160174 スタンド(左側臥位)



160175 会陰(正常)



160176 会陰(病変)



100293 水性潤滑剤



160178 前立腺・診察用便せつ

160179 前立腺(正常)



160180 前立腺(片側性良性肥大)



160181 前立腺(両側性良性肥大)



160182 前立腺(片側がん)



160183 前立腺(両側がん)



160184 診察用糞便



安全と清掃の 手 引 き

シミュレーターを使用される前に、この安全の手引きを確認してください

DO's



- このガイドのすべての指示に従い厳守してください。
- すべての警告に注意してください。

- 水性潤滑剤を使用してください。非推奨材料は、材質のシリコンゴにダメージを与え、強度の低下を招きます。



- 常にグローブをつけ、指輪などの貴金属はつけない。ネイルなど鋭利なものは、モデル損傷の原因となります。

- 直腸への触診する前に、潤滑剤を検査指に塗布してください。



- 使用後は柔らかい布やスポンジを、中性洗剤を混ぜたお湯につけ、しっかり絞った後、やさしく拭いてください。
- 余分な潤滑剤や浣腸、クリームなどは製品を劣化させるため、しっかりと拭きます。

STORAGE & TRANSPORTATION



- ケガや製品損傷を防ぐため、輸送中や保管中に製品が適切に梱包、固定されていることを常に確認してください。

DON'Ts



- 熱源の近くに設置したり、炎にさらしたり、火の近くで使用したりしないでください。
- 本製品の近または上で可燃性の溶剤を使用しないでください。

- 製造元から供給されるアタッチメント以外は使用しないでください。



- 指に異物（貴金属、ネイルなど）をつけて使用しないでください。
- 直腸内には指や実際の直腸薬以外のものは挿入しないでください。

- 力を加えずすぎない。過剰な加圧は控えてください。



- スキンパーツ（ゴム）に割けている場合は使用しないでください。

- お客様のもとでの製品の分解や修理を禁止します。販売店から製造元に依頼をしてください。



- 子供の使用を禁止します。


セットアップ

スタンドにセッティングする


左側臥位

付属の160174_左側臥位スタンドをつかう

1

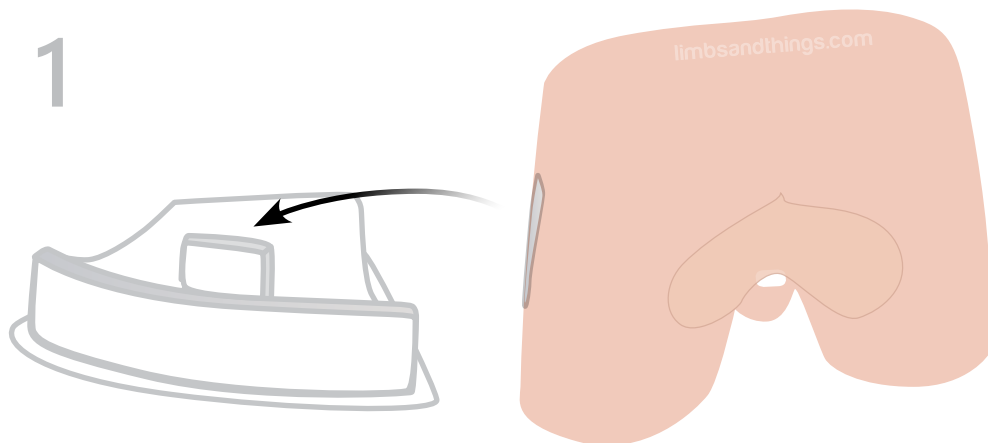


2

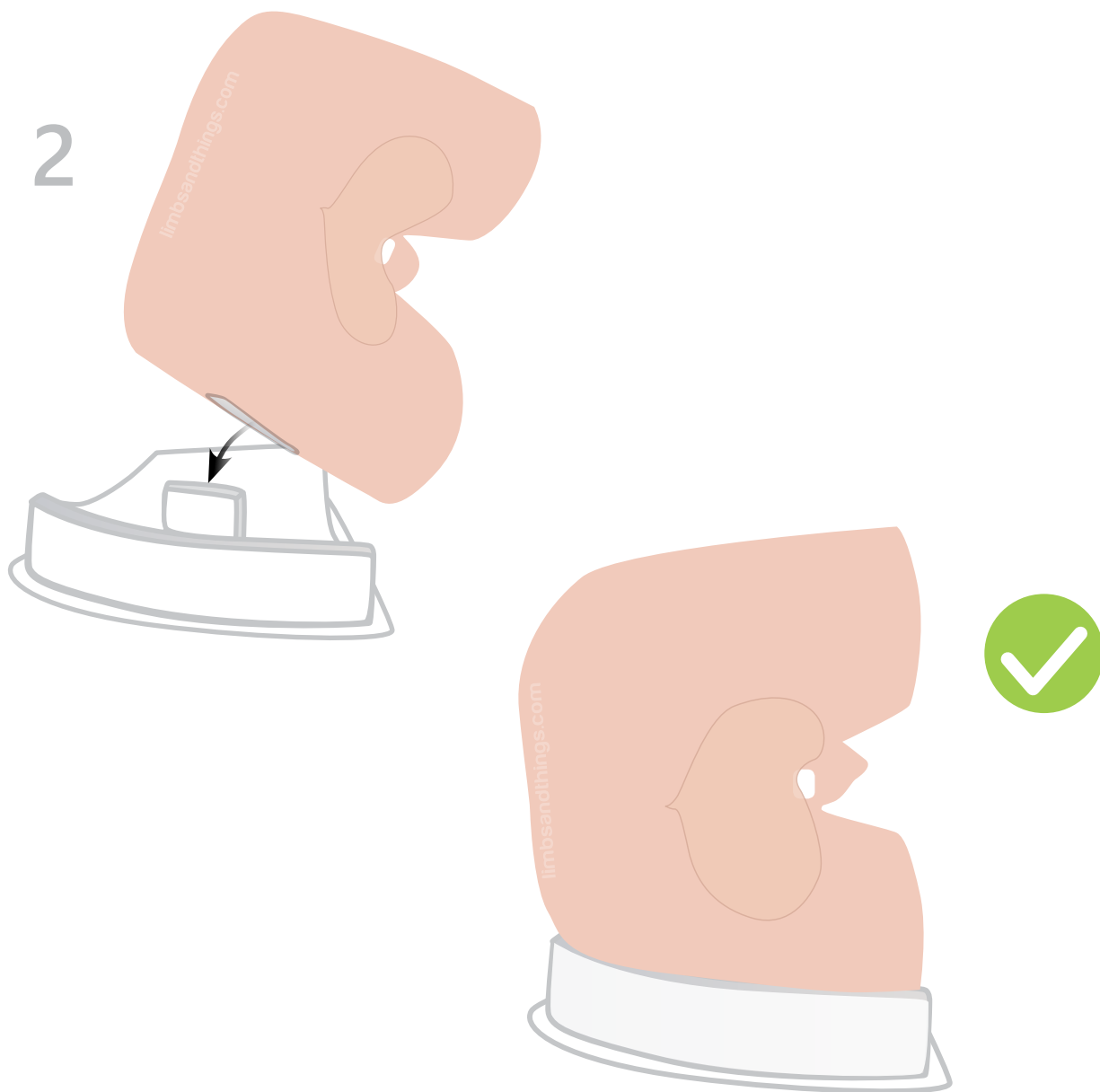


セットアップ

会陰を取りつける / 取り替える


取りはずし

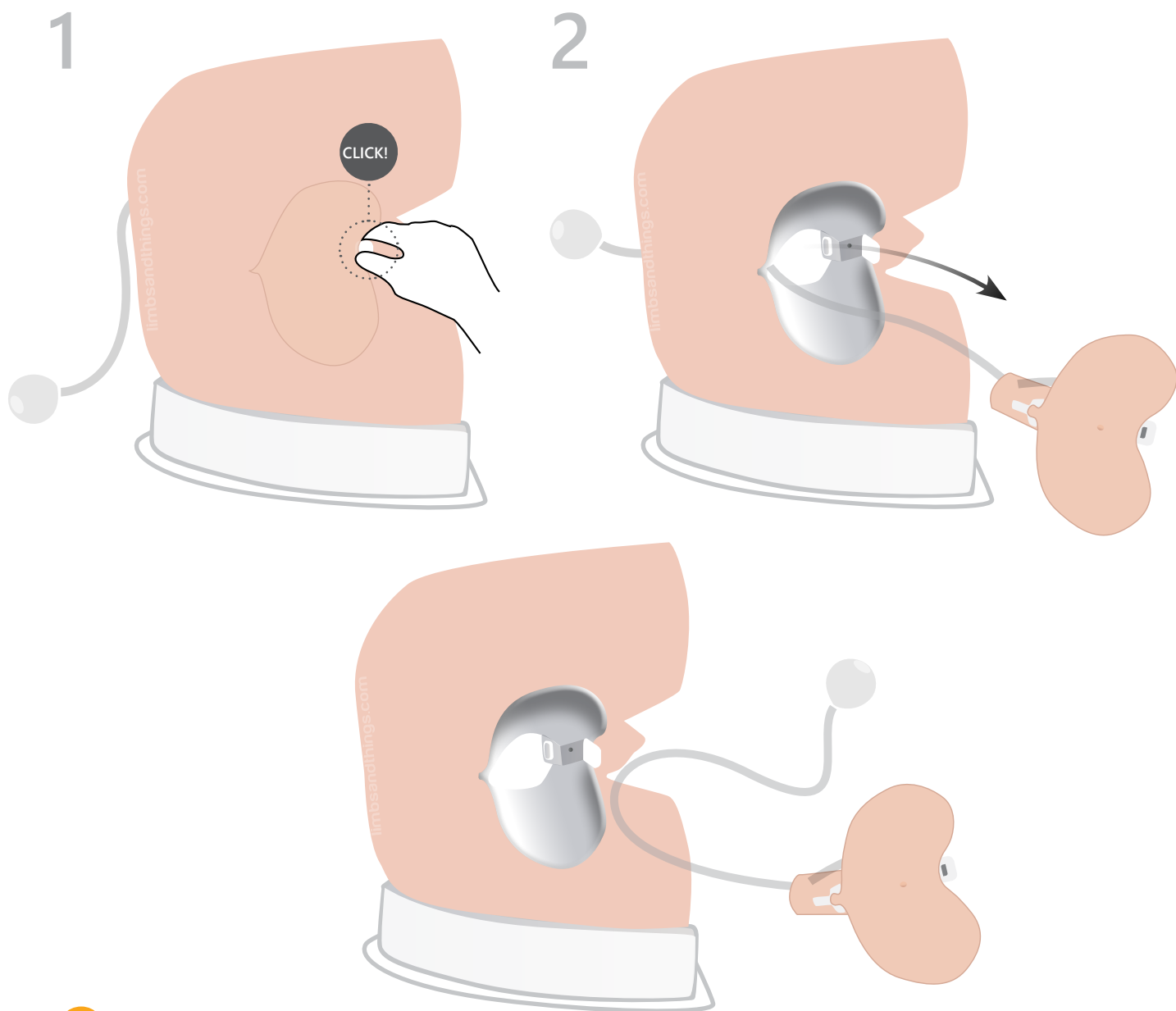

160176 会陰(病変)は、内壁にがんとポリープを触れることができます。

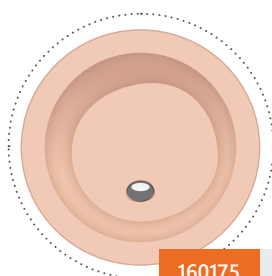

160175 正常

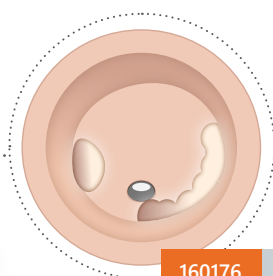


160176 病変




セットアップ

取り付け


1

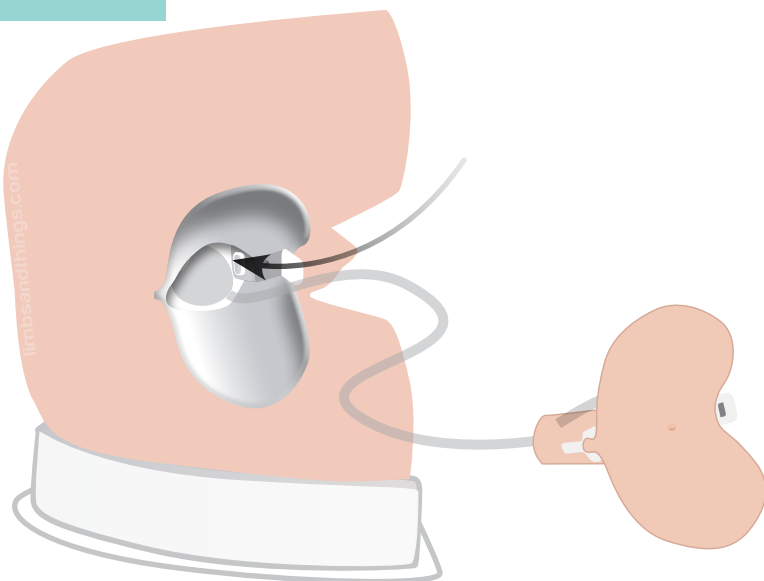



2

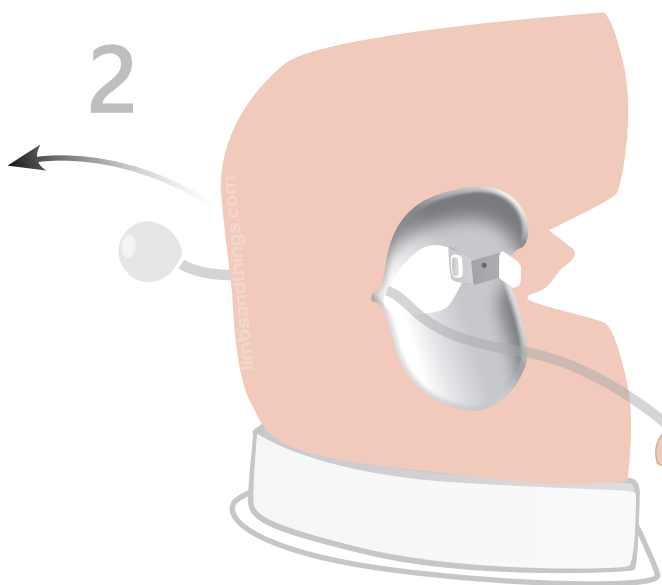

3

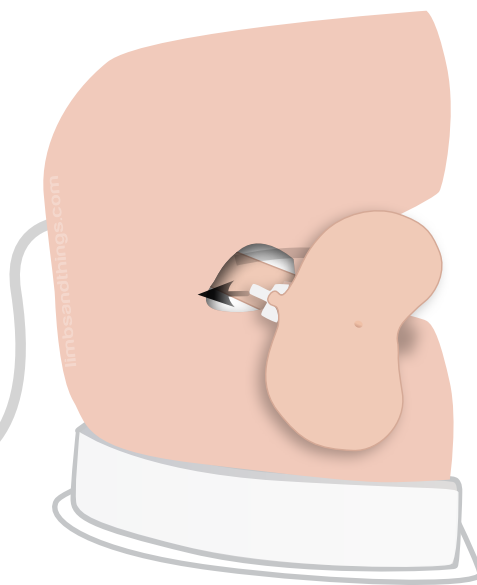

4

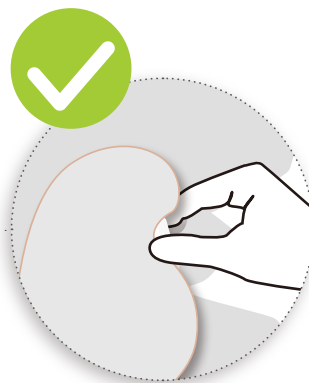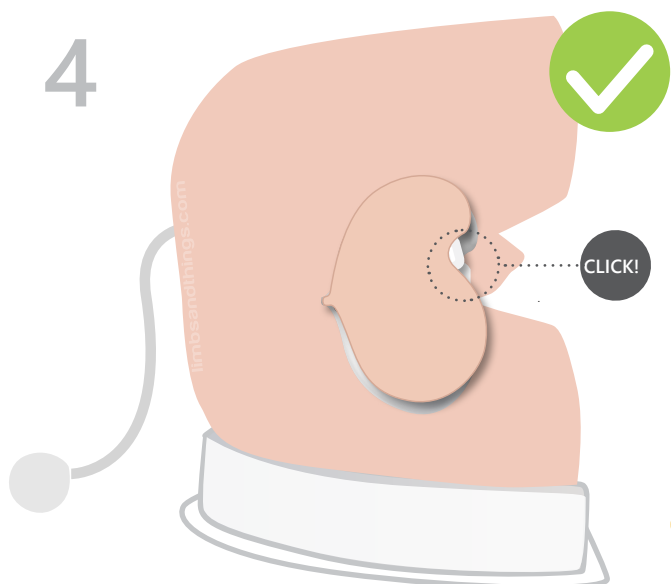




会陰部をフィットさせるには、必ず
白いタブを使用してください。



会陰部外縁部を押さないでください。


セットアップ

前立腺を取りつける / 取り替える

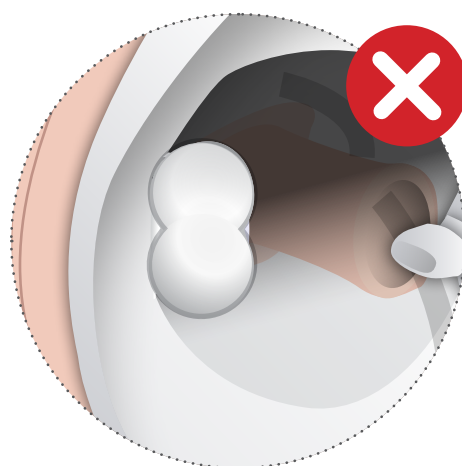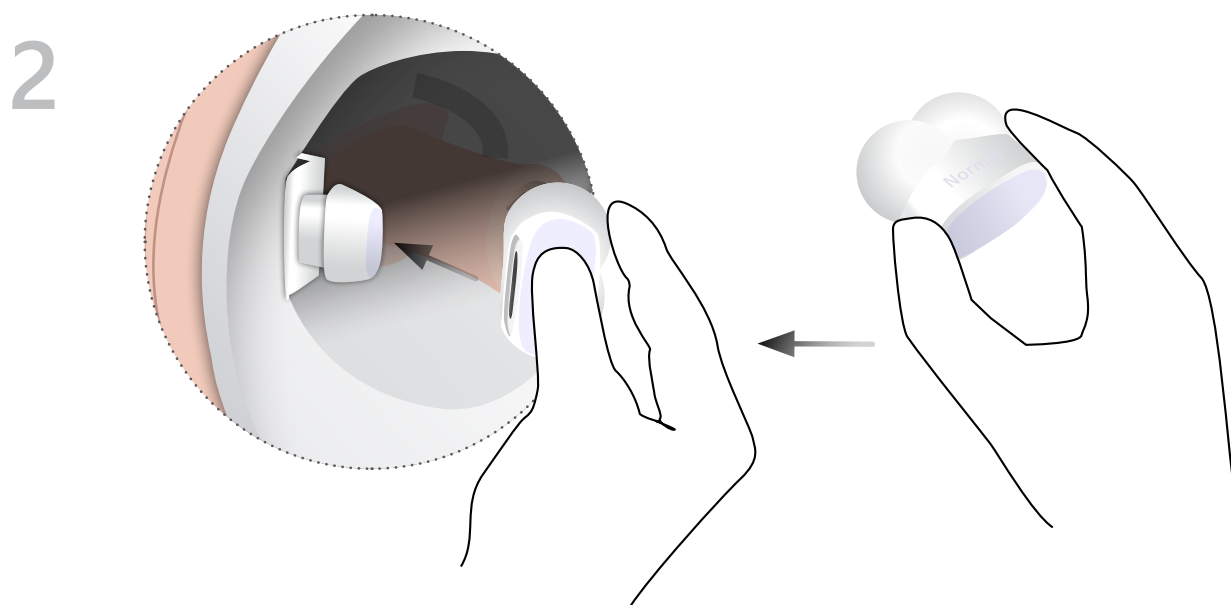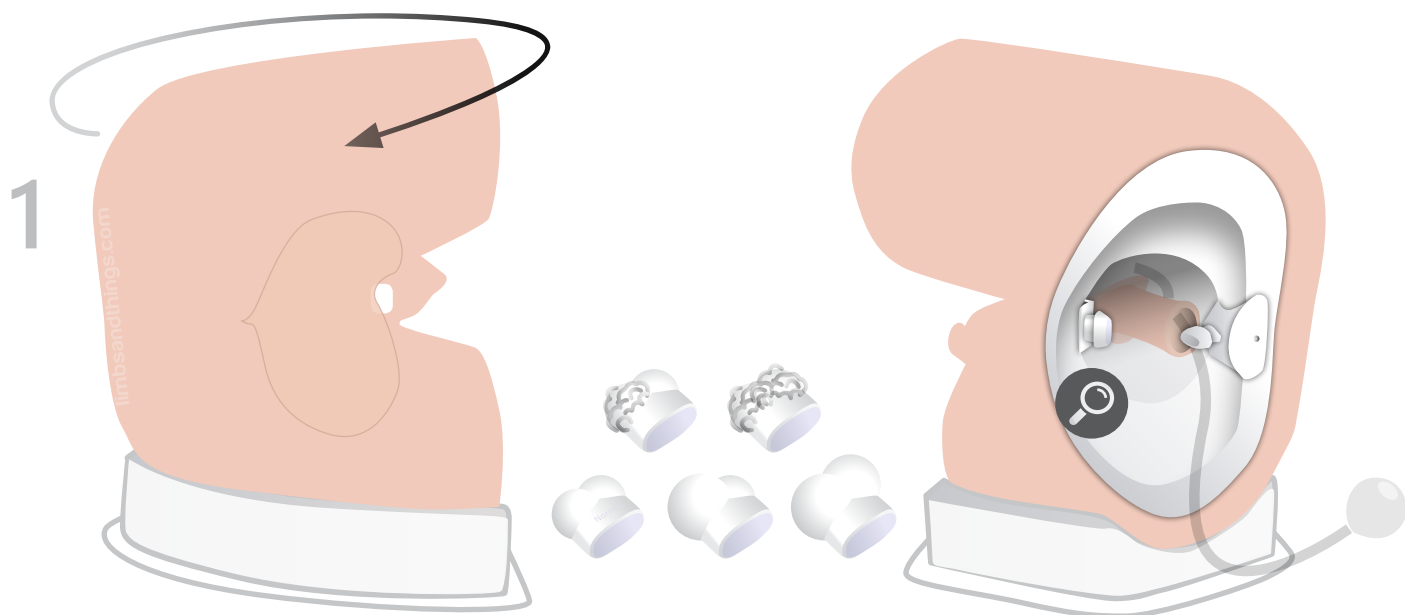


セットアップ



診察用糞便を取りつける

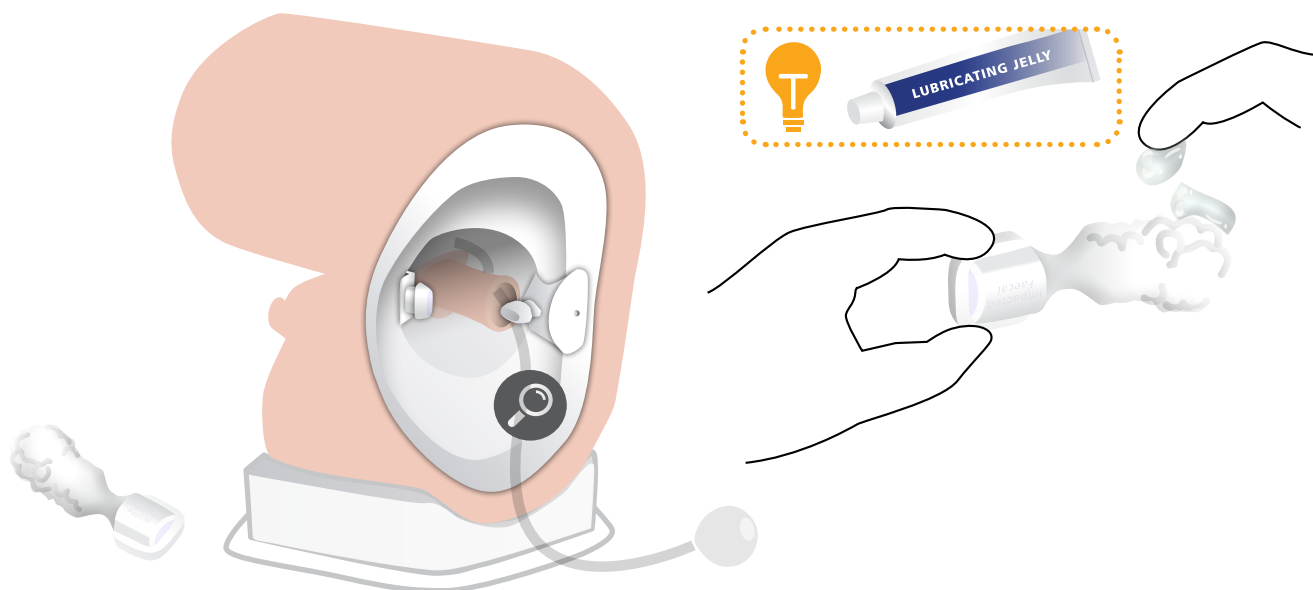

1

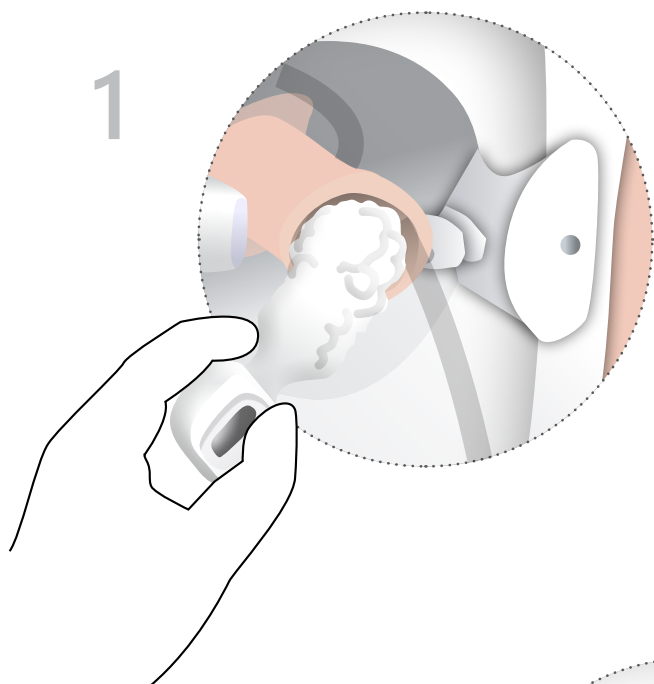


2

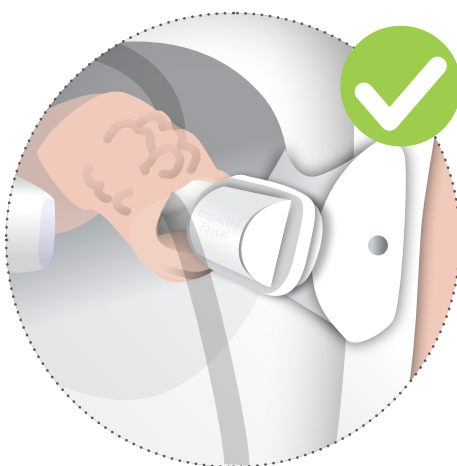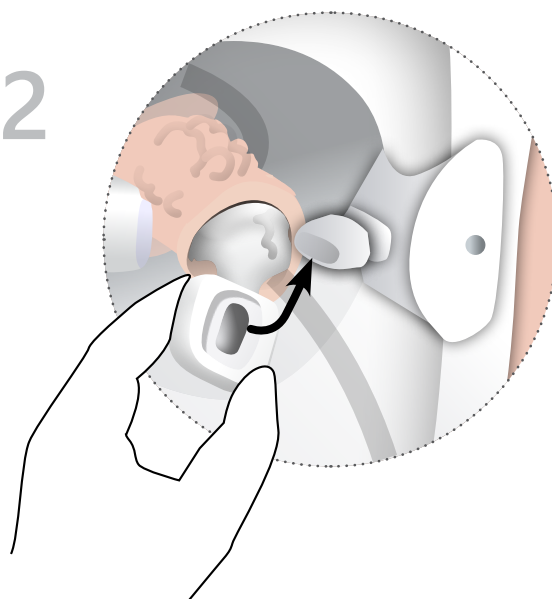

トレーニング

直腸を診察する

- 常にグローブをつけ、指輪などの貴金属はつけないようにします。また、ネイルなど鋭利なものは、モデルを損傷しますので、避けてください。
- 直腸の診察の前に、診察する指に潤滑剤をつけるようにします。

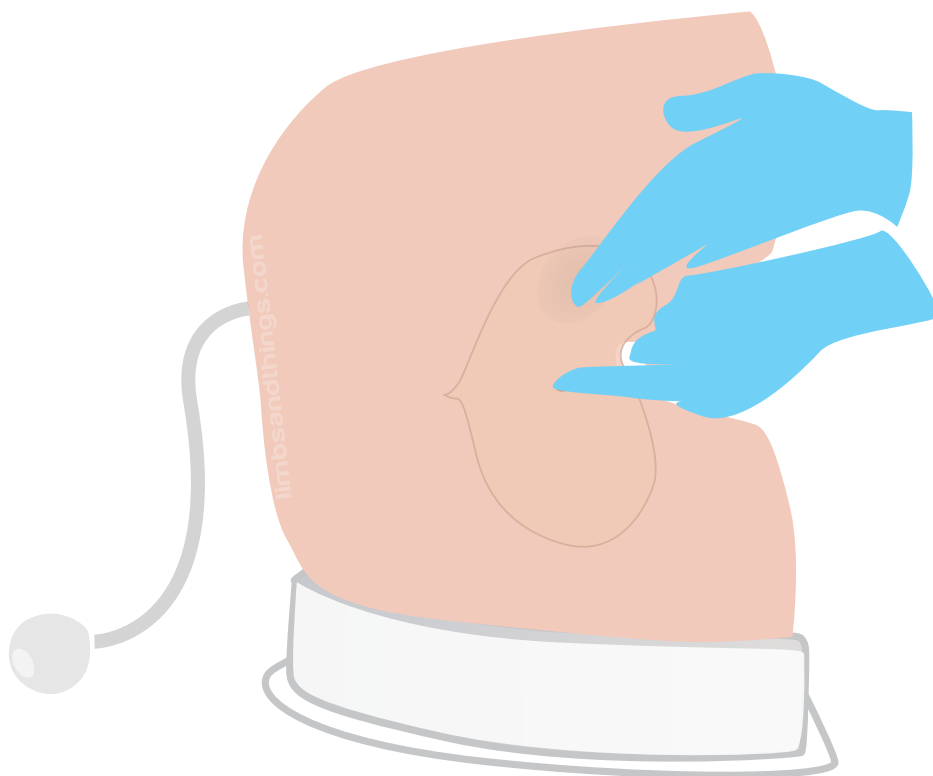


肛門の圧を評価する

診察をしている指に、グリップ感を得ることができます。




過剰な加圧は
行わない

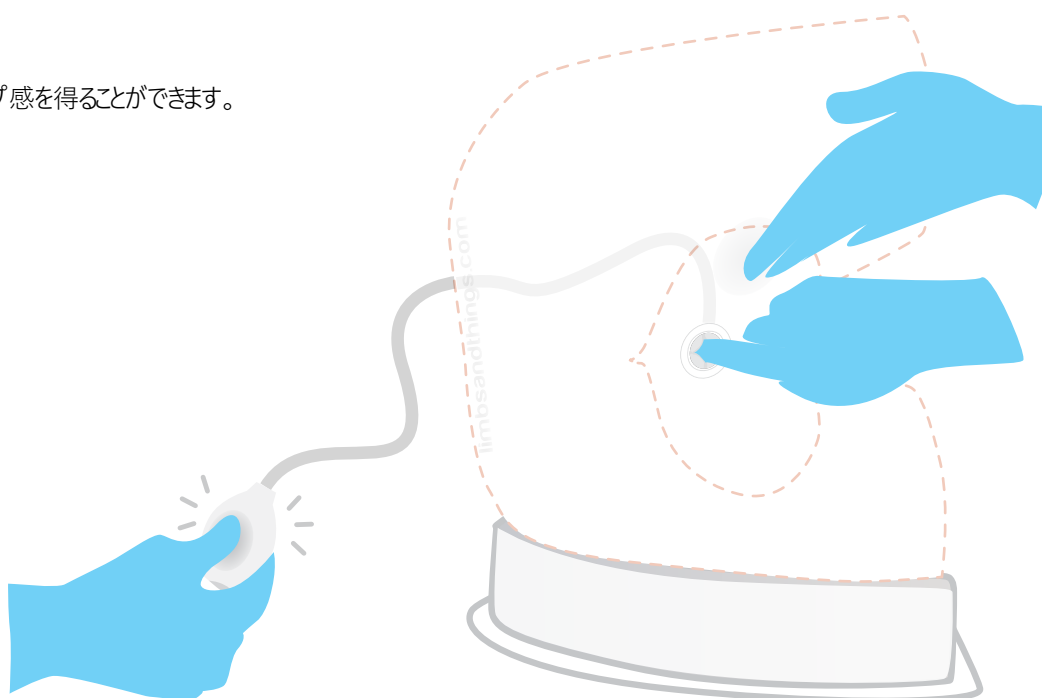

トレーニング

肛門の圧を評価する

ポンプを握ることで、括約筋の収縮と肛門の緊張度の評価を行います。

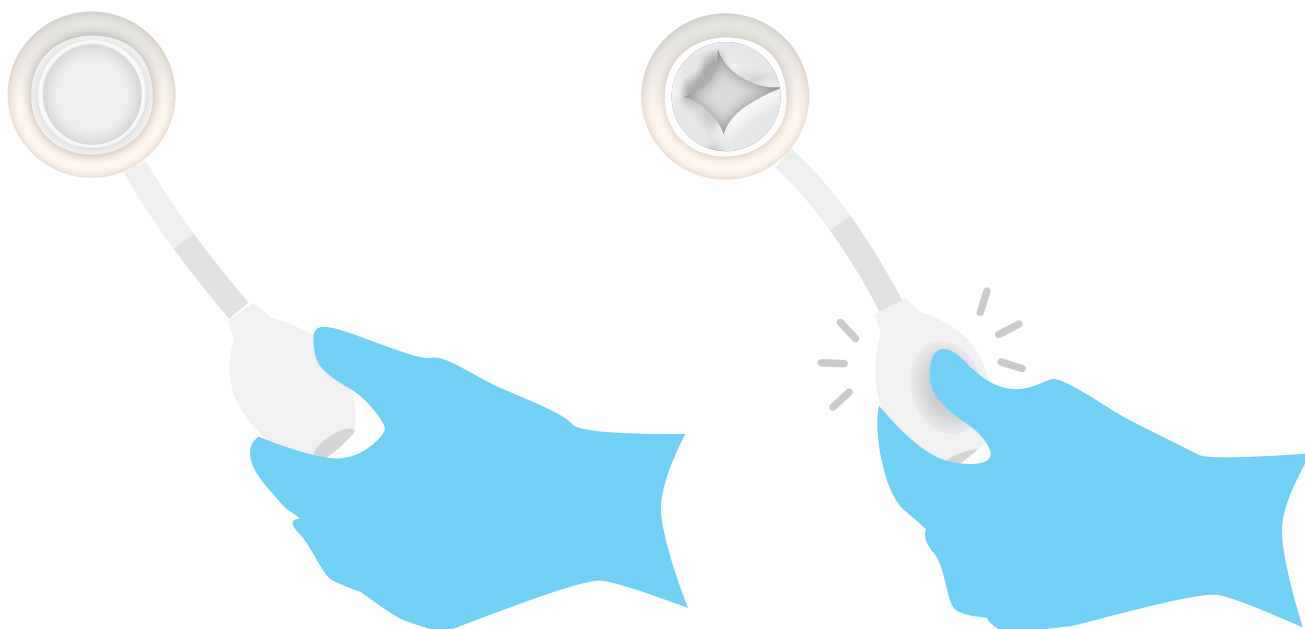

使用後の 清掃と保管


- 柔らかな布で潤滑剤をきれいに拭きとめます。
- 表面の汚れは、中性洗剤をいれたお湯と柔らかな布を使い拭きとめます。



**YOU MAY
ALSO BE
INTERESTED IN...**

160172 直腸診察トレーナー用スタンド(伏臥位)

半立位 (Semi-Standing Position)

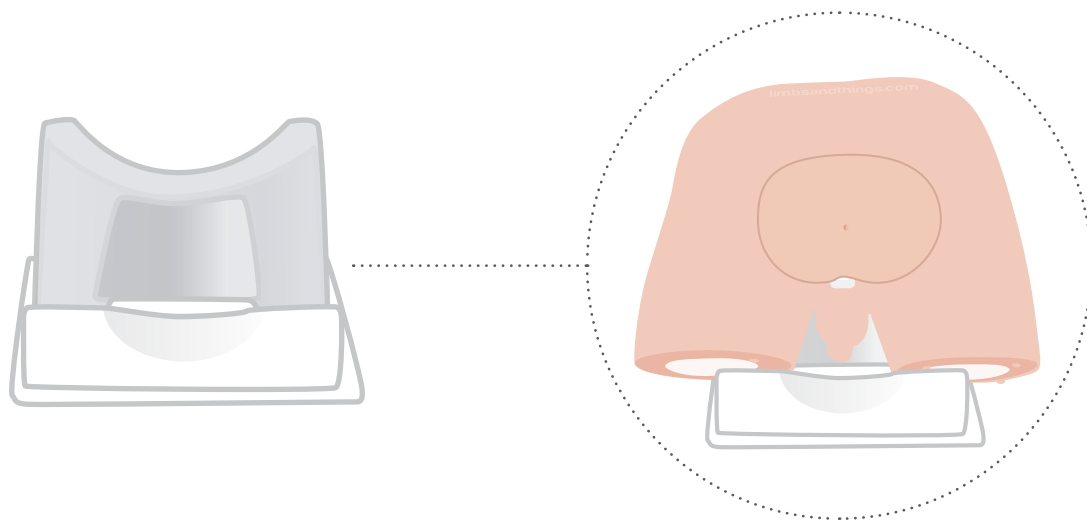

140209 キャリーケース(中)



Part No: 165-022
2018年12月, 第1版
© 2018 Limbs & Things

NLS 日本ライトサービス株式会社
Nihon Light Service, Inc.

医学教育機器事業部

〒113-0033 東京都文京区本郷 2-3-9 ツインビュー御茶の水2F

☎ 03-3815-2354

☎ 03-3818-6843

✉ igaku@nlsinc.co.jp

🌐 www.medical-sim.jp