



USER GUIDE



PROMPT Flex

帝王切開 IFH モジュール

品番 : 180300

インデックス

商品構成	3
安全と清掃の手引き	4
セットアップ	5
• PROMPT Flex 母体の準備	5
– 腹壁を取り外す	
– 骨盤リング、PROMPT Flex 用子宮頸、PROMPT Flex 会陰を取り外す	
• 帝王切開 IFH トレーニングのセットアップ	7
– 骨盤底インサートを取り付ける	
– 帝王切開モジュール用会陰を取り付ける	
– 帝王切開 IFH 用子宮を取り付ける	
– 胎児を子宮内へ入れる	
• 帝王切開（骨盤位娩出※非 IFH）のセットアップ	10
• 帝王切開（横位）のセットアップ	12
清掃と保管	15
• 会陰部の脱着	15

商品構成

内診／帝王切開モジュール用会陰

180138



子宮固定フォーム

180175



帝王切開 IFH 用子宮

180301



骨盤底インサート

180302



帝王切開用子宮（横位）

180170



切開創付き腹部スキン

180303



帝王切開用子宮頸

180173



オプション品

PROMPT Flex 分娩トレーナー
スタンダードセット

180100

PROMPT Flex 分娩トレーナー
アドバンスセット

180106



※ このモジュールを使用するにはPROMPT Flex 胎児が必要です。

安全と清掃の 手引き

PROMPT Flex 帝王切開 IFH モジュールを使用される前に、
この安全の手引きを確認してください。

DO's



- このガイドのすべての指示に従ってください。
- このガイドは大切に保管してください。
- すべての警告に注意してください。

- 常に手袋を着用し、貴金属はすべて外してください。爪や指輪などの鋭利な表面は、製品損傷の原因となります。



- 潤滑剤は PROMPT Flex 用潤滑剤を使用してください。非推奨品の使用はシミュレーターの劣化や損傷の原因となります。

- 潤滑剤は分娩毎に子宮、産道、胎児に塗布してください。



- 使用後は毎回、柔らかい布やスポンジを中性洗剤を混ぜたお湯につけ、しっかり絞った後、やさしく拭いてください。母体と胎児の表面についた余分な潤滑剤をきれいに取り除いてください。

DONT's



- 熱源の近くに設置したり、炎にさらしたり、火の近くで使用したりしないでください。
- 本製品の近くまたは上で可燃性の溶剤を使用しないでください。

- メーカーが提供するアタッチメント以外は使用しないでください。



- 製品を分解したり修理しようとしたりしないでください。製品の点検や修理は販売代理店に連絡をしてください。

- 本製品は玩具ではありませんので、お子様や訓練を受けていないスタッフが使用することはできません。



保管と移動



- 人身事故や製品の破損を防ぐため、輸送・保管時には必ず適切な梱包・固定を行ってください。




セットアップ

PROMPT Flex 母体の準備

腹壁を取り外す

- 全開大下帝王切開：





- 経膈的圧迫（児頭挙上）法による脱陥入＜OA/OP/OT＞
- 脱陥入バルーンデバイスの使用
- 骨盤位娩出（牽引）＜OA/OP/OT＞
- パトワードン手技 ＜OA/OT ※腹部スキン取り外し＞

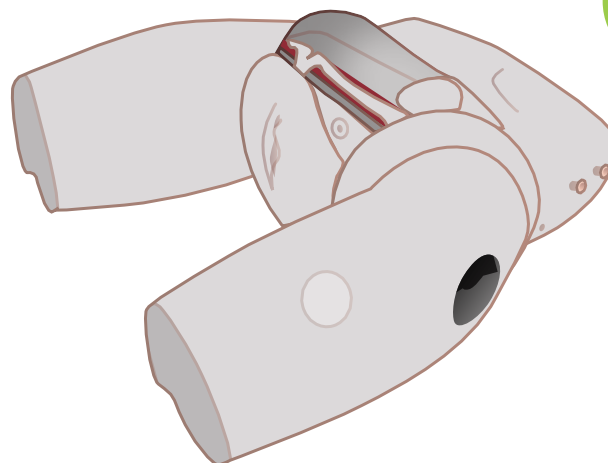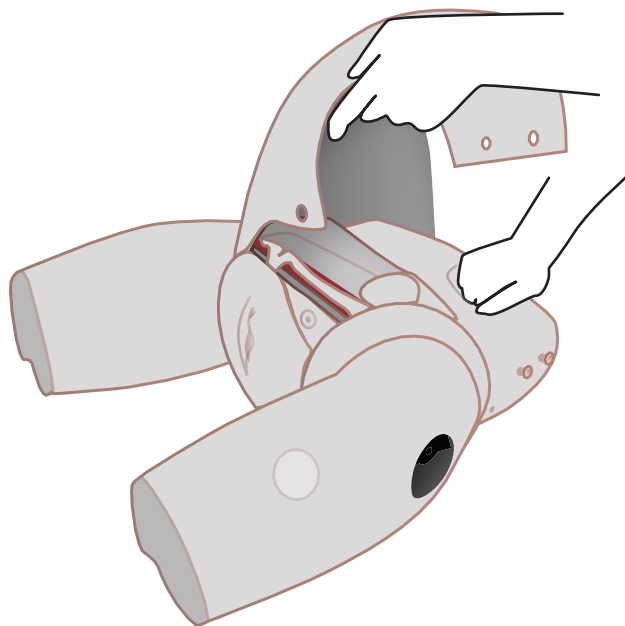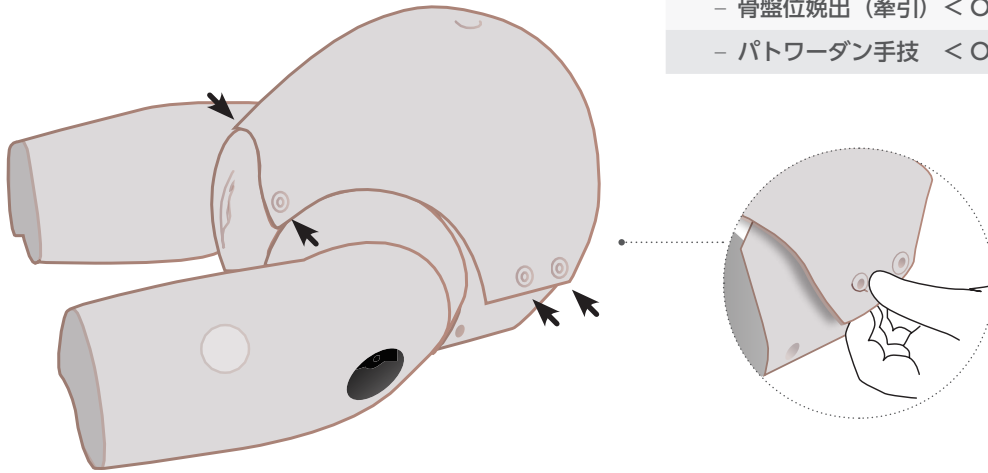

セットアップ

PROMPT Flex 母体の準備


骨盤リング、PROMPT Flex 用子宮頸、PROMPT Flex 会陰を取り外す

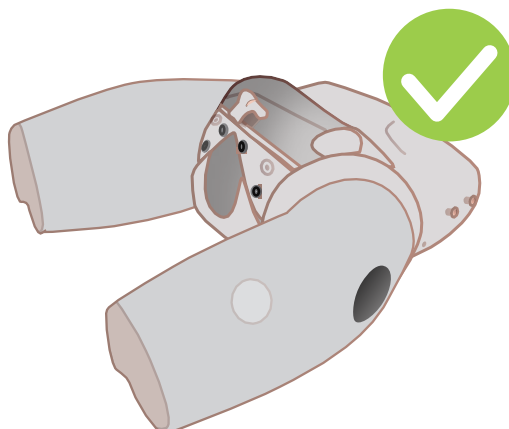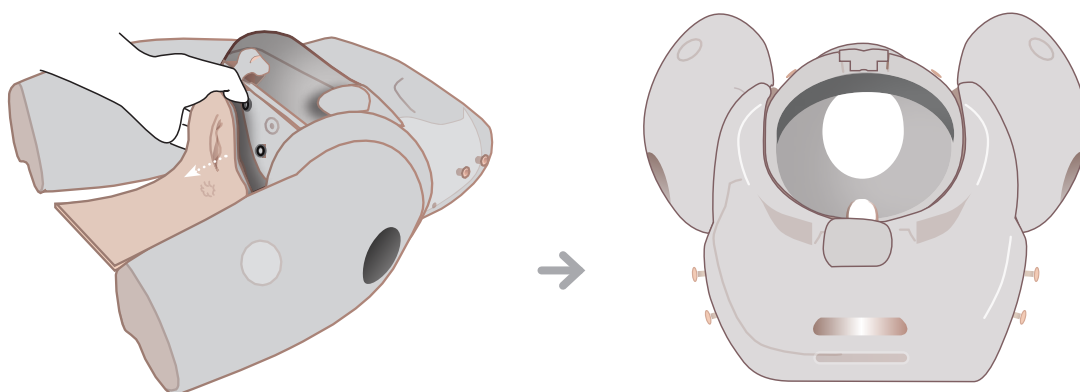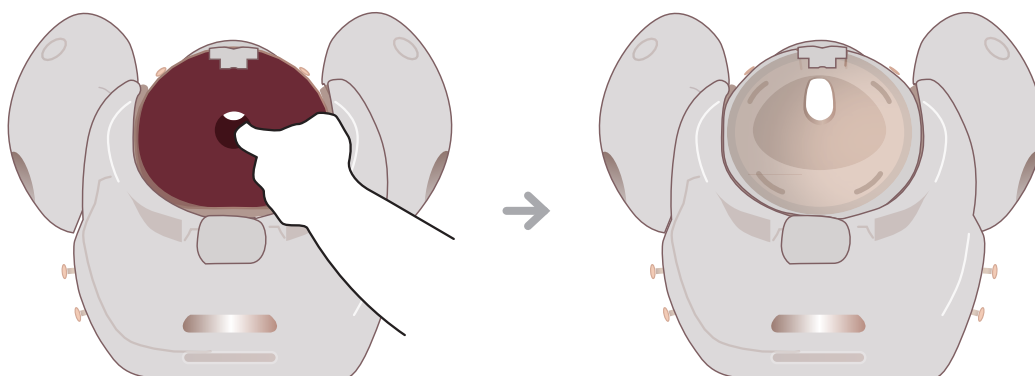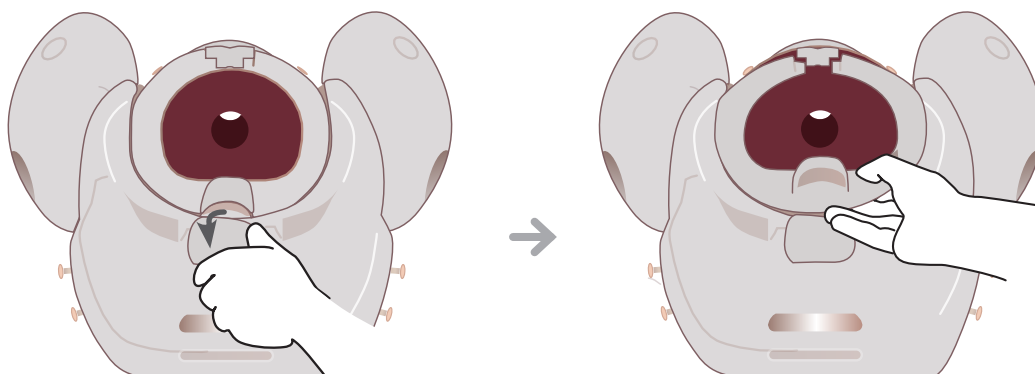


セットアップ

帝王切開 IFH トレーニングのセットアップ

骨盤底インサートを取り付ける

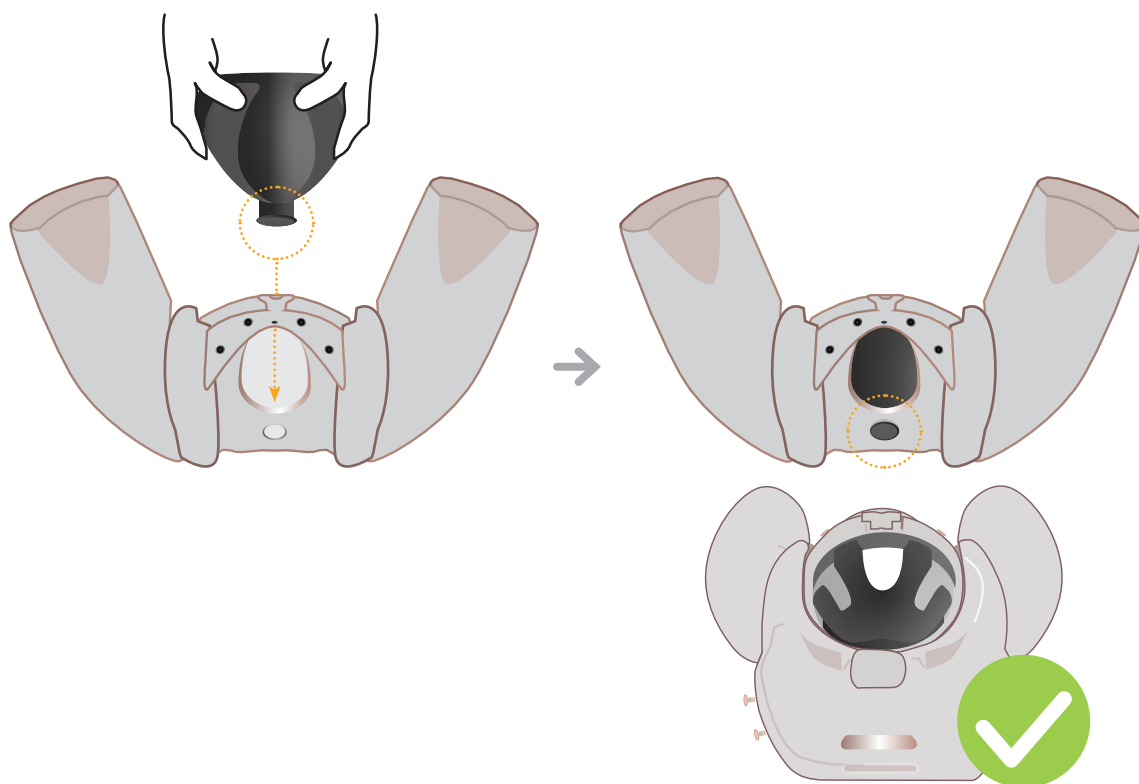




帝王切開モジュール用会陰を取り付ける

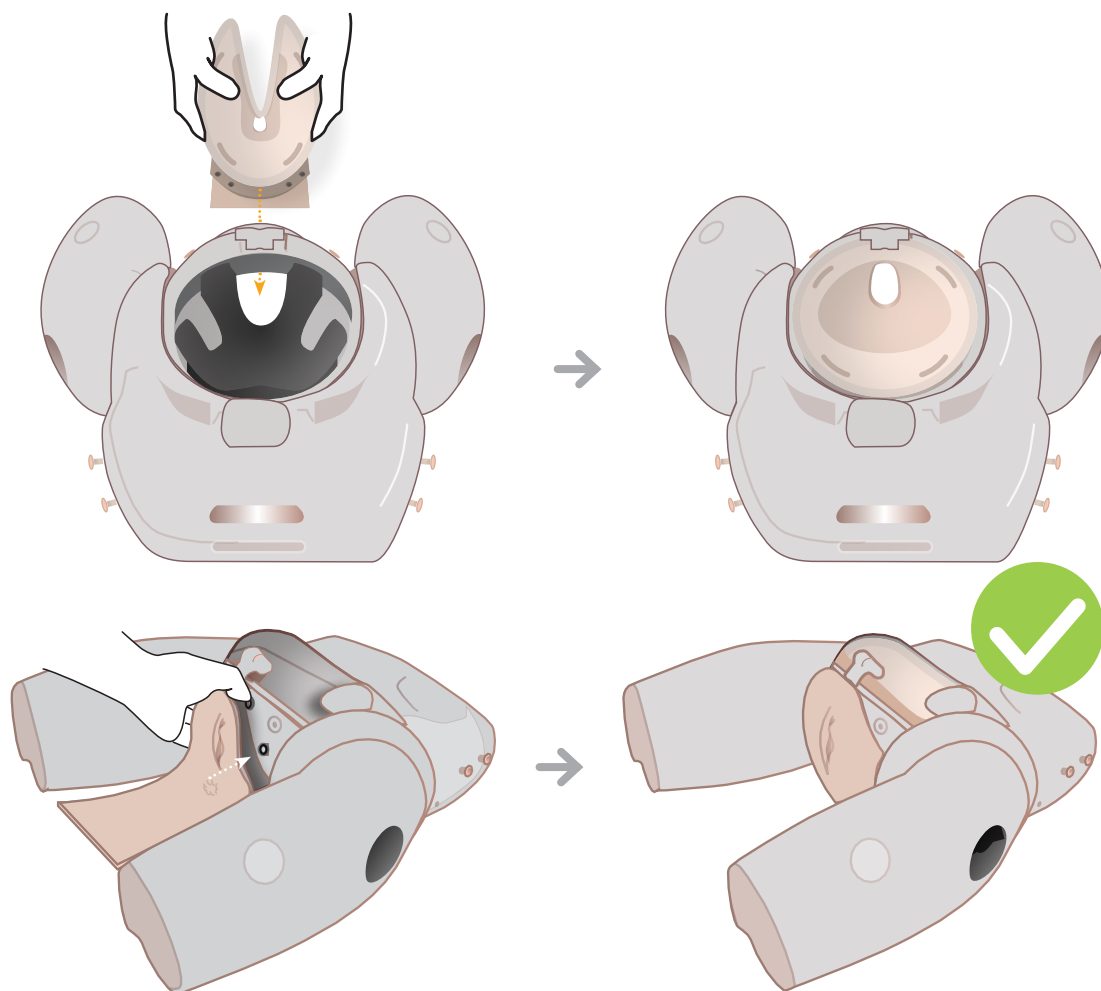

セットアップ

帝王切開 IFH トレーニングのセットアップ


帝王切開 IFH 用子宮を取り付ける

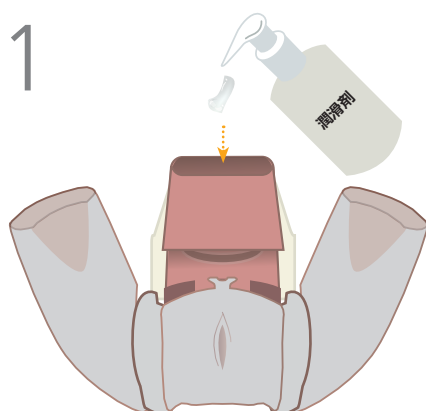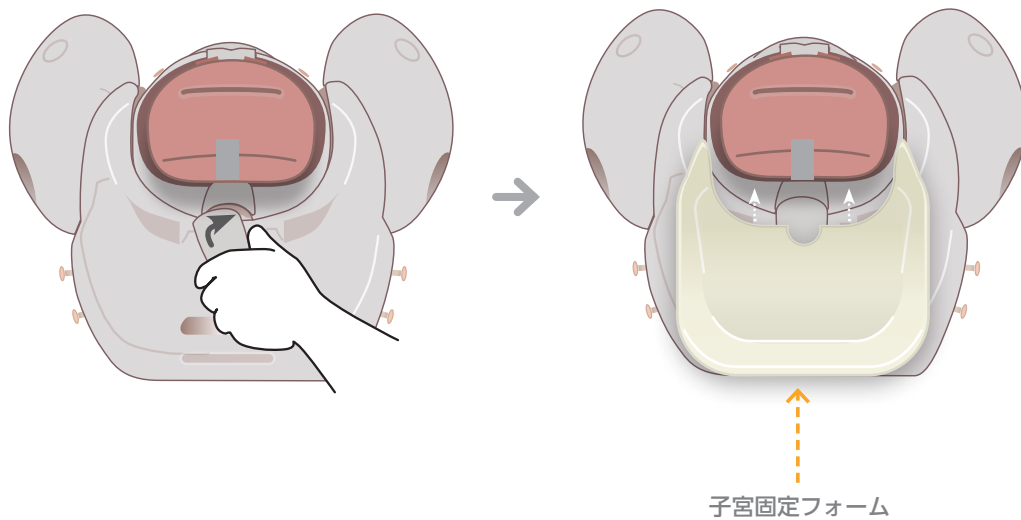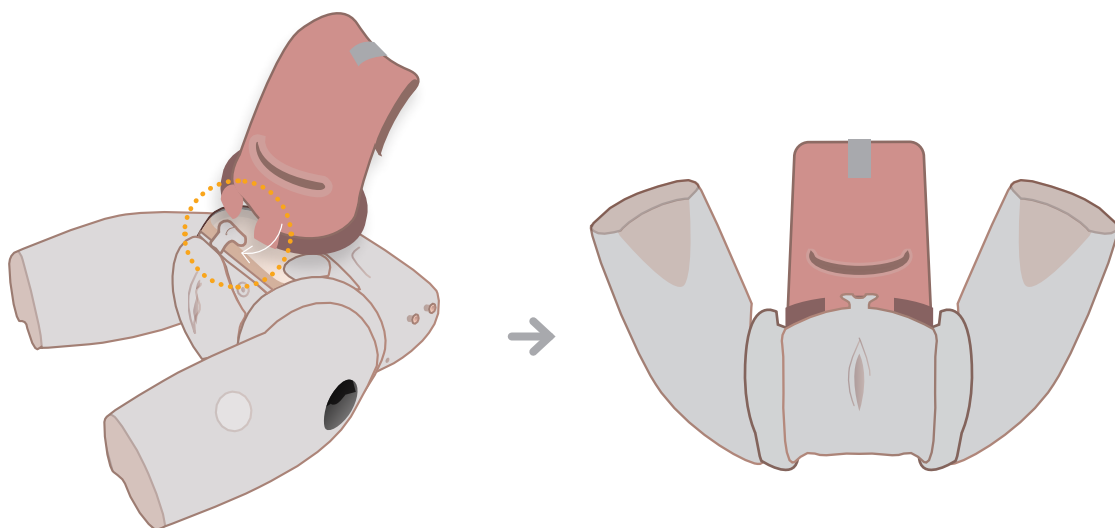

セットアップ




帝王切開 IFH トレーニングのセットアップ

胎児を子宮内へ入れる

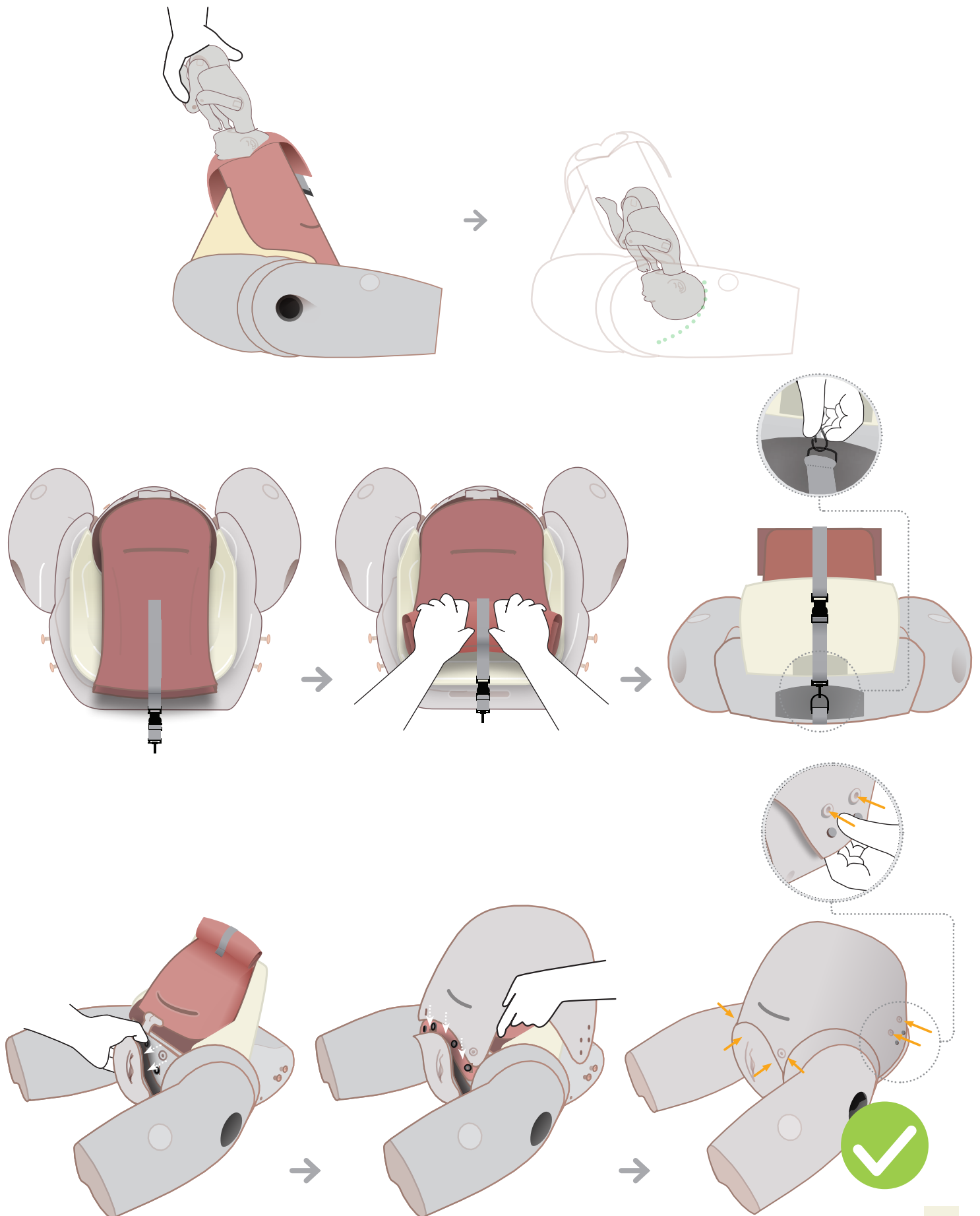







セットアップ

帝王切開（骨盤位娩出※非 IFH）のセットアップ

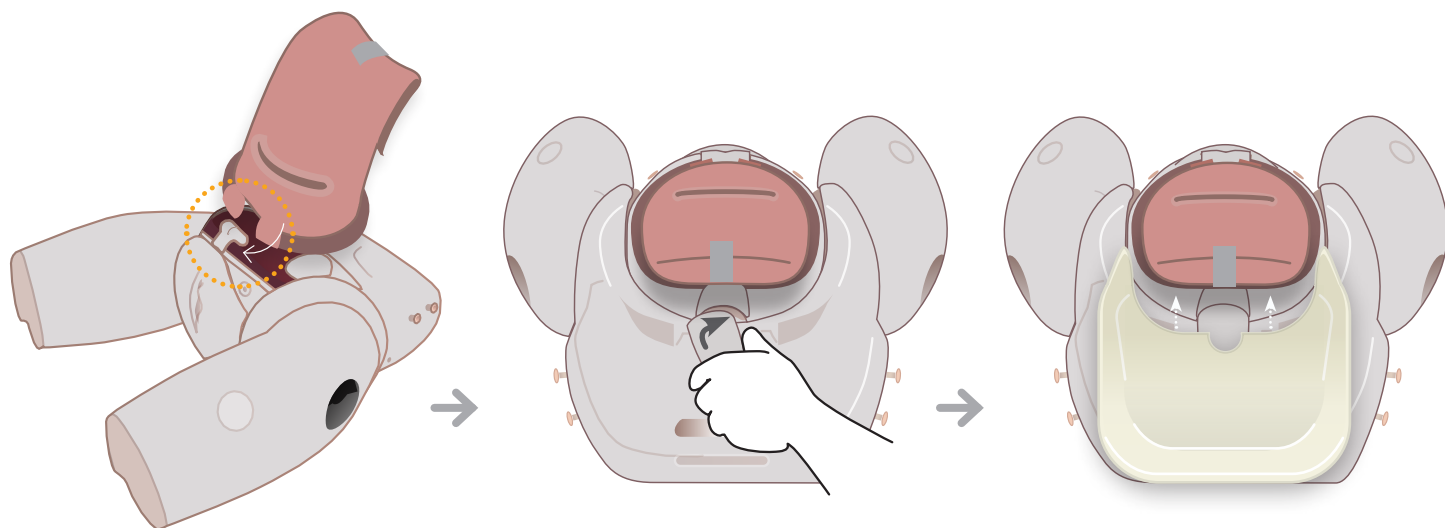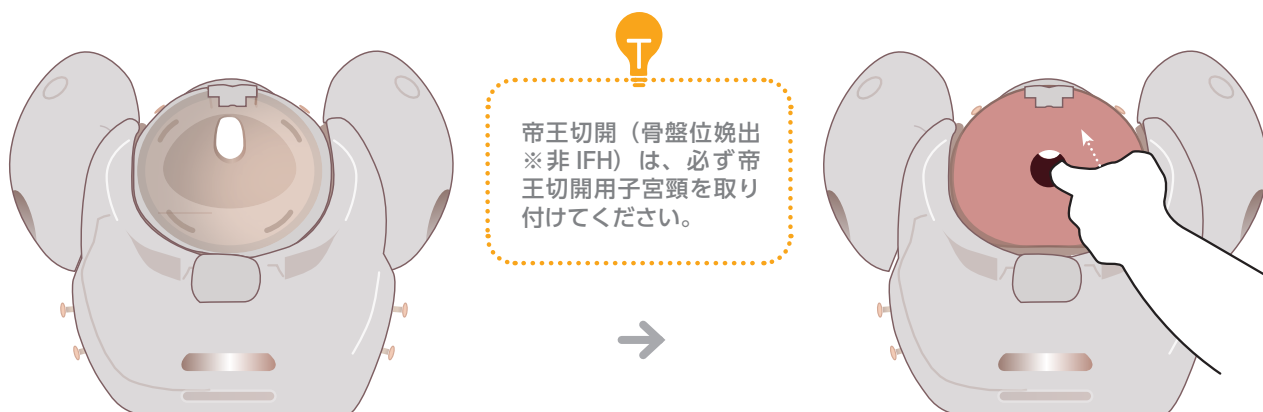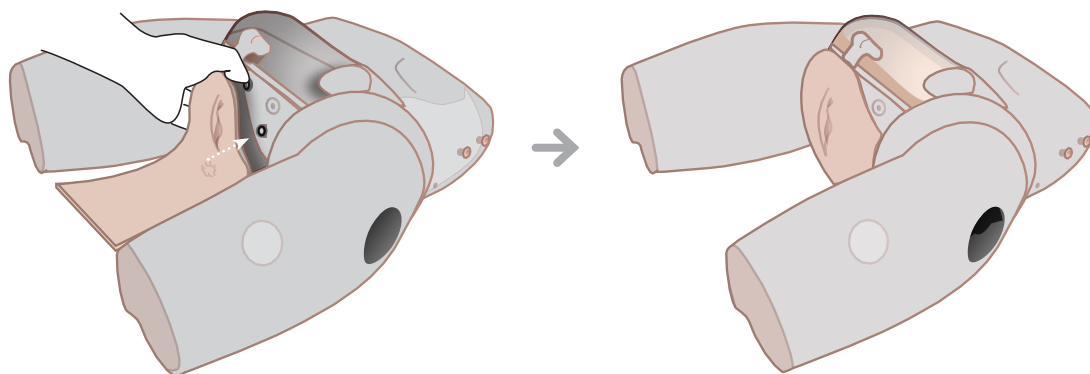




セットアップ

帝王切開（骨盤位娩出※非 IFH）のセットアップ

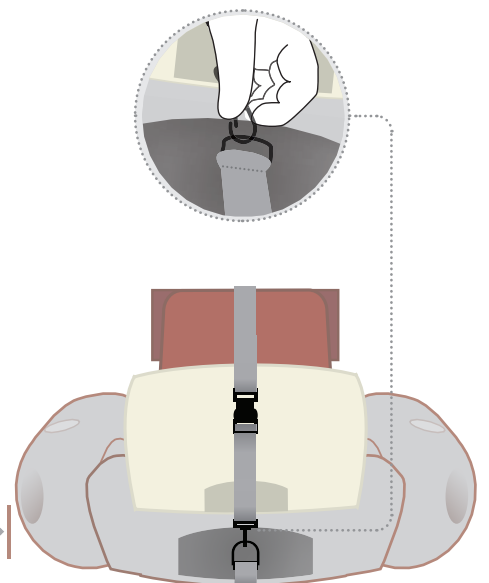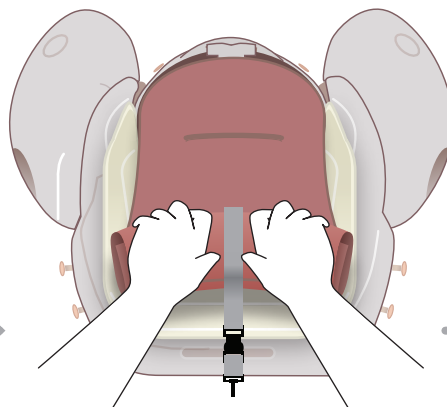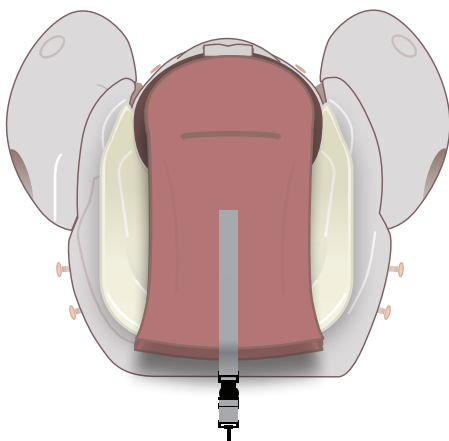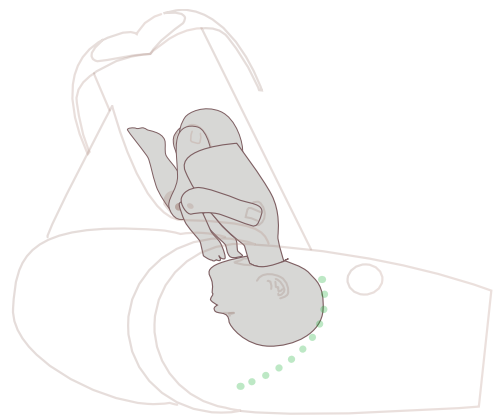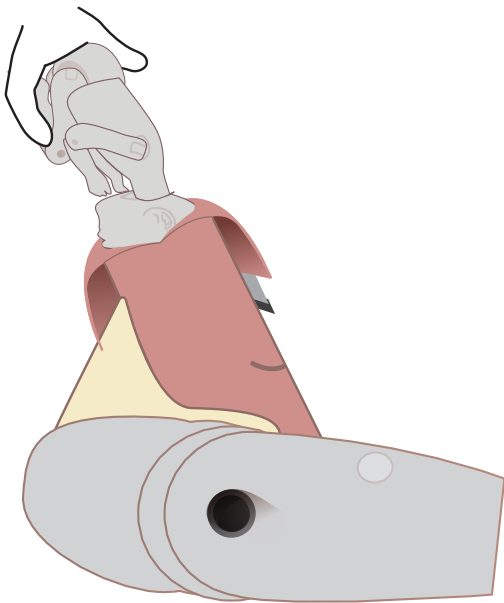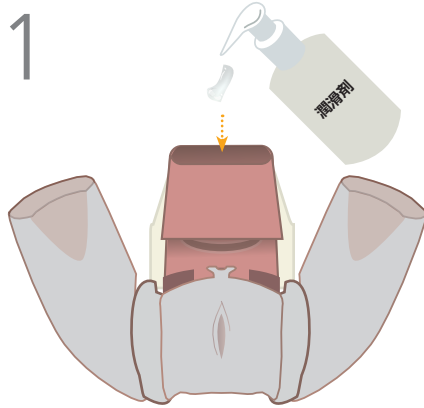



セットアップ

帝王切開（横位）のセットアップ

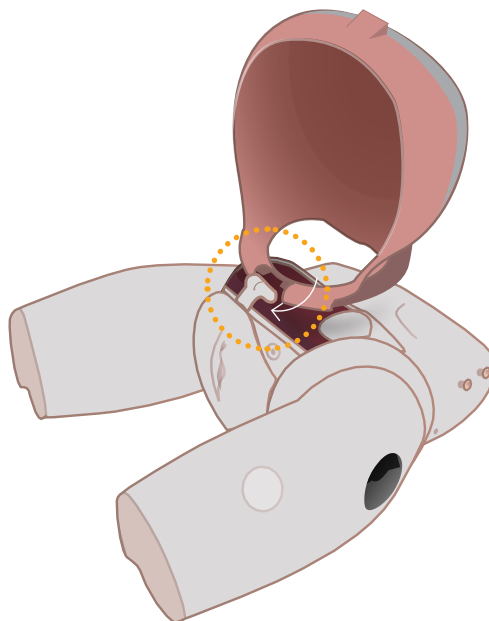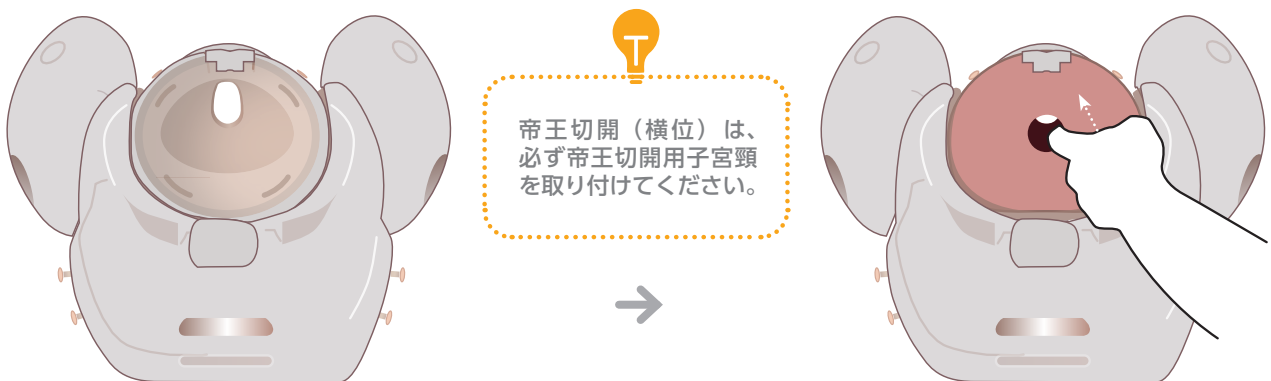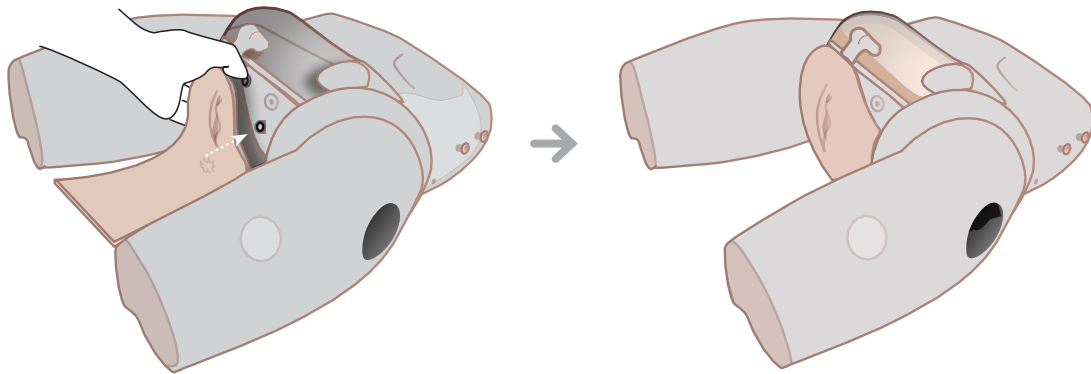


セットアップ


帝王切開（横位）のセットアップ

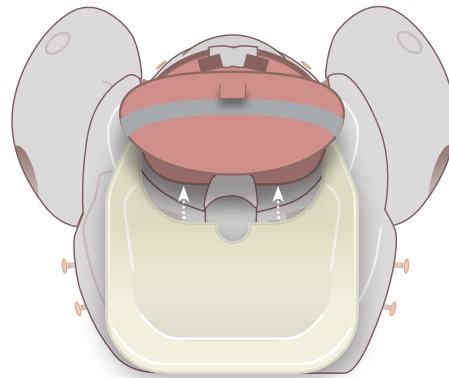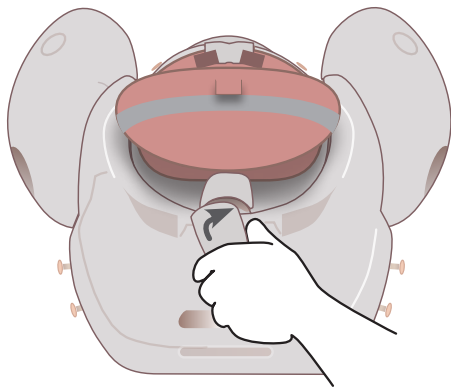


1

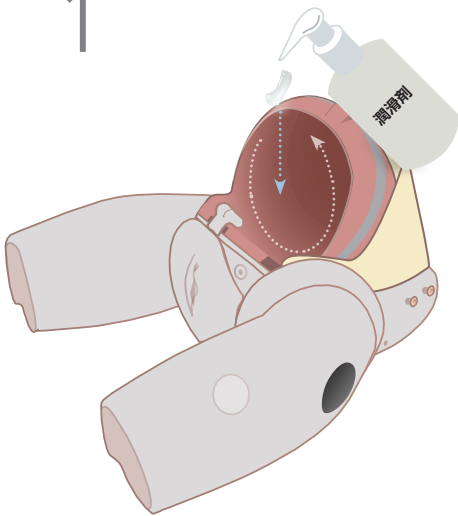

2

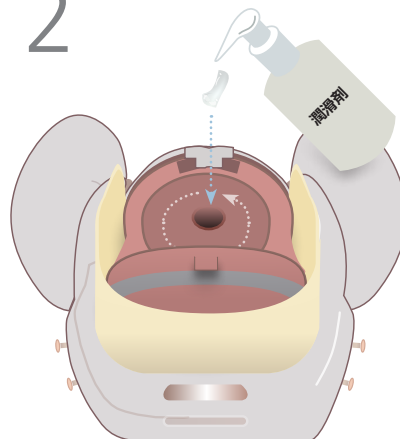


3

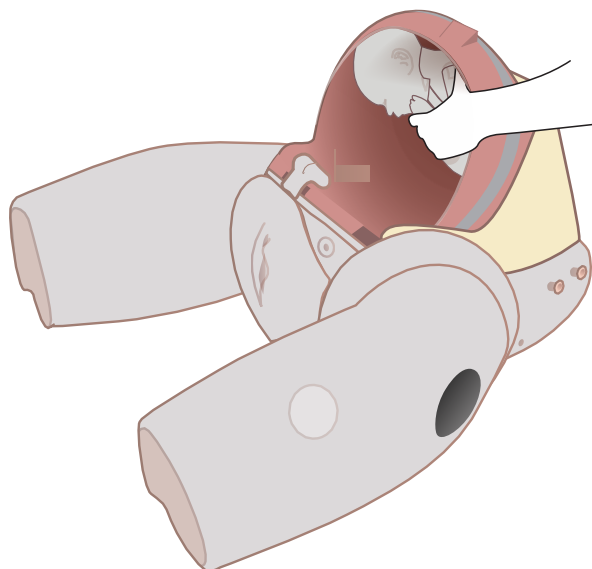

セットアップ


帝王切開（横位）のセットアップ

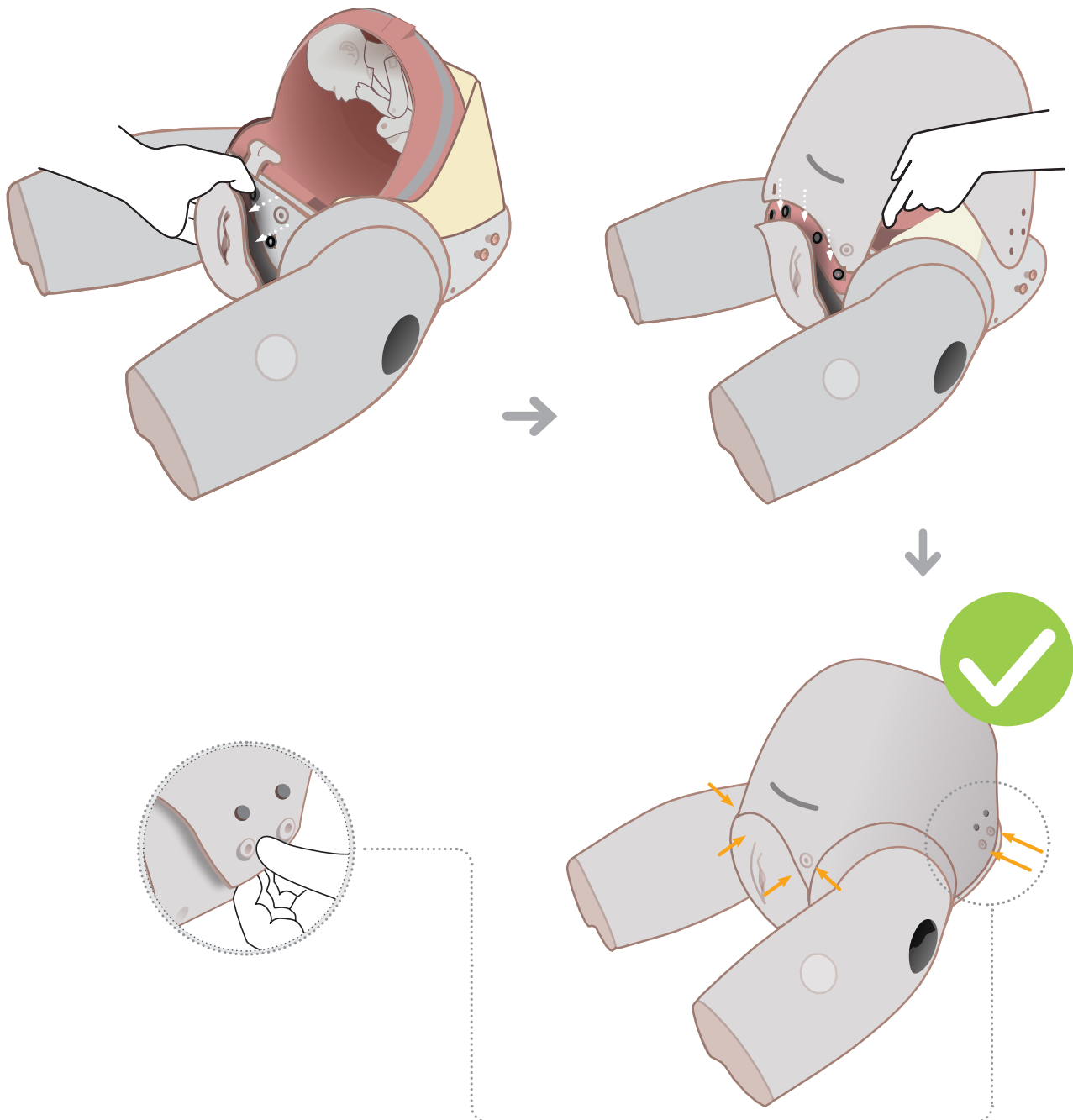

清掃と保管

会陰部の脱着


使用後は毎回、柔らかい布やスポンジを中性洗剤を混ぜたお湯につけ、しっかり絞った後、母体と胎児の表面の潤滑剤をきれいに拭き取ってください。

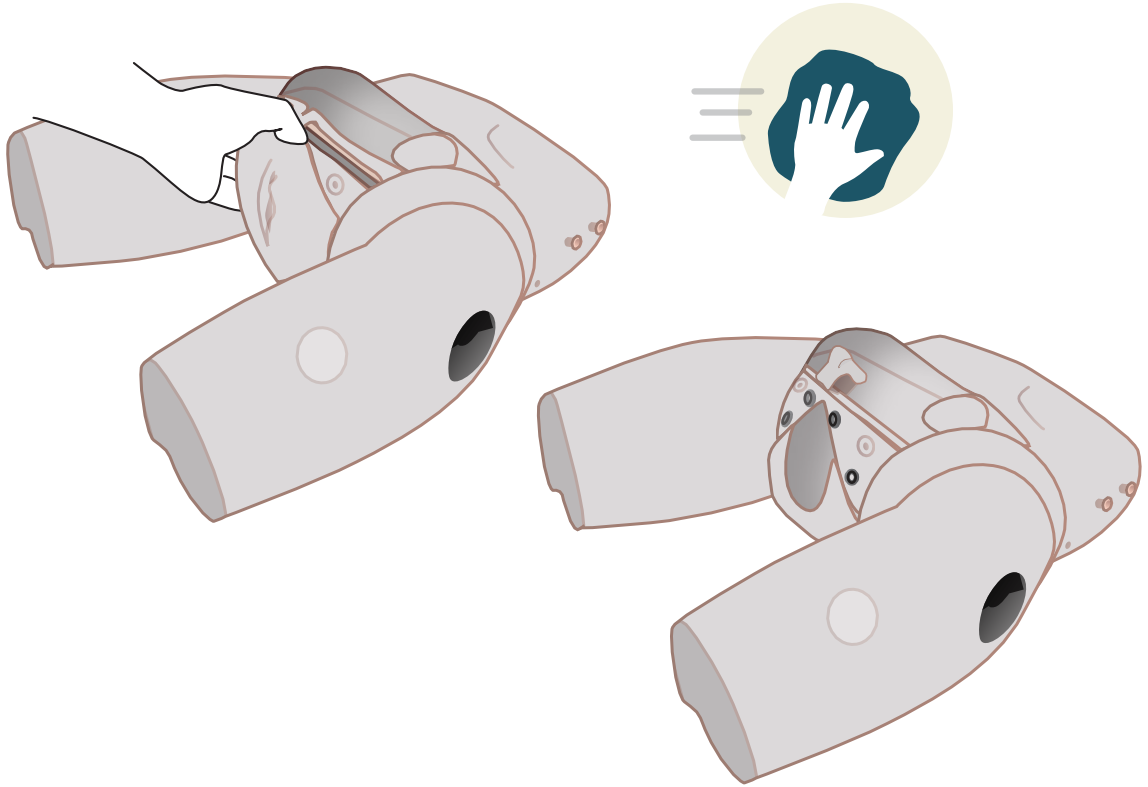

PROMPT Flex 帝王切開 IFH モジュールは「180110 下腿（膝関節モジュール付）」の併用をお勧めします。



このモジュールには、PROMPT Flex 胎児と PROMPT Flex 母体が必要です。
※胎児は仕様により手技再現度が異なるため、新仕様（下図）の胎児を推奨します。

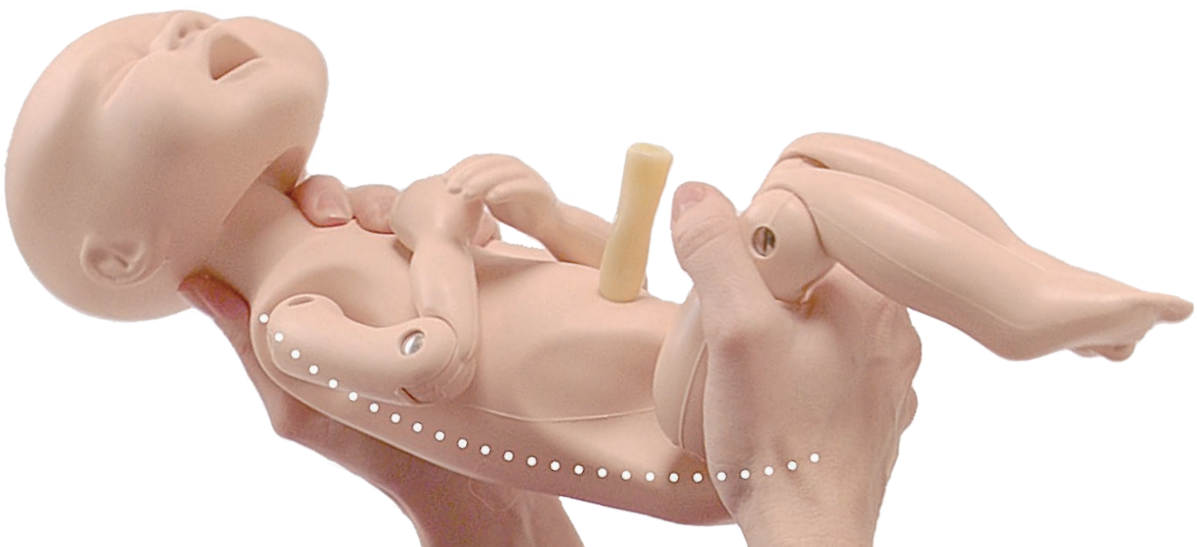

YOU MAY
ALSO BE
INTERESTED IN...

180100

PROMPT Flex 分娩トレーナー スタンダードセット



180110

下腿（膝関節モジュール付）




180101

PROMPT Flex 産後出血モジュール



180102

PROMPT Flex 内診モジュール

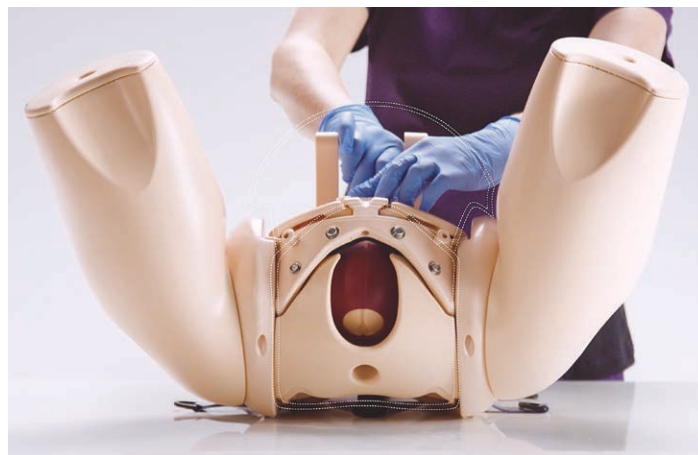

Part No: 956-536

第2版 2022年6月
©2022 Limbs & Things

NLS 日本ライトサービス株式会社
Nihon Light Service, Inc.

医学教育機器事業部

〒113-0033 東京都文京区本郷 2-3-9 ツインビュー御茶の水 2F

☎ 03-3815-2354

☎ 03-3818-6843

✉ igaku@nlsinc.co.jp

🌐 www.medical-sim.jp