




USER GUIDE



PROMPT Flex 産後出血モジュール

品番：180101

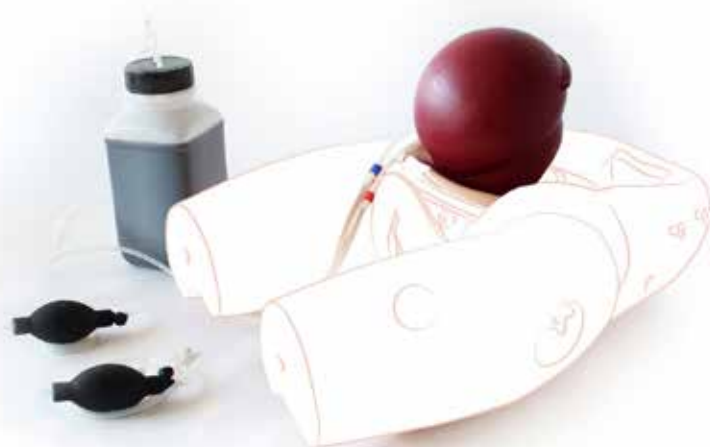

インデックス

商品構成	2
安全と清掃の手引き	3
セットアップ	4
• PROMPT Flex 母体の準備	4
• 産後出血モジュールを取り付ける	6
• 疑似血液供給タンク、腹壁を取り付ける	7
• 子宮を膨らます	8
• 子宮の出血を再現する	9
トレーニング	10
• シミュレーションの開始と終了	10
清掃と保管	11

商品構成

疑似血液供給タンク

産後出血用子宮 一式

180127

濃縮疑似静脈血
(スターターパック) × 2

100020



構成に含まれませんので、ご用意ください。

PROMPT Flex 母体

180120



安全と清掃の 手引き

PROMPT Flex 産後出血モジュールを使用される前に、
この安全の手引きを確認してください。

DO's



- このガイドのすべての指示に従ってください。
- このガイドは大切に保管してください。
- すべての警告に注意してください。

- 付属の疑似血液のみ使用してください。非推奨品の使用はシミュレーターの劣化や損傷の原因となります。



- 常に手袋を着用し、貴金属はすべて外してください。爪や指輪などの鋭利な表面は、製品損傷の原因となります。

- 使用後は毎回、柔らかい布やスポンジを中性洗剤を混ぜたお湯につけ、しっかり絞った後、やさしく拭いてください。母体の表面についた疑似血液等の汚れをきれいに除去してください。



保管と移動



- 人身事故や製品の破損を防ぐため、輸送・保管時には必ず適切な梱包・固定を行ってください。

DONT's



- 熱源の近くに設置したり、炎にさらしたり、火の近くで使用したりしないでください。
- 本製品の近くまたは上で可燃性の溶剤を使用しないでください。

- メーカーが提供するアタッチメント以外は使用しないでください。



- 貴金属をつけたまま使用しないでください。




- 製品を分解したり修理しようとしたりしないでください。製品の点検や修理は販売代理店に連絡をしてください。



セットアップ

PROMPT Flex 母体の準備

腹壁を脱着する

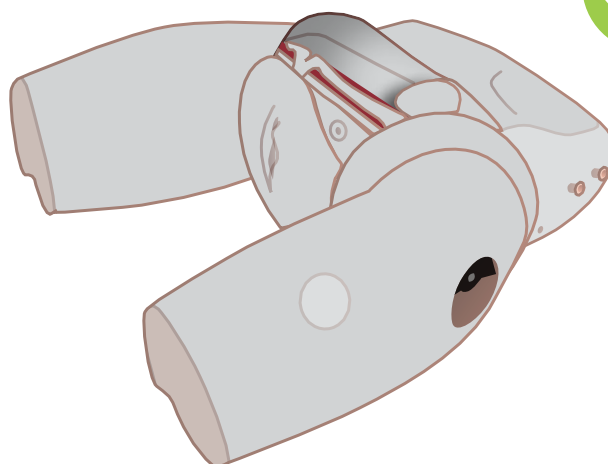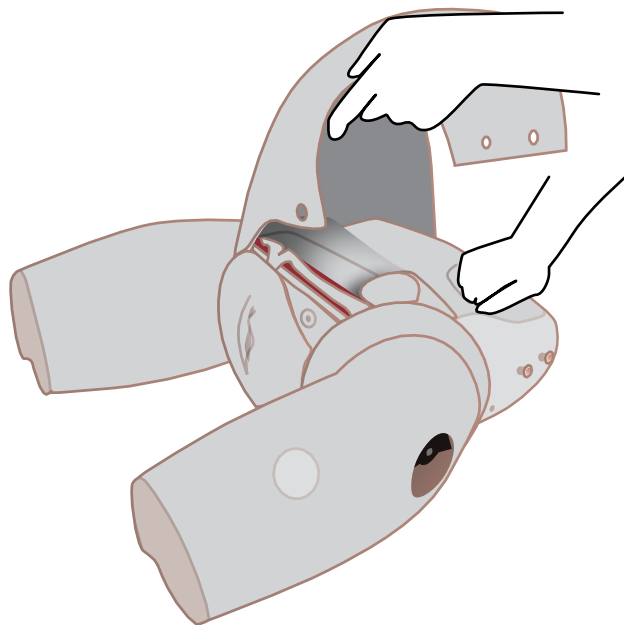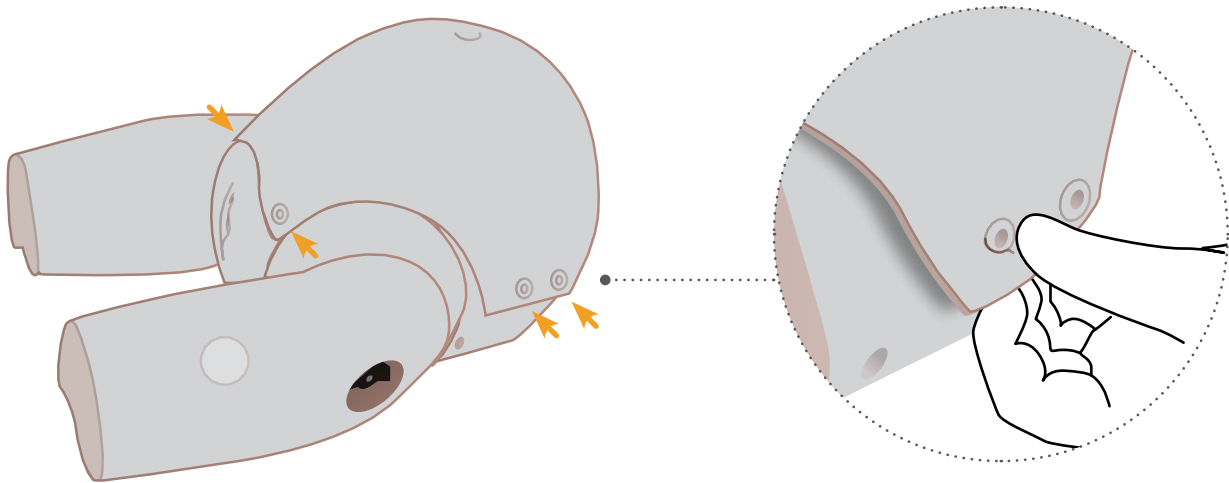


セットアップ


PROMPT Flex 母体の準備

PROMPT FLEX 分娩用の骨盤リング、子宮頸の取り外し

1

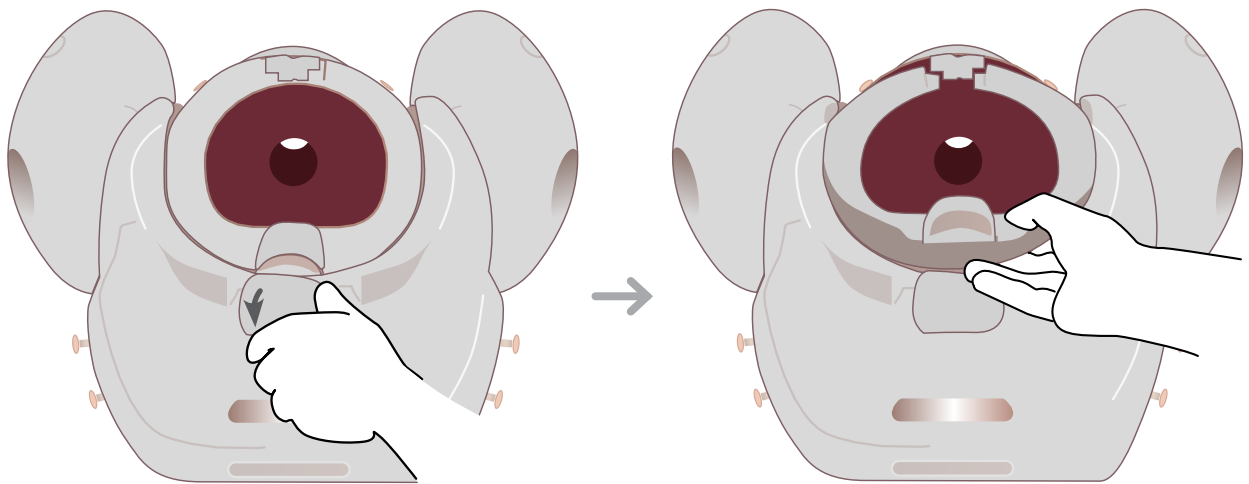


2

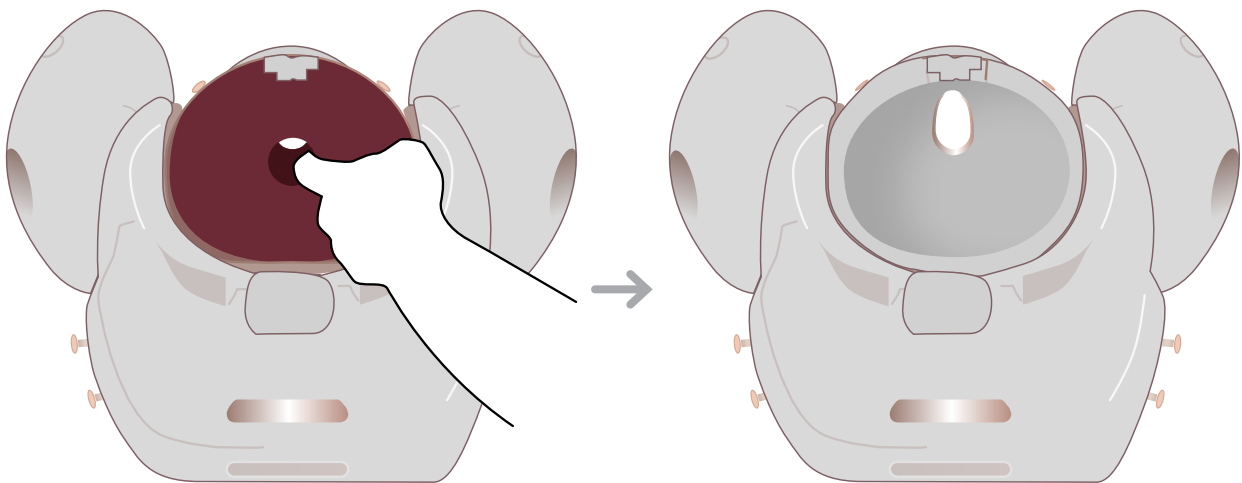


セットアップ

産後出血モジュールを取り付ける

1

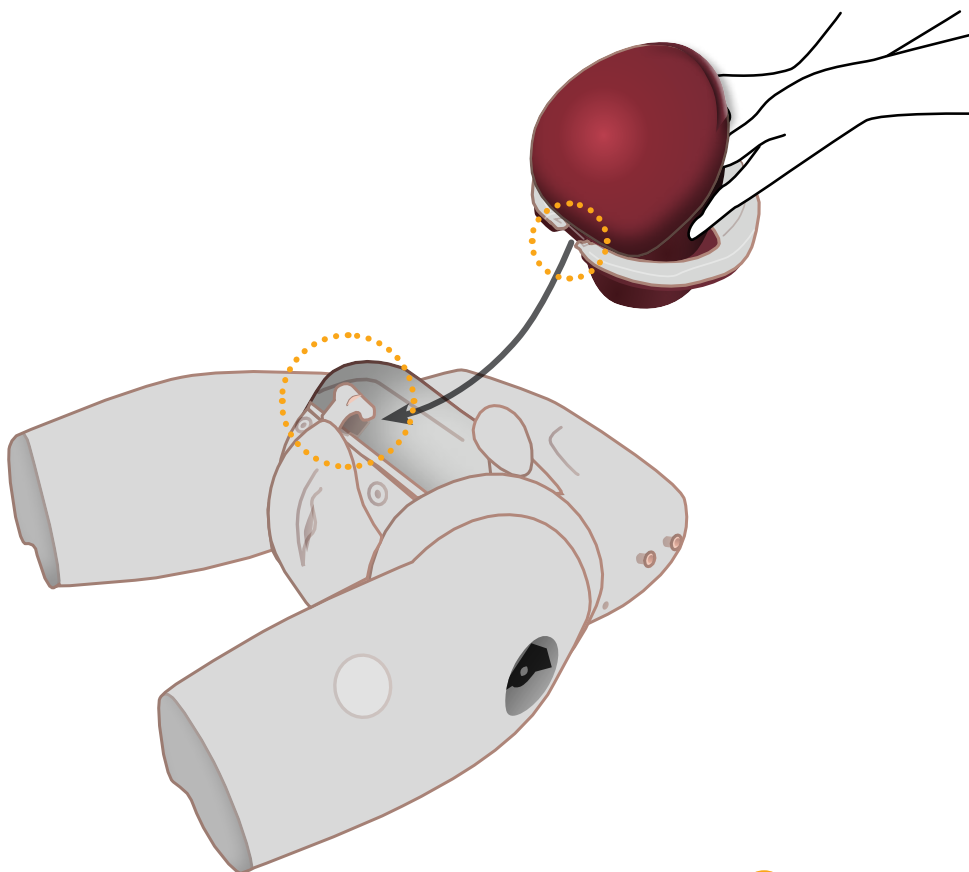


2

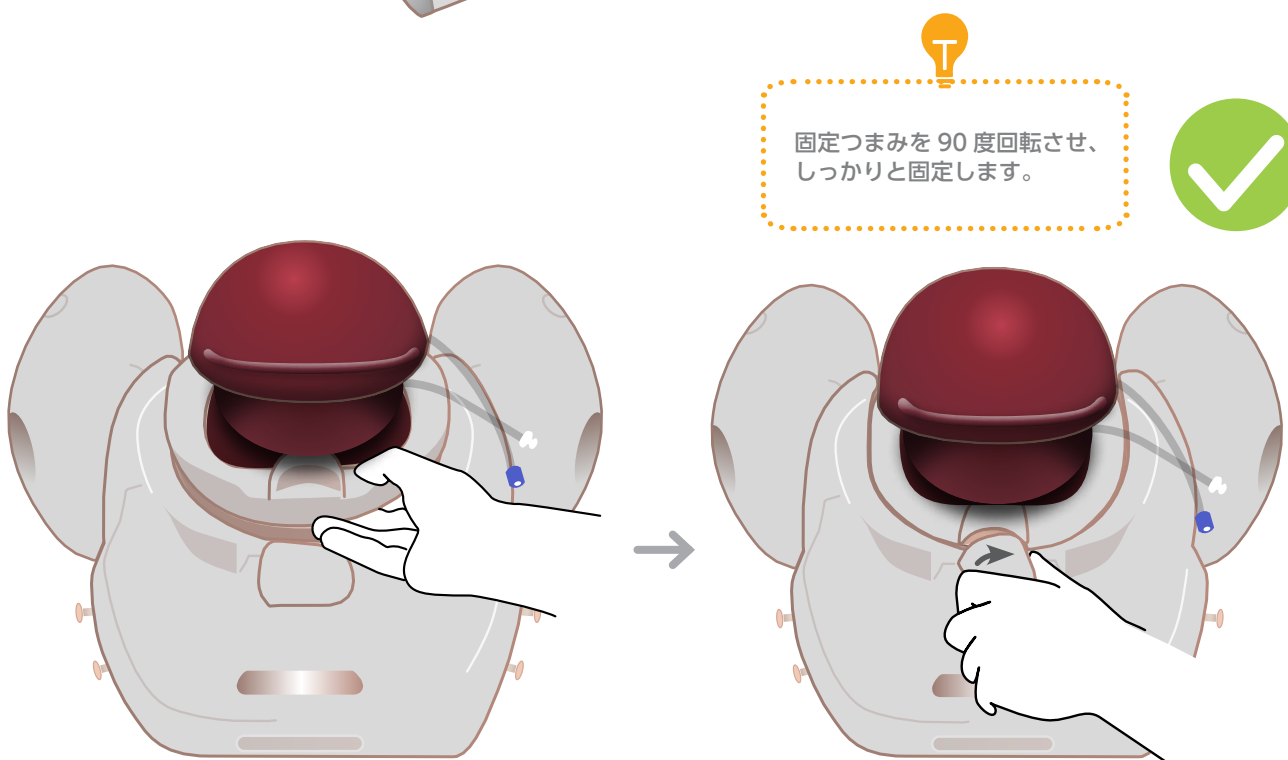


セットアップ

疑似血液供給タンク、腹壁を取り付ける


1

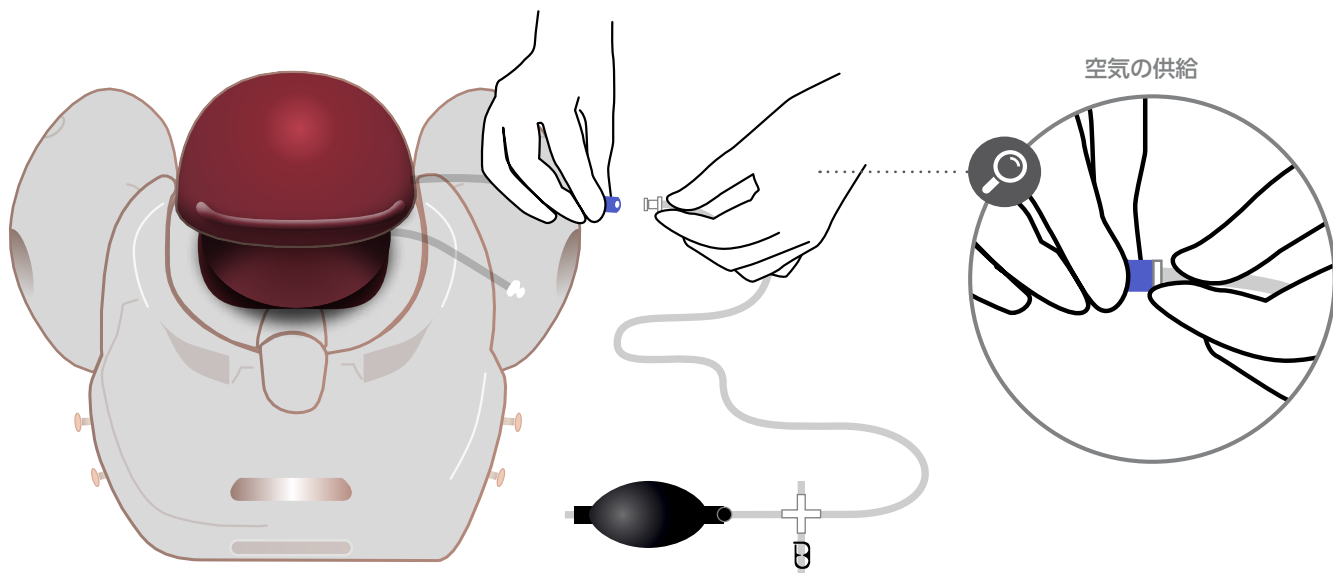

2

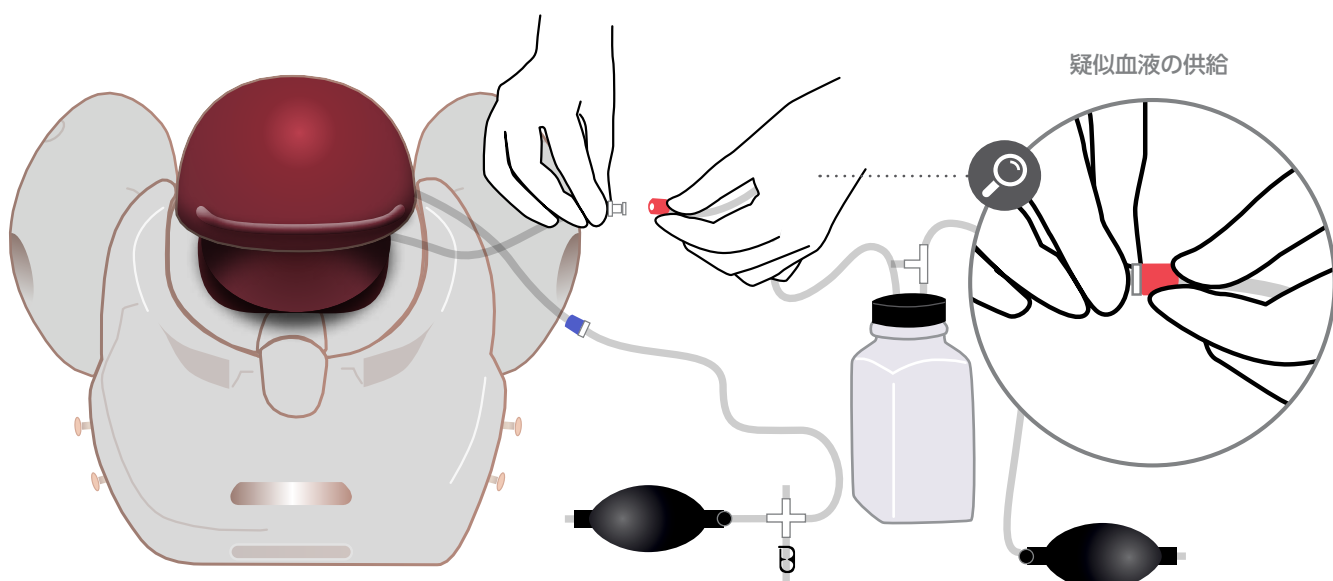


3

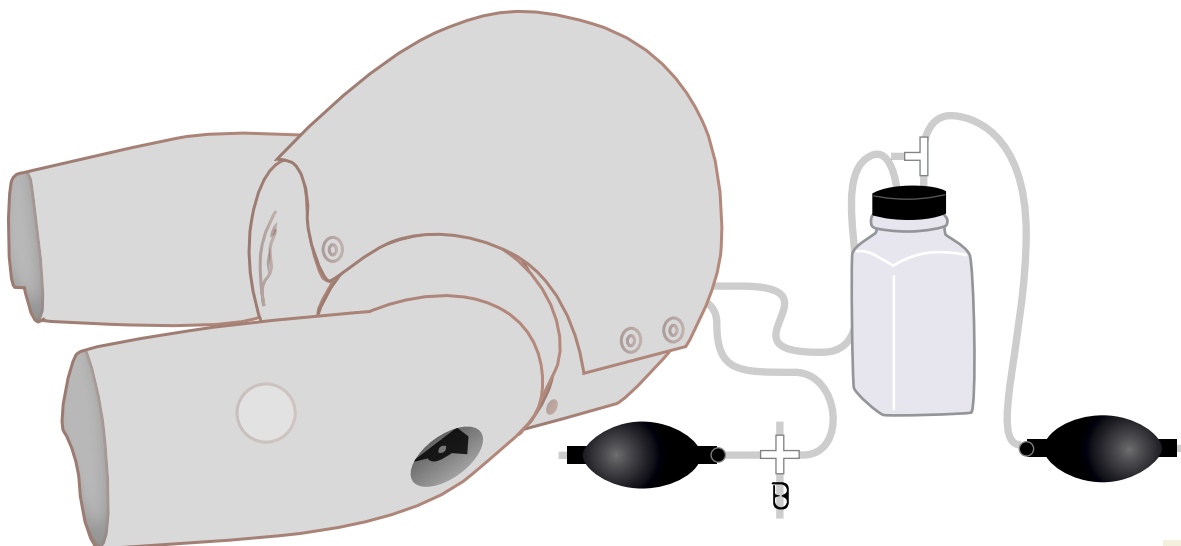




セットアップ

子宮を膨らます

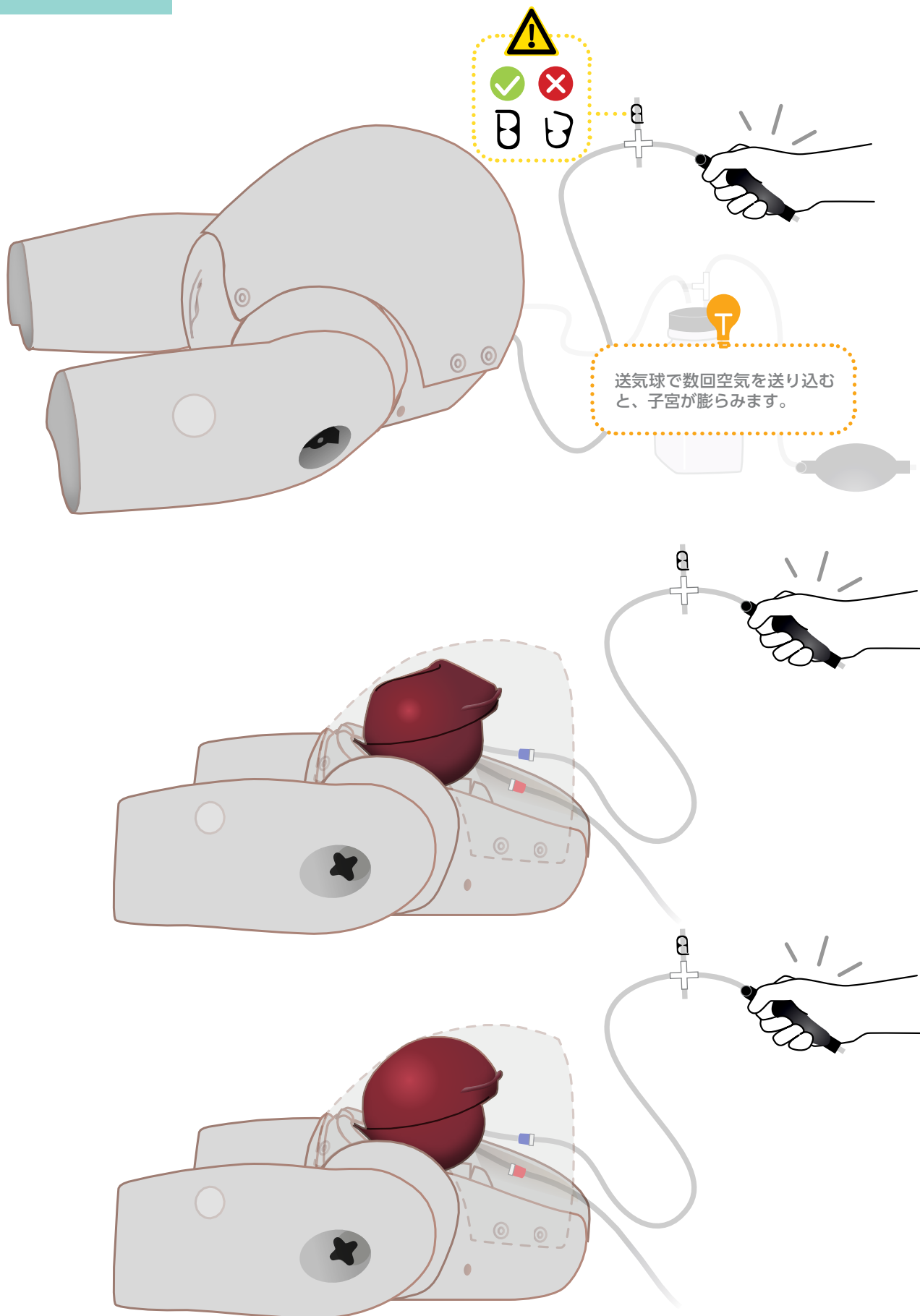


セットアップ

子宮の出血を再現する

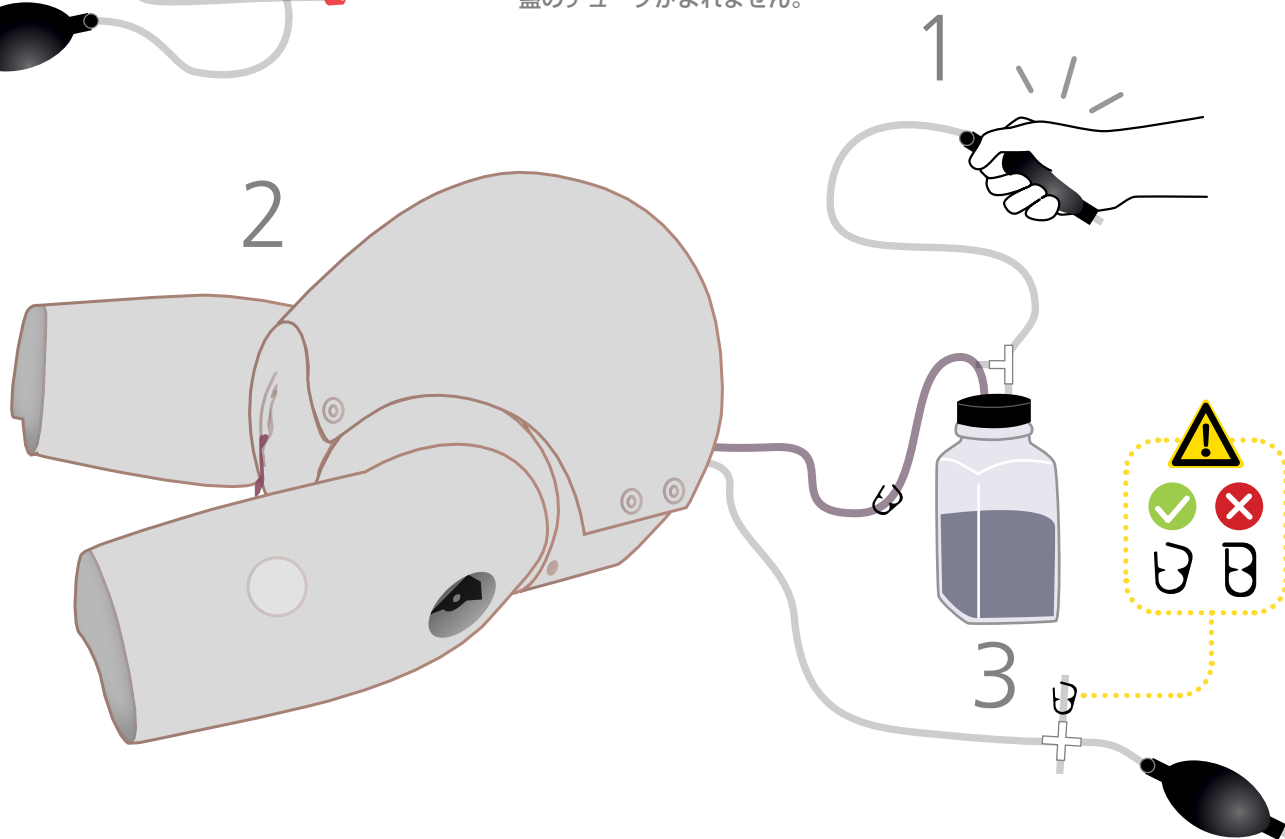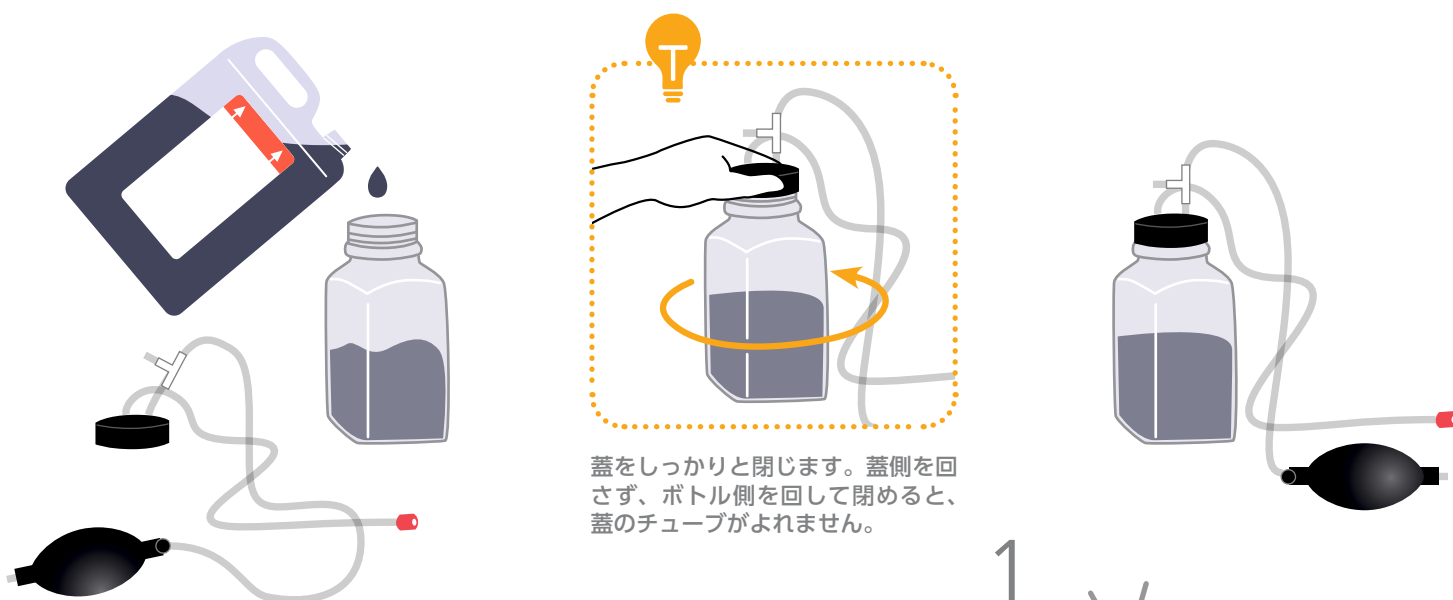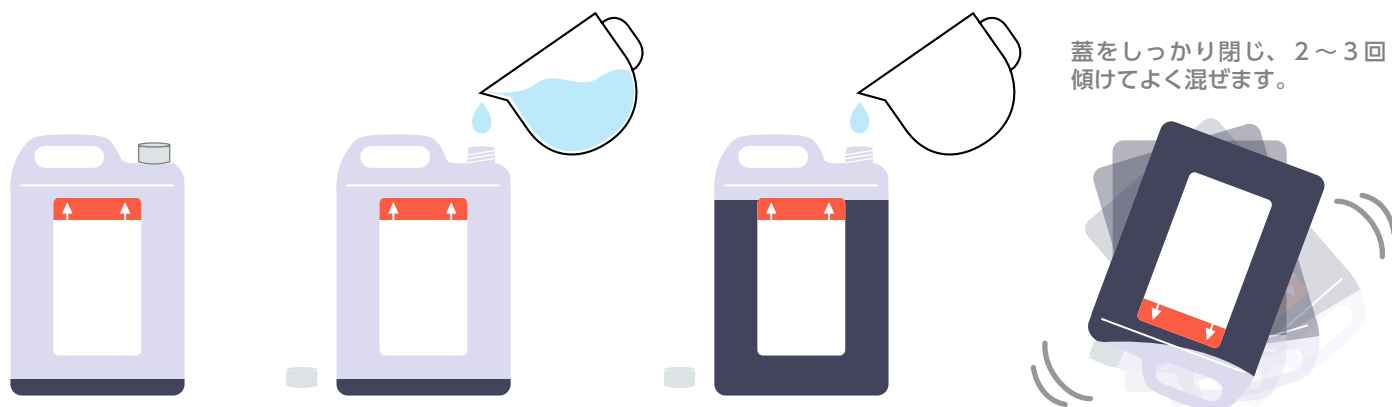




腹壁を装着し、子宮マッサージを行うことができます。子宮はマッサージを行う度に空気がチューブから抜けるようになっています。

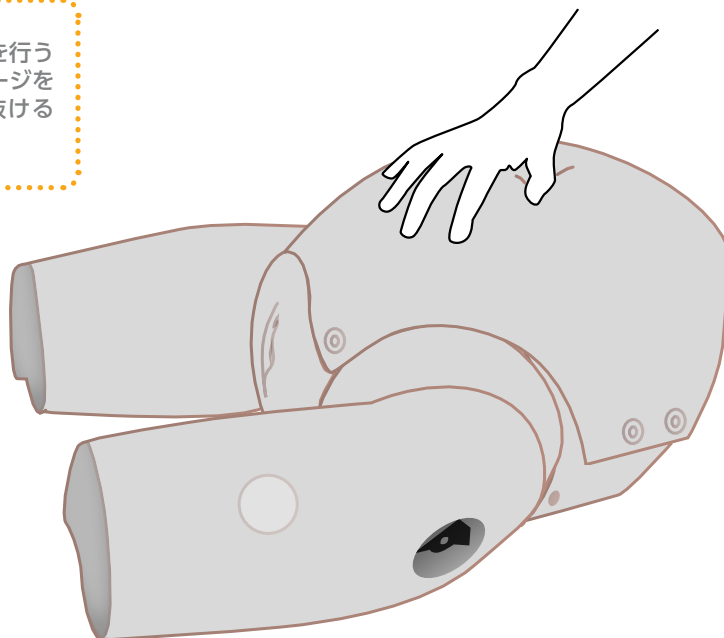



子宮マッサージが終わったら、速やかに疑似血を循環させるクランプを閉じて血液の流れを止めます。

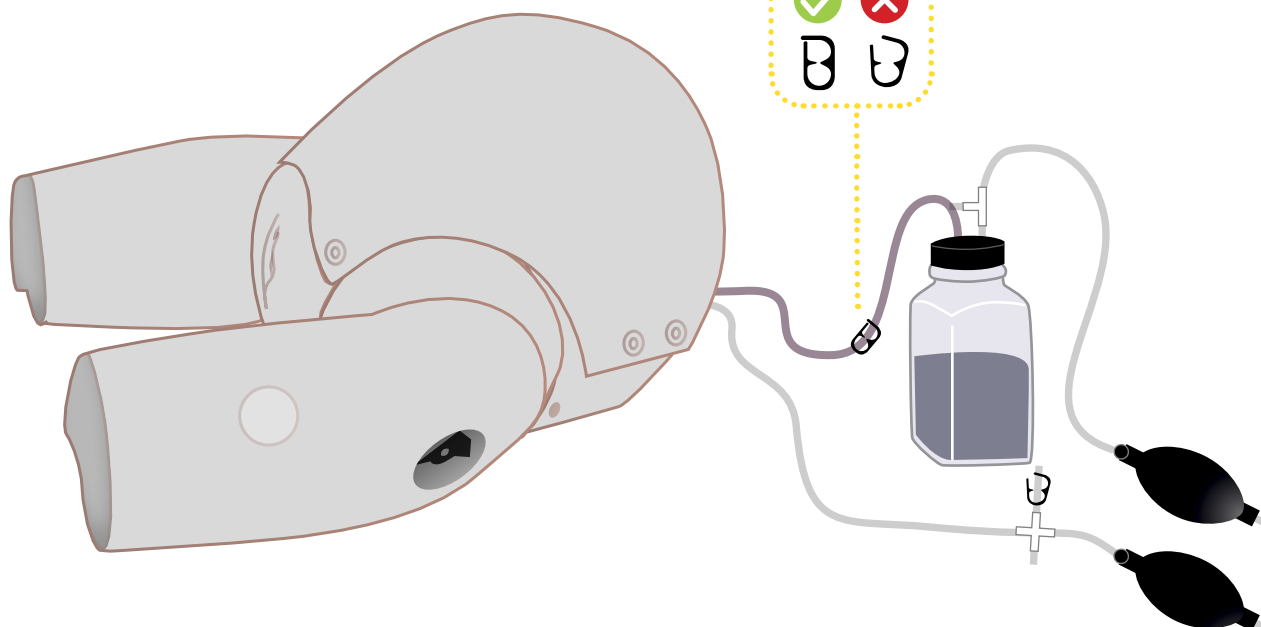


清掃と保管



シミュレーション後の腔内の擬似血液は、空のシリンジで取り除きボトルに戻してください。

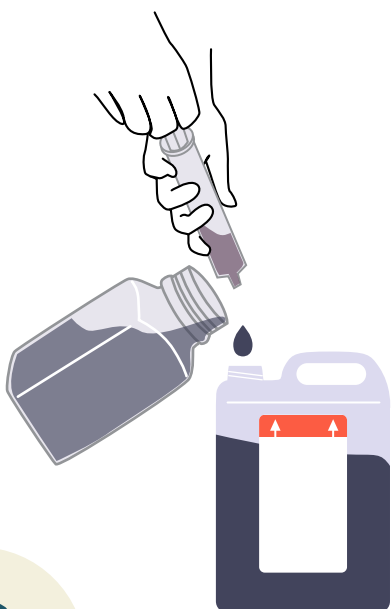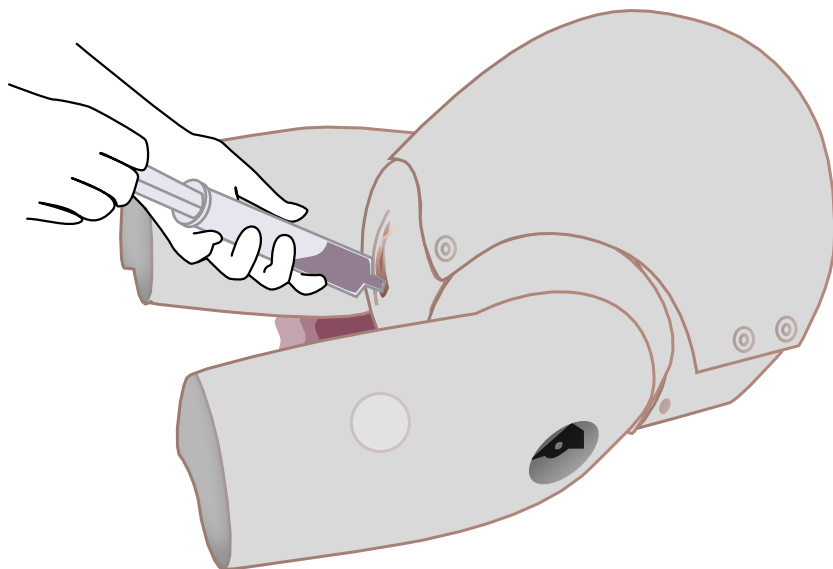

使用後は毎回、柔らかい布やスポンジを中性洗剤を混ぜたお湯につけ、しっかり絞った後、やさしく拭いてください。母体の表面についた擬似血液等の汚れをきれいに取り除いてください。

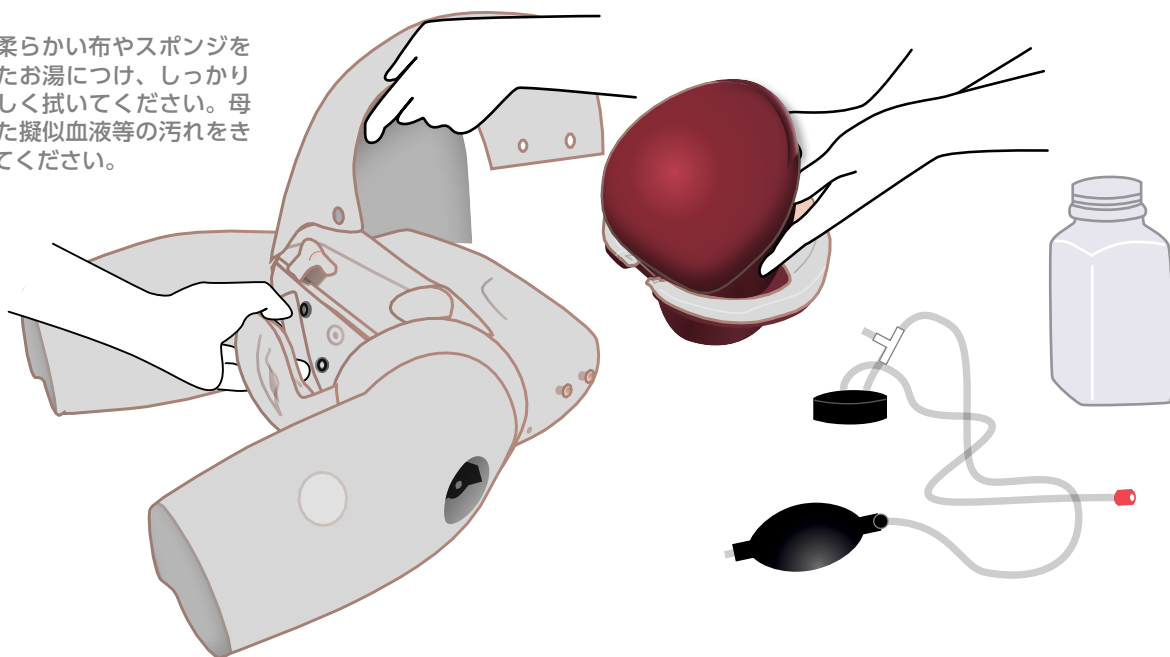

YOU MAY
ALSO BE
INTERESTED IN...

180100

PROMPT Flex 分娩トレーナー スタンドセット



180110

下腿（膝関節モジュール付）



180102

PROMPT Flex 内診モジュール



180300

PROMPT Flex 帝王切開 IFH モジュール



180310

PROMPT Flex 器械分娩 AVB モジュール



Part No: 365-014

第6版 2022年5月
©2022 Limbs & Things

NLS 日本ライトサービス株式会社
Nihon Light Service, Inc.
医学教育機器事業部

〒113-0033 東京都文京区本郷 2-3-9 ツインビュー御茶の水 2F
☎ 03-3815-2354
☎ 03-3818-6843
✉ igaku@nlsinc.co.jp
🌐 www.medical-sim.jp