



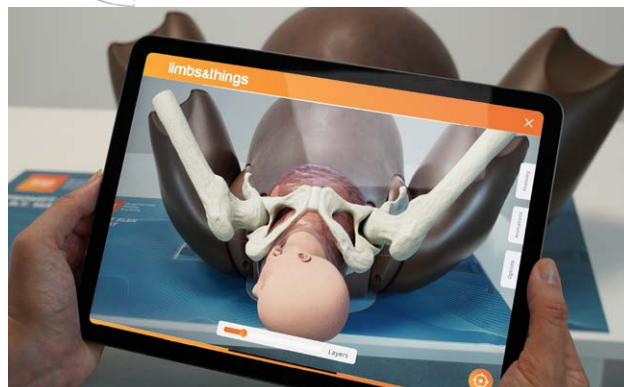

USER GUIDE

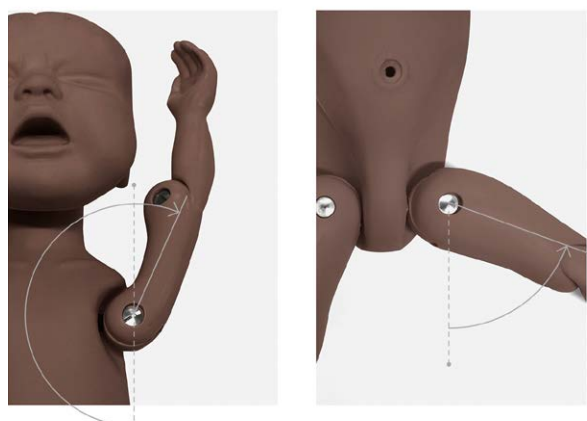

# PROMPT Flex 分娩トレーナー スタンダードセット

品番：180100


## インデックス

|                 |    |
|-----------------|----|
| 商品構成            | 3  |
| 安全と清掃の手引き       | 4  |
| セットアップ          | 5  |
| • 腹壁を脱着する       | 5  |
| • 子宮頸を取り外す      | 6  |
| • 娩出法ごとのセットアップ  | 7  |
| トレーニング          | 8  |
| • 正常分娩          | 8  |
| • 骨盤位分娩         | 9  |
| • 肩甲難産          | 10 |
| 清掃と保管           | 11 |
| • 会陰部の脱着        | 11 |
| • 筋肉注射パッドの交換と清掃 | 11 |
| • 大腿部の調整        | 11 |

## 商品構成


PROMPT Flex 母体

180120

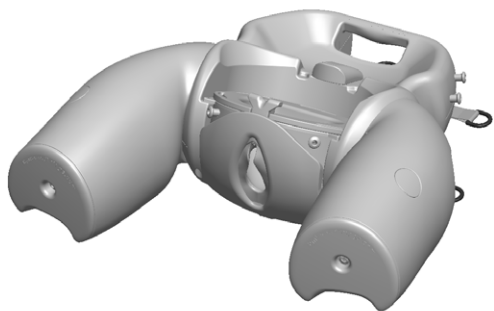


PROMPT Flex 胎児（スタンダード）

180121

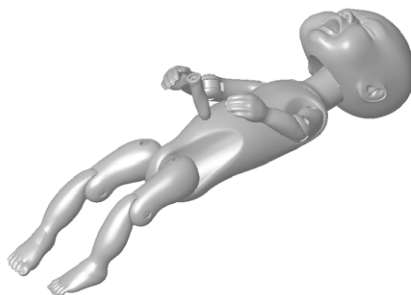

PROMPT Flex 胎盤

180123

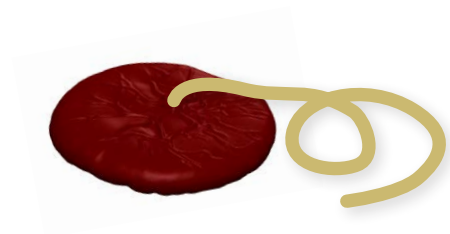


PROMPT Flex 腹壁

180124




PROMPT Flex 会陰

180125

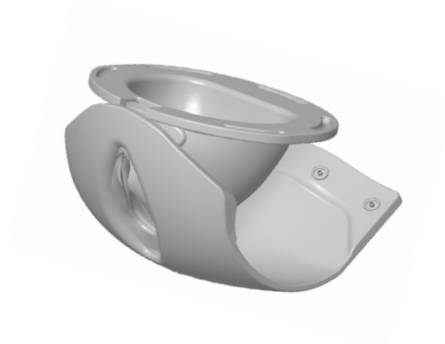


PROMPT Flex 用子宮頸

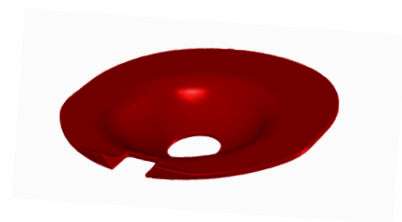

骨盤リング



固定用ストラップ

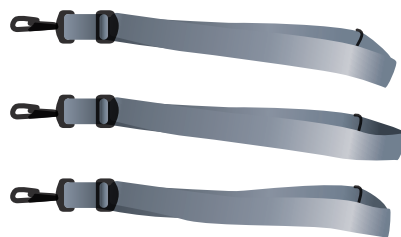

PROMPT Flex 用潤滑剤（500ml）

110199




キャリーケース



ART マット（PROMPT Flex 用）

160133

※別冊ガイド参照  
(折り曲げ厳禁)

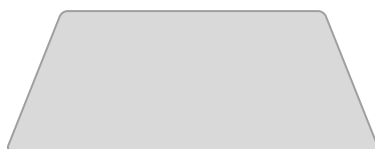

## 安全と清掃の 手引き

PROMPT Flex 分娩トレーナースタンダードセットを  
使用される前に、この安全の手引きを確認してください。

### DO's



- このガイドのすべての指示に従ってください。
- このガイドは大切に保管してください。
- すべての警告に注意してください。

- 本製品に付属の潤滑剤、模擬血液以外は使用しないでください。
- 推奨外品の使用は、シミュレーターの劣化、破損の原因となります。



- 常に手袋を着用し、貴金属はすべて外してください。爪や指輪などの鋭利な表面は、製品損傷の原因となります。

- 潤滑剤は分娩毎に子宮頸、産道、胎児に塗布してください。



- 使用後は毎回、柔らかい布やスポンジを中性洗剤を混ぜたお湯につけ、しっかり絞った後、やさしく拭いてください。母体と胎児の表面についた余分な潤滑剤をきれいに取り除いてください。

### DONT's



- 熱源の近くに設置したり、炎にさらしたり、火の近くで使用したりしないでください。
- 本製品の近くまたは上で可燃性の溶剤を使用しないでください。

- メーカーが提供するアタッチメント以外は使用しないでください。



- 貴金属をつけたまま使用しないでください。

- 製品を分解したり修理しようとしたりしないでください。製品の点検や修理は販売代理店に連絡をしてください。



### 保管と移動



- 人身事故や製品の破損を防ぐため、輸送・保管時には必ず適切な梱包・固定を行ってください。




潤滑剤の塗布が不十分な場合、胎児や胎盤が押し出されるときに産道や子宮頸を傷つけることがあります。



## セットアップ

### 腹壁を脱着する

腹壁は必要に応じ骨盤内での胎児の位置を正確に把握できるよう、容易に着脱することができます。

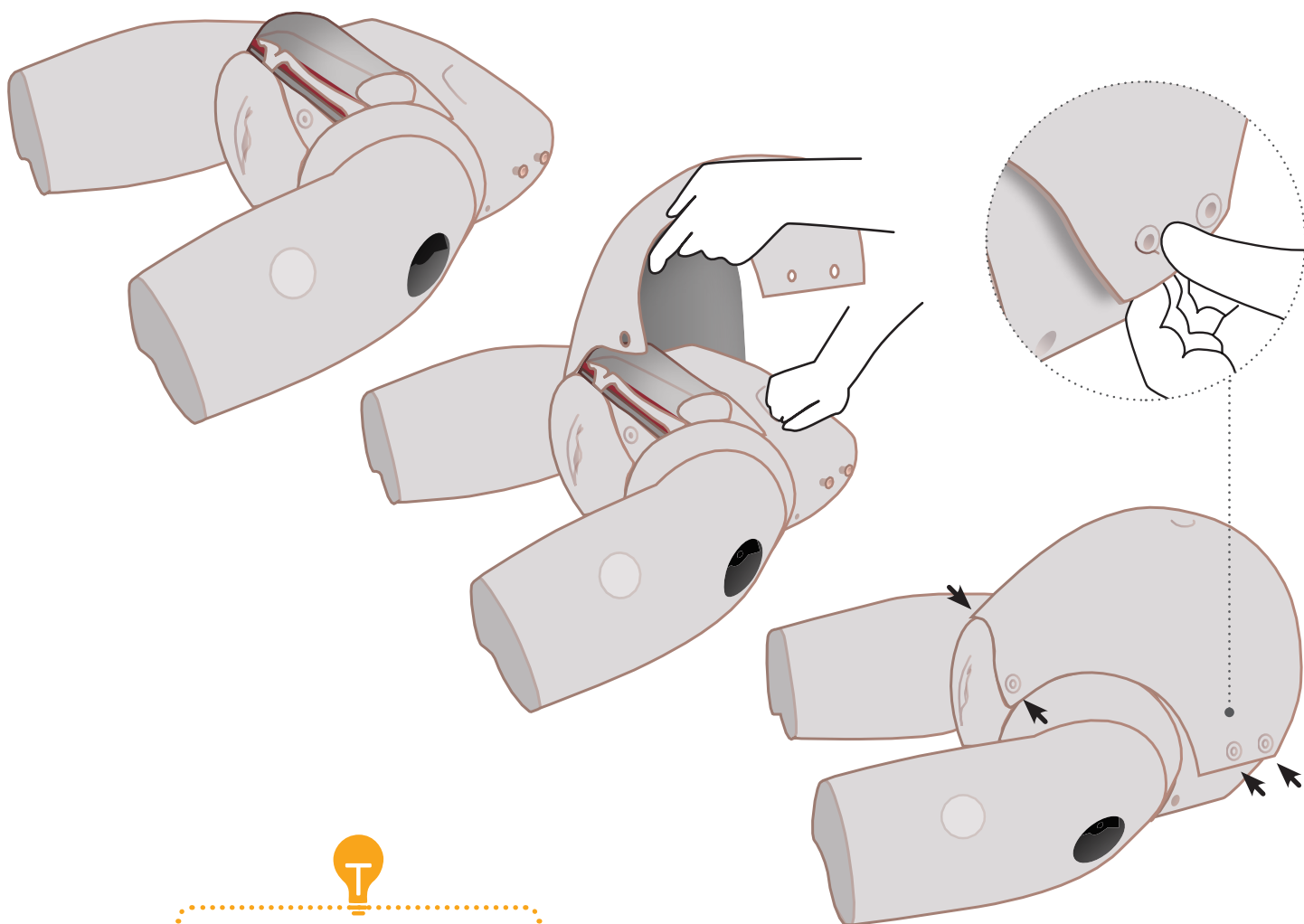

必要に応じ、固定用ストラップで机の上にしっかりと固定します。

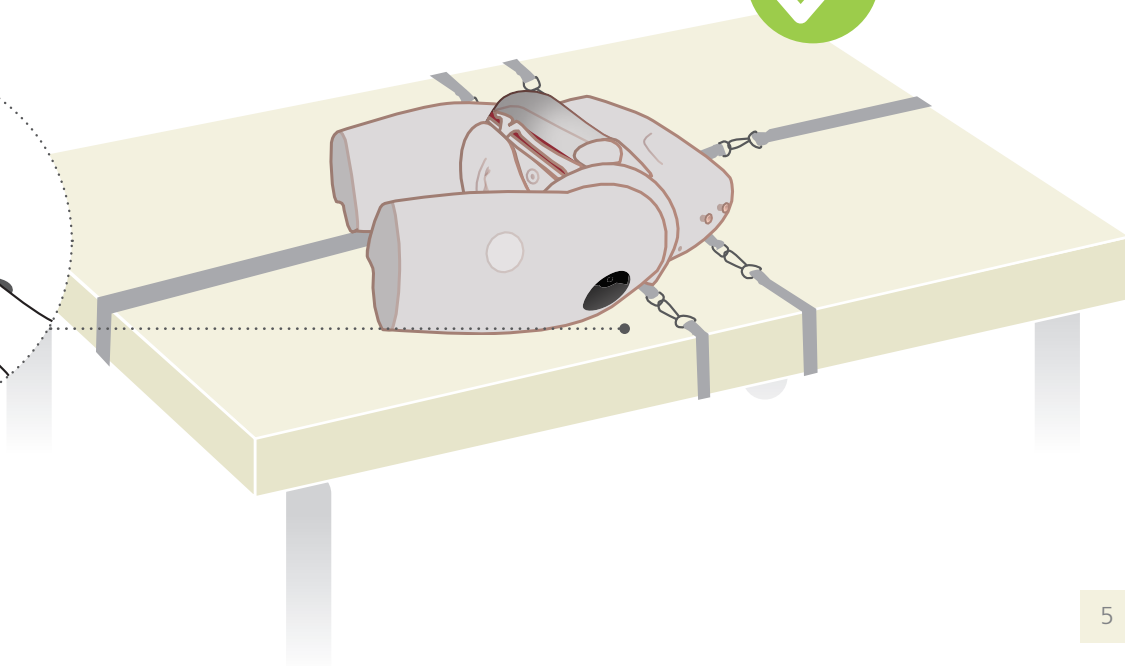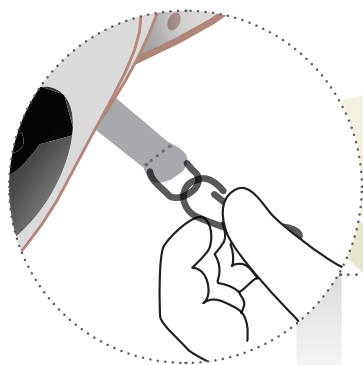


## セットアップ


子宮頸を取り外す

| 娩出法       | 子宮頸の要否 |
|-----------|--------|
| 正常分娩      | ●      |
| 骨盤位分娩     | —      |
| 鉗子分娩／吸引分娩 | —      |
| 肩甲難産      | —      |


1

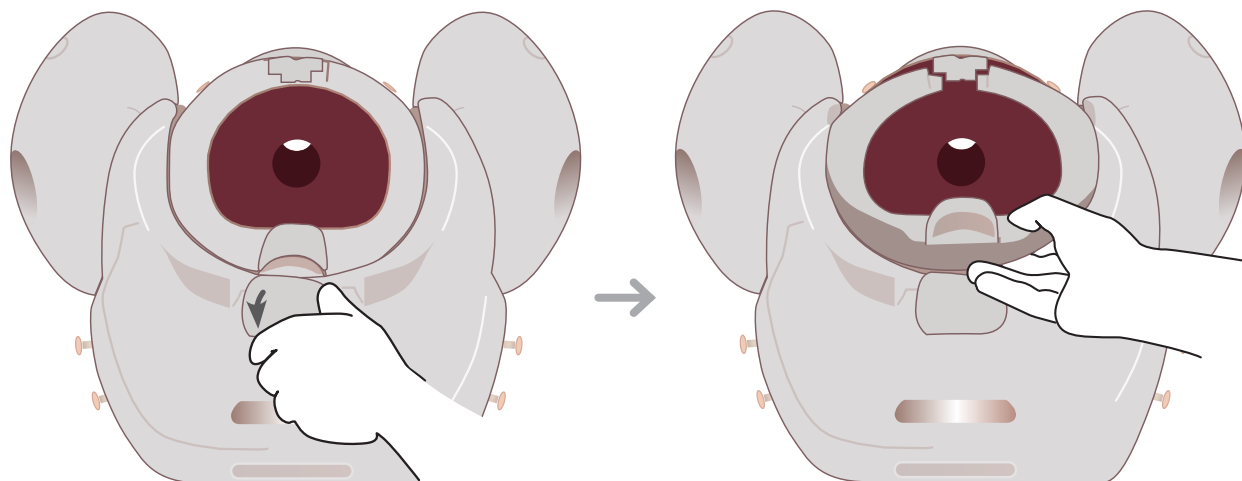

2

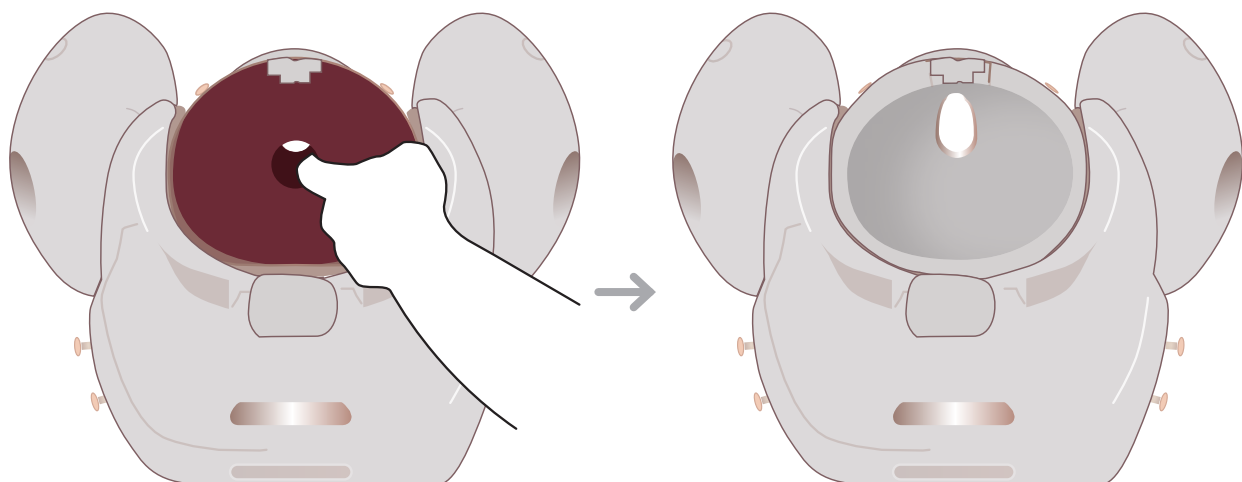


3

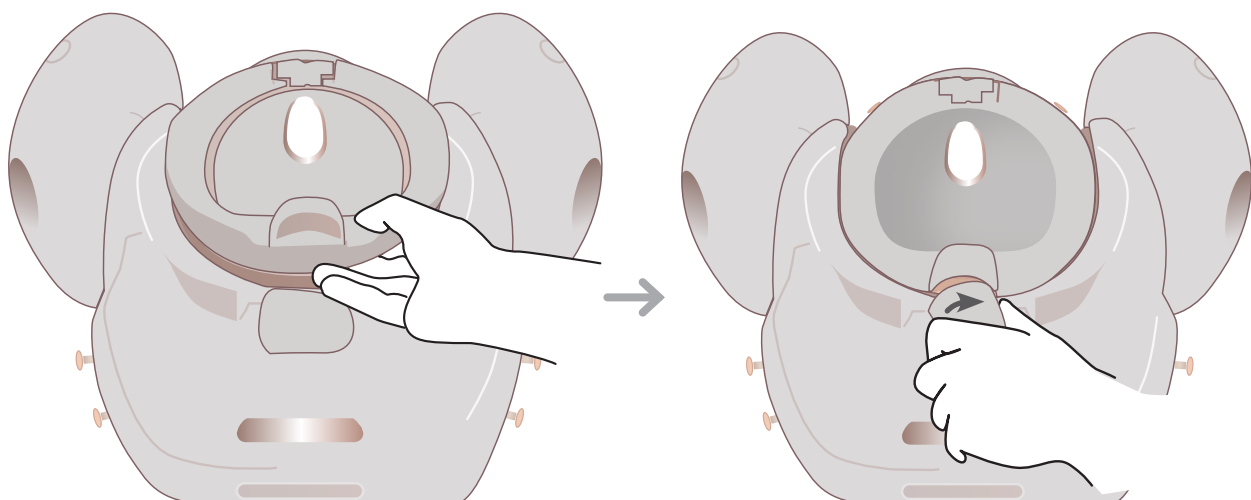


## セットアップ

### 娩出法ごとのセットアップ


分娩前に必ず潤滑剤を塗ってください。

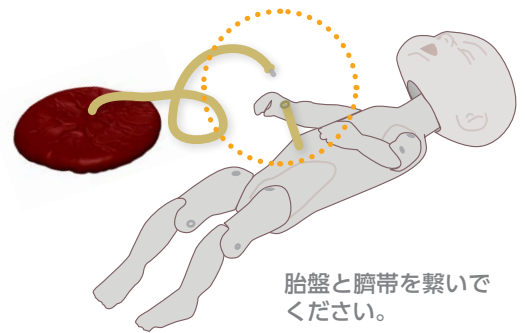





#### 正常分娩

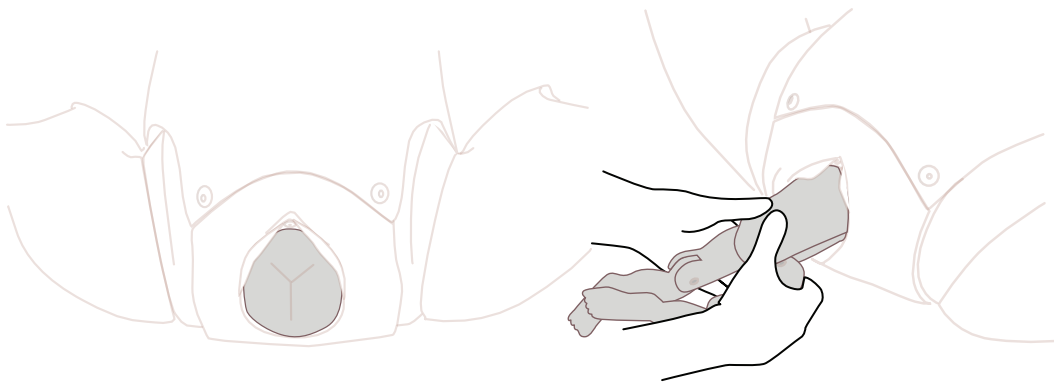

#### 骨盤位分娩

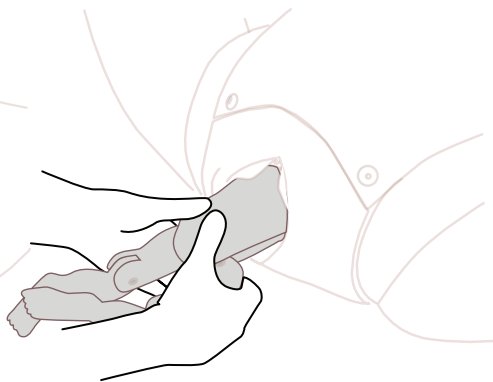


#### 肩甲難産

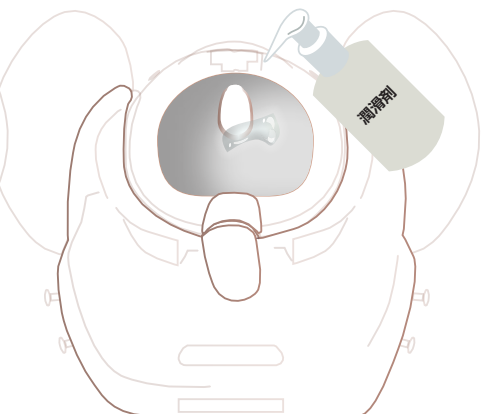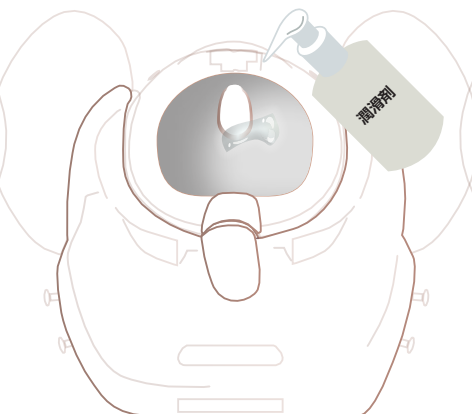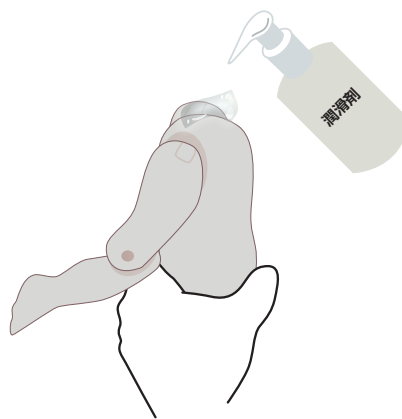
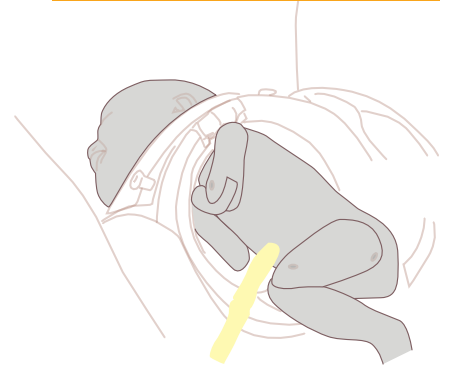






正常分娩を正しく行うには、胎児を骨盤内で回旋させながら押しだします。


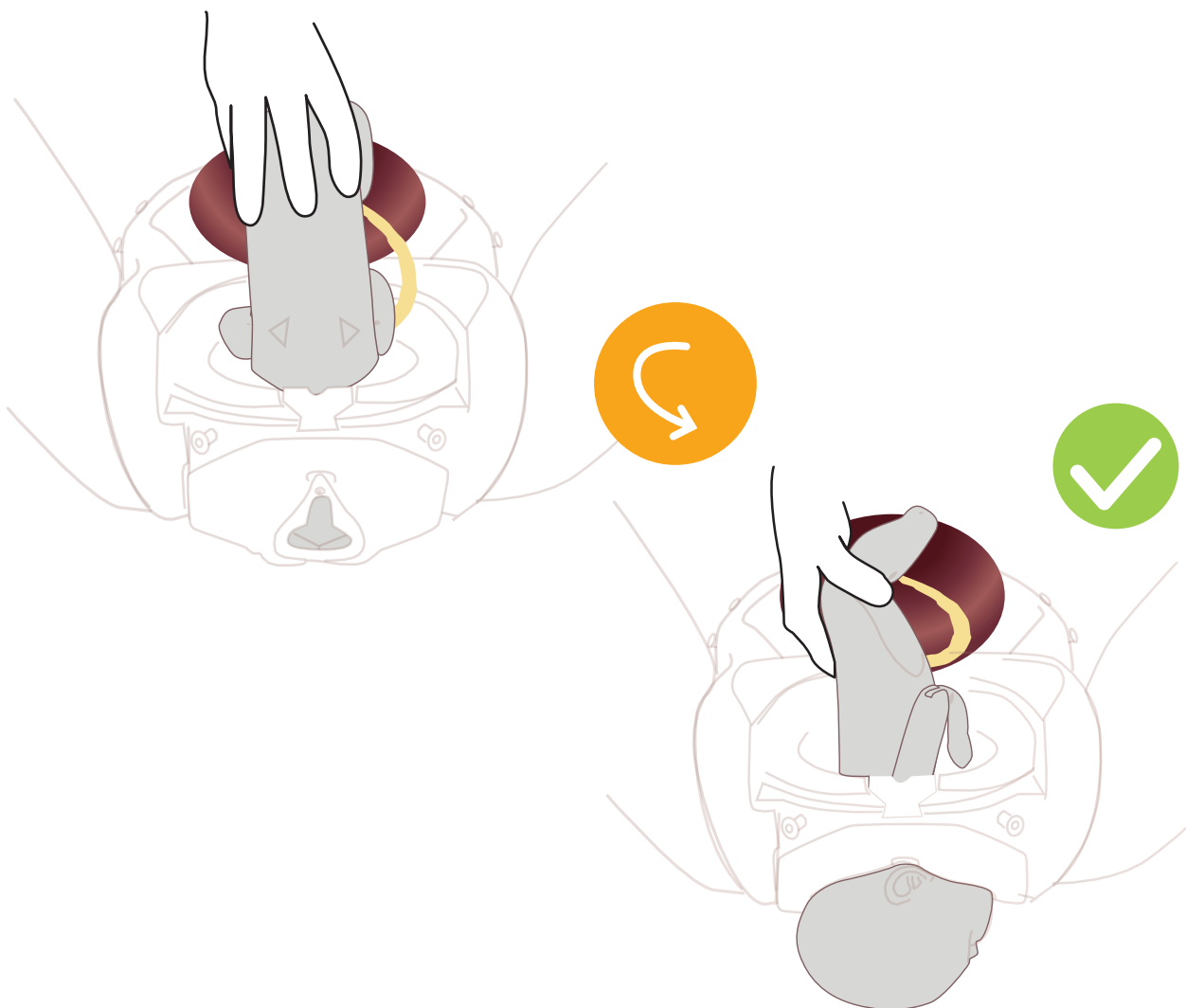




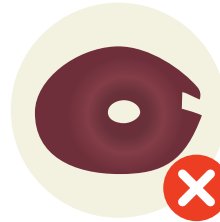
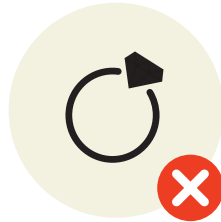


胎児の頭を押して、陣痛やいきみのシミュレーションします。  
分娩中、胎児の腕は曲げた状態で固定してください。

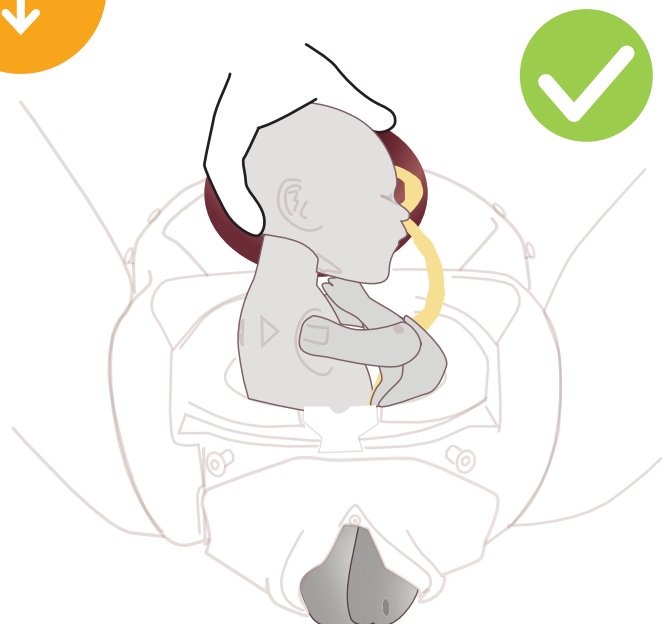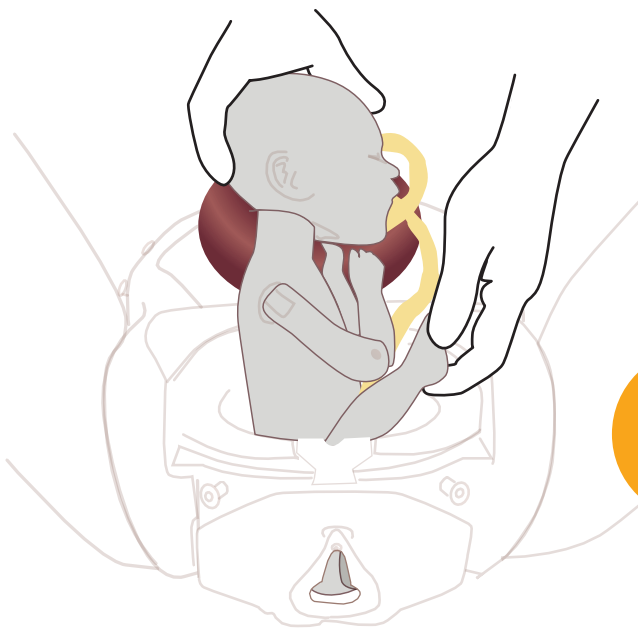

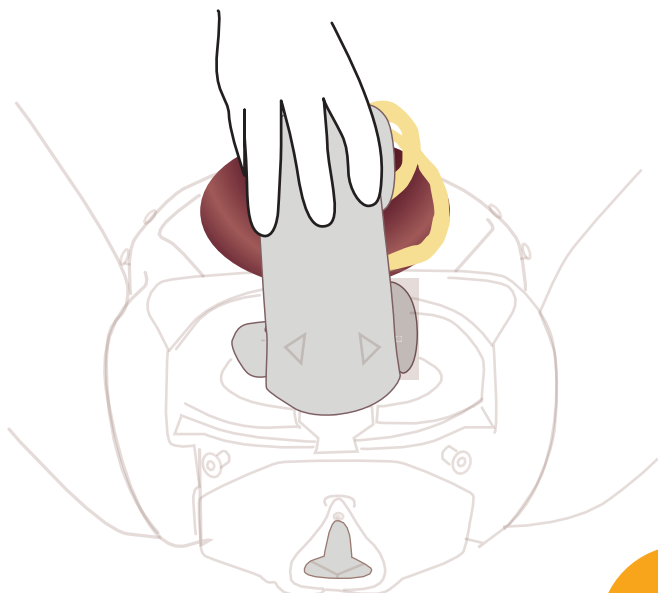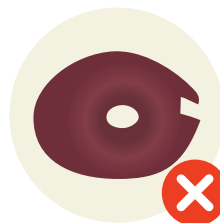


胎児の前在肩甲が母体の恥骨結合後方に押し込められていることを確認してください。

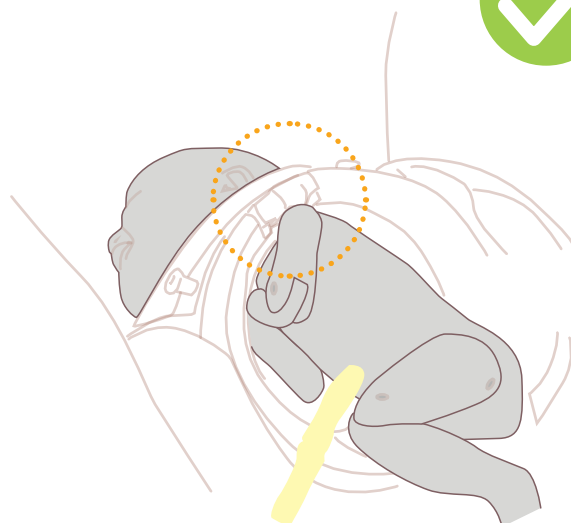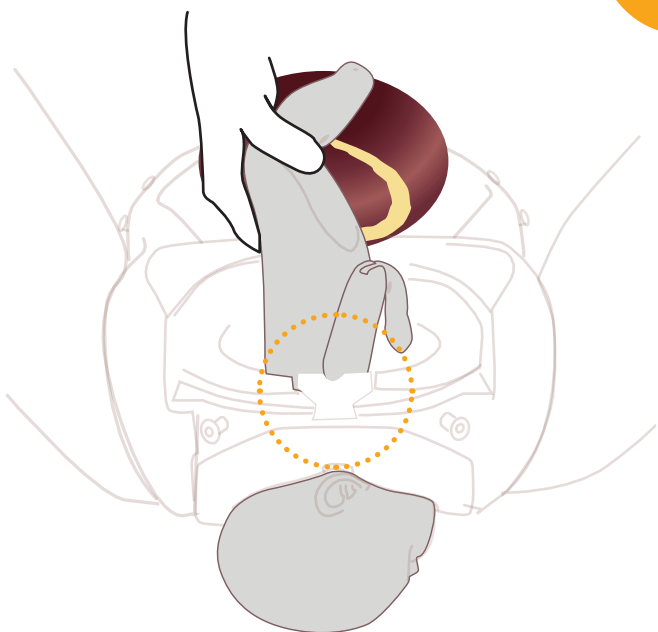


## 清掃と保管

### 会陰部の脱着


使用後は毎回、柔らかい布やスポンジを中性洗剤を混ぜたお湯につけ、しっかり絞った後、母体と胎児の表面の潤滑剤をきれいに拭き取ってください。

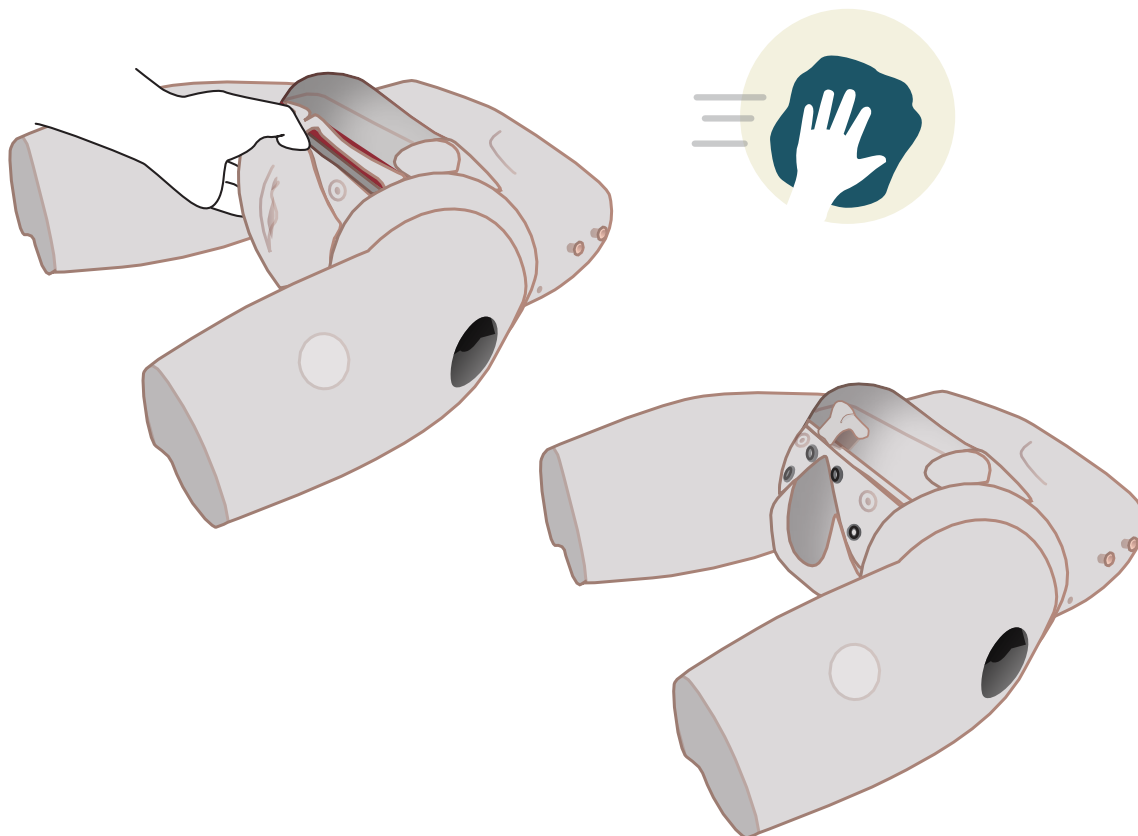

### 筋肉注射パッドの交換と清掃

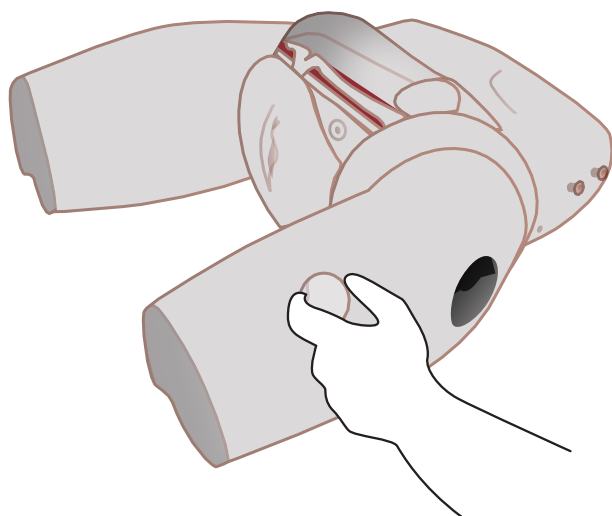

### 大腿部の調整

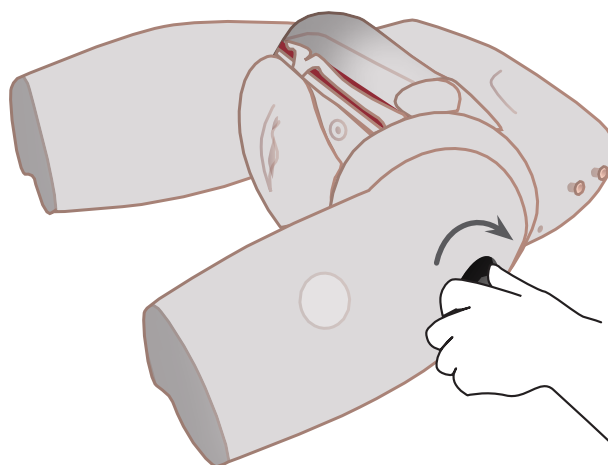

YOU MAY  
ALSO BE  
INTERESTED IN...


**180110**

下腿（膝関節モジュール付）



**180102**

PROMPT Flex 内診モジュール

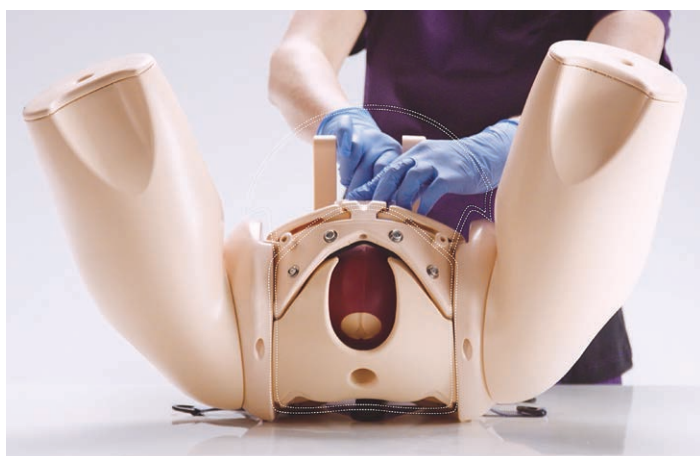

**180101**

PROMPT Flex 産後出血モジュール



**180300**

PROMPT Flex 帝王切開 IFH モジュール



**180180**

PROMPT Flex 子宮頸管縫縮術モジュール



**Part No: 365-100**

第3版 2024年5月  
©2024 Limbs & Things

**NLS 日本ライトサービス株式会社**  
Nihon Light Service, Inc.

医学教育機器事業部

〒113-0033 東京都文京区本郷 2-3-9 ツインビューお茶の水 2F  
03-3815-2354  
03-3818-6843  
igaku@nlsinc.co.jp  
www.medical-sim.jp