



USER GUIDE



PROMPT Flex 器械分娩AVB モジュール

180310

インデックス

商品構成	3
安全と清掃の手引き	4
セットアップ	5
• PROMPT Flex母体の準備	5
- 腹壁を取り外す	5
- 分娩用骨盤リング、子宮頸、会陰を取り外す	6
• 鉗子分娩のセットアップ	7
• 吸引分娩のセットアップ	10
クリーニングと保管	14

TAKE A LOOK AT
OUR **PROMPT FLEX**
VIDEO



VISIT THE WEBSITE
limbsandthings.com

OR YOUTUBE CHANNEL
[youtube.com/limbsandthings](https://www.youtube.com/limbsandthings)

商品構成

器械分娩AVB用会陰

180312



子宮固定フォーム

180175



器械分娩AVB用子宮

180311



器械分娩AVB用児頭マスク

180313



器械分娩AVB用インサート

180314



構成に含まれませんので、ご用意ください。

※PRMPTFlex母体と胎児が必要

PROMPT Flex 分娩トレーナー

スタンダード

180100

アドバンス

180106



安全と清掃の 手引き

PROMPT Flex器械分娩AVB モジュールを使用される前に、
この安全の手引きを確認してください。

DO's



このガイドのすべての指示に従ってください。このガイドは大切に保管してください。すべての警告に注意してください

常に手袋を着用し、貴金属はすべて外してください。爪や指輪などの鋭利な表面は、製品損傷の原因となります。



潤滑剤はPROMPT Flex用潤滑剤を使用してください。非推奨品の使用はシミュレーターの劣化や損傷の原因となります。

使用前には必ず子宮、産道、胎児に潤滑剤を塗布してください。



使用後は毎回、中性洗剤を混ぜたお湯に柔らかい布やスポンジつけ、しっかり絞った後、優しく拭いてください。

DON'Ts



熱源の近くに設置したり、炎にさらしたり、火の近くで使用したりしないでください。本製品の近くまたは上で可燃性の溶剤を使用しないでください。

メーカーが提供するアタッチメント以外は使用しないでください。



製品を分解したり修理しようとしたりしないでください。製品の点検や修理は販売代理店に連絡をしてください。

本製品は玩具ではありませんので、お子様はご使用になれません。



保管と移動




人身事故や製品の破損を防ぐため、輸送・保管時には必ず適切な梱包・固定を行ってください。

セットアップ

PROMPT Flex母体の準備





腹壁を取り外す

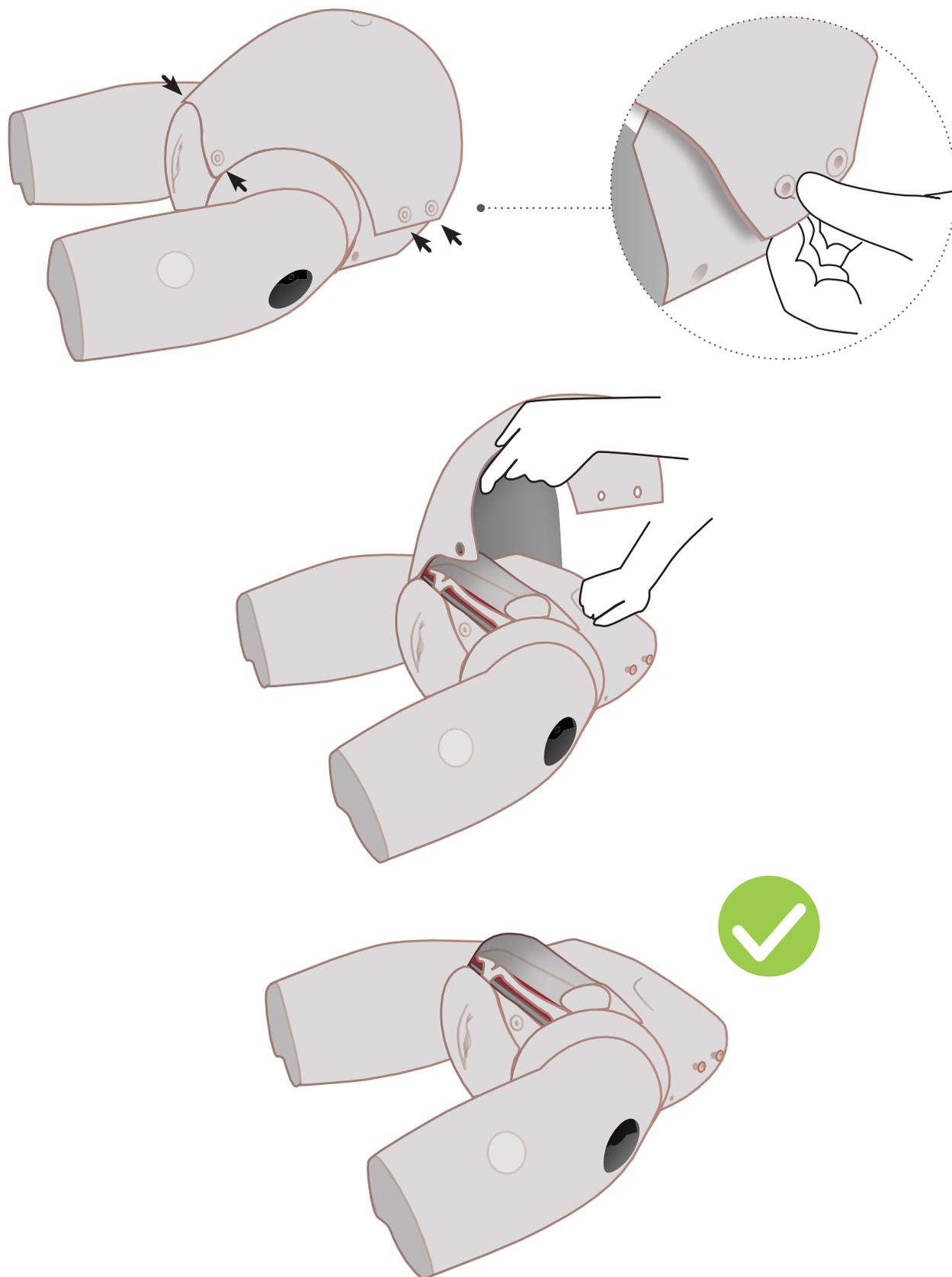

セットアップ


PROMPT Flex母体の準備

分娩用骨盤リング、子宮頸、会陰を取り外す

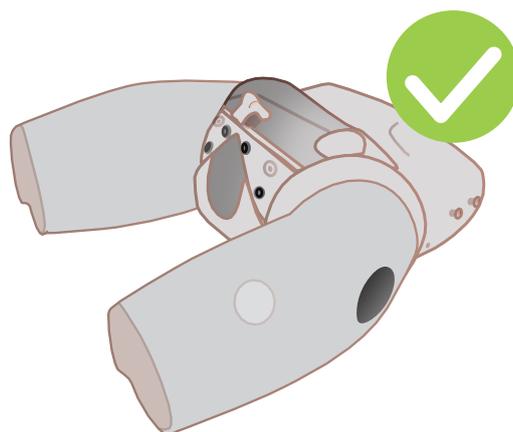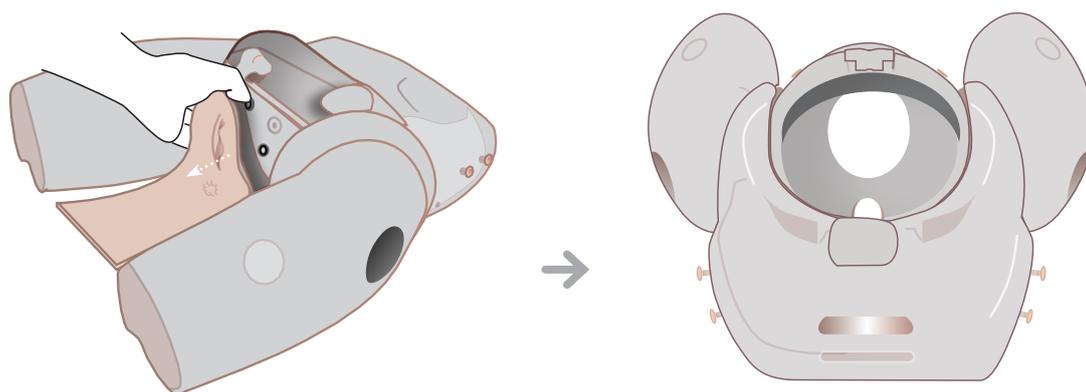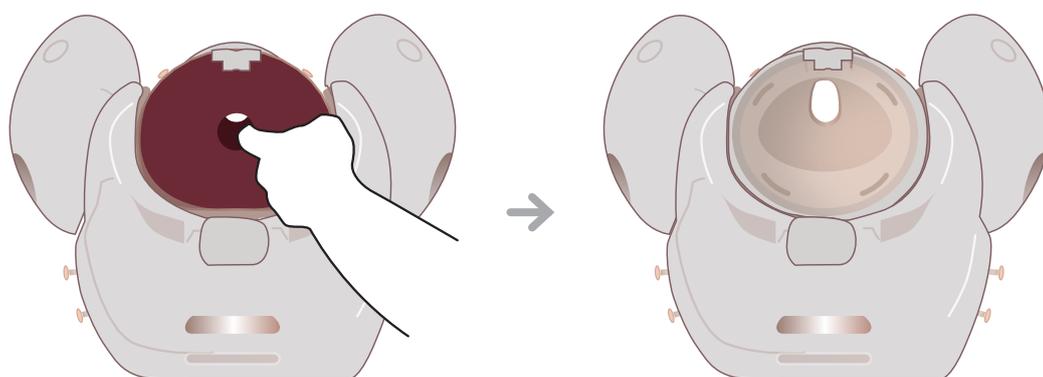
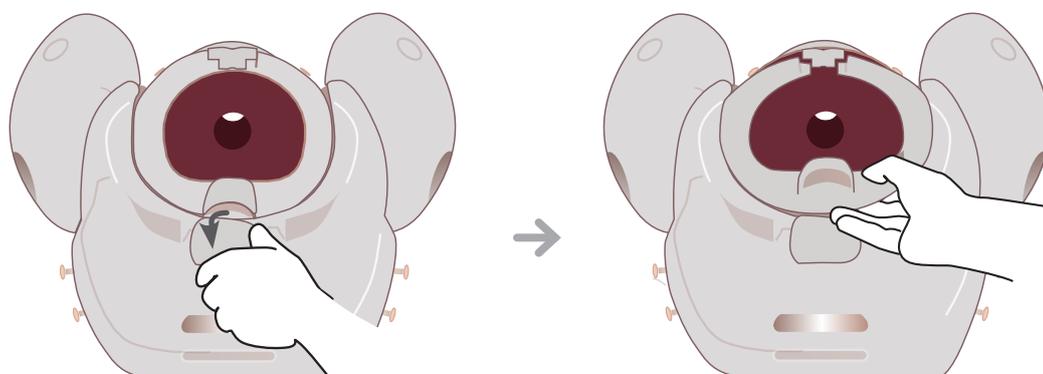


セットアップ

鉗子分娩のセットアップ


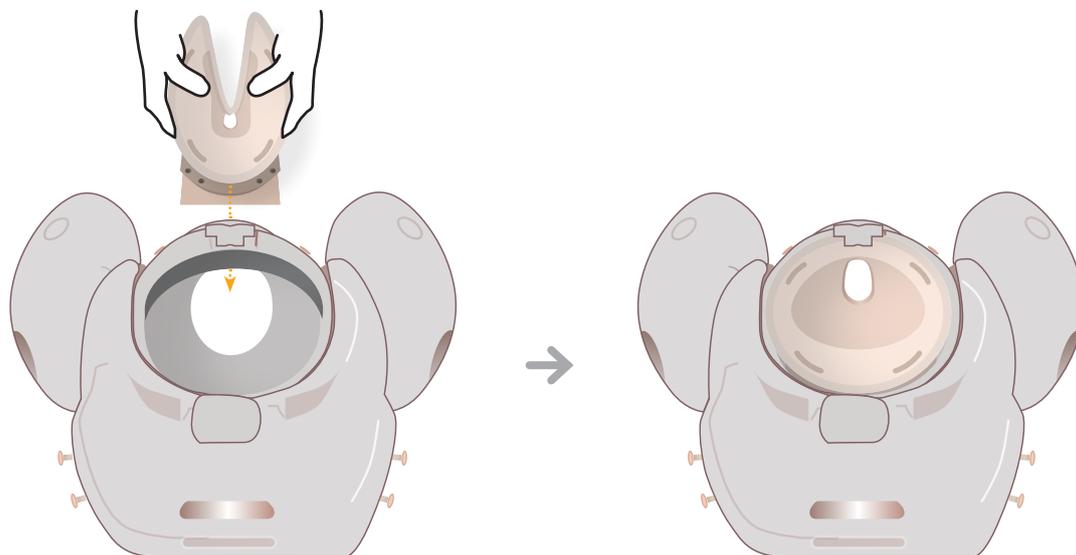


インサートの矢印面が上、
矢印の先を恥骨側へ

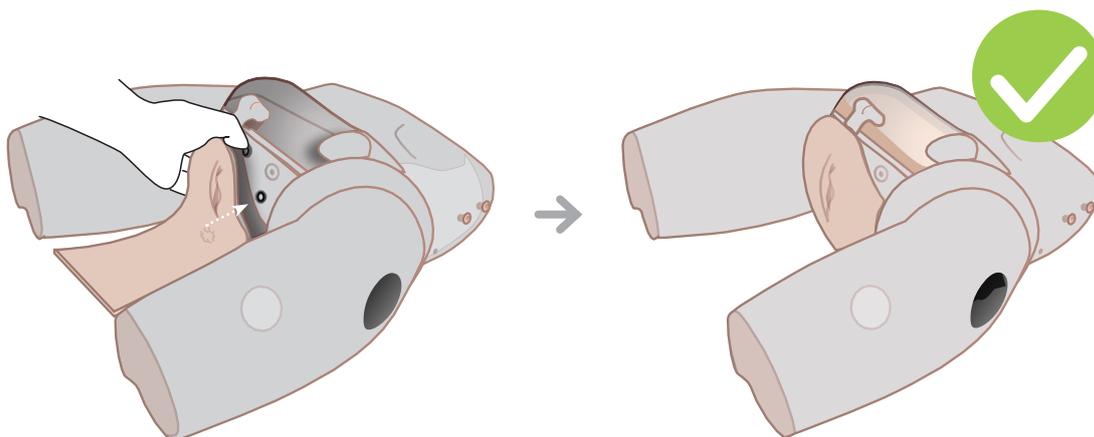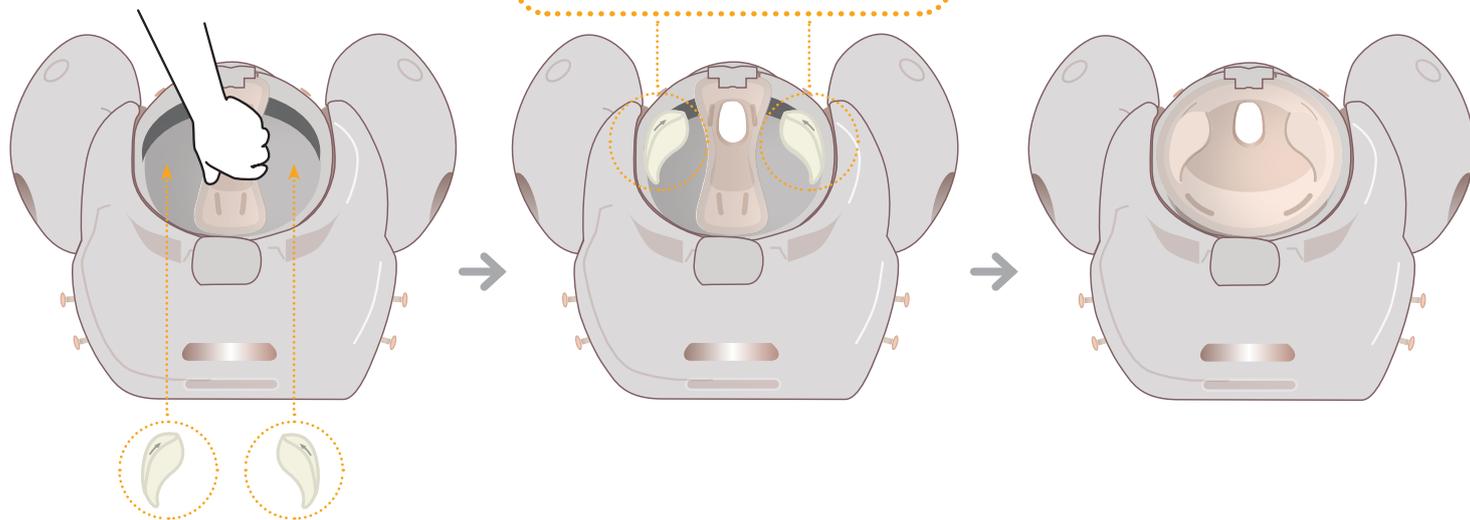




セットアップ

鉗子分娩のセットアップ

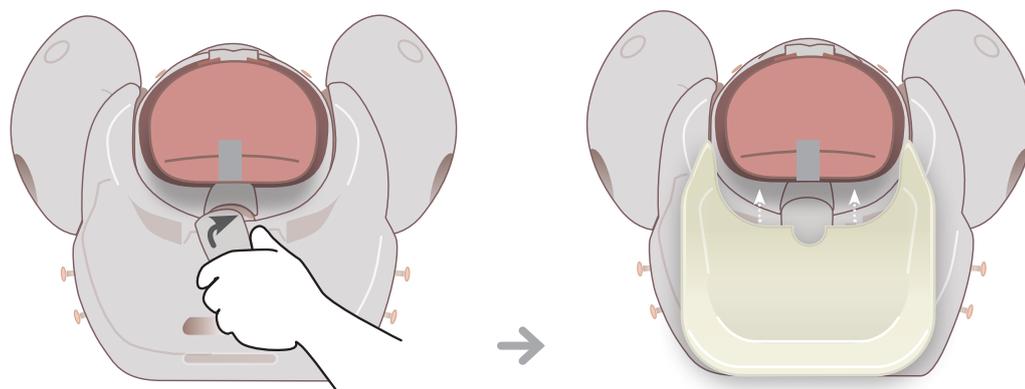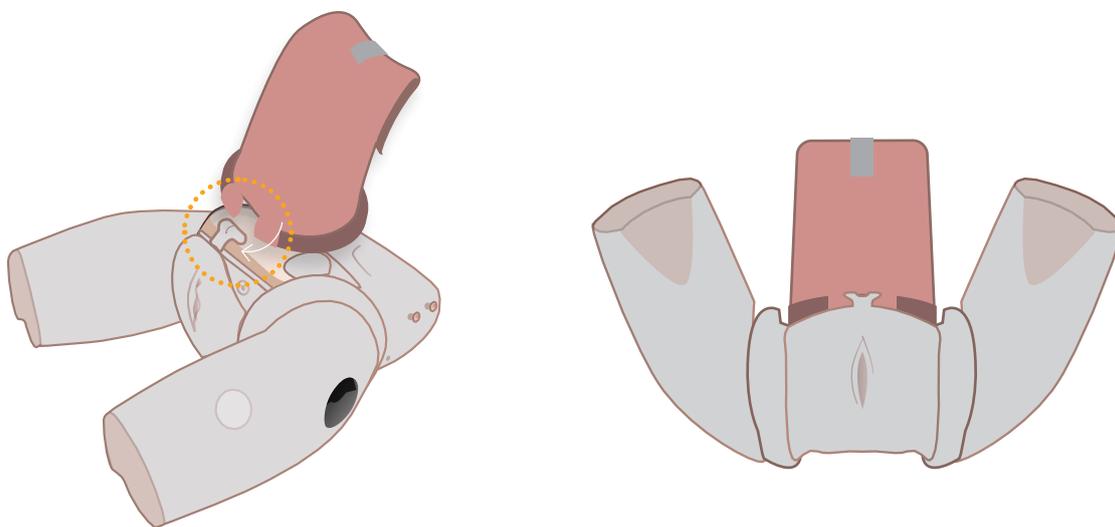



セットアップ

鉗子分娩のセットアップ

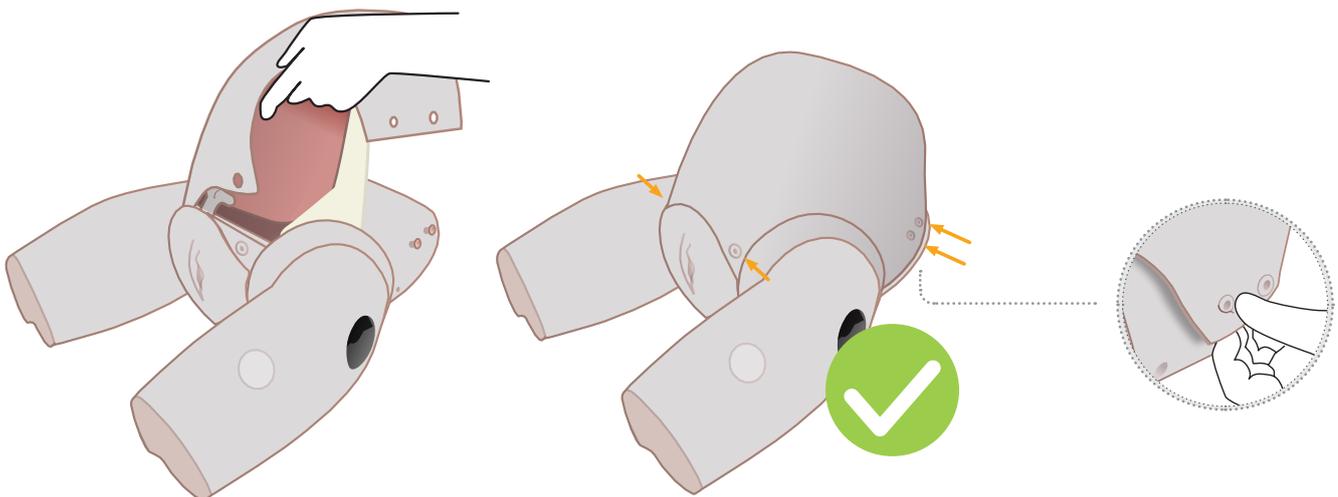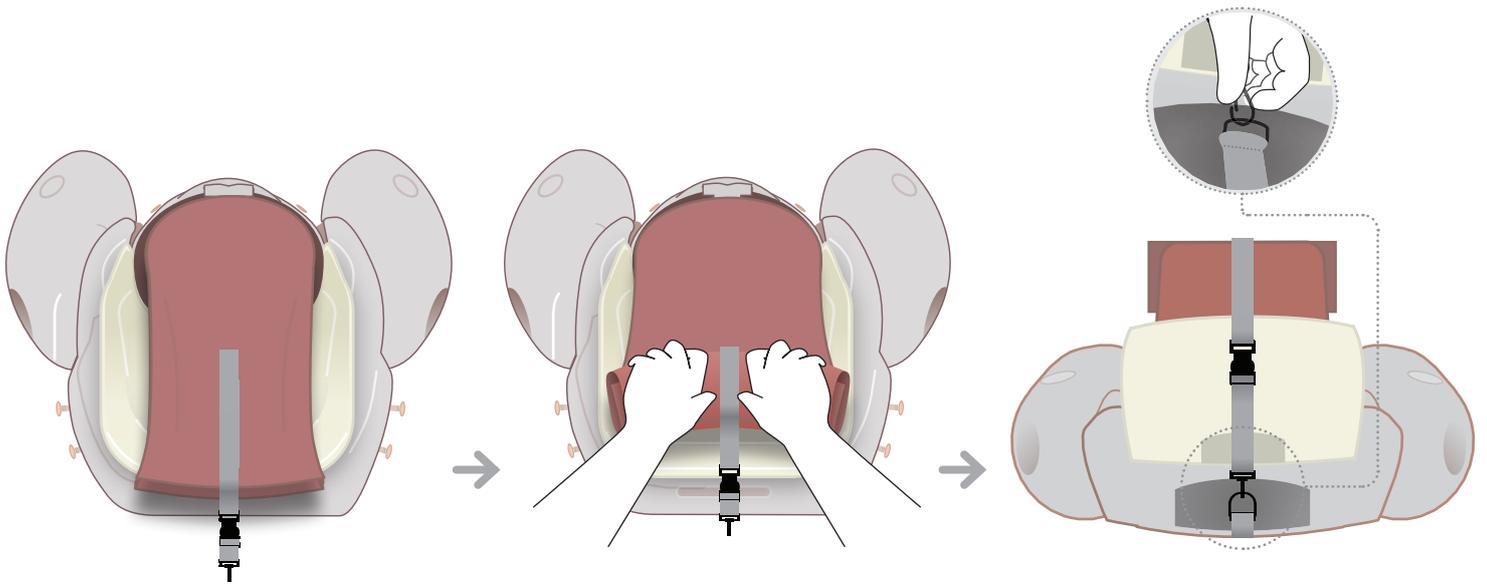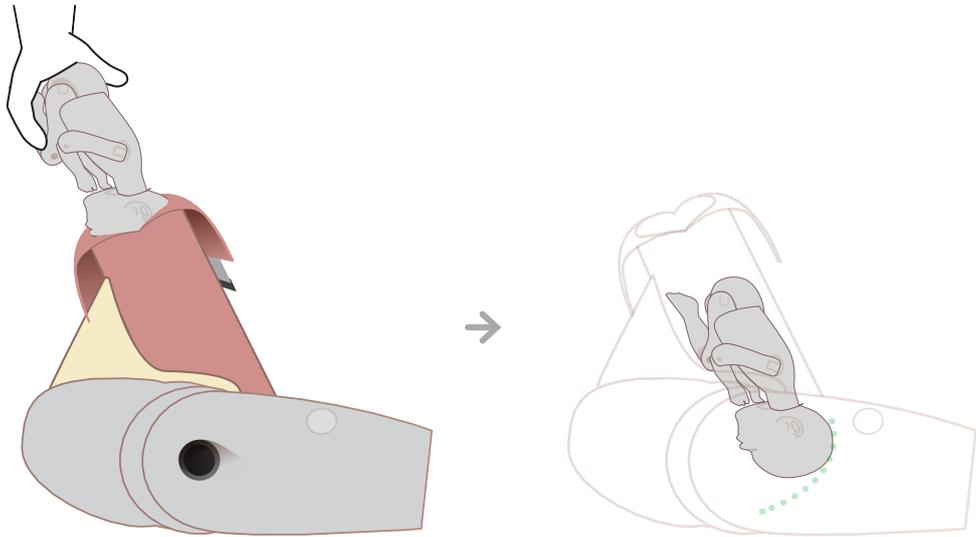






セットアップ

吸引分娩のセットアップ

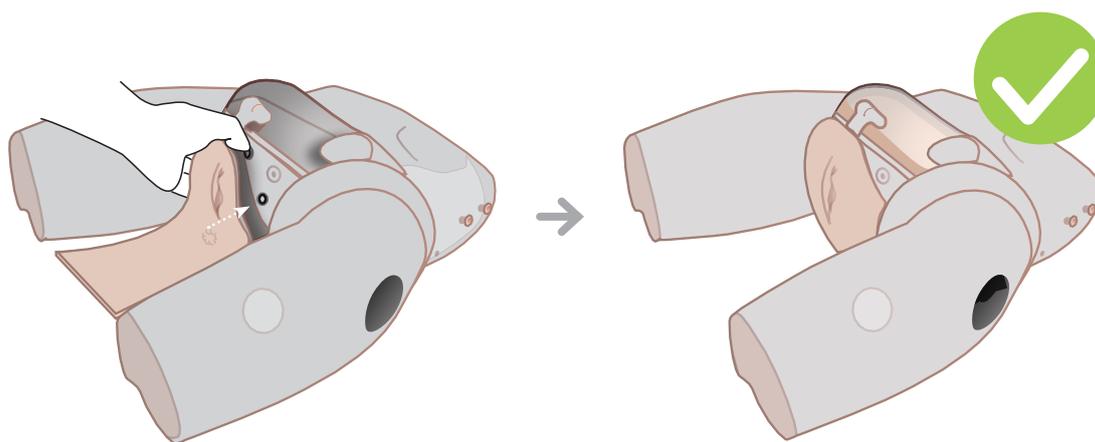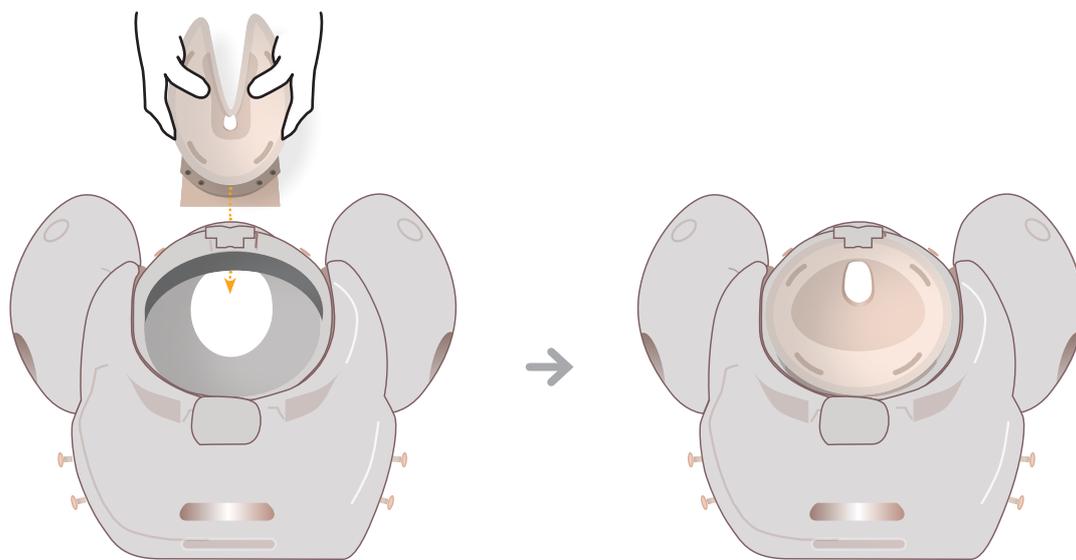




セットアップ

吸引分娩のセットアップ

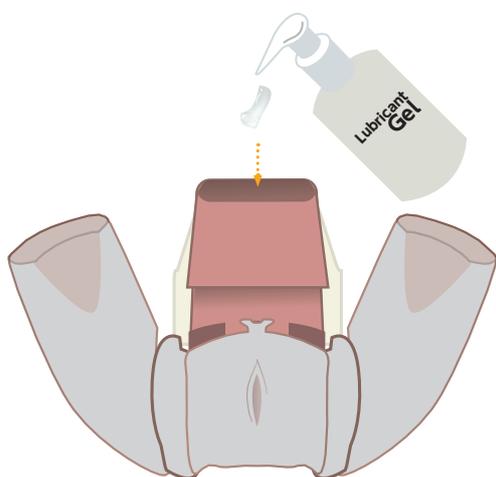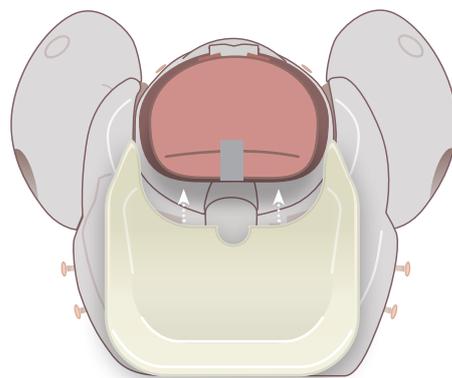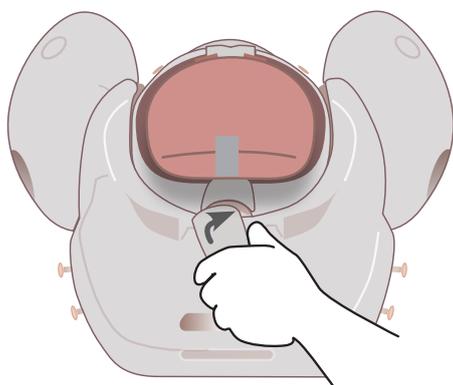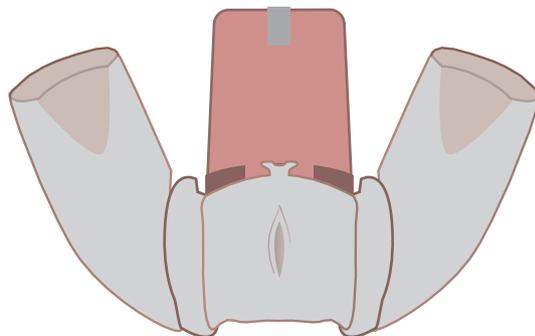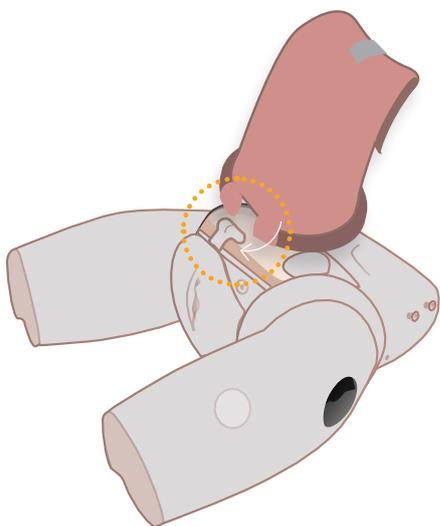






マスク装着時、事前に
児頭の潤滑剤はすべて除去

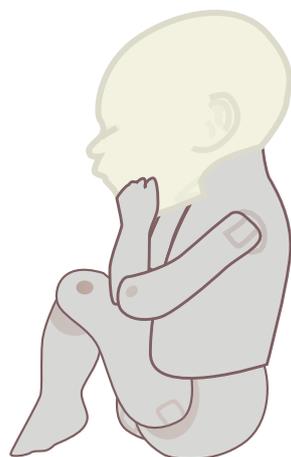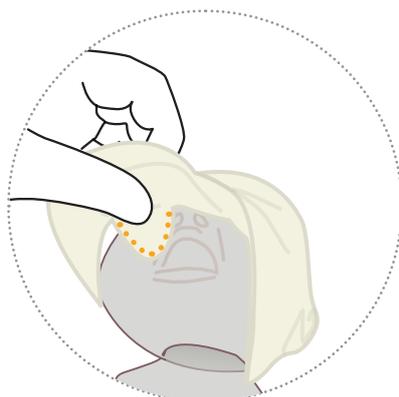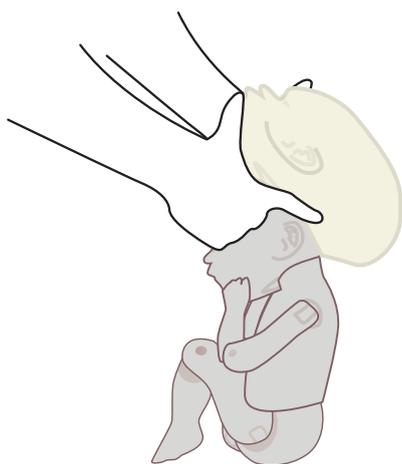


セットアップ

吸引分娩のセットアップ

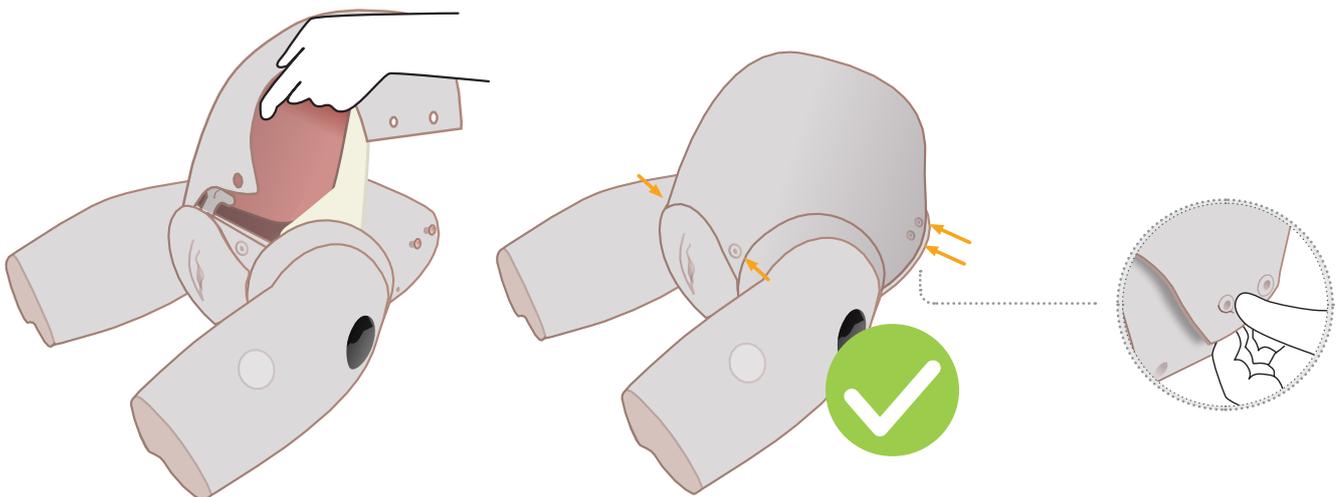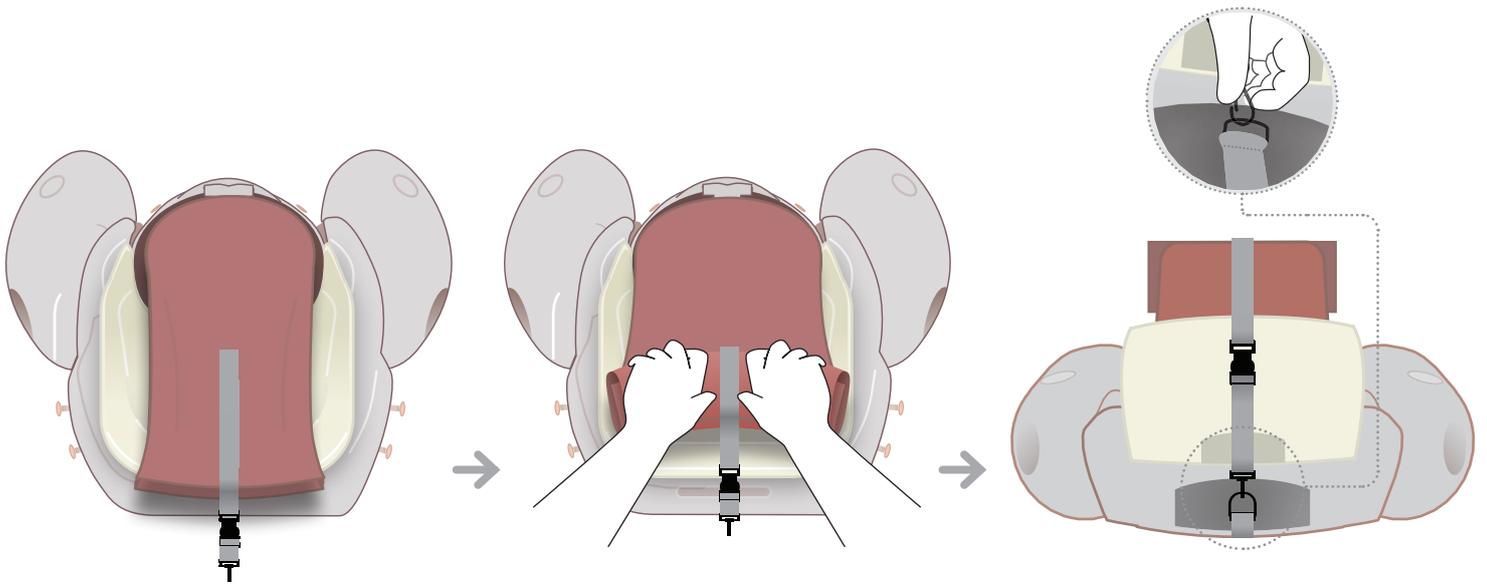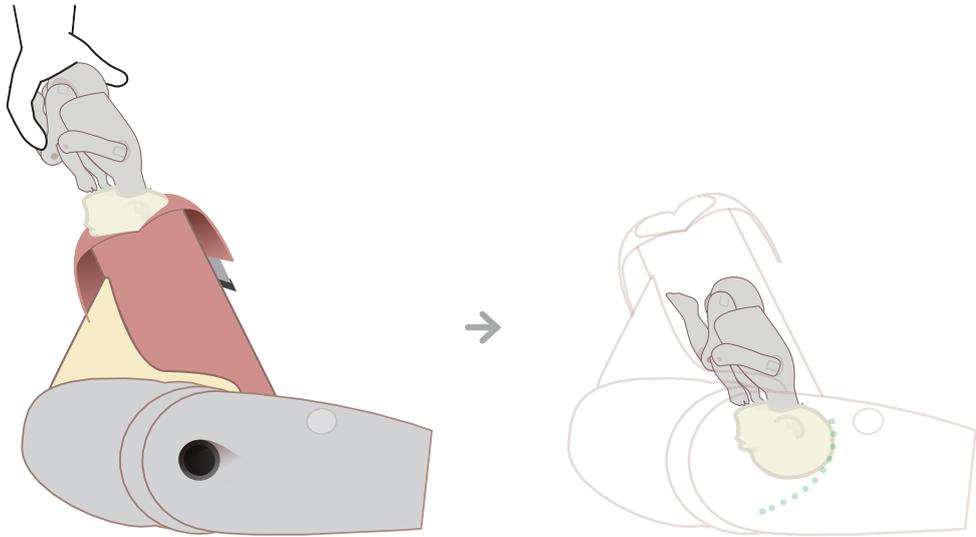

クリーニング と保管

使用後は毎回、中性洗剤を混ぜたお湯に柔らかい布やスポンジつけ、
しっかり絞った後、やさしく拭いてください。

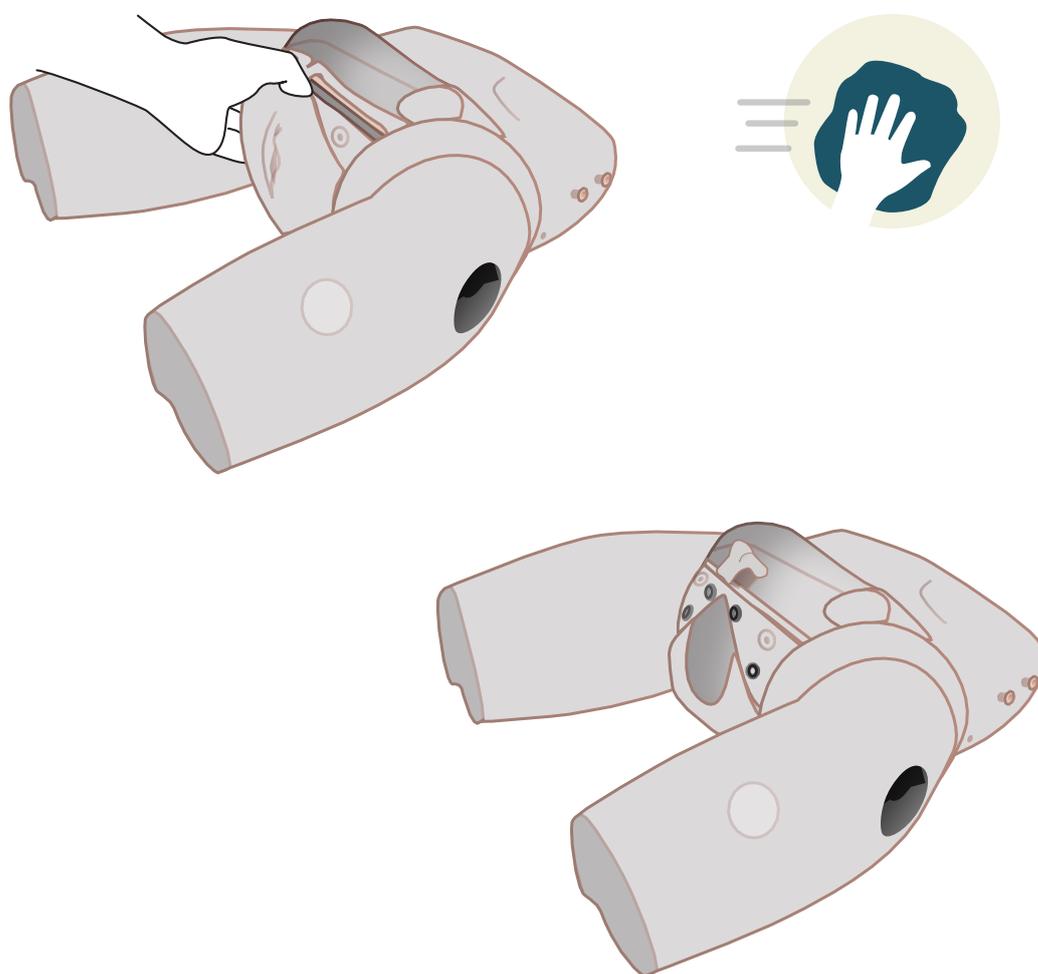

YOU MAY
ALSO BE
INTERESTED IN...

下腿（膝関節モジュール付）



帝王切開IFHモジュール



内診モジュール



産後出血モジュール



圧迫縫合用子宮



Part No: 965-542

2023年3月 第1版
© 2023 Limbs & Things

NLS 日本ライトサービス株式会社
Nihon Light Service, Inc.

医学教育機器事業部

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-42-1

03-3815-2354

03-3818-6843

igaku@nlsinc.co.jp

www.medical-sim.jp