


## タブレットへとモデルのペアリング手順

腕モデルの電源を付け、タブレットの電源を ON にしホーム画面になったら以下の手順でモデルとタブレットのペアリングを行ってください。

- 1) 腕モデルの準備をし、モデルの電源をつける。タブレットの「設定」から「接続済みのデバイス」を選択し、「新しいデバイスとペア設定する」を選択する。

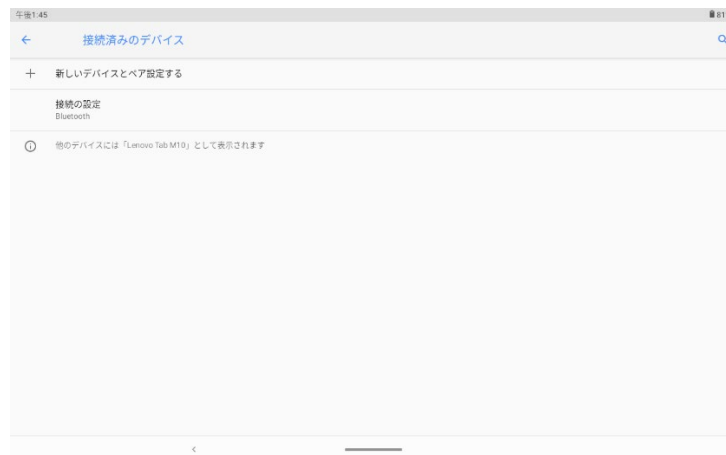

少し待つと腕モデルのシリアル番号が表示される。モデルのシリアルを選択し、ペアリング設定のパスコード「56789」を入力し登録を完了させる。





- 2) ホームのデスクトップ画面の CEAB2 アプリのアイコンを選択し、アプリを起動する。  
位置情報の取得については「許可しない」、Bluetooth への接続は「許可する」とする。
- 3) 任意のトレーニングモードを選択し始めると、初回に限っては「デバイスに接続できません」が表示さる。  
再度画面上のヘッダー部の、Bluetooth マークをタッチすると、ペアリングした腕モデルの端末番号が表示されるので、選択する。これで設定作業は完了。以降は、自動的にタブレットと腕がペアリングした状態で起動できる。



**(注意)**

- ◆ **タブレットの Wifi は常に「OFF」にしてください。** Bluetooth と Wifi は使われる周波帯が同じため、干渉し初期設定された Bluetooth のペアリング設定を解除する場合があります。解除されても、タブレットの Bluetooth の設定画面には設定名称が残っており、一見接続が正しく設定されているように見えます。  
この場合、一旦、最初に設定したペアリング設定を削除し、再度設定（上記工程の NO.7～9）作業を行う必要があります。