



USER GUIDE

エコーガイド 腹腔穿刺トレーナー

160100

インデックス

商品構成	3
安全と清掃の手引き	4
セットアップ	5
• 解剖パーツの取付け / 取りはずし	6
• 腸	6
• 肝臓	7
• 脾臓	7
• 腹腔穿刺パッドの取付け - パッドの使用法	8
• 腹水（水）の注水	9
• リフィルタンクの使用法（任意）	9
トレーニング	10
清掃と保管	11

TAKE A LOOK
AT OUR **VIDEO**



VISIT THE WEBSITE
limbsandthings.com

OR YOUTUBE CHANNEL
youtube.com/limbsandthings

商品構成


皮膚 (スキン)

160101



交換パッド (2枚)

160102

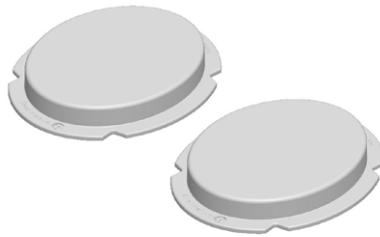

肝臓

160103



脾臓

160104



腸 (固定タイプ) 2個

160105



腸 (浮遊タイプ) 2個

160106



パッド固定枠 (2個)

160107



リフィルタンク

160108



本体



キャリーケース



安全と清掃の 手引き

エコーガイド腹腔穿刺トレーナーを使用される前に、
この安全の手引きを確認してください

DO's



このガイドのすべての指示に従ってください。
このガイドは大切に保管してください。
すべての警告に注意してください。

製造元指定の消耗品に限り使用できます。



製品が破損したり摩耗したりした場合は、修理
する必要があります。お買い上げの販売店にご
連絡ください。修理の手配をご希望の場合は、
お買い上げの販売店までご連絡ください。

柔らかい布やスポンジを、中性洗剤を
混ぜたお湯につけ、しっかりしぼった
後、やさしく拭いてください。



DON'Ts



熱源の近くに設置したり、炎にさらしたり、火
の近くで使用したりしないでください。
本製品の近くや上で可燃性溶剤を使用しないで
ください。

屋外での使用を禁止します。
損傷が生じます。



製品を分解したり修理しようとしたりしないで
ください。製品の点検や修理は販売代理店に連
絡をしてください。

子供の使用を禁止します。



STORAGE & TRANSPORTATION



トレーナーや消耗パーツを含めると、ケースは重
くなります。持ち運びには、気を付けてください。



この製品は両側に水を満水に入れることで重く
なります。（重さ7Kgが加わります。）



ケガや製品損傷を防ぐため、輸送中や保管中に製
品が適切に梱包、固定されていることを常に確認
してください

セットアップ

ご用意ください
(構成に含まれません)

水差し




膿盆



ロート



カテーテル

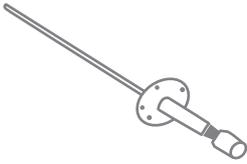


21G穿刺針



メス







エコー (コンベックス)
※任意

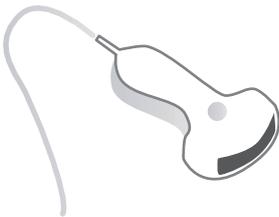

エコーゼリー
※任意



腸(固定/浮遊タイプ)

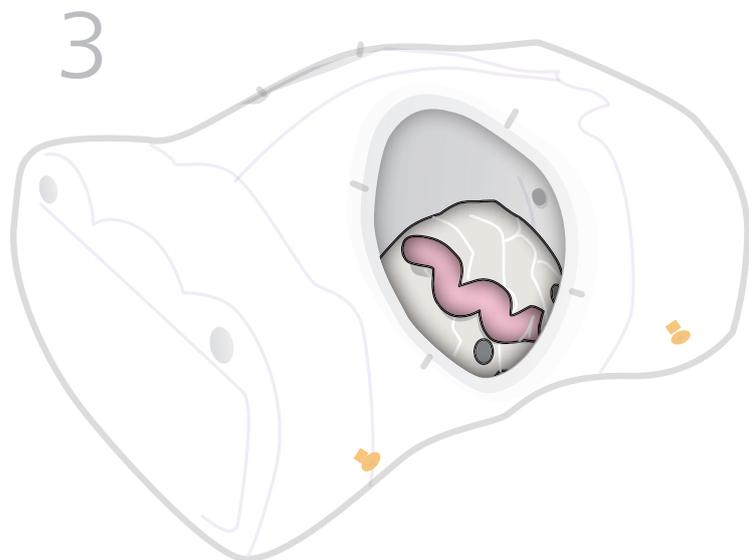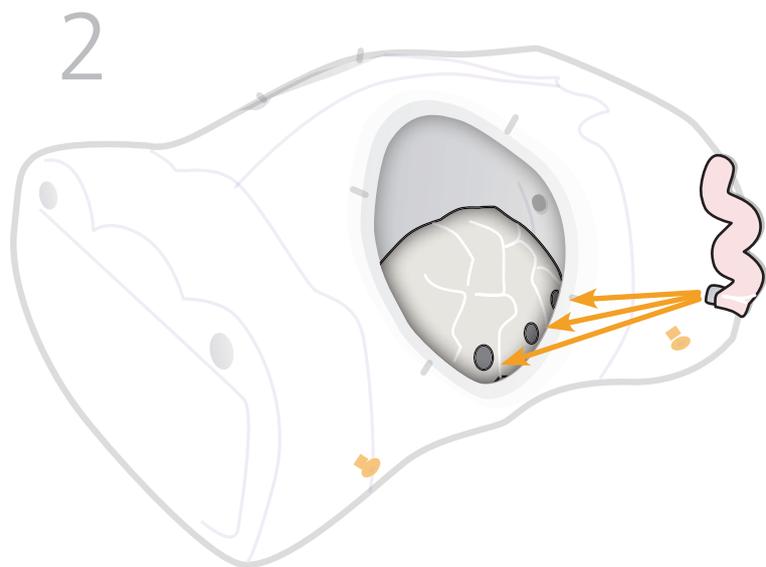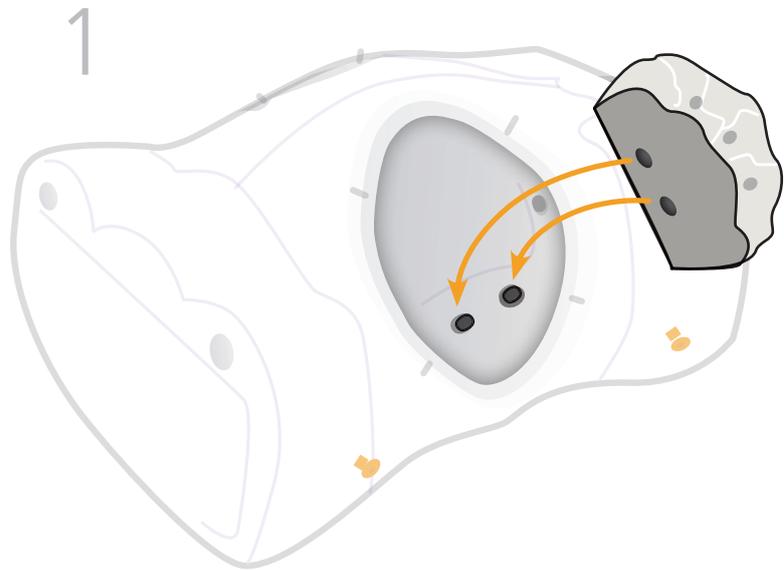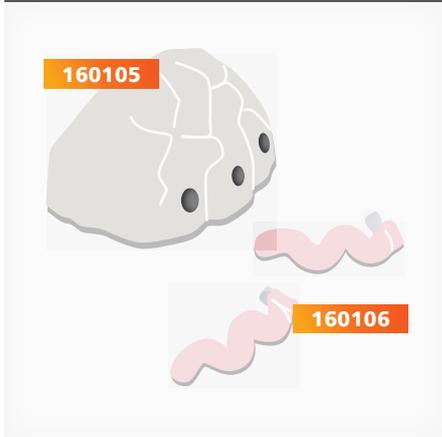

肝臟

160103



右側




脾臟

160104




左側

4

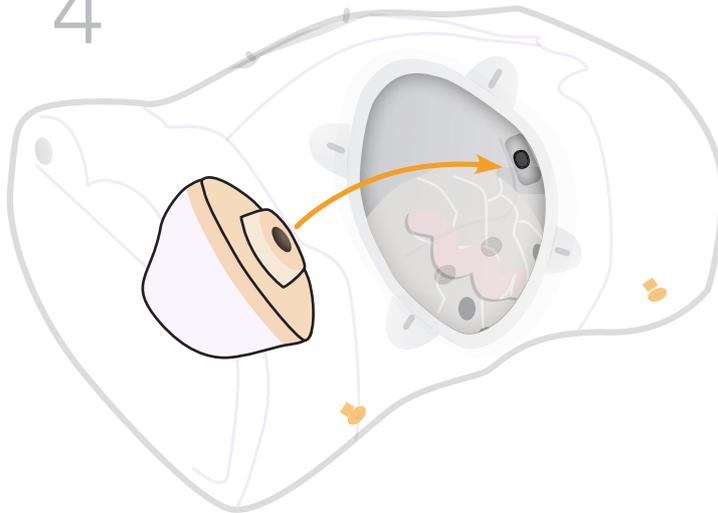

腹腔穿刺パッドの取付け

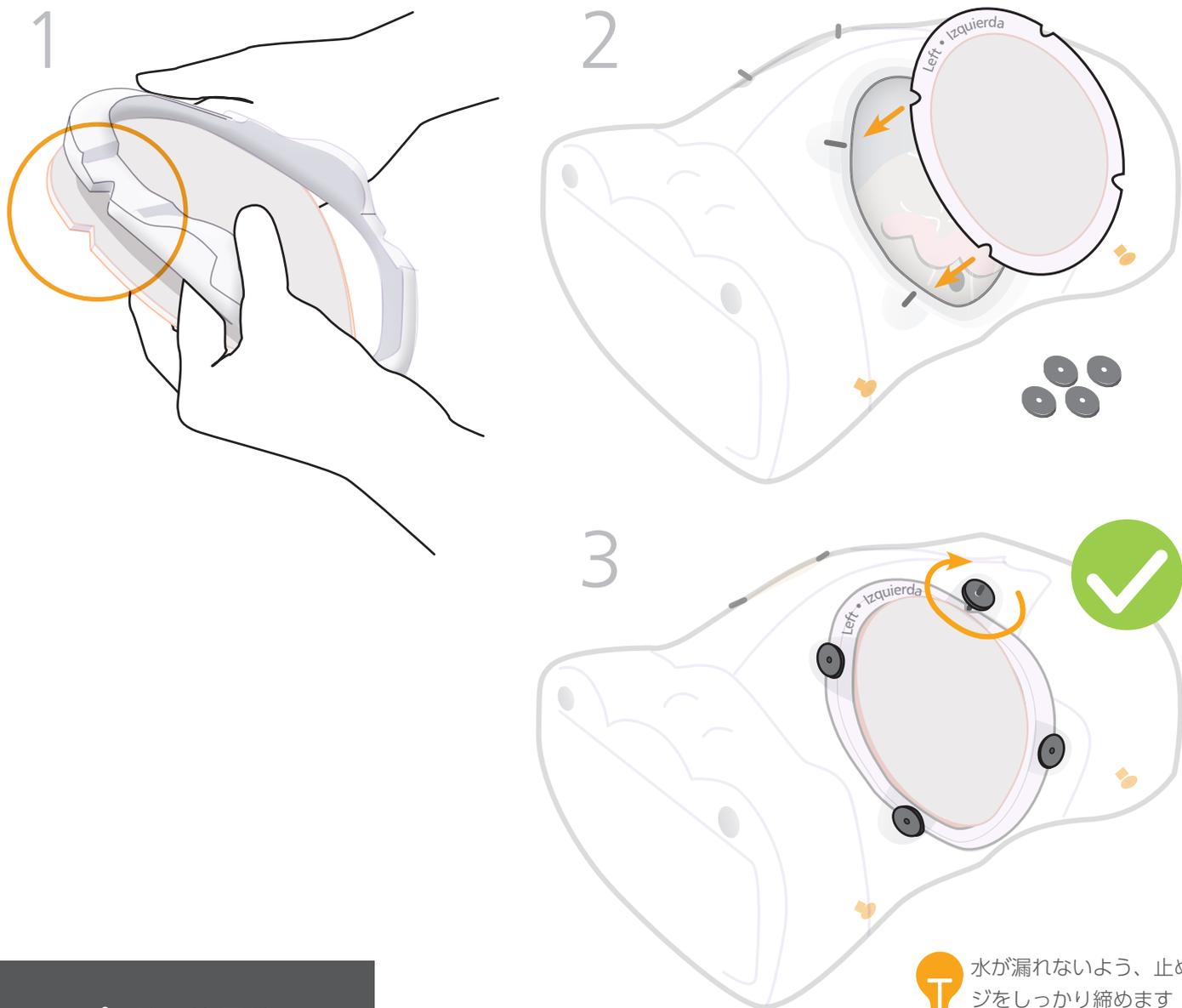


T 水が漏れないよう、止めネジをしっかり締めます


パッドの使用方法

パッド1枚につき約200回の穿刺が可能です

100
穿刺

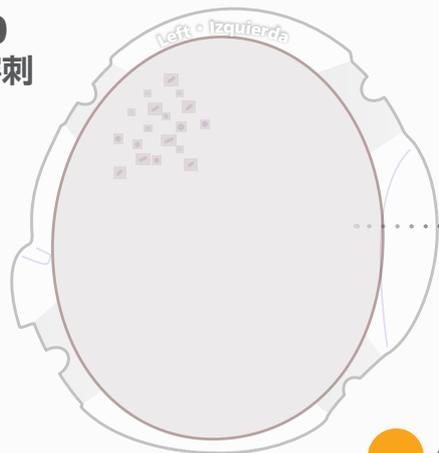


+ 100
穿刺

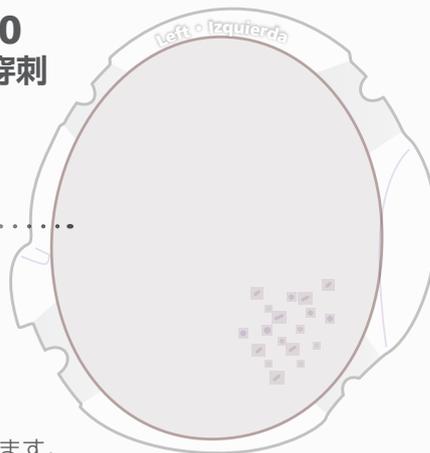


T パッドには推奨使用時期が表示されています。経過により内部が減量し穿刺感が変わります。

腹水(水)の注水

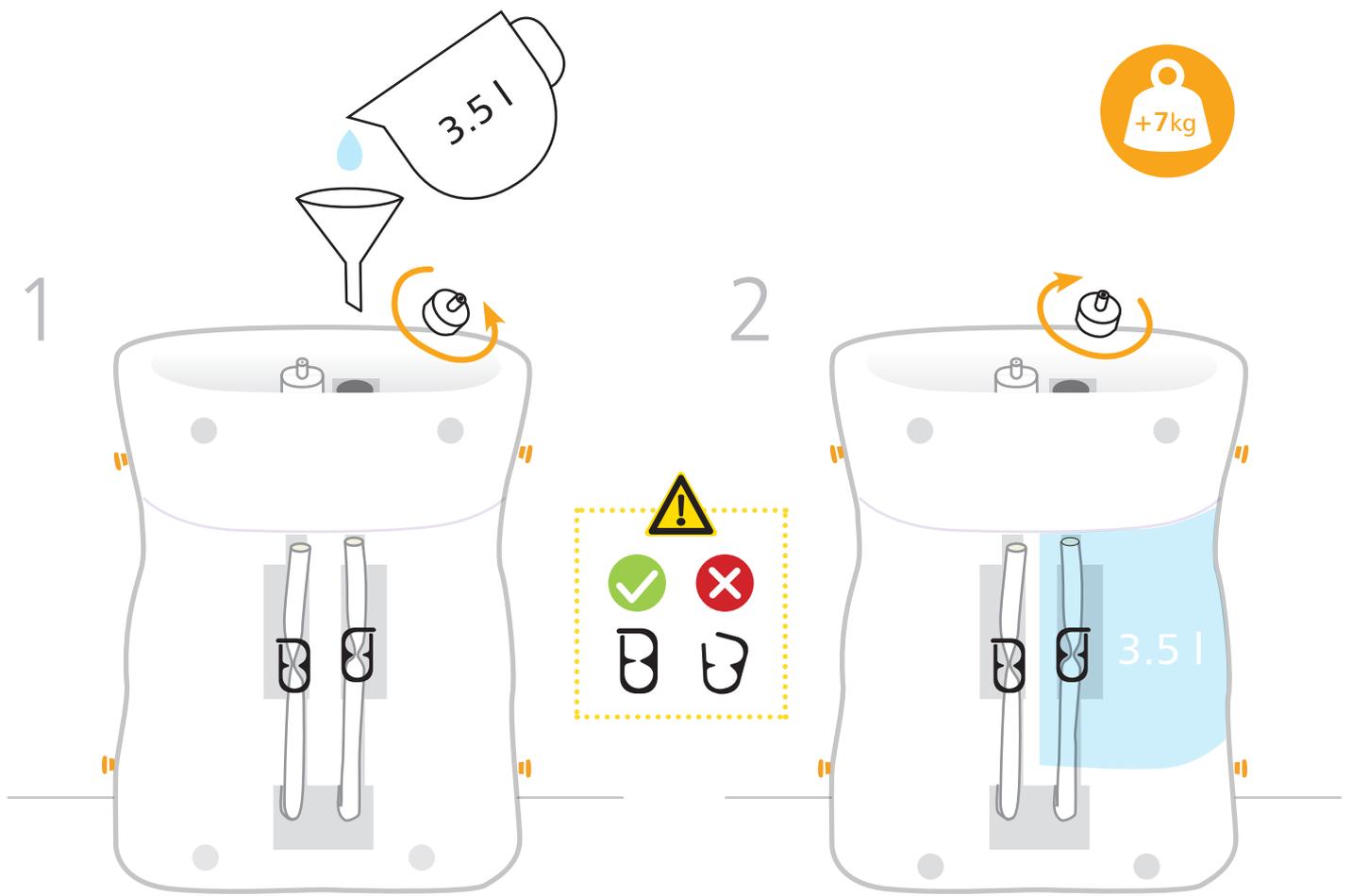

リフィルタンクの使用法(任意)

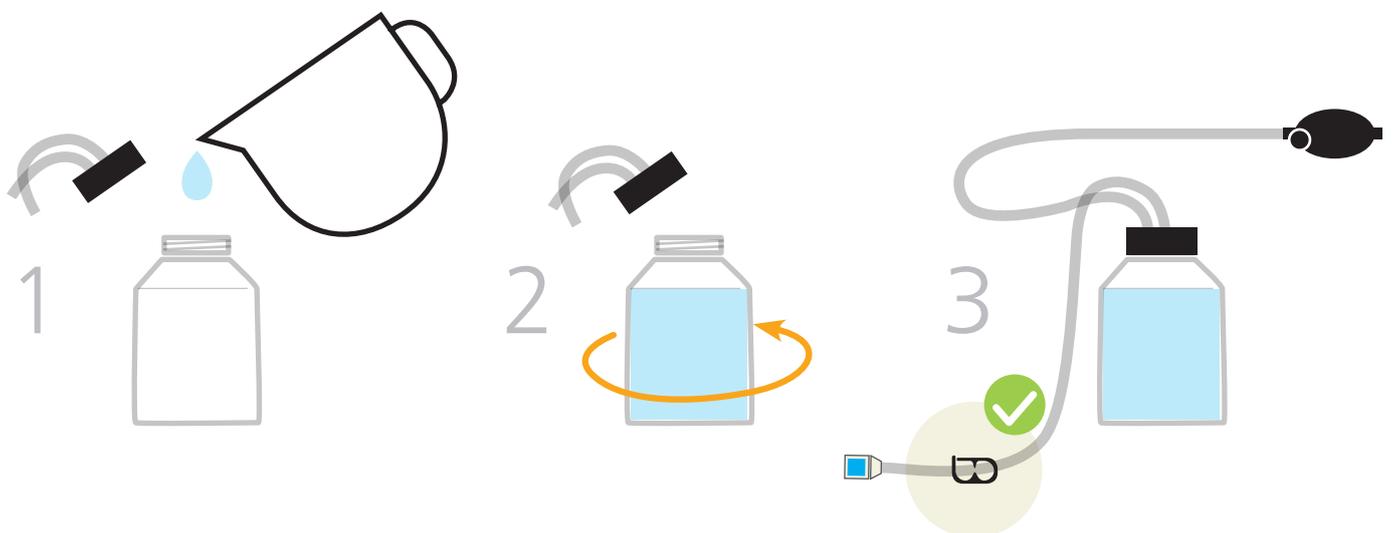




トレーニング



診断の手順



治療の手順

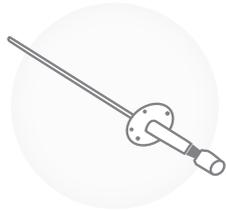


超音波の手順




TAKE A LOOK AT OUR
PARACENTESIS TRAINER VIDEO

VISIT THE WEBSITE
limbsandthings.com
OR YOUTUBE CHANNEL
youtube.com/limbsandthings

清掃と保管

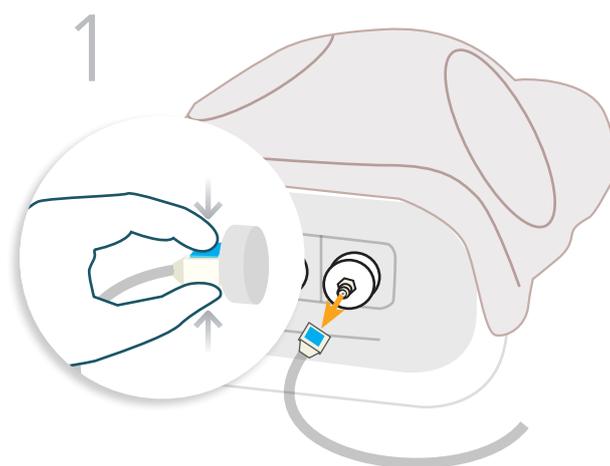

 完全に排水されるようモデルを少し傾けます。

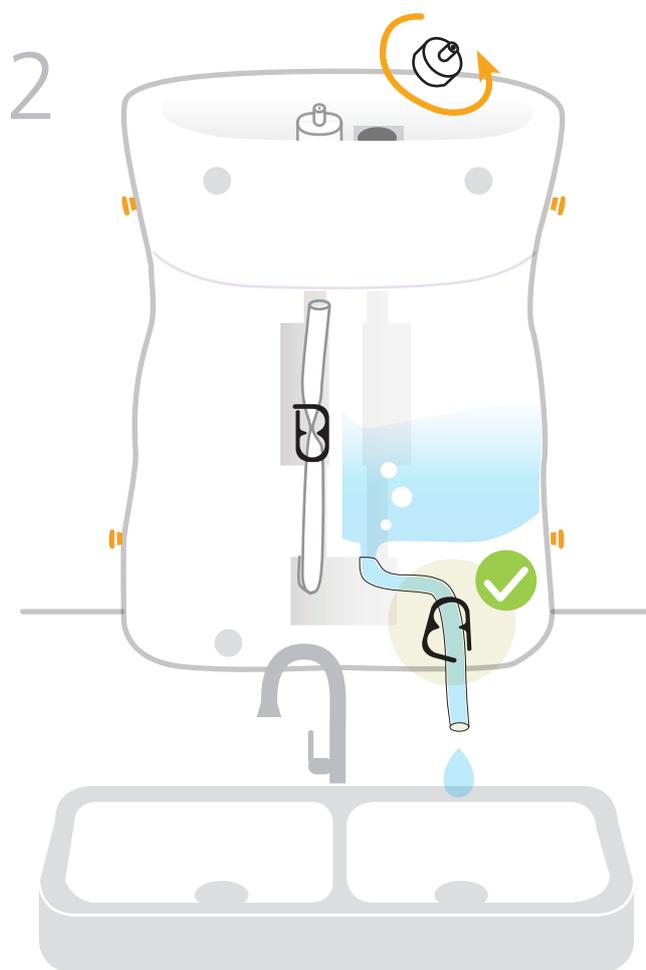

YOU MAY
ALSO BE
INTERESTED IN...

胸腔ドレナージ・
胸腔穿刺トレーナー

160230



腹部診察
トレーニングモデル

160000



導尿トレーナー
レンジ

160850

160851

160852

160853

160854



Part No: 365-019

第1版 2020年8月
© 2020 Limbs & Things

NLS 日本ライトサービス株式会社
Nihon Light Service, Inc.
医学教育機器事業部

〒113-0033 東京都文京区本郷 2-3-9 ツインビューお茶の水 2F

☎ 03-3815-2354

☎ 03-3818-6843

✉ igaku@nlsinc.co.jp

🌐 www.medical-sim.jp