



USER GUIDE



エコーガイド 肩関節注射トレーナー

品番:170202



インデックス

商品構成	3
安全と清掃の手引き	4
セットアップ	7
• トルソに肩モジュールを装着する	7
• 滑液を注入する	8
ケアとメンテナンス	11
• モジュールを交換する	11

TAKE A LOOK
AT OUR **VIDEO**



VISIT THE WEBSITE
limbsandthings.com

OR YOUTUBE CHANNEL
youtube.com/limbsandthings

商品構成

肩関節注射トルソ

170215



エコーガイド肩関節注射用交換モジュール

170213



肘パーツ



注射針セット

170108



滑液充填キット

170217



滑液（250ml）

170022



キャリーケース



構成に含まれません（ご用意ください）



リニアプローブ（超音波機器）



超音波ジェル

安全と清掃の 手引き

エコーガイド肩関節注射トレーナーを使用される前に、
この安全の手引きを確認してください

DO's



- このガイドを厳守してください。
- このガイドを保管してください。
- すべての警告に注意してください。
- 取り扱いには注意してください。

- 針は付属のものか、21ゲージの新品に近いものを使用してください。



- 製品が破損や摩耗した場合は、修理の必要があります。お買い上げの販売店にご連絡ください。

- 使用後は、柔らかい布やスポンジを中性洗剤を混ぜたお湯につけ、しっかり絞った後、やさしく拭いてください。



DON'Ts



- 熱源の近くに設置したり、炎にさらしたり、火の近くで使用したりしないでください。
- 本製品の近くまたは上で可燃性の溶剤を使用しないでください。

- 肩を回しすぎたり、動かしすぎたりしないでください。破損の原因となります。



- 関節内に滑液を過剰に注入しないでください。修復不能の損傷に至る場合があります。
- 過剰注入による問題は、保証対象外となります。

- 滑液注入は、付属の滑液充填キット以外では行わないでください。



保管と移動




- 人身事故や製品の破損を防ぐため、輸送・保管時には必ず適切な梱包・固定を行ってください。



- 保管する場合は、肩関節注射トレーナーから滑液を抜いてください。



エコーガイド肩関節注射トレーナーは慎重に取り扱ってください。

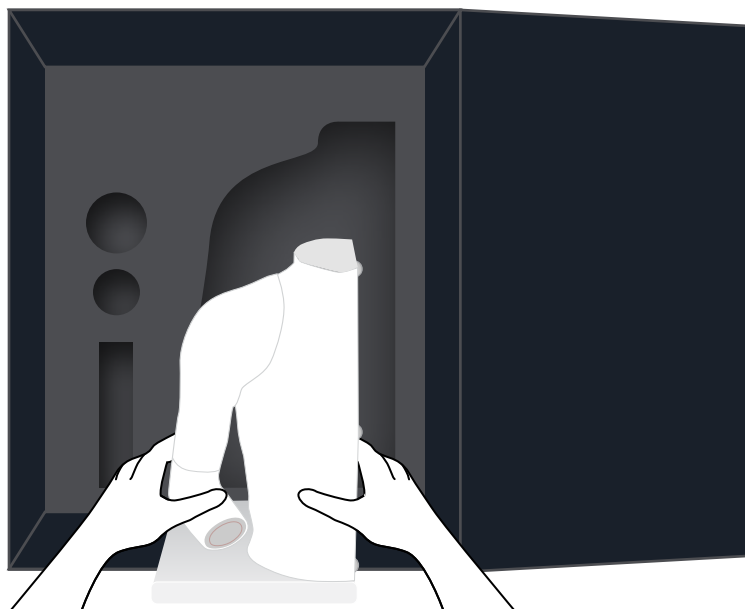

エコーガイド肩関節注射トレーナーは、非常にデリケートな製品です。
慎重に取り扱い、保護用のキャリーケースで適切に保管してください。







エコーガイド肩関節注射用交換モジュールは厳重に保管してください。

* 本記載は170214／170213にのみ適用されます。


エコーガイド肩関節注射用交換モジュールは、非常にデリケートな製品です。慎重に取り扱い、保護箱で保管してください。

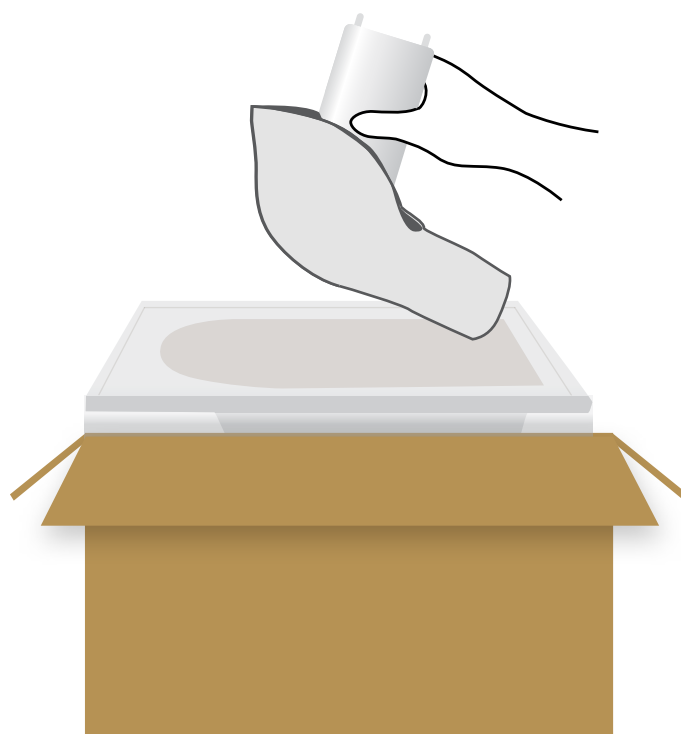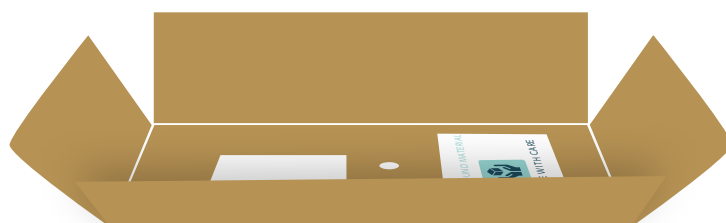


セットアップ

トルソに肩モジュールを装着する

- 1 新しい肩モジュールに肘パーツを取り付けます

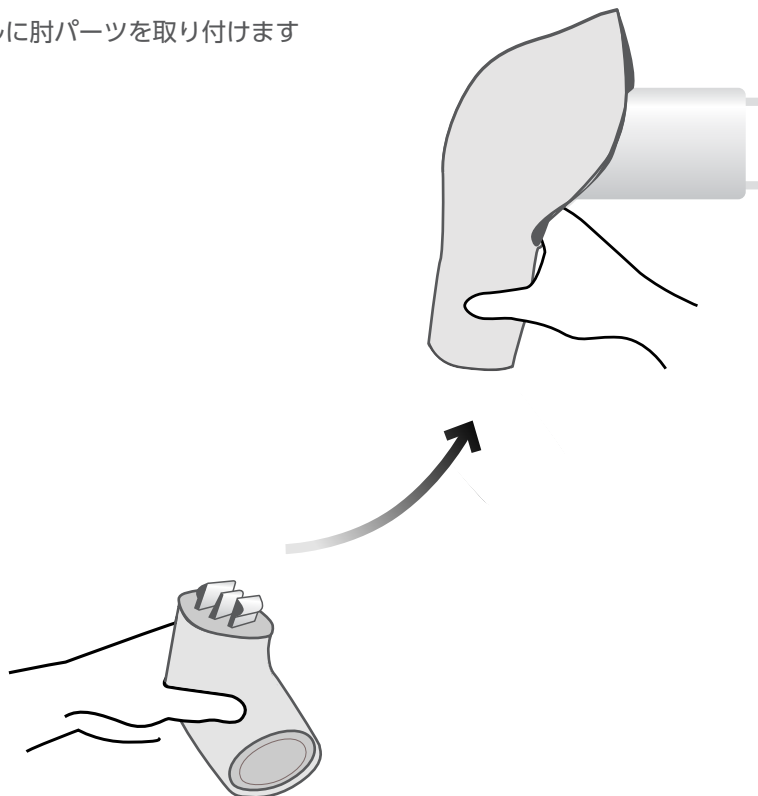

- 2 トルソに肩部を差し込みます

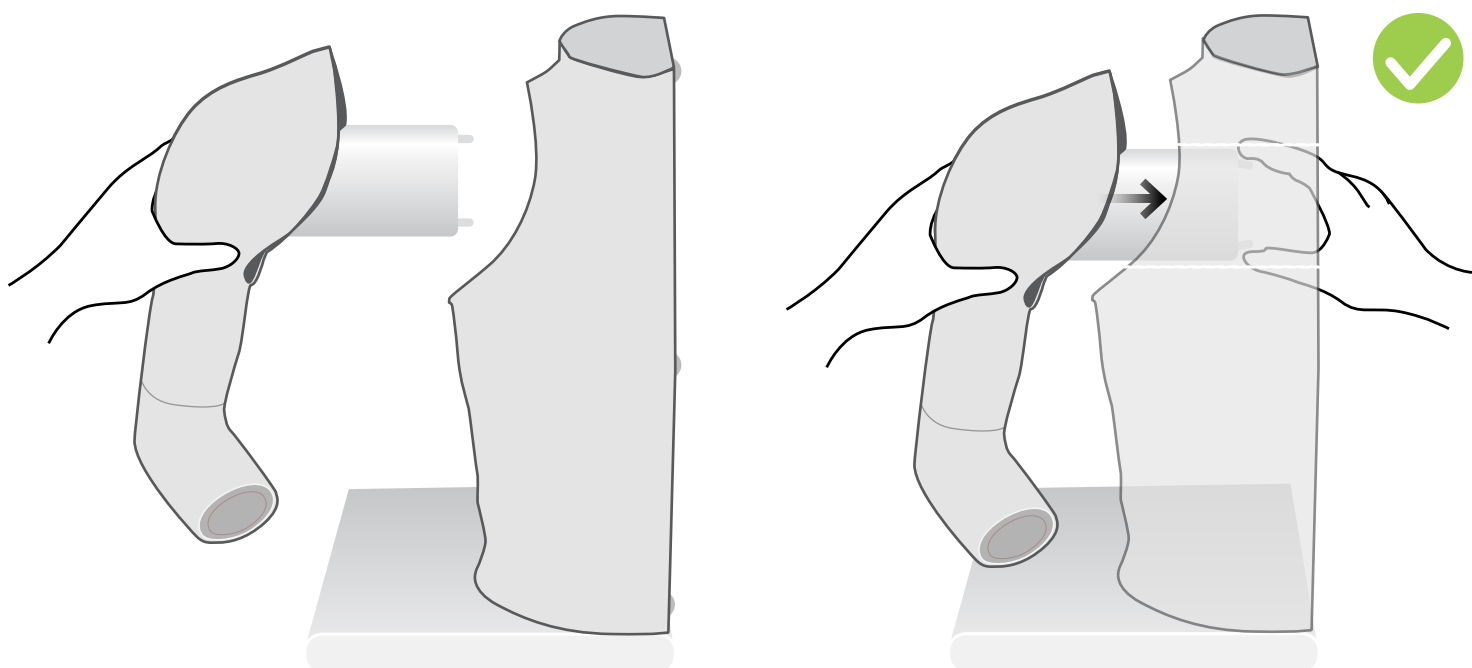


セットアップ

滑液を注入する

1

「OUT」側ポートにチューブを挿し、
先端の緑ネジ部を回転し固定します

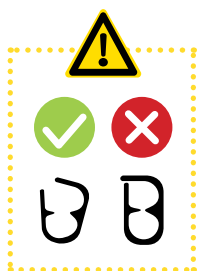

クランプ：開放



2

シリンジで滑液を吸引します

必要な滑液量は部位により異なります。シリンジへの吸引は各部位に応じた量（P.9-10参照）を推奨します。




滑液充填セット（170217）構成のシリンジ以外は使用しないでください。



セットアップ

滑液を注入する

- 3 「IN」側ポートにシリンジを挿し、
シリンジを回転し固定します

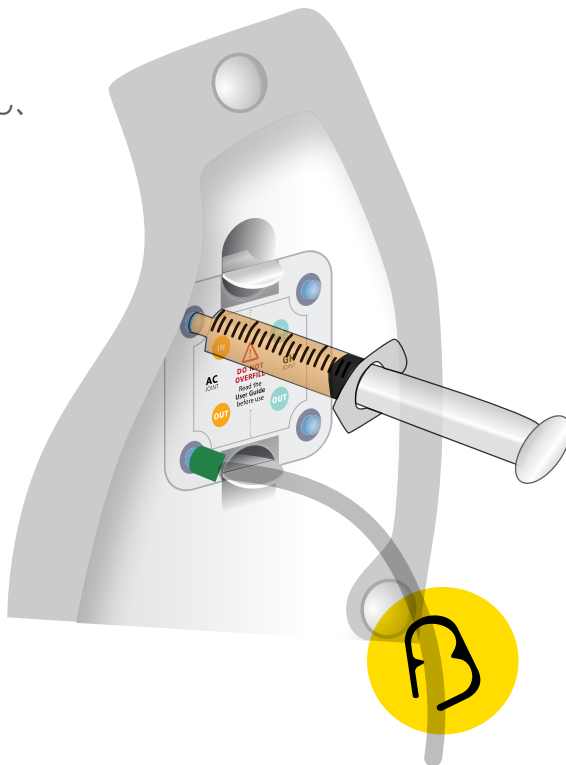


- 4 クランプを開放したまま、シリンジで滑液を注入し、
チューブから排出したらクランプを閉じます

!

注入前に、充填キットが正しくセットアップされていることを確認してください。

正しくセットアップされていれば注入時に抵抗感を感じることはありません。

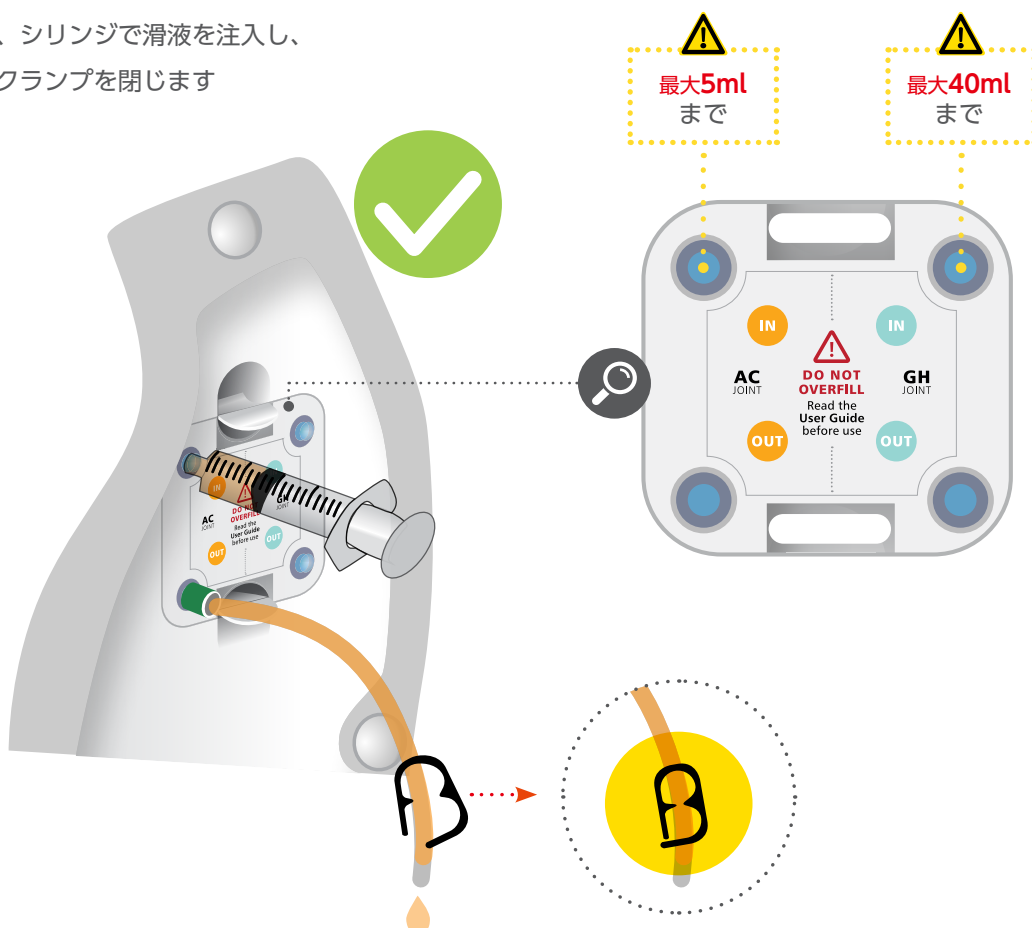

セットアップ




滑液を注入する

肩鎖関節

制限容量：5ml

滑液包炎のシミュレーションのみ、
クランプ閉鎖から、さらに5ml注入
します。**5ml以上の追加注入は損傷
原因となります。**

過剰注入は製品保証対象外です。

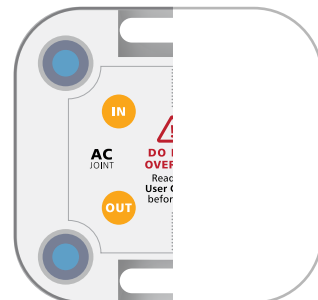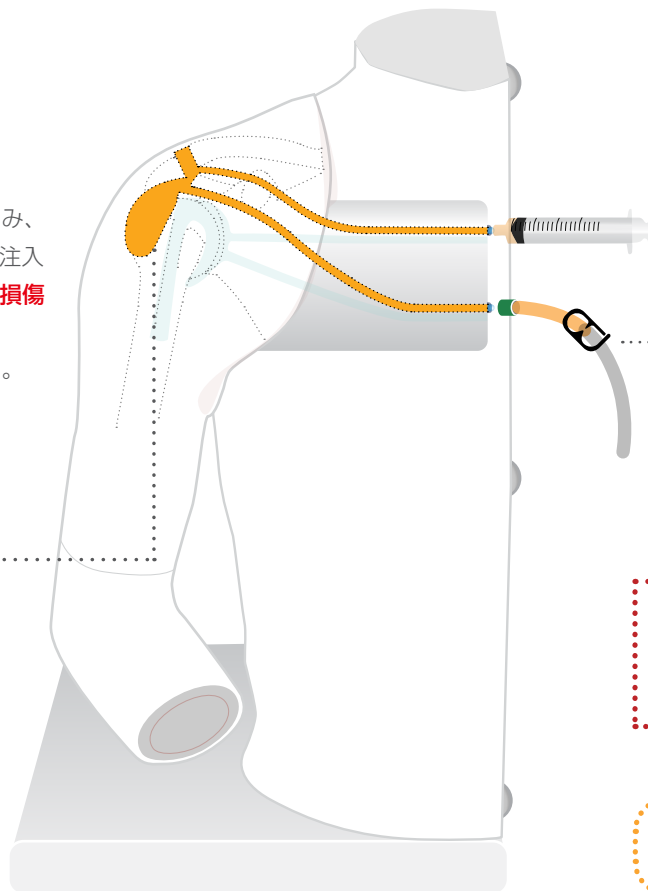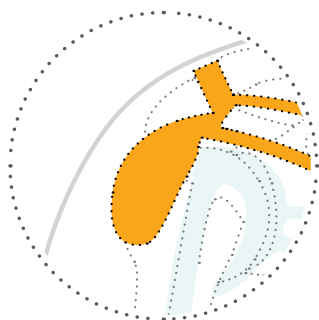

クランプを閉鎖したままで
5ml以上の注入は禁止
修復不能な損傷の危険性




クランプを使用後に開放

肩甲上腕関節 (肩関節腔)


制限容量：40ml

肩鎖関節と異なり、クランプ閉鎖後
に追加注入はできません。

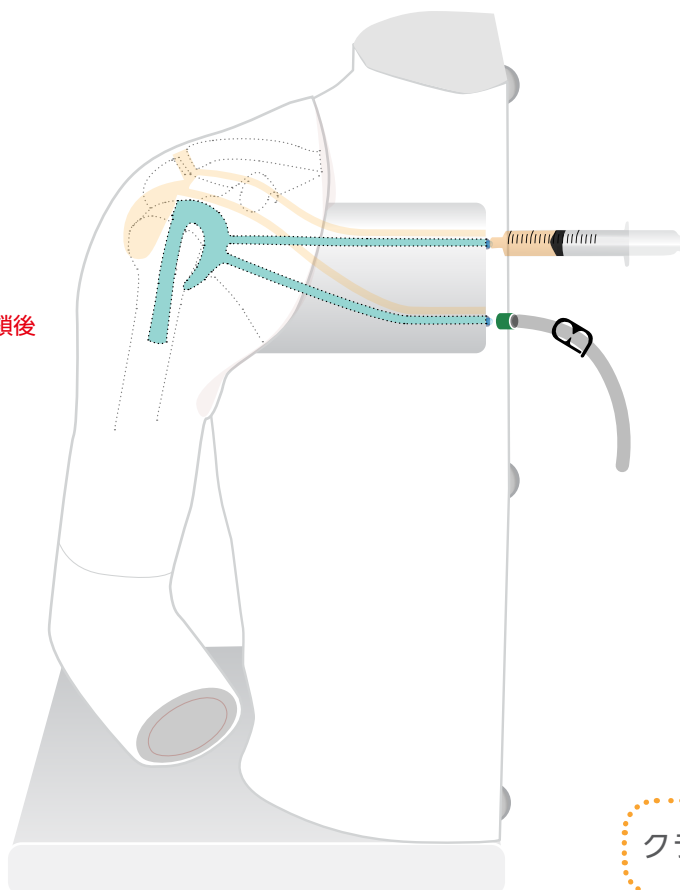


クランプを使用後に開放


1 チューブを外します

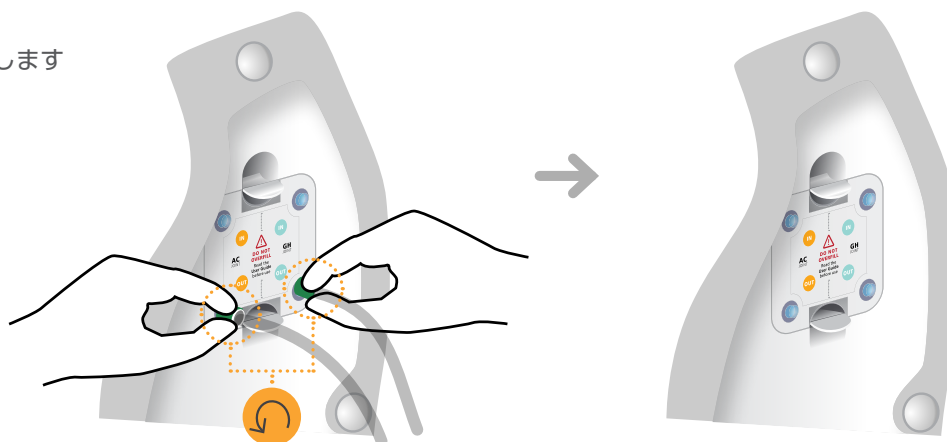

2 トルソから肩モジュールを取り外します

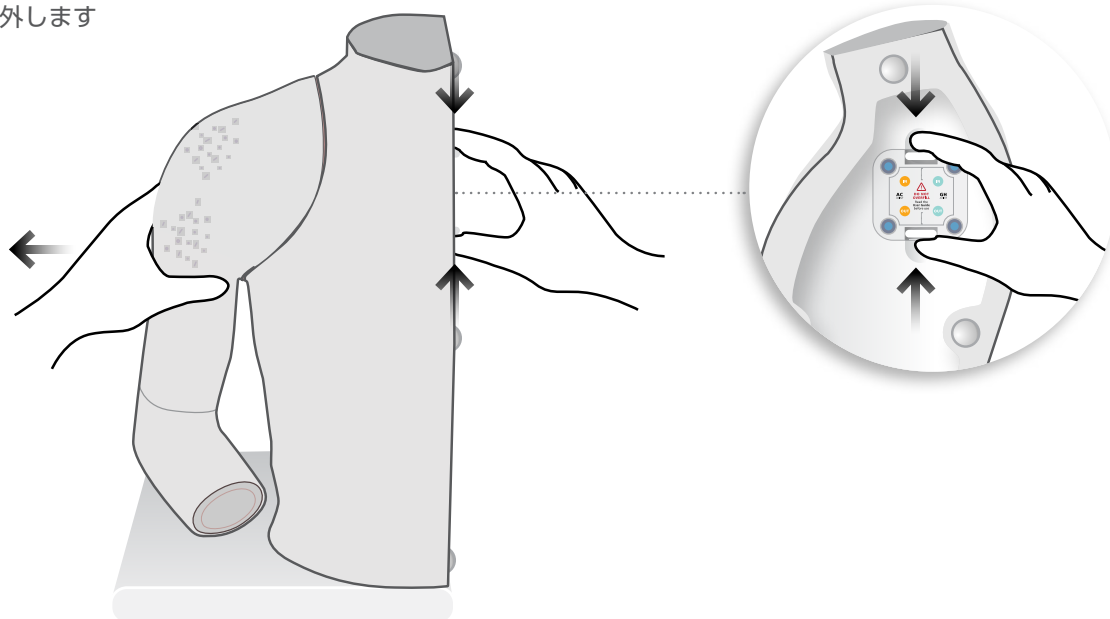

3 肘パーツを外します

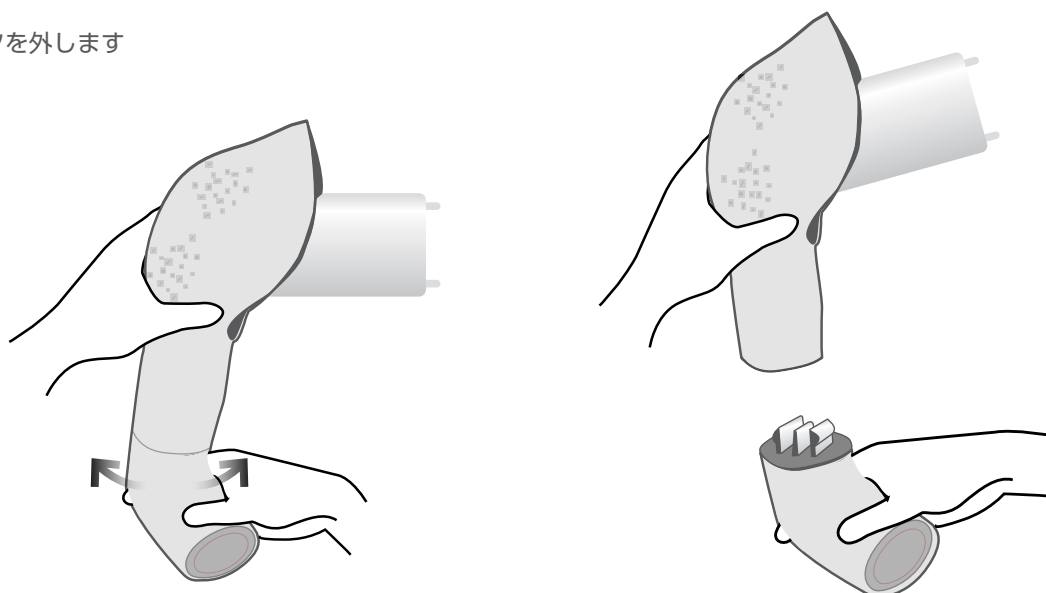

YOU MAY
ALSO BE
INTERESTED IN...

170103

エコーガイド膝関節注射トレーナー



170200

肩関節注射トレーナー



170230

手・手首関節注射トレーナー



130080

肘関節注射モデル



130100

足・足関節注射モデル



Part No: 365-027

第4版 2023年5月
© 2023 Limbs & Things

NLS 日本ライトサービス株式会社
Nihon Light Service, Inc.
医学教育機器事業部

〒113-0033 東京都文京区本郷 2-3-9 ツインビュー御茶の水2F

☎ 03-3815-2354

☎ 03-3818-6843

✉ igaku@nlsinc.co.jp

🌐 www.medical-sim.jp