


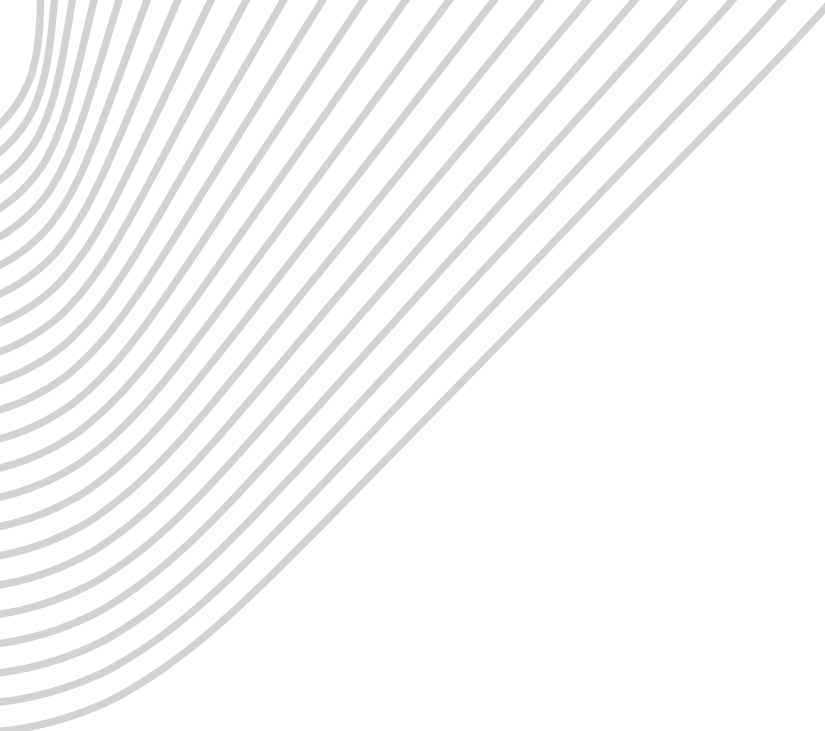

SKILLQUBE

クイックスタートガイド
qubeSERIES

NLS

日本ライトサービス株式会社
Nihon Light Service, Inc.




コントローラ（指導者）用iPad

モニタ用iPad

アセスメント（診断）用iPad

1 デバイスの設定






1. すべてのiPadでインターネットに接続可能なWiFi接続を確立します。
2. 次に、**設定アプリ**を開き、**iPadにサインイン**してApple IDでデバイスにサインインします。Apple IDを持っていない場合は、同じメニューで作成できます。
3. すべてのデバイスにApple IDでログインしたら、**App Store**アプリを開いて「**SKILLQUBE**」を検索します。
4. コントローラ用に**qubeCONTROL**アプリ、アセスメント用に**qubeASSESS**アプリをダウンロードします。モニタ用に**qubeZERO**アプリなどのインターフェイスをダウンロードします。

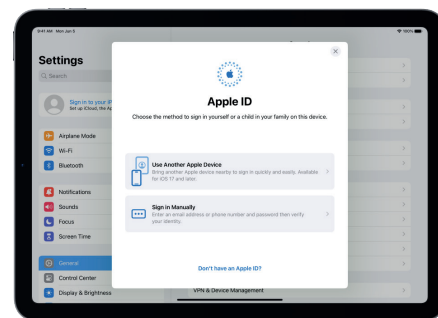

2 デバイスのアクティベーション

1. 新しいシミュレーションデバイスの納品時に、**qubeCLOUD**へのアクセスデータがデバイス管理者に送信されています。メールの指示に従ってユーザーアカウントを作成してください。次のステップでライセンスを有効化するためにそのアクセスデータが必要です。
2. 次に**qubeCONTROL**を開きます。アプリを初めて開くと、**qubeCLOUD**にログインする必要があります。ステップ1のデバイス管理者のアクセスデータを入力してください。
3. **qubeCONTROL**は利用可能なライセンスを検索します。利用可能なライセンスを選択してデバイスをアクティベートします。アクティベーションには、シナリオやデバイス固有の設定が転送されるため、少し時間がかかることがあります。
4. 次のステップで**qubeASSESS**を開き、**qubeCLOUD**のアクセスデータでログインします。右上の「未サインイン」をタップしてください。

ログインすることで、シナリオベースの既存メディアがアセスメントにロードされ、シミュレーション中のデータ量が削減されます。このステップは必須ではありませんが、推奨されます。

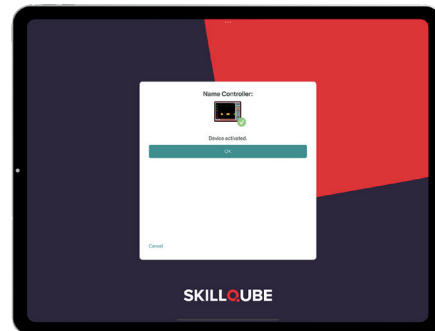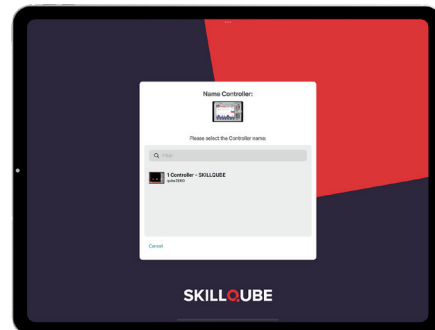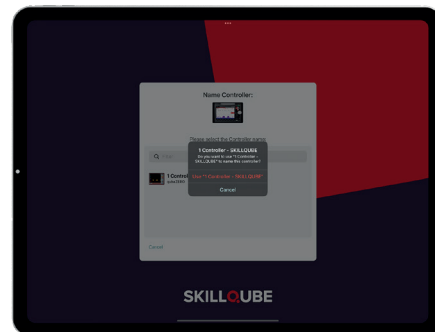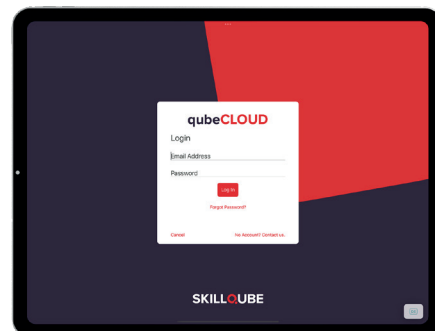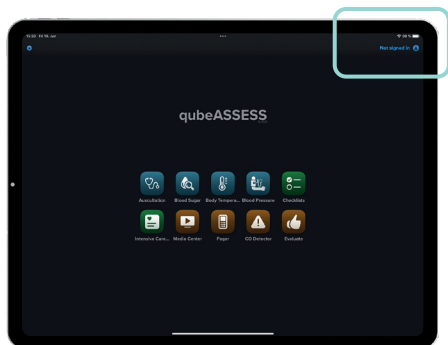

3 デバイスの接続



シミュレーションを開始する前に、すべてのデバイスが同じWiFiネットワークに接続されていることを確認してください。その後、**qubeCONTROL**、**qubeASSESS**、および希望するモニタを開きます。

1. コントローラとモニタを接続するには、（コントローラの）右上の赤い点滅ボタンをタップします：「デバイスと接続」
2. 近くの利用可能なデバイスの一覧が表示されます。モニタを探して選択します。



iPadの使用についてのサポートが必要ですか？
詳細については、support.apple.comをご覧ください。

3. モニタで接続を確認するように求められます。デバイスが正常に接続された場合、青い枠が表示されます。
4. アセスメントや、利用可能な場合は人工呼吸器シミュレーターにも同様の手順で接続を行います。
5. シナリオを開始するには、上部の赤く点滅するバー「シナリオを選択」をタップします。自由シナリオか事前にプログラムされたシナリオから選択できます。希望するシナリオを選択したら、画面下部の「ロード」をタップし、「今すぐ開始」をタップします。

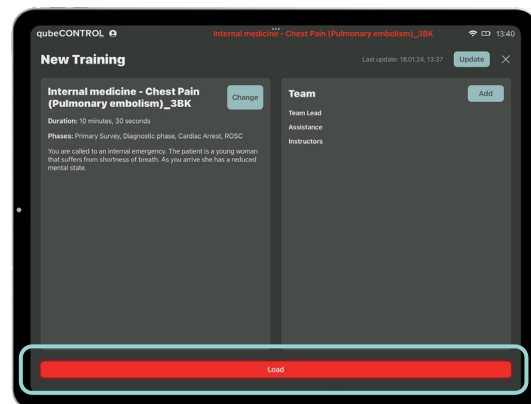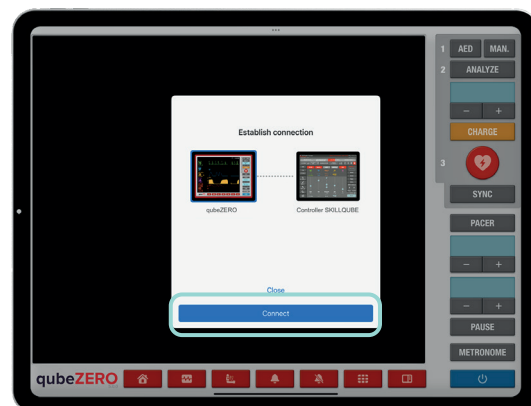

4 シミュレーションの実行

シナリオを開始した後、バイタルサインをアクティブにし、さまざまな設定を調整できます。

1. バイタルサインはタップするだけで有効化および無効化できます。バイタルサインによっては、さらに設定が必要です。バイタルサイン値のボタン（例：ECG）が赤くなっている場合、その値が有効であり、モニタに表示されています。
2. スライダーを使用してアクティブなバイタルサインを変更できます。波形を変更するには、下部の希望する波形をタップします。



3. 変更したバイタルサインをモニタに送信するには、コントローラーの右下にある「送信」をタップします。上部の「+/-」ボタンを使用して、バイタルサイン値がどの程度の時間で変化するかかのトレンド時間を設定できます。
4. 事前にプログラムされたシナリオを終了するには、右上の「一時停止」シンボルをクリックします。シナリオを終了するには、上部の赤く点滅するバー「一時停止」または「シナリオ終了」をタップします。シナリオ終了後、すぐにログブックを表示できます。シミュレーションモニタは自動的にオフになります。



注意

インターネット接続：ライセンスの有効化や、**SKILLQUBE**アプリおよびAppleのオペレーティングシステム（iPadOS）のアップデートのインストールには、インターネット接続が必要です。シミュレーショントレーニング中に安定したデバイス接続を確保するために、付属のWiFiルーターを使用することをお勧めします。アクセスデータはルーターに記載されています。このネットワークにすべてのiPadを接続してください。既知のWiFiネットワークを切断するには、**設定アプリ**から**WiFi > i > このネットワークを削除**に移動します。

基本情報

ソフトウェアを最新の状態に保ちましょう！私たちのニュースレターに登録し、アプリのソフトウェアアップデートに関する情報を受け取りましょう。

また、**qubeSERIES**を拡張するための他のシミュレーション製品、例えば**qubeAIRFLOW**、**qubeCPR**、および**qubeTRIGGER**も利用可能です。

すべての情報はウェブサイト **skillqube.com**で確認できます。

NLS 日本ライトサービス株式会社
Nihon Light Service, Inc.

医学教育機器事業部

〒113-0033 東京都文京区本郷 2-3-9 ツインビュー御茶の水 2F

☎ 03-3815-2354 ☎ 03-3818-6843 ✉ igaku@nlsinc.co.jp 🌐 www.medical-sim.jp