

静脈注射アームの循環詰まりの解消手順

1. 以下の物品を準備してください。




2. 以下のように接続をします。

シリンジ内に空気を入れ、数回空気を注入してください。



3.もしそれでも現象が改善しない場合は、シリンジに水5mlを入れ注水してください。

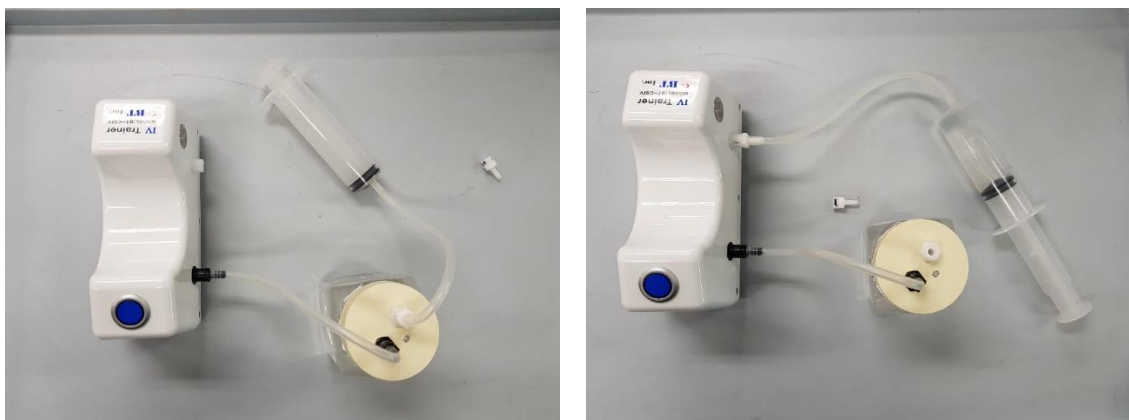

4.以下のように接続し、モーターの電源を入れ、高速血流スイッチを1分程度押して正常に循環がされるかを確認してください。



5.もしそれでも現象が改善しないときは、水を数回注水し、10分ほど待ってから、もう一度注水を行ってください。



6.最後にボトルキャップから白コネクタを外し、モーター内のすべての水を完全に排水してください。

