


443047

チューブ管理トレーニングモデル

ユーザーガイド

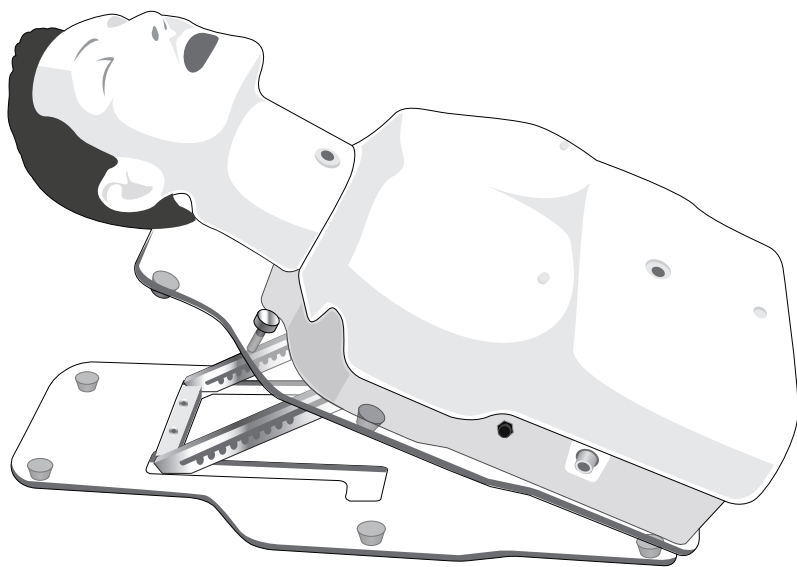

■ 製品情報

製 品 名	チューブ管理トレーニングモデル
品 番	443047
製 造 元	BT Inc. (South Korea)

■ 製品仕様

サ イ ズ	310 X 700 X 238mm
重 量	9 kg

■ カスタマーサービス

Website	www.btinc.co.kr
Address	A-313, Samsong Techno-valley, 140, Tongil-ro, Deogyang-GU, Goyang-Si, Gyeonggi-do, 10594, Republic of Korea
Telephone	+82-2-2038-2903
E-mail	btinc@btinc.co.kr



【ご 注 意】

本書を注意深く読み、製品を正しく理解し、使用者の安全と正しい使用方法について確認するようにしてください。

- ① メーカーから提供または承認された構成部品以外は使用しないでください。
- ② 本マニュアルに記載されている以外での目的で製品を使用しないでください。
- ③ メーカーの許可なく製品を分解または改造した場合、保証は無効となります。また、商業目的での模倣または変更された製品を作成することは、法律で禁止されています。
- ④ 製品を水や湿気のある場所に近づけないで下さい。
- ⑤ できる限り高温または低温の環境に製品を近づけないようにしてください。
極端な気象条件から製品の劣化または内部破損が生じることがあります。
- ⑥ 化学薬品（ベンゼンまたはシンナーなどの溶剤）で製品を清掃すると、発火または表面劣化の原因となります。
- ⑦ メーカー（BT Inc.）は改良のため、予告なく仕様を変更をすることができます。

■ 構 成 品


成人トルソモデル

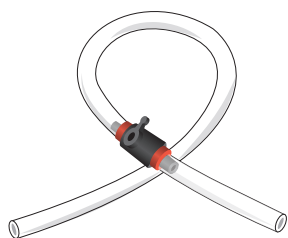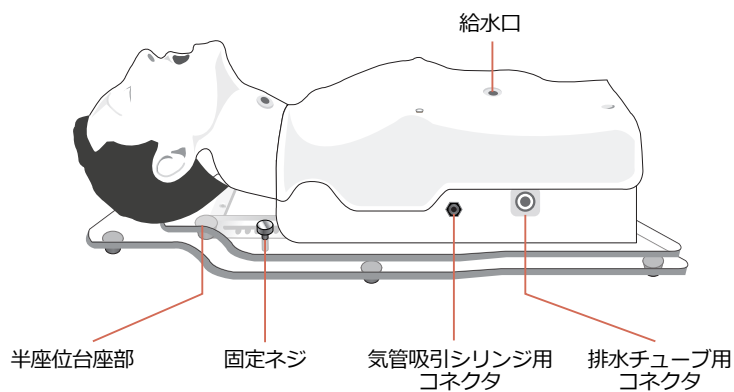

排水チューブ





ロート

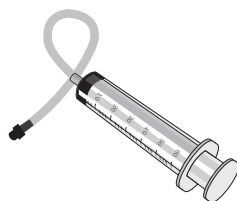



気管吸引用シリンジ

※他：保管ケース、ユーザーガイド（本紙）



■ はじめに

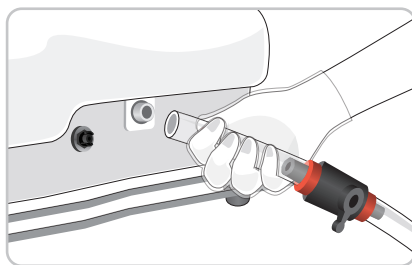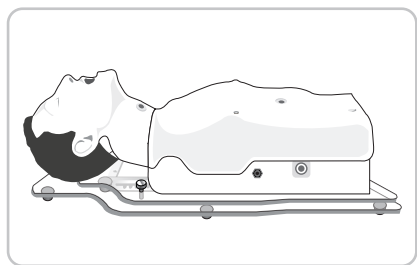

マネキンを仰臥位で設置します。付属の排水チューブの排水弁をロックにし、マネキン右側面の排水チューブ用コネクタにしっかりと差し込みます。

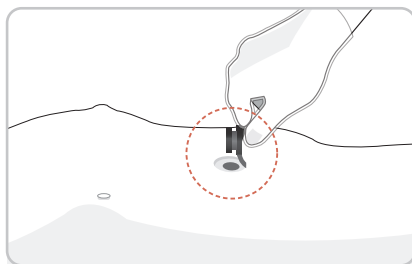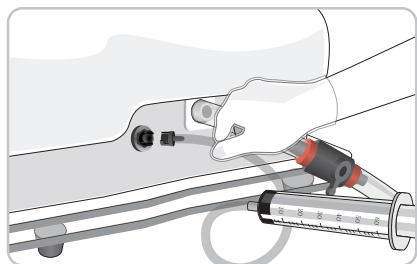

気管吸引用シリンジをマネキン右側面の気管吸引シリンジ用コネクタに接続し、腹部の給水口のキャップをあけます。

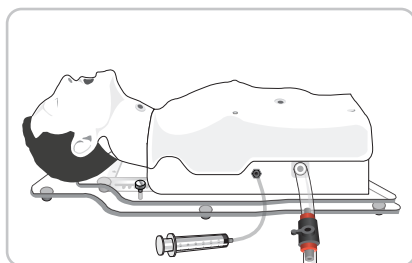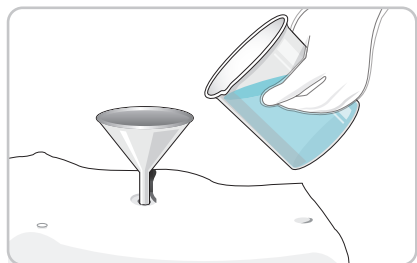


腹部の給水口に付属のロートをさし、300～350CCの水を注ぎます。


※ 本製品の準備をする際、注水をする前には排水チューブのロックが閉じていることを必ず確認するようにしてください。

■ はじめに


< 体位の変更 >

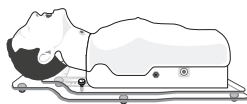

仰臥位


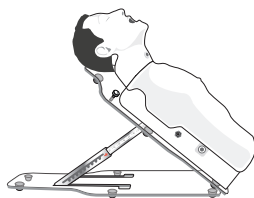


半座位 (21度~45度)

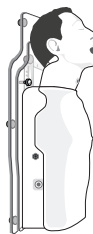


座位

< 半座位への変更の仕方 >

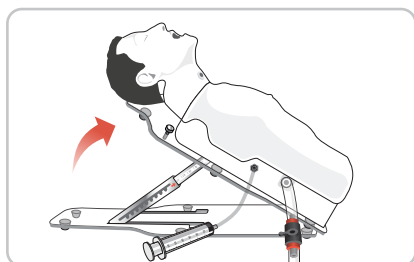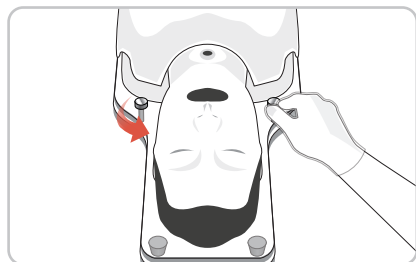


台座を固定している固定ねじを完全に緩め、半座位台座が底部の台座と分離されたことを確認し、半座位台座をゆっくり傾け持ち上げます。仰臥位に戻す場合は、一旦最大可動域まで傾けるとロックが解除されます。

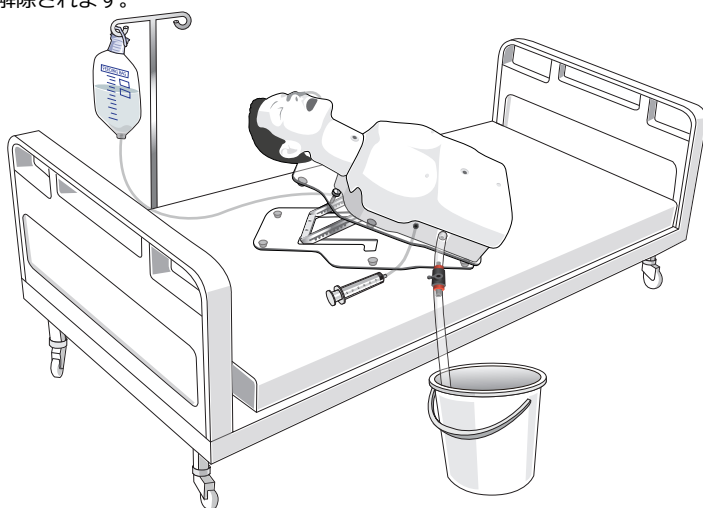


機能

< 経鼻栄養チューブ >

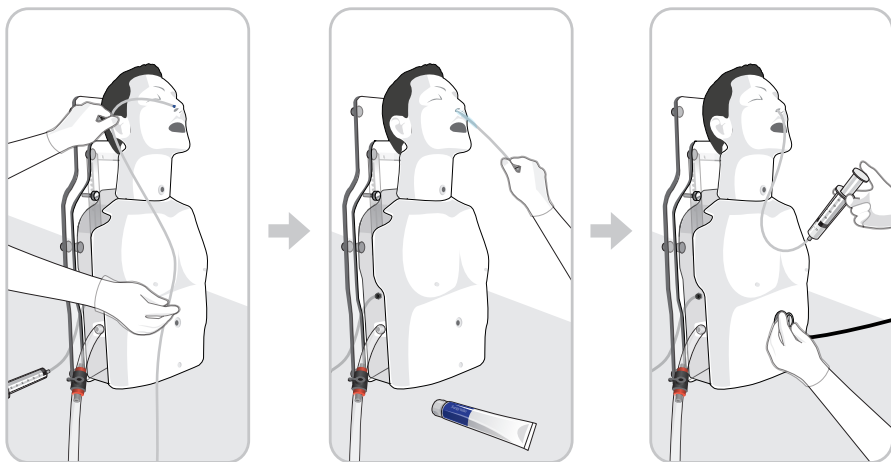

栄養チューブトレーニングの際は、マネキンを座位、半座位に設置します。

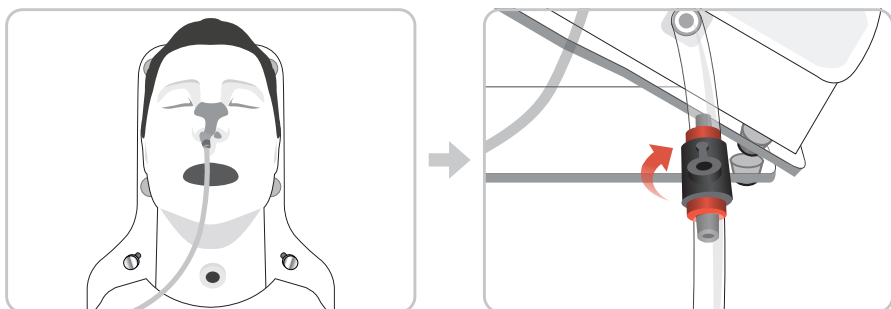


栄養チューブを挿入し、注入される際は排水チューブの弁を解放してから行うようにしてください。

※ 経鼻栄養チューブのトレーニングの際は、排水チューブのロックが開放されていることを確認するようにしてください。


■ 機 能

< 気管切開ケア / 気管内吸引 >

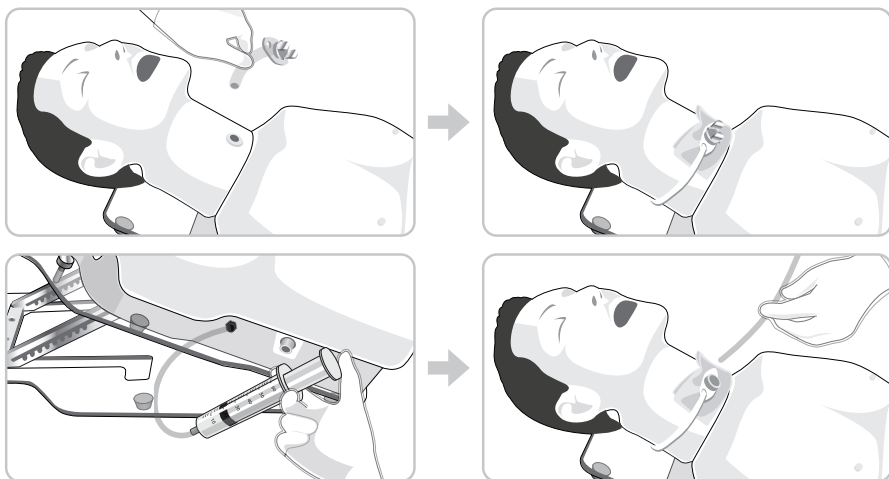


気管切開ケアを行うこともできます。気管内吸引は、模擬痰などを20~30CC注入してから吸引を行ってください。

< 胃瘻チューブ / PEGケア >

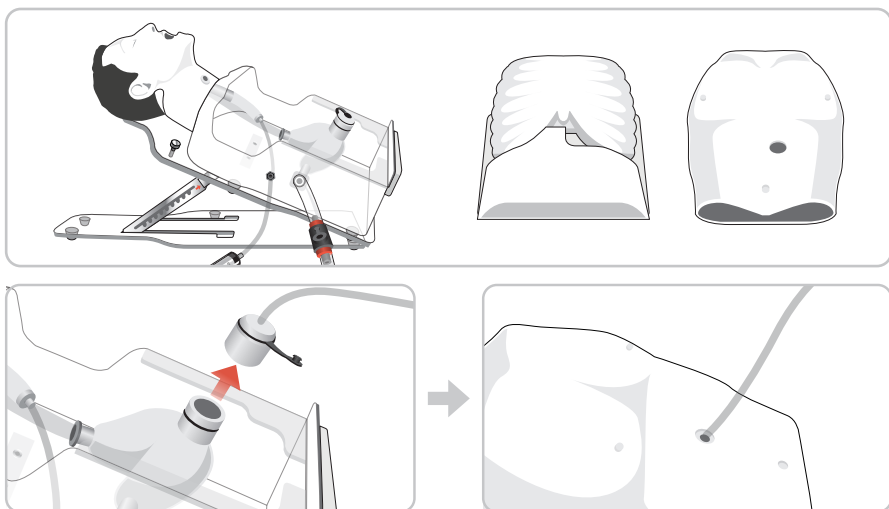


胃瘻チューブケアやPEGケアのトレーニングは、胸部スキンとその下の肋骨部プレートを取りはずし、胃の栓を開けチューブを差し込んでから、再度胸部スキンをかぶせ行ってください。


■ メンテナンス

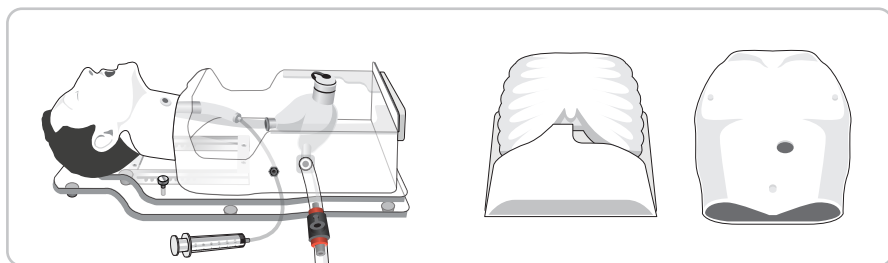

トレーニングの後は、マネキンを仰臥位にし、モデル内の水分をすべて排水させ、胸部スキンと肋骨プレートを取りはずします。

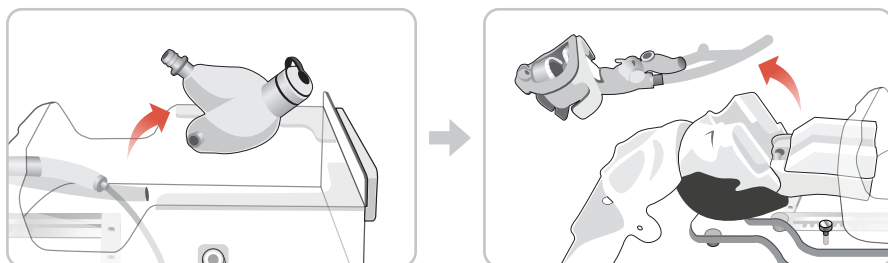

胃部を取りはずし、フェイススキンを取りはずし、気管部も取りはずします。

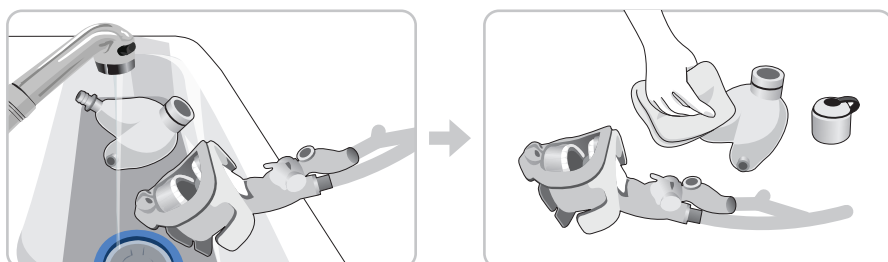

取りはずした胃部と気管部をやさしく流水で洗い流し、柔らかい乾いた布で表面の水分をふき取ってください。そのまま自然乾燥させ、完全に乾いたら逆の手順でモデルに装着してください。

チューブ管理トレーニングモデル

BT-CSIS

Tube Feeding Training Model



日本ライトサービス株式会社

Nihon Light Service, Inc.

医学教育機器事業部

〒113-0033 東京都文京区本郷 2-3-9 ツインビュー御茶の水 2F

☎ 03-3815-2354 📠 03-3818-6843 ✉ igaku@nlsinc.co.jp 🌐 www.medical-sim.jp