



USER GUIDE



エコーガイド 腰椎・硬膜外穿刺モデル

品番:16102



インデックス

商品構成	3
安全と清掃の手引き	4
セットアップ	5
● スタンドを組み立てる	5
● カートリッジを取り付ける	7
● 硬膜内に水を循環させる	10
メンテナンス	11

TAKE A LOOK
AT OUR VIDEO



VISIT THE WEBSITE
limbsandthings.com

OR YOUTUBE CHANNEL
youtube.com/limbsandthings

商品構成

腰椎・硬膜外穿刺用
スタンド



腰椎・硬膜外穿刺用
給水タンク



腰椎・硬膜外穿刺トルソ
(スキン付き)



エコーガイド
腰椎・硬膜外穿刺パッド

161014



腰椎・硬膜外穿刺用硬膜
スタンダード (2本)

161017



腰椎・硬膜外穿刺用硬膜
アドバンス (4本)

161018



腰椎・硬膜外穿刺用インサート
カートリッジ

161020



ARTマット (腰椎穿刺用)

160130

※別冊ガイド参照
(折り曲げ厳禁)



マーカーペン



以下は、構成に含まれません。ご用意ください。

スパイナル針



マノメーター



硬膜外キット



エコー機器
(リニアプローブ)



エコージェル



安全と清掃の 手引き

シミュレーターを使用される前に、この安全の手引きを確認してください

DO's



- このガイドのすべての指示に従い厳守してください。
- すべての警告に注意してください。

- 製造元から供給されるアタッチメント消耗品だけ使用してください。



- 資格を有したサービス担当者にすべてのサービスを依頼してください。損傷した場合は、整備が必要です。

- 使用後は、柔らかい布やスポンジを中性洗剤を混ぜたお湯につけ、しっかり絞った後、やさしく拭いてください。



DON'Ts



- 熱源の近くに設置したり、炎にさらしたり、火の近くで使用したりしないでください。
- 本製品の近くまたは上で可燃性の溶剤を使用しないでください。

- お客様のもとでの製品の分解や修理を禁止します。販売店から製造元に依頼をしてください。



- この機器をお子様が使用することは禁止します。

- 硬膜外および腰椎穿刺用脂肪パッドや皮膚パッドをエコーガイド用パッドと併用しないでください。これらは超音波には使用できません。



保管と移動





- ケガや製品損傷を防ぐため、輸送中や保管中に製品が適切に梱包、固定されていることを常に確認してください。



セットアップ

スタンドを組み立てる


1

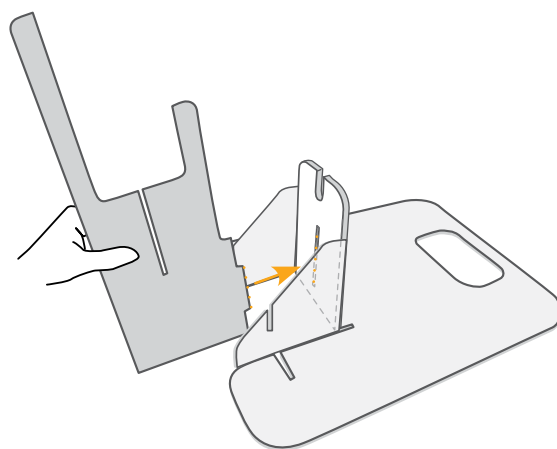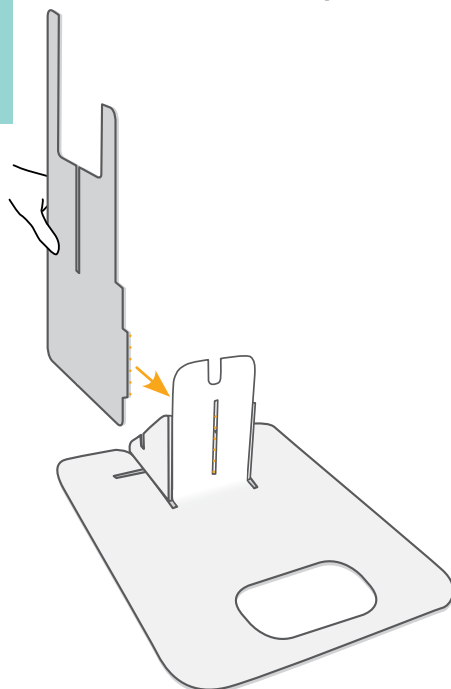


2

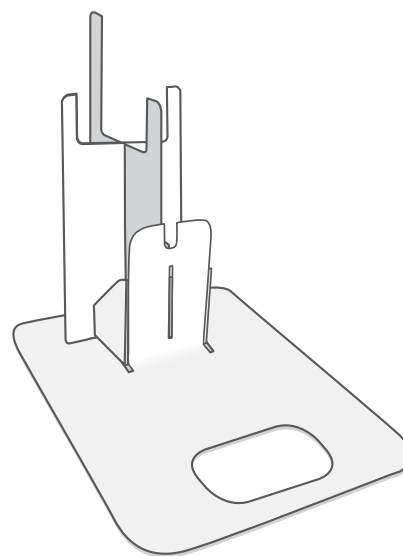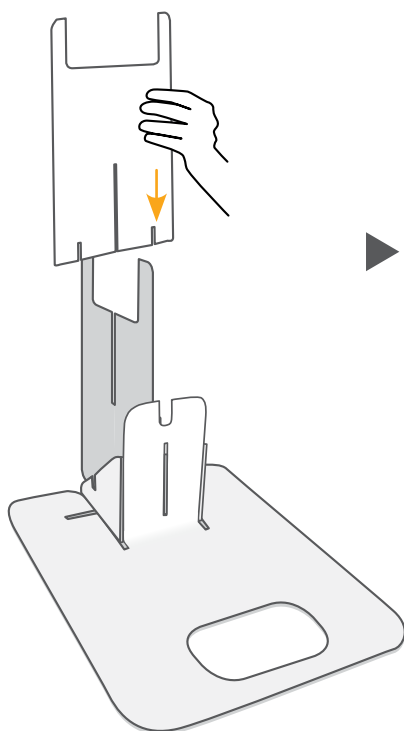

3

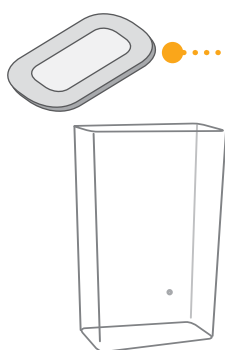


蓋をドリフトレー
として使用します。

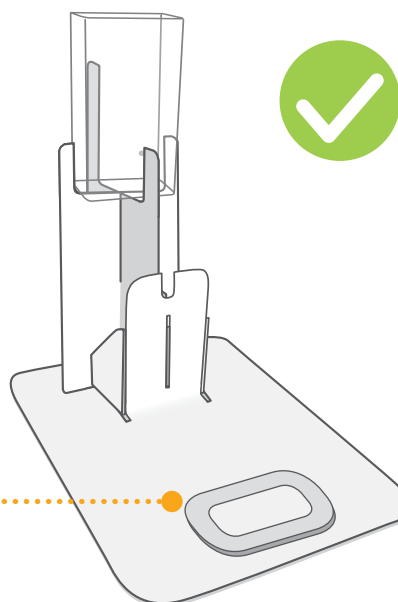


セットアップ

スタンドを組み立てる

4

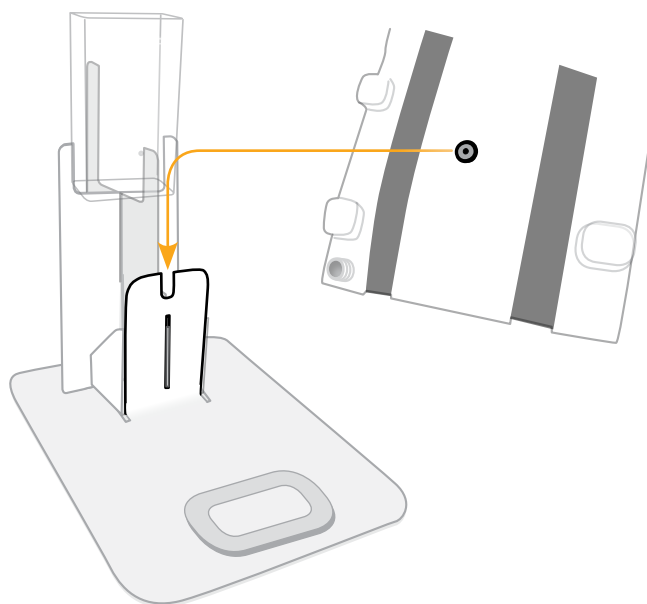


スタンドのくぼみにトルソ背部のフックがかみ合うように設置します

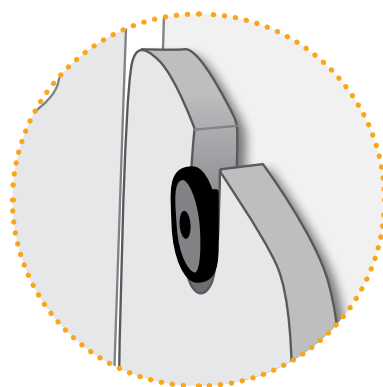

5


トルソは座位か、左側臥位でセットします

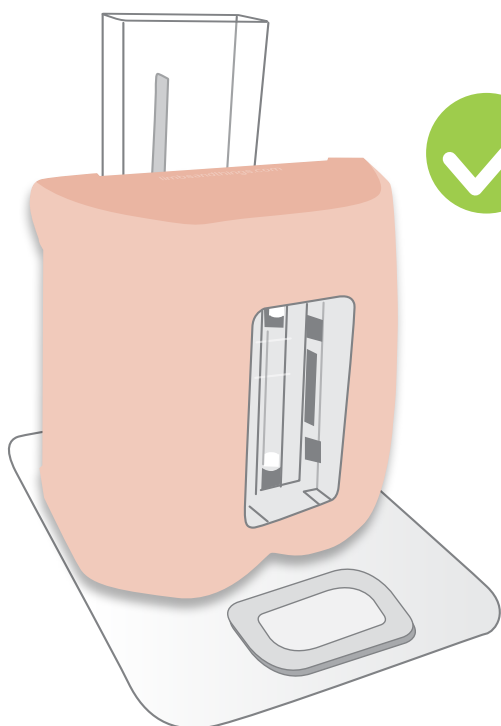

セットアップ

カートリッジを取り付ける

1

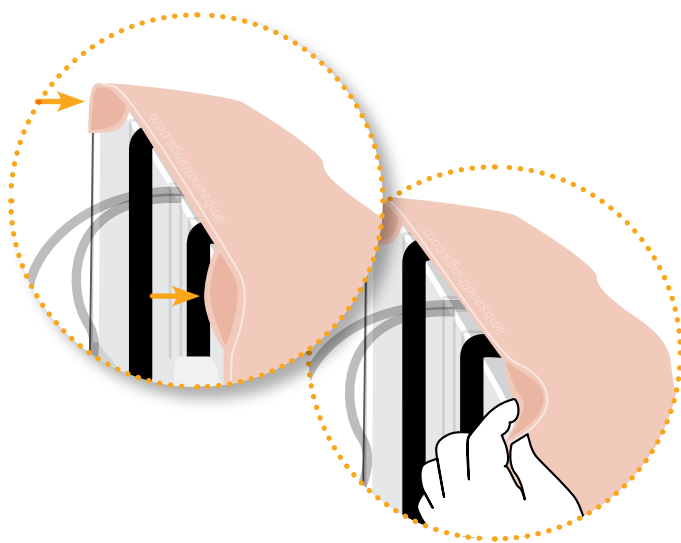



2



耐久性を重視した硬膜
スタンダード



よりリアルな穿刺感の硬膜
アドバンス

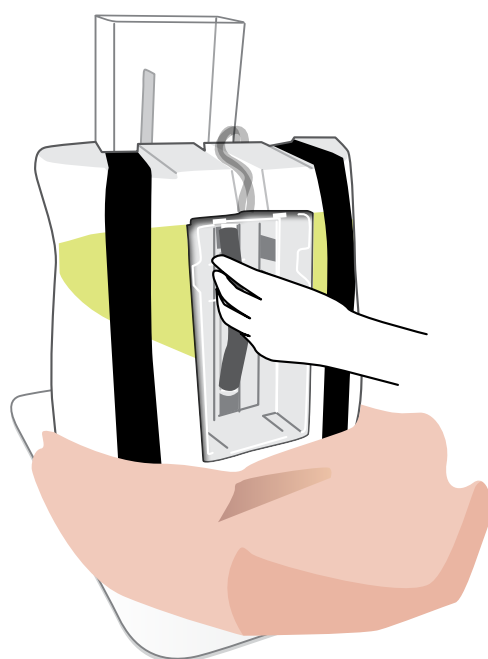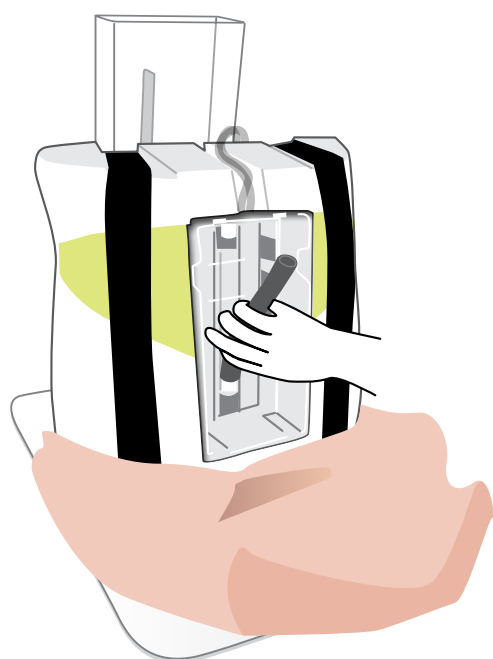


セットアップ

カートリッジを取り付ける

4




5

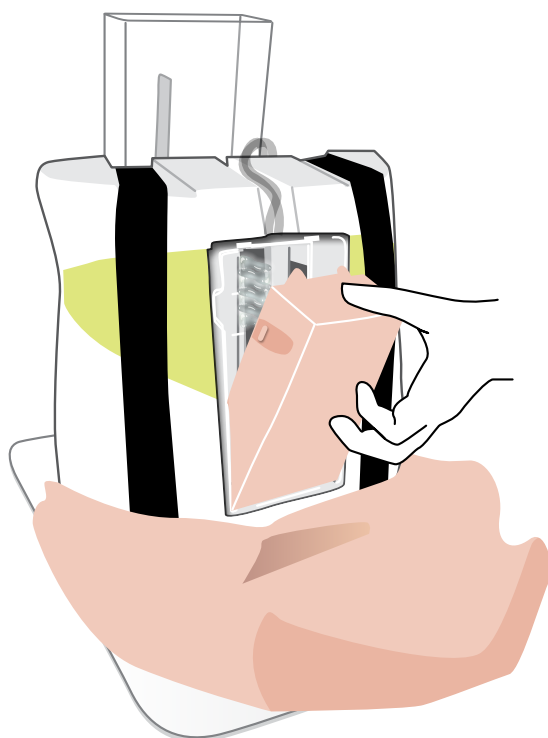


セットアップ

硬膜内に水を循環させる


1

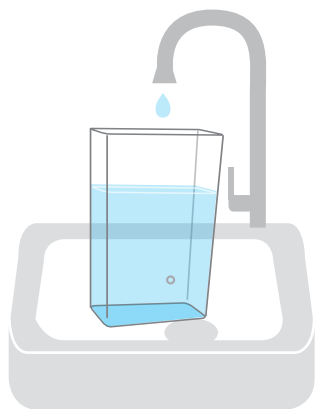


2

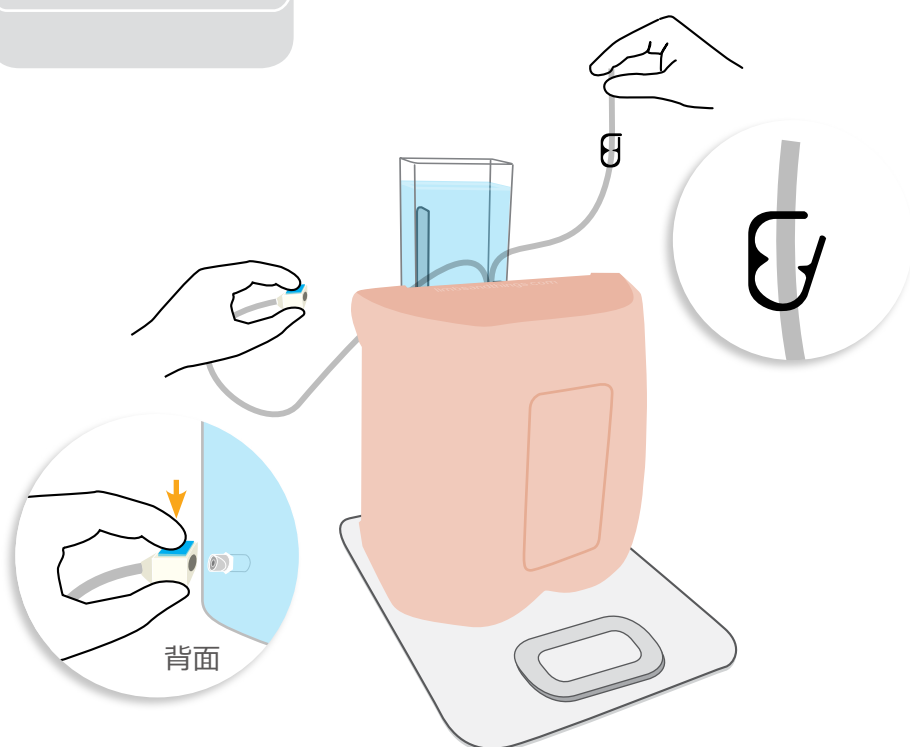


3

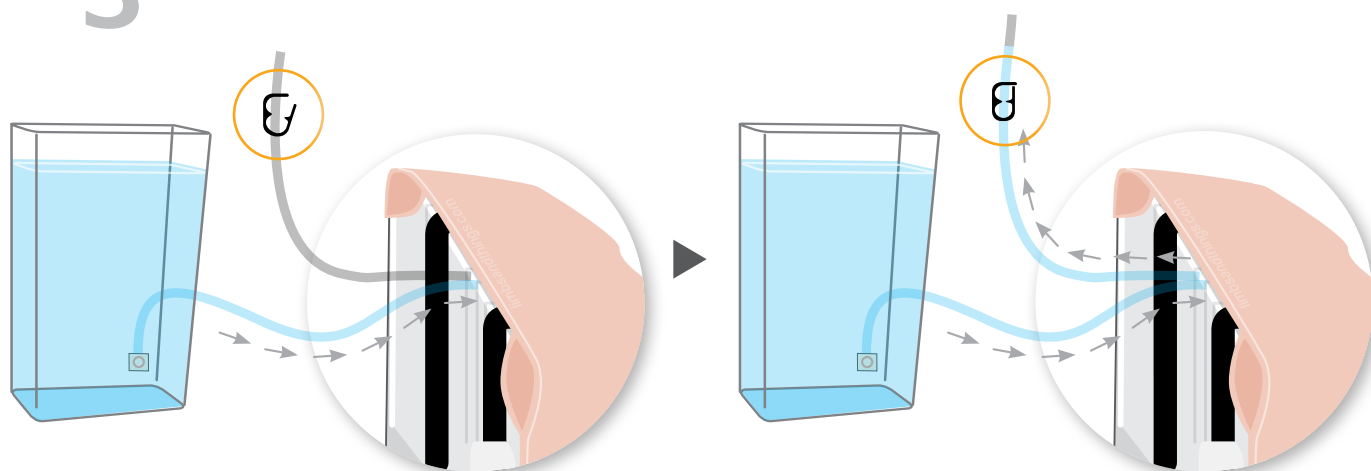

セットアップ

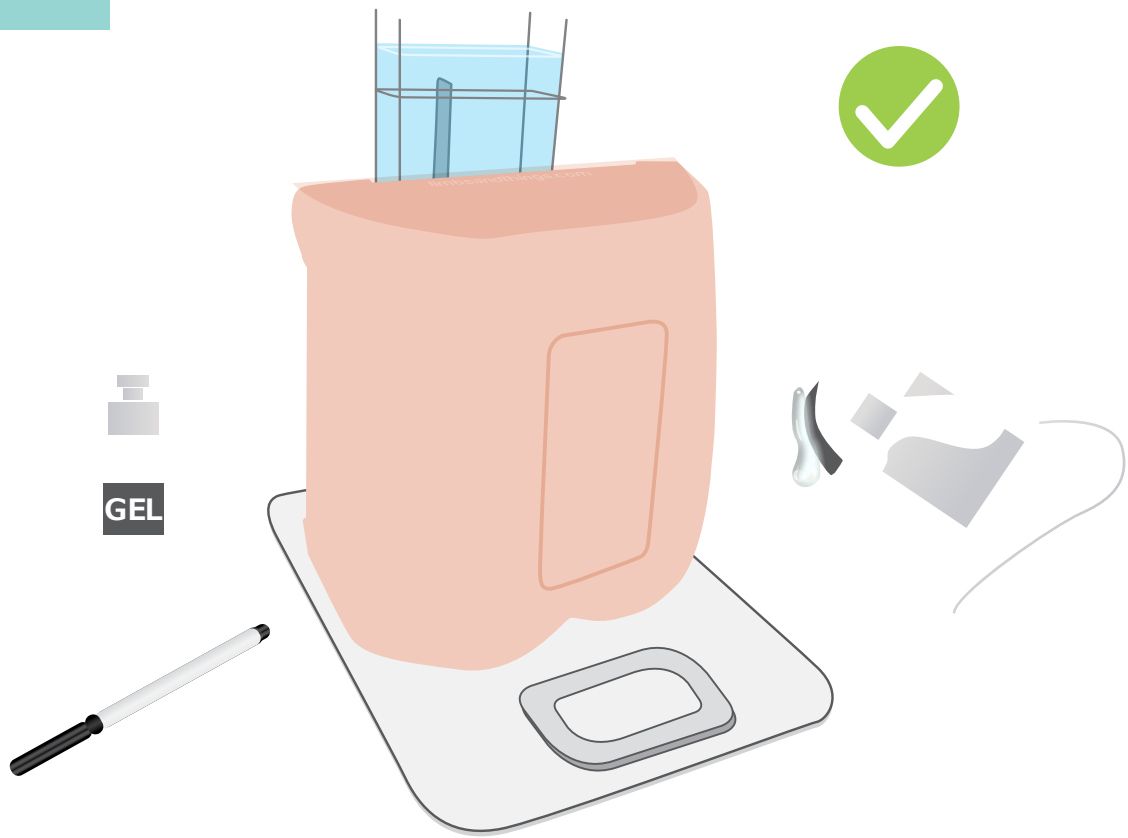


超音波スキャン後に硬膜外穿刺を行う際
ジェルをつけたままの方がパッドの寿命
は長く持ちます。

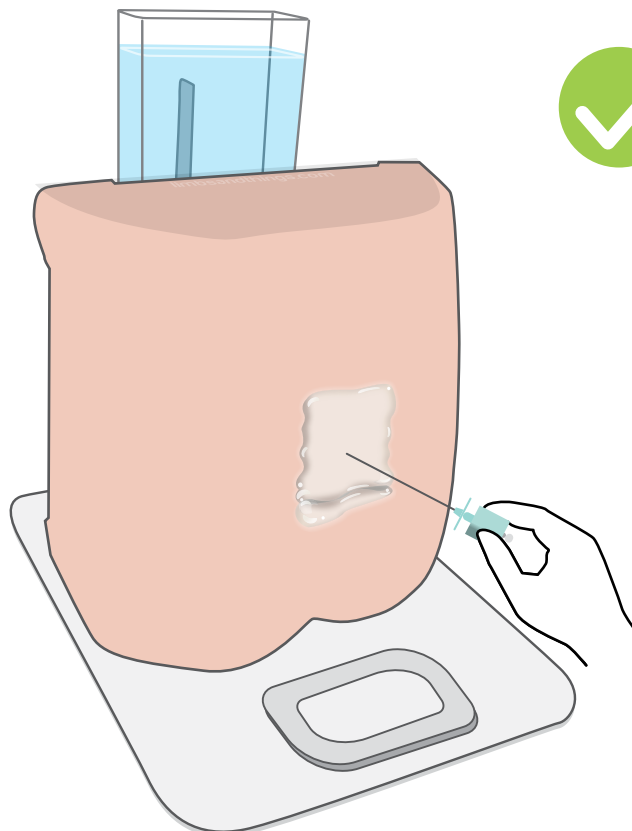


メンテナンス

1

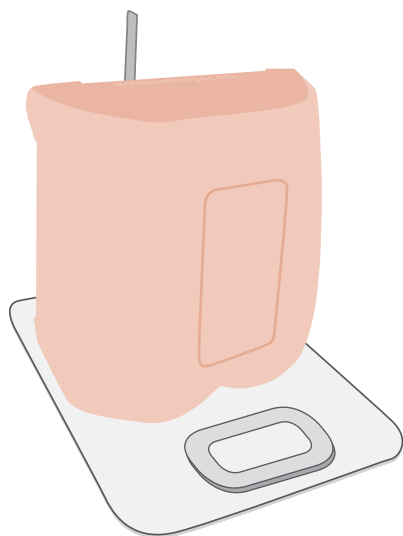




2

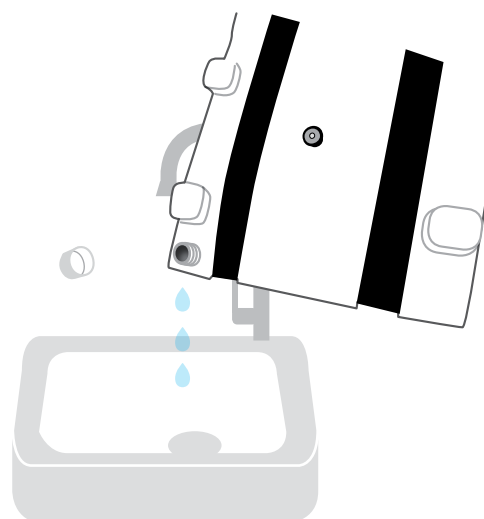

3



柔らかい乾いた布で水分をふきとります

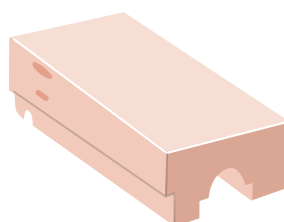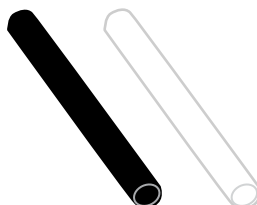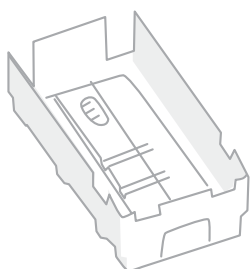

完全に乾燥したら組み立て保管します

YOU MAY
ALSO BE
INTERESTED IN...

胸腔ドレナージ・
胸腔穿刺トレーナー

160230



エコーガイド
腹腔穿刺トレーナー

160100



第2版 2023年10月
© 2023 Limbs & Things

NLS 日本ライトサービス株式会社
Nihon Light Service, Inc.

医学教育機器事業部

〒113-0033 東京都文京区本郷 2-3-9 ツインビュー御茶の水2F

☎ 03-3815-2354

☎ 03-3818-6843

✉ igaku@nlsinc.co.jp

🌐 www.medical-sim.jp