

231377 分娩シミュレーター(ALSO用)

ALSO(Advance Life Support in Obstetrics)プロバイダーコースで使用されている分娩マネキンです。胎児は空気で膨らませての使用法と、水を充填リアルな重量感を再現する使用法を選択できます。トレーニング中は、ベビーパウダーを母体の骨盤部と胎児双方の接触部に摩擦軽減のため散布するようにしてください。

母体底面に吸盤がついていますが、テーブルなどに固定しにくい場合は、多少湿らせることで固定されやすくなります。




商品構成

- | | |
|----------------------|------------------|
| ①母体 | ⑥空気充填用ポンプと給水チューブ |
| ②231378_胎児 早産(未熟児) | ⑦疑似血液粉末 疑似羊水粉末 |
| ③231379_胎児 臨月(新生児) | ⑧ベビーパウダー |
| ④231380_腹壁 | ⑨キャリーバッグ |
| ⑤231382_会陰×2(1枚はスペア) | (※231381_胎盤は別売) |

空気での充填

- 1) 胎児の左足底の金属製バルブに、空気重点用ポンプのチューブを取り付けます
- 2) バルブを反時計回りにまわし、緩めます
- 3) ポンプの送気球を握って胎児に空気を送り、適度な膨らみにします
※膨らませすぎないようにしてください。胎児の柔軟性は空気が少なめの方が増します
- 4) バルブを時計回りに回し、バルブを閉じたら、チューブをぬきとめます

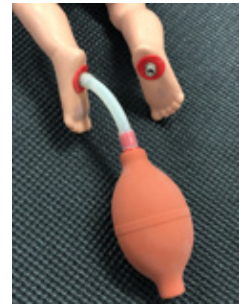

水での充填

- 1) 胎児の足底の金属製バルブを両脚とも開きます
- 2) 左足底のバルブに吸水チューブのホースの先を取り付けます
- 3) 吸水チューブの白い樹脂部を水道の蛇口に差し込みます
- 4) 蛇口の水を流し、胎児の右足のバルブから水が漏れだしたら、注水をとめます
※注水する時、必ず胎児は逆さ(脚を上、頭を下)にしておこなってください
- 5) 左足のバルブからチューブを抜き取り、左のバルブから少し水が出るくらいまで胎児内の空気を抜きます
- 6) 水が漏れないよう、左右両足のバルブをしっかり閉めます
※蛇口に取付けた白いコネクターは簡易的な構造です。勢いよく注水すると外れますので、留意してください



水の排水とメンテナンス

- 1) 流し台など排水できる場所で、胎児の脚を下にした状態で立てかけ、両足底のバルブを解放します
- 2) 完全に排水されるまで(15分程度を目安)待ちます。完全に排水されたことを確認してください
- 3) 水をいれたままにするとマネキンの内部に微生物やカビなどが繁殖しますので、使用後は速やかに排水することを推奨します。継続して使用する場合は、1週間おきに水を注水しなおしてください。

◆疑似羊水(メチルセルロース)はコップ半分のお湯にスプーン1杯程度を混ぜ、コップ1.5杯分の水で薄め使用します

◆疑似血液粉末は1リットルのお湯で完全に溶かした後、3リットルの水と混ぜて使用します

■保管する時は、胎児は膨らませた状態で保管してください

■汚れは石鹼水を使用し、柔らかいスポンジで拭きとめます。洗浄後はよくすすぎ、完全に乾燥させたのち、ベビーパウダーを振りかけ保管してください

発売元

NLS 日本ライトサービス株式会社
Nihon Light Service, Inc.

医学教育機器事業部

〒113-0033 東京都文京区本郷3-42-1

TEL: 03-3815-2354 www.medical-sim.jp