



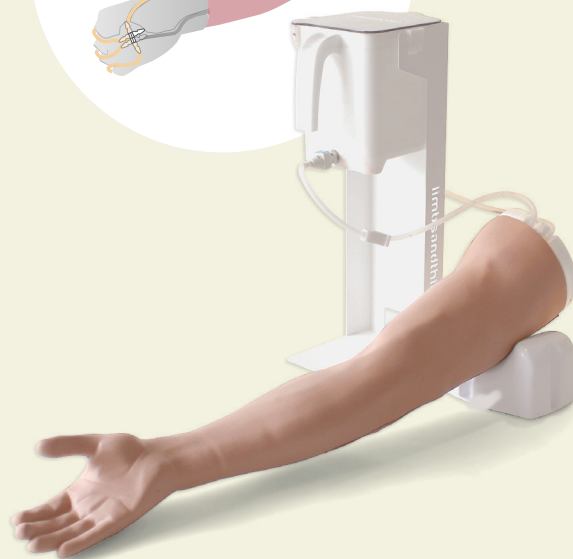

USER GUIDE

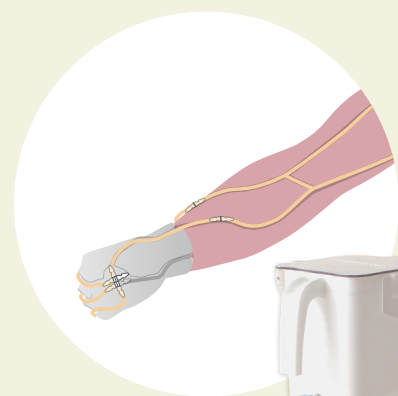

静脈穿刺トレーナー スタンダード

品番: 170302



インデックス

商品構成	3
安全と清掃の手引き	4
セットアップ	5
• 疑似血液をユニットに移す	5
• 腕モデルとユニットを接続し循環させる	6
• 疑似血液を腕モデルとユニットから排出する	7
• 皮膚を脱着する	8
• 静脈を交換する	10
使用後のかたづけ	11
• 内部洗浄とメンテナンス	11
• 保管する前には	11

セットアップ
Movie



消耗品交換
Movie



トラブルシュー
ティング



TAKE A LOOK
AT OUR **VIDEO**



VISIT THE WEBSITE
limbsandthings.com

OR YOUTUBE CHANNEL
youtube.com/limbsandthings

商品構成

腕モデル（本体）



静脈穿刺トレーナー用皮膚

170312



血液循環ユニット（重力式）


170316



静脈穿刺トレーナー正中静脈モジュール



静脈穿刺トレーナー手背静脈モジュール

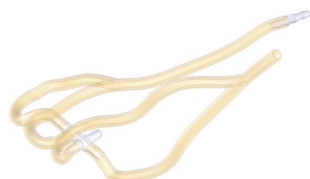

アームレスト

100302




潤滑シート



濃縮疑似静脈血（スターターパック）

100020

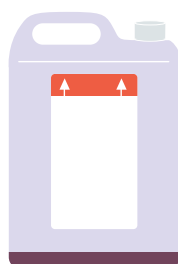

静脈穿刺トレーナー用輸液チューブ

100335



サージカルテープ



安全と清掃の 手引き

静脈穿刺トレーナーを使用される前に、
この安全の手引きを確認してください。

DO's



- このガイドのすべての指示に従い厳守してください。
- このガイドを保管してください。
- すべての警告に注意してください。

- 付属の疑似血液のみ使用してください。推奨外品の使用は、シミュレーターの劣化、破損の原因となります。



- 常に手袋を着用し、貴金属はすべて外してください。爪や指輪などの鋭利な表面は、製品損傷の原因となります。

- 水性の潤滑剤のみを使用してください。



- 使用後は毎回、柔らかい布やスポンジを中性洗剤を混ぜたお湯につけ、しっかり絞った後、やさしく拭いてください。



DON'Ts



- 熱源の近くに設置したり、炎にさらしたり、火の近くで使用したりしないでください。
- 本製品の近くまたは上で可燃性の溶剤を使用しないでください。

- 電化製品や水に濡れたものの近くで使用しないでください。



- 貴金属をつけたまま使用しないでください。

- 製品を分解したり修理しようとしたりしないでください。
- 製品の点検や修理は販売代理店に連絡をしてください。



- 使用後に疑似血液を本体に入れた状態のままにしないでください。

保管と移動





- 人身事故や製品の破損を防ぐため、輸送・保管時には必ず適切な梱包・固定を行ってください。




- 製品にはラテックスが含まれています。

セットアップ

疑似血液をユニットに移す
スタンドにジャグを固定します。

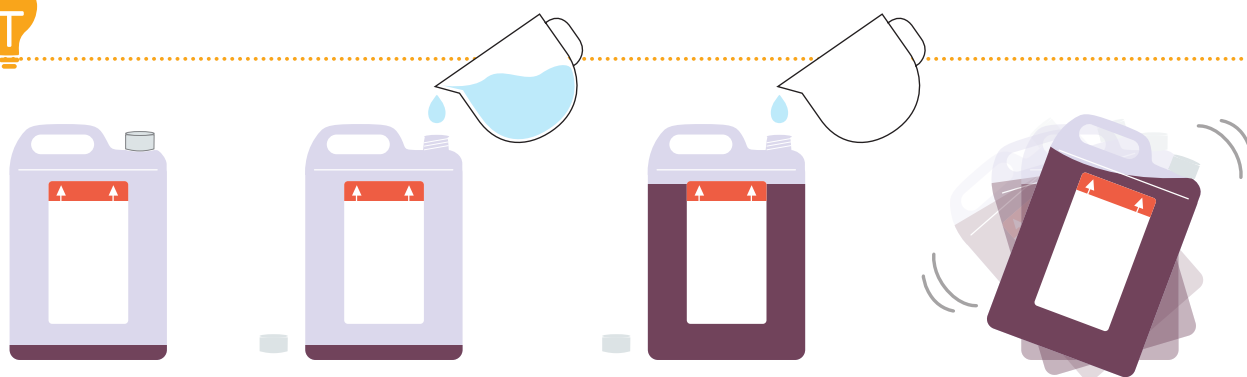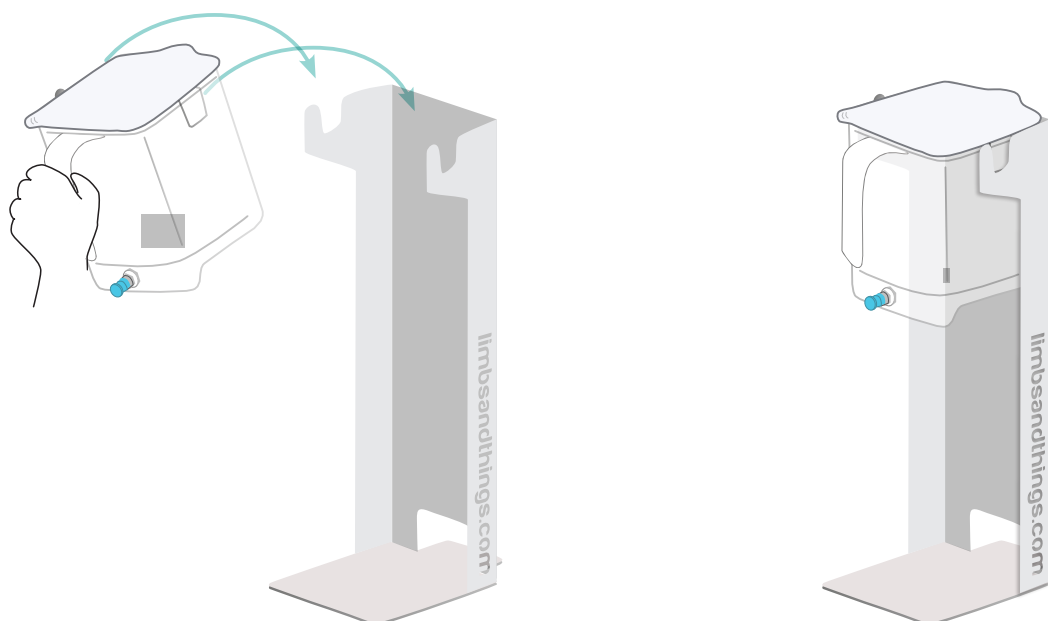

ジャグに血液を入れる

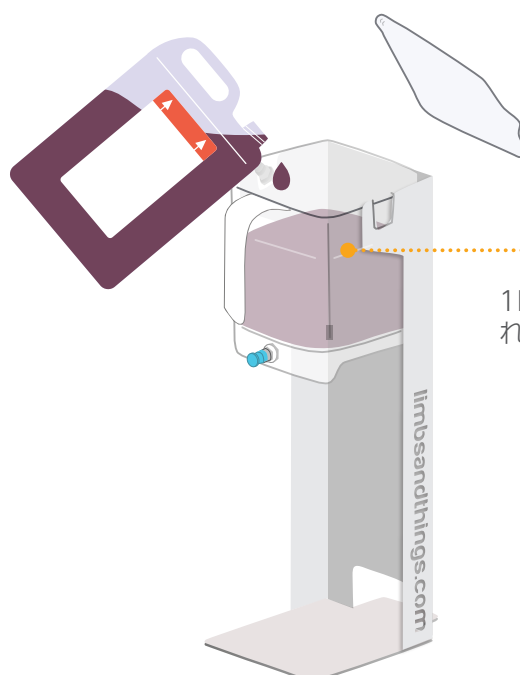

1L～1.5Lの疑似血液を入
れてください。

セットアップ

腕モデルとユニットを接続し循環させる

セットアップ
Movie




※事前にセットアップMovieをご覧ください。各部の接続順や切替えのタイミングなどをご確認頂けます。

- 1 モデルのチューブをジャグと輸液チューブに接続します。




排出側のチューブからシリンジで空気を抜くことで、疑似血液の流れを誘導します。

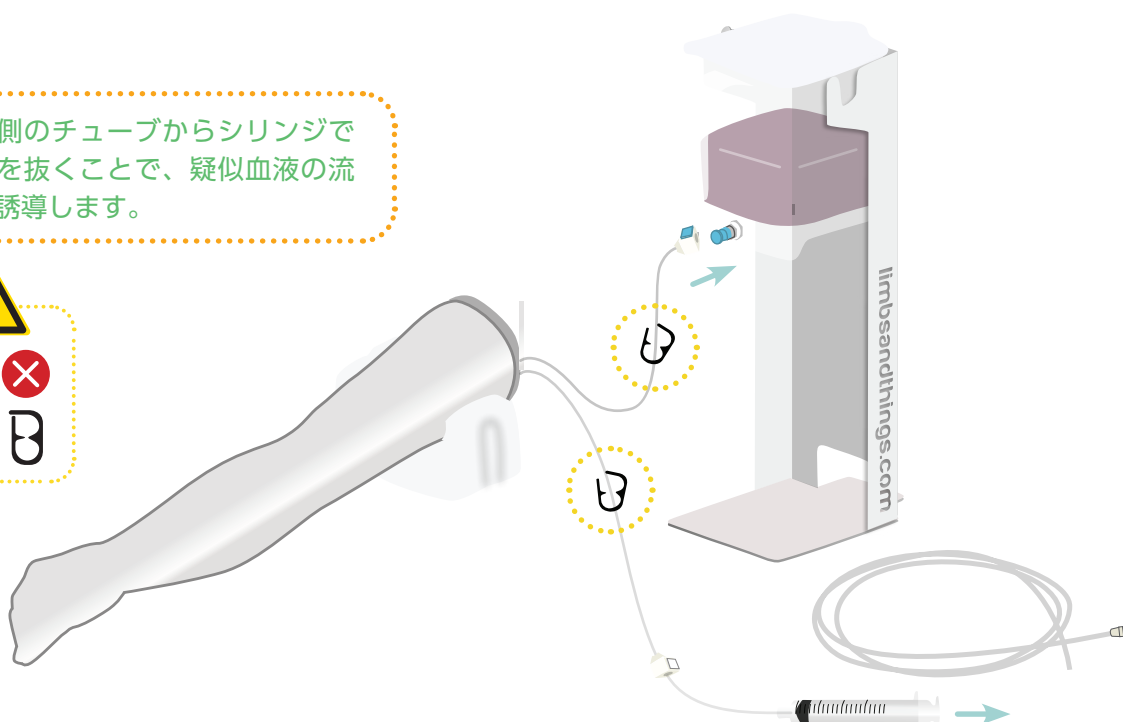

- 2 輸液チューブを外し、ジャグに接続し循環させます。

約1~2分、完全に充填するのを待ちます。

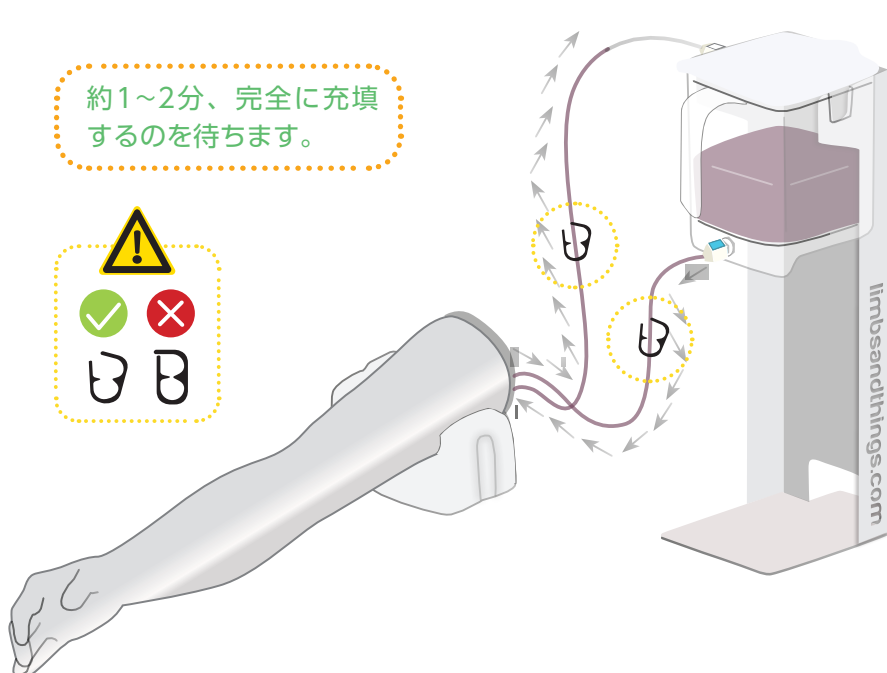

コネクタを外す時はボタンを押してください。




トレーナーが使用可能となります。

セットアップ

疑似血液を腕モデルとユニットから排出する

青コネクタのチューブを外し、輸液チューブに接続します。

1

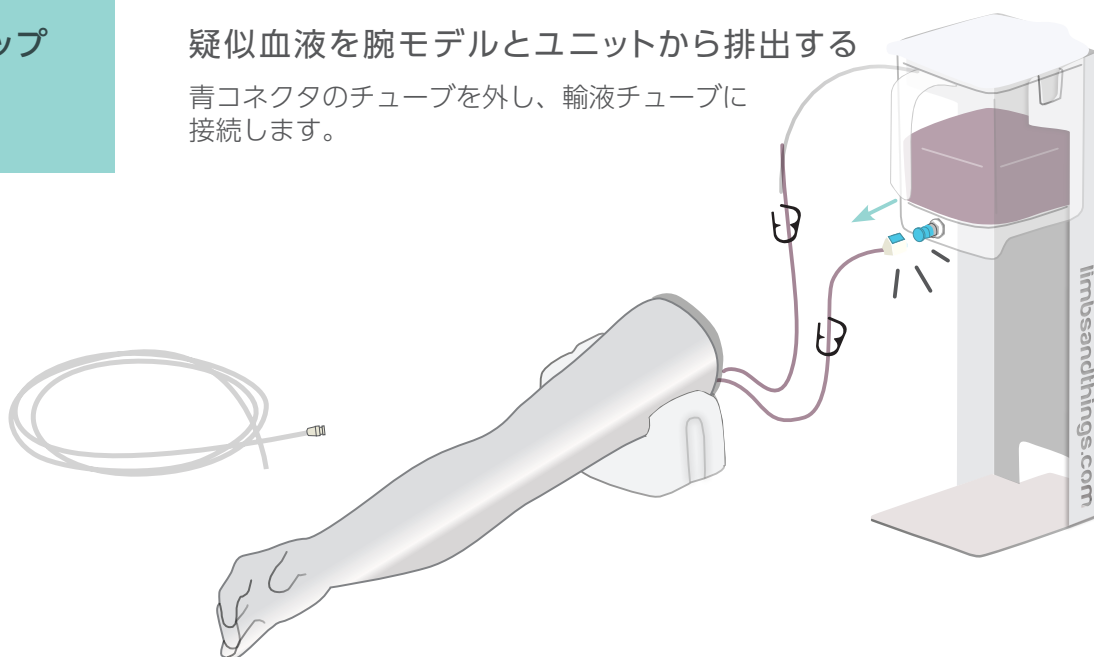

透明なチューブの中からすべての疑似血液を取り除きます。

残留した疑似血液は、カビの発生や次回使用時の機能低下につながります。

2




セットアップ

皮膚を脱着する

消耗品交換
Movie



取り外し方法

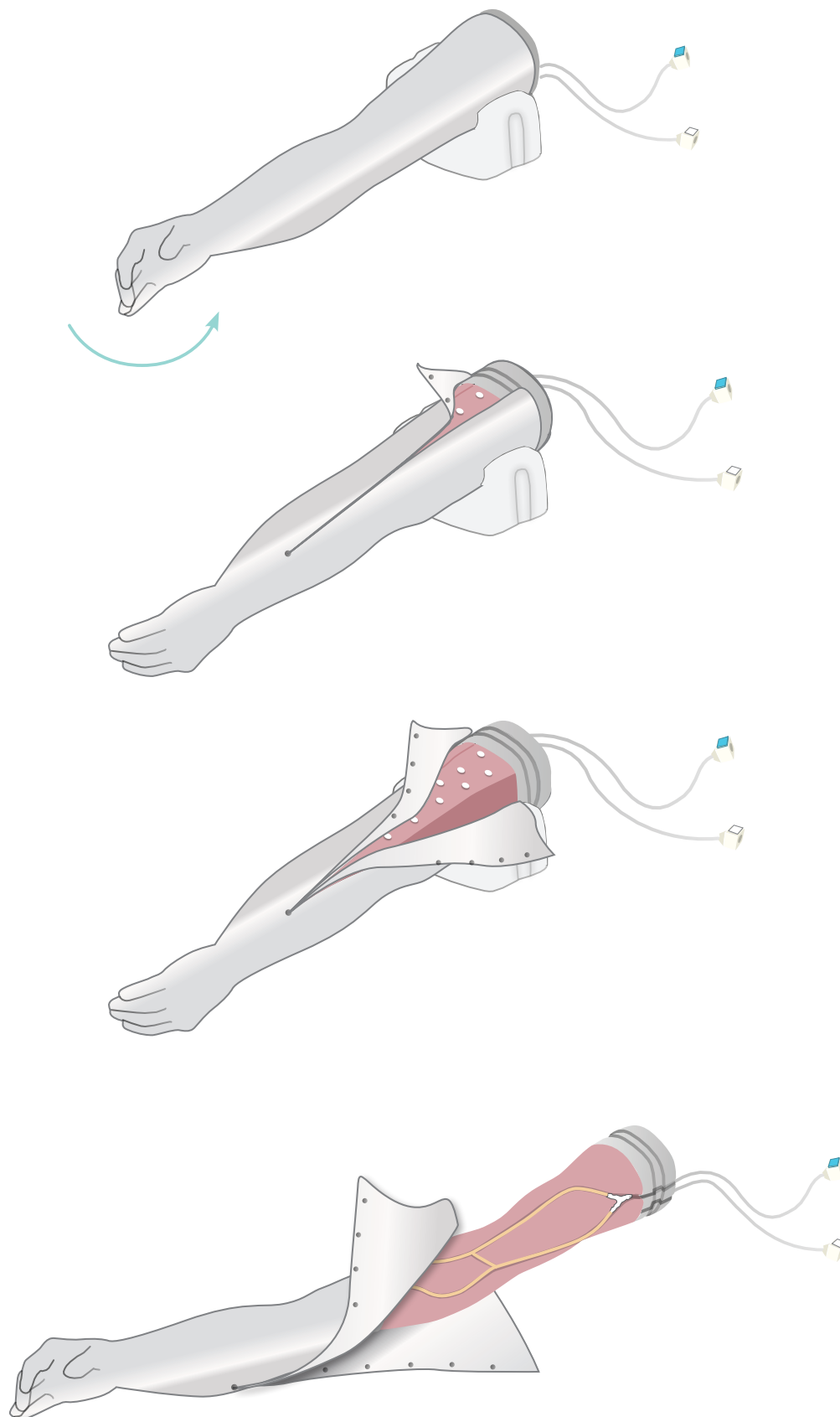


セットアップ


皮膚を脱着する

取り付け方法


1

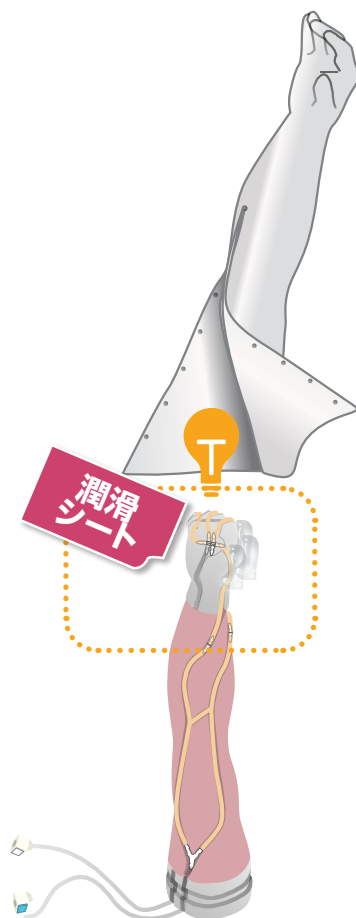

2

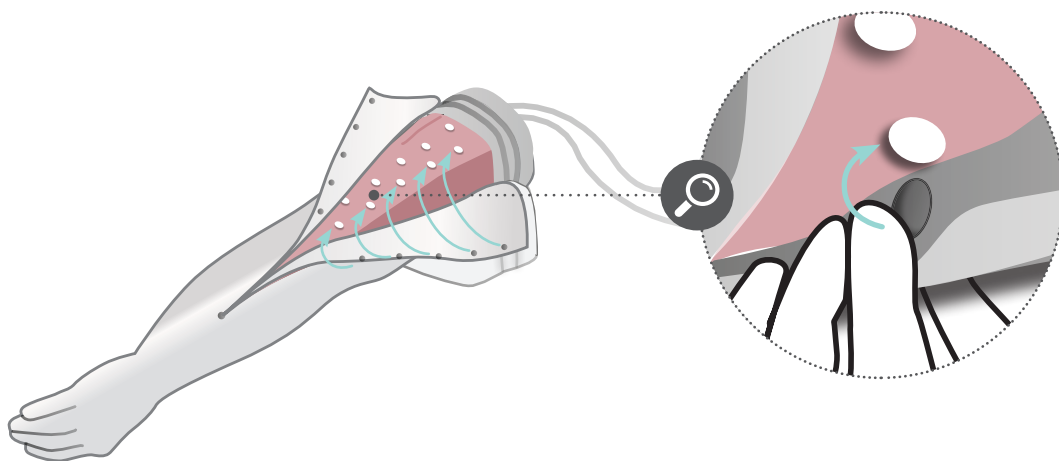

3

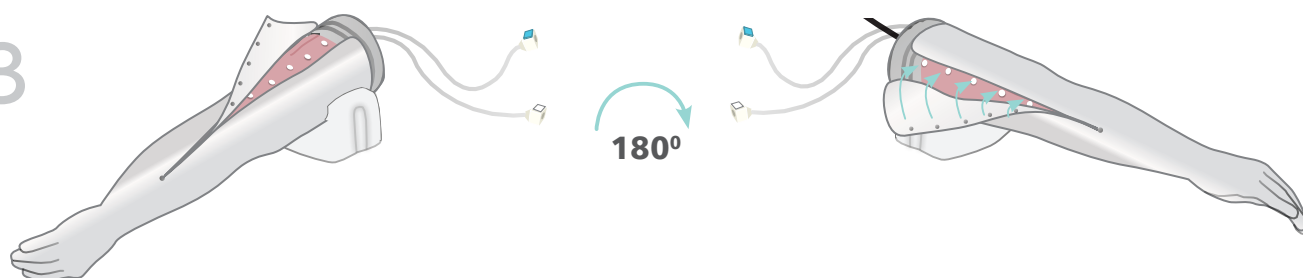


セットアップ


静脈を交換する

取り外し方法


1

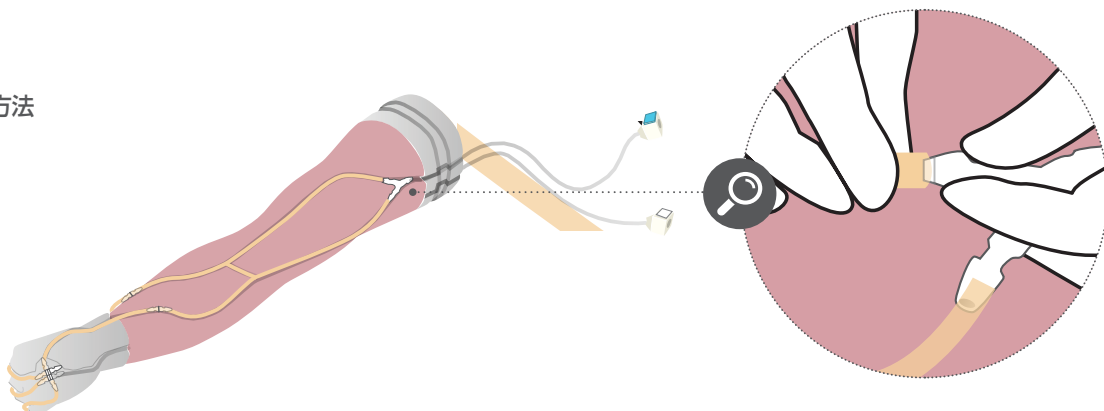


2

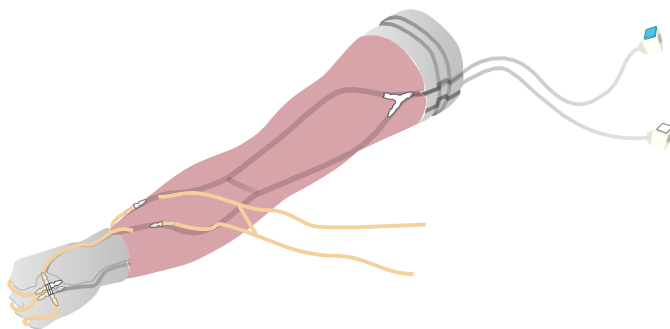

3

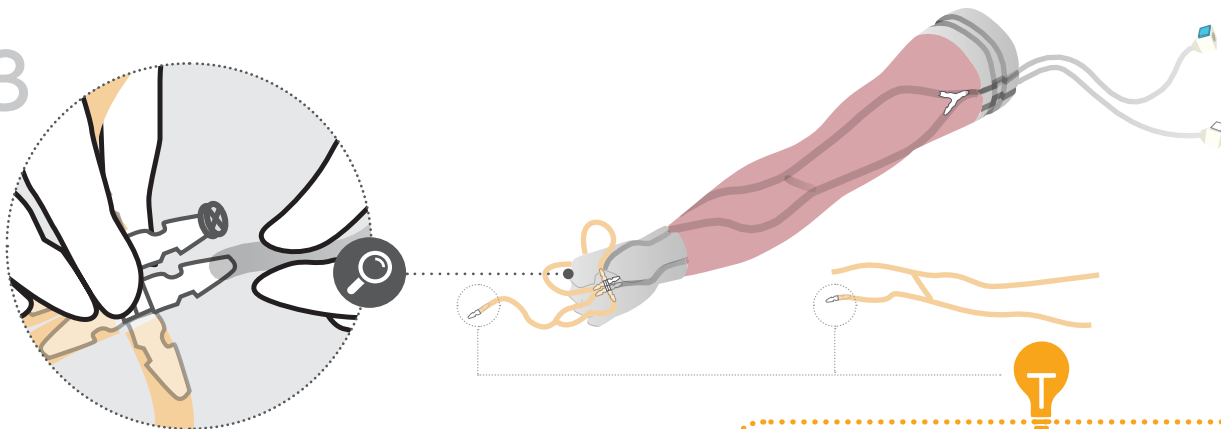

取り付け方法

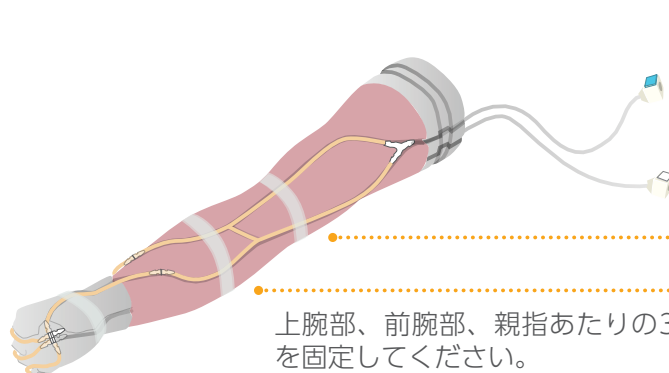

上腕部、前腕部、親指あたりの3か所を固定してください。




静脈の交換の際、プラスチック製コネクタは廃棄しないでください。



使用後のかたづけ


内部洗浄とメンテナンス

内部を水でクリーニングします。
6～7ページの手順で行ってください。

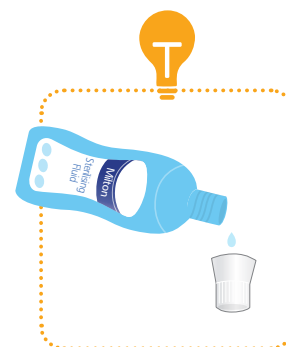


10倍希釈程度の抗菌剤の使用が効果的です。

1

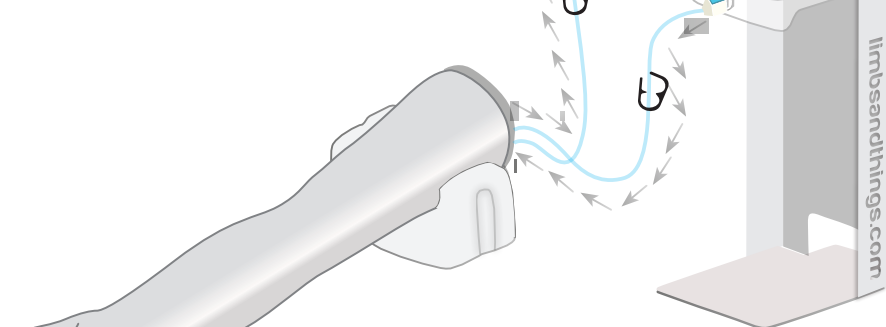

2

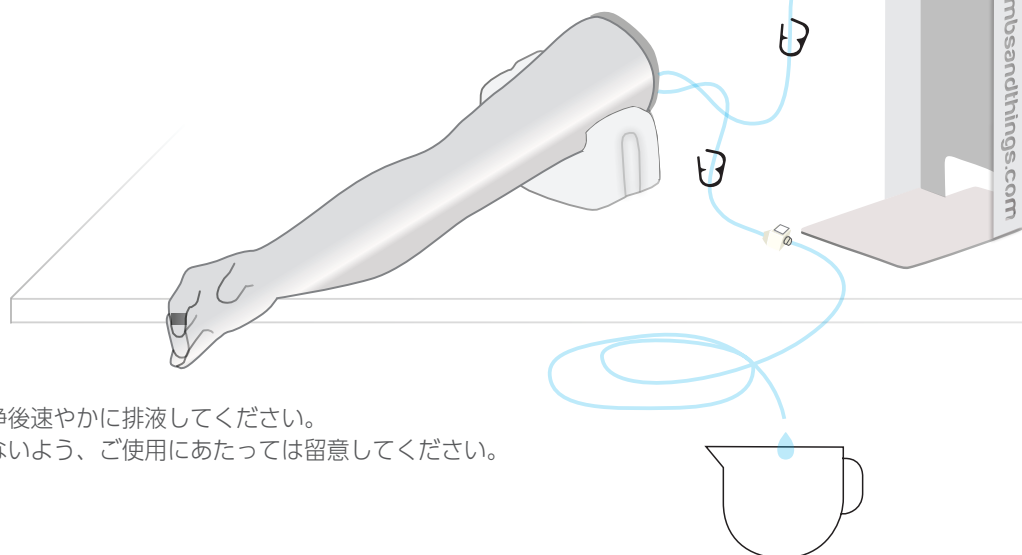


※抗菌剤を使用する際は、洗浄後速やかに排水してください。
また、薬剤を直接手で触れないよう、ご使用にあたっては留意してください。



保管する前には

湿らせた柔らかい布やスポンジで製品を清掃してください。
温水と中性洗剤のみを使用してください。

使用後は水分を除去し、
完全に乾燥させてから保管してください。

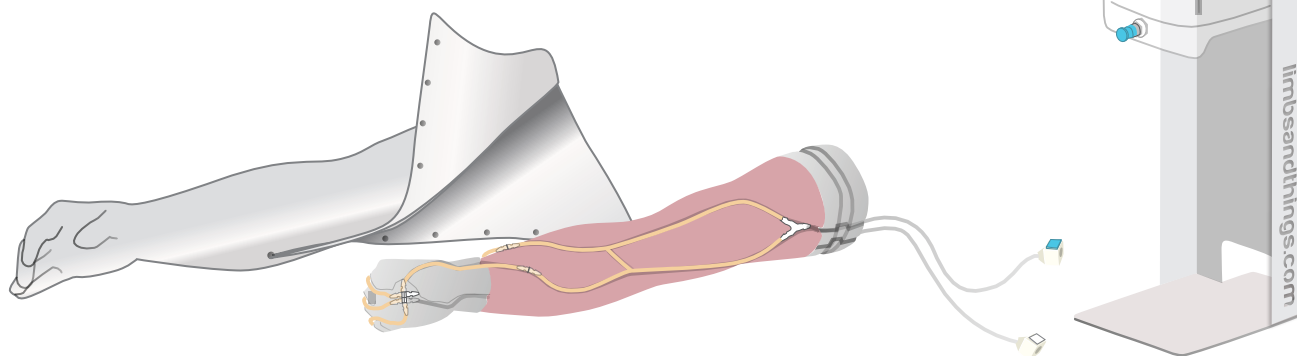

YOU MAY
ALSO BE
INTERESTED IN...

静脈穿刺トレーナー正中静脈モジュール
(2個入)

170306



静脈穿刺トレーナー手背静脈モジュール
(2個入)

170307



濃縮疑似静脈血 (補充用)

100021



濃縮疑似静脈血 (スターターパック)

100020



アームキャリーケース

100301



Part No: 965-529

第4版 2024年1月
©2024 Limbs & Things

NLS 日本ライトサービス株式会社
Nihon Light Service, Inc.

医学教育機器事業部

〒113-0033 東京都文京区本郷 2-3-9 ツインビュー御茶の水 2F

☎ 03-3815-2354

📠 03-3818-6843

✉ igaku@nlsinc.co.jp

🌐 www.medical-sim.jp